





STYRKA & FUNKTION

REAL 9000 PLUS Version 2.1

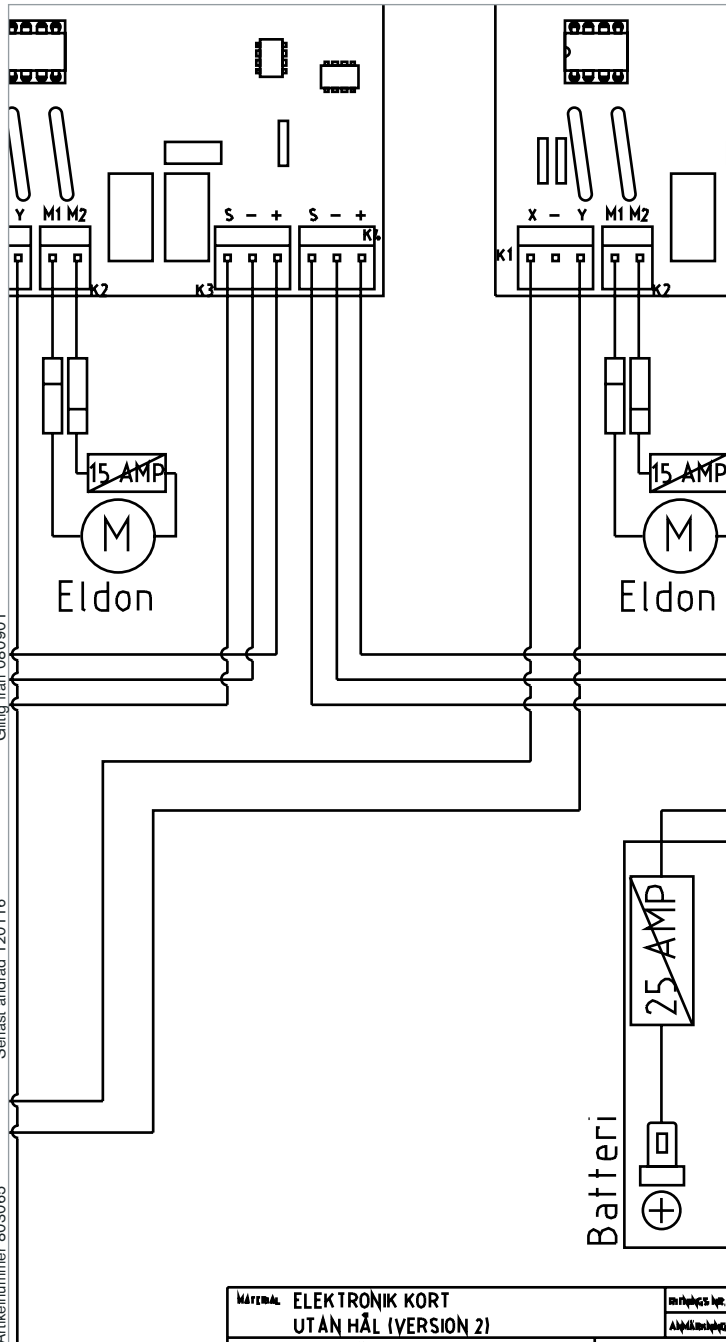


UPP/NER

ArtikeInr. 802546

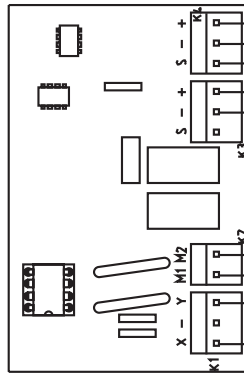


BROMS

ArtikeInr. 802600

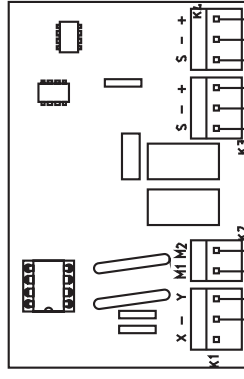



SITSVINDEL

ArtikeInr. 802578

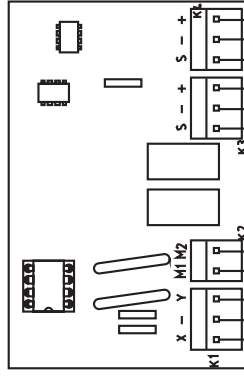

RYGGVINDEL

ArtikeInr. 802578

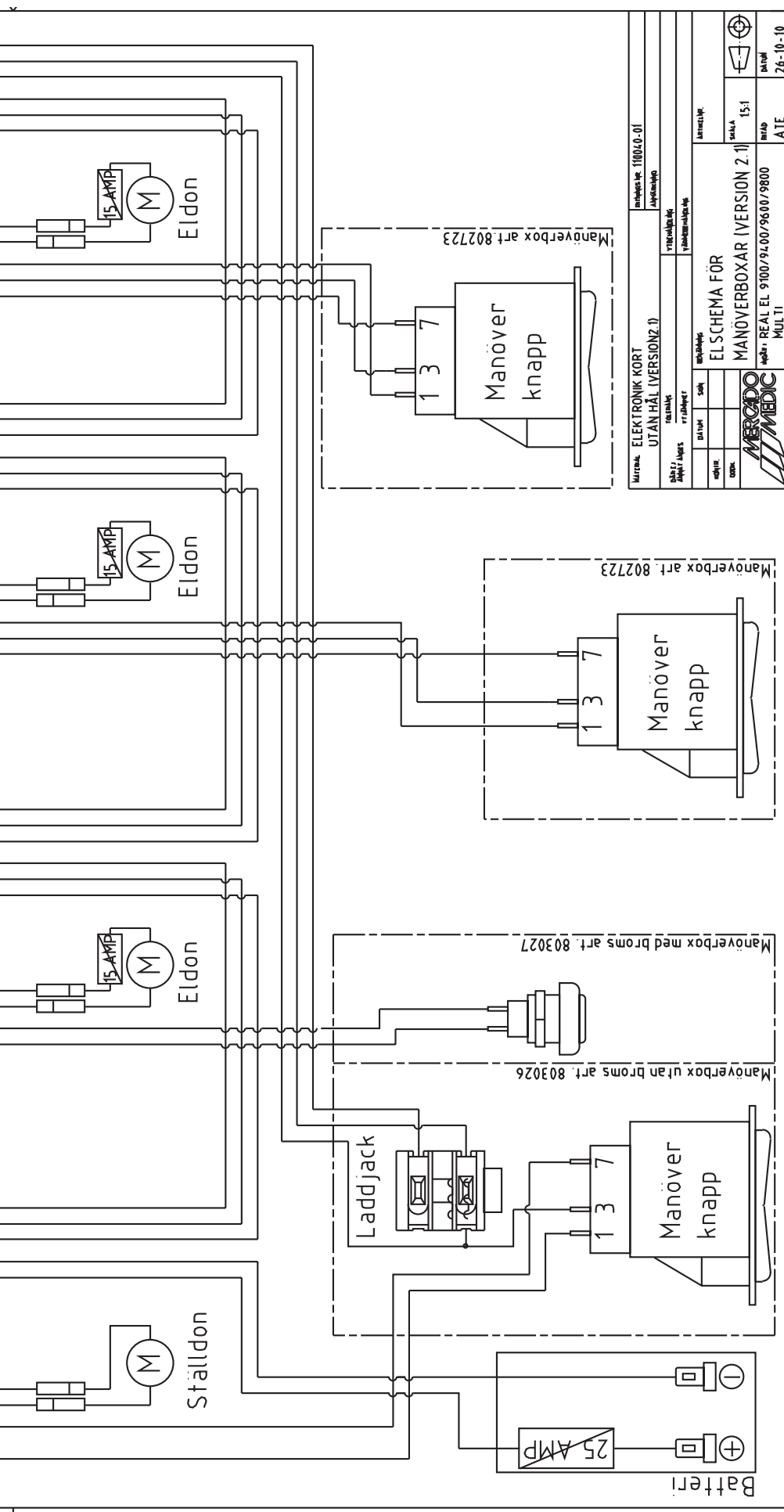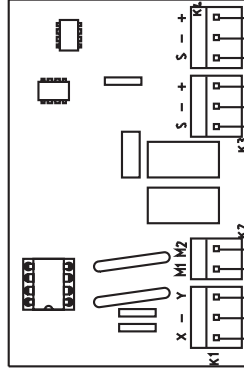

Märkena: ELEKTRONIK KORT
UTÅN HÅLL (VERSION 2.1)

Skapa: 15.1
För: REAL EL 9100/9400/9600/9800

Elektronik
Kort
Mått: 100x100

RECADO MEDIC

MULTI

ATE

26-10-10

UPP/NER

ArtikeInr. 802546

SITSVINKEL


ArtikeInr. 802578

BROMS

ArtikeInr. 802600

RYGGVINKEL

ArtikeInr. 802578

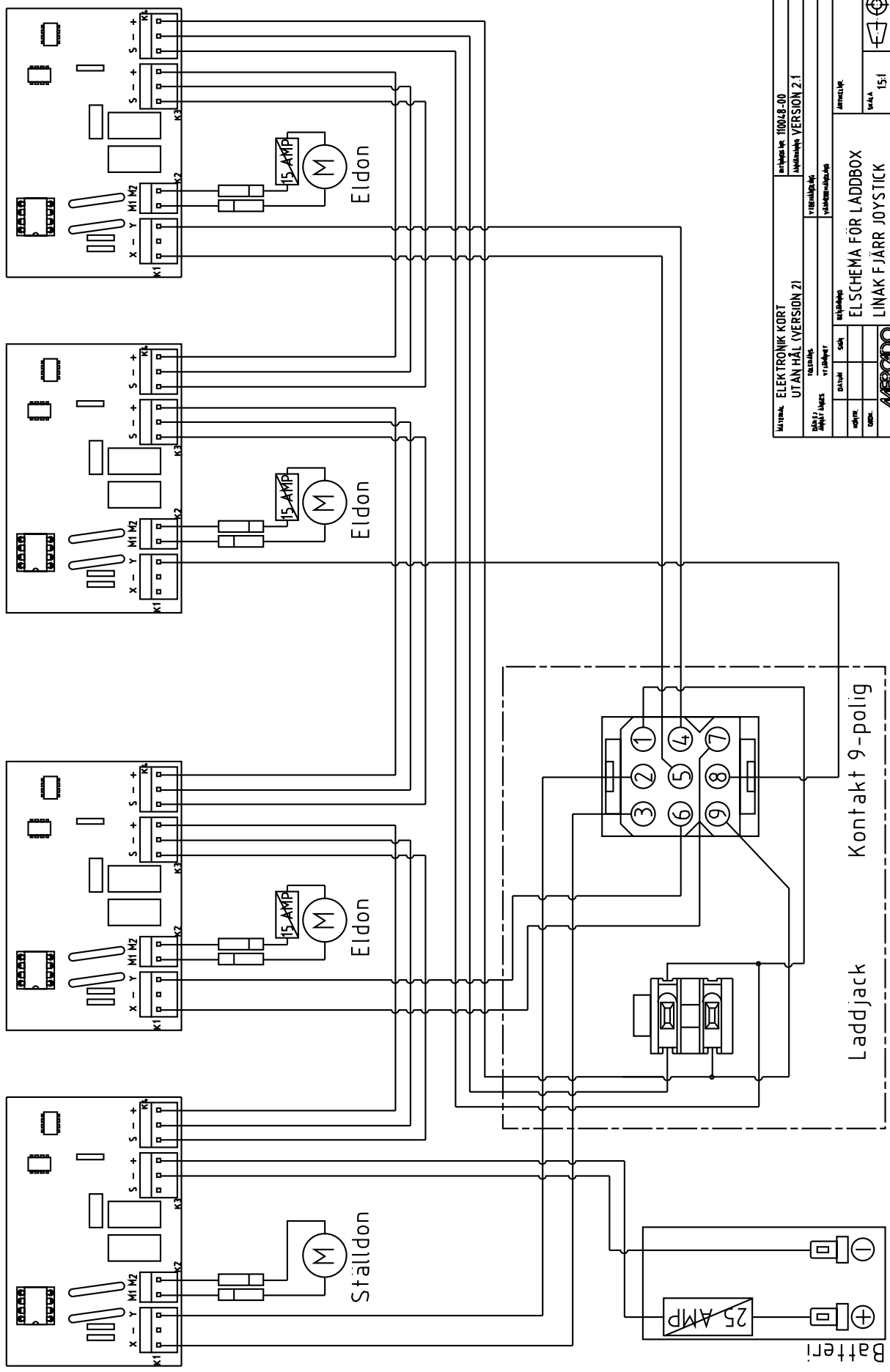

Miträta: ELEKTRONIK KORT		inbjudningsnr: 110048-00
UTAN HÅL VERSION 21		inbjudningsnr: VERSION 2.1
Byggtid	Reservdel	Ytterligare
Datum	Skapad	Ändrad
Upprättad	Skapad	Ändrad
Upprättad	Skapad	Ändrad
MERCIDO LINAK F JÄRR JOYSTICK		
Model: REAL EL PLUS 9100/94-00/9600/9800 MULT I1		
Skapad	15:1	15:1
Ändrad	ATE	ATE
Version	01-08-08	01-08-08


Laddjack Kontakt 9-polig

Laddbox multi art. 803030 vid fler elfunktioner


MERCADOS NYA ELEKTRONIK FÖR UPP & NER


Eftersom den PLUS elektroniken är minusstyrd är den inte bakåtkompatibel. Version 1 & Version 2 Elektronik kan kompletteras med PLUS Elektroniken.

På bilden visas sats 802998 & ellyftomat.

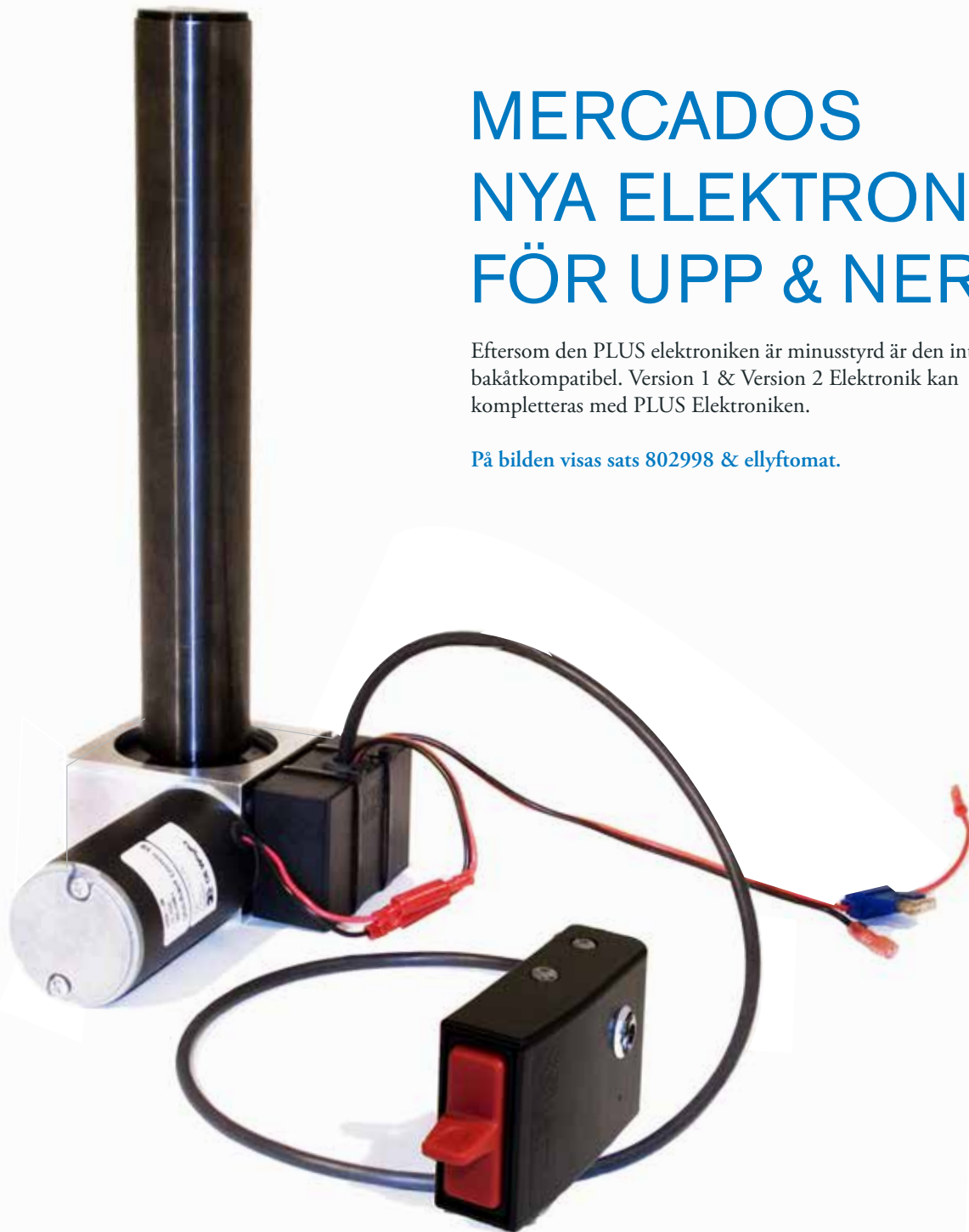

MONTERING AV FÄSTE FÖR RELÄKORTSBOX **1** Montera fästplåten med skruvarna på Ställdonshuset med pilen riktad uppåt mot Ställdonsröret. På Eldonet skall fästplåten monteras på baksidan av den vinkelräta plåtvinkeln med pilen uppåt. **2** Fäst locket över boxen med två plastremmar. **3** Skjut ner boxen i skårorna på fästplåten, tills spärren hakar fast.

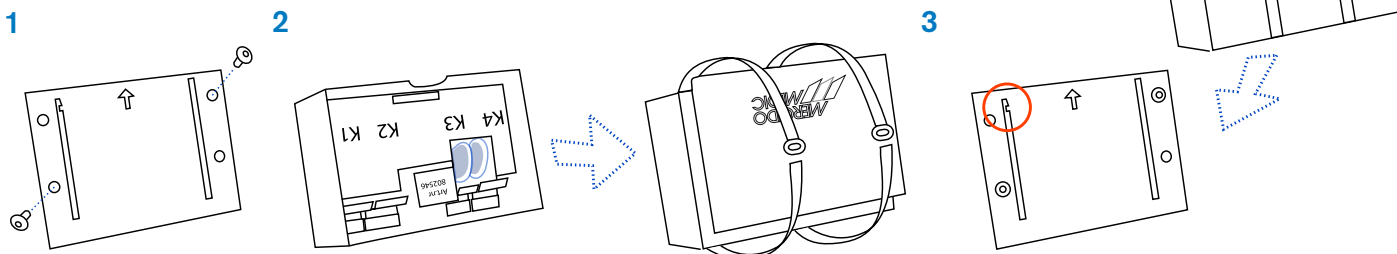


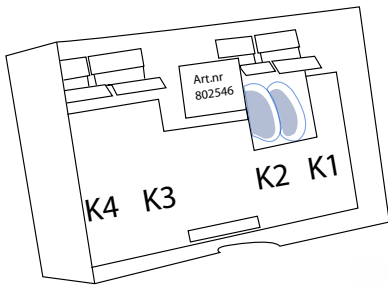

**VILL DU BYGGA IHOP DET SJÄLV GÖR DU SÅ HÄR:
PÅ KRETSKORTET FINNS MOLEKONTAKTERNA
K1-K4.**




**VI REKOMMENDERAR ATT NI BESTÄLLER DENNA SATS MED
ART.NR 802998. DET INNEHÅLLER ALLT.**

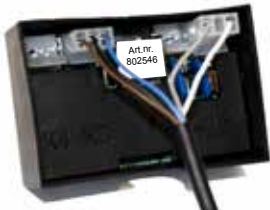

● LADDBOX UPP/NED STEG 1

För att ansluta [Laddbox upp/ned art.nr 803029](#).


Koppla kontakten med **TVÅ** ledare till kretskortets kontakt märkt **K1** och kontakten med **TRE** ledare till kontakt märkt **K3**.

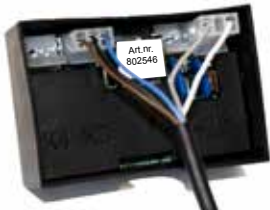

● LADDBOX MULTI STEG 1

För att ansluta [Laddbox multi art.nr 803030](#).

Använd sladd med **TVÅ** kontakter. Koppla kontakten med **TVÅ** ledare till kretskortets kontakt märkt **K1** och kontakten med **TRE** ledare till kontakt märkt **K3**.

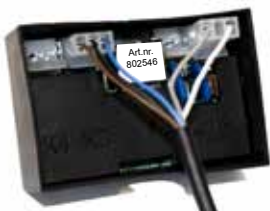

● MANÖVERBOX STEG 1

För att ansluta [Manöverbox art.nr 803034](#).

Koppla kontakten med **TVÅ** ledare till kretskortets kontakt märkt **K1** och kontakten med **TRE** ledare till kontakt märkt **K3**.



● LADDBOX ● MANÖVERBOX STEG 2

För att ansluta [Kablage för Motor art.nr 802681](#).

Koppla kontakt till kretskortets kontakt märkt **K2**. Den andra änden kopplas till motorn.



● LADDBOX ● MANÖVERBOX STEG 3

För att ansluta [Kablage för Batteri art.nr 802648](#).


Koppla kontakt till kretskortets kontakt märkt **K4**.

Den andra änden kopplas till batteriet. SVART kabel kopplas till batteriets minuspol. OBS! RÖD kabel kopplas till batteriets pluspol. (Ifall stolen är en multi så används **K4** för att strömförsörja nästkommande kort).


MERCADOS NYA ELDON & ELEKTRONIK FÖR SITSVINKLING

Eftersom den PLUS elektroniken är minusstyrd är den inte bakåtkompatibel. Version 1 & Version 2 Elektronik kan kompletteras med PLUS Elektroniken.

På bilden visas sats 803000 samt 802730 monterat på vinkelställbart sittkruss.

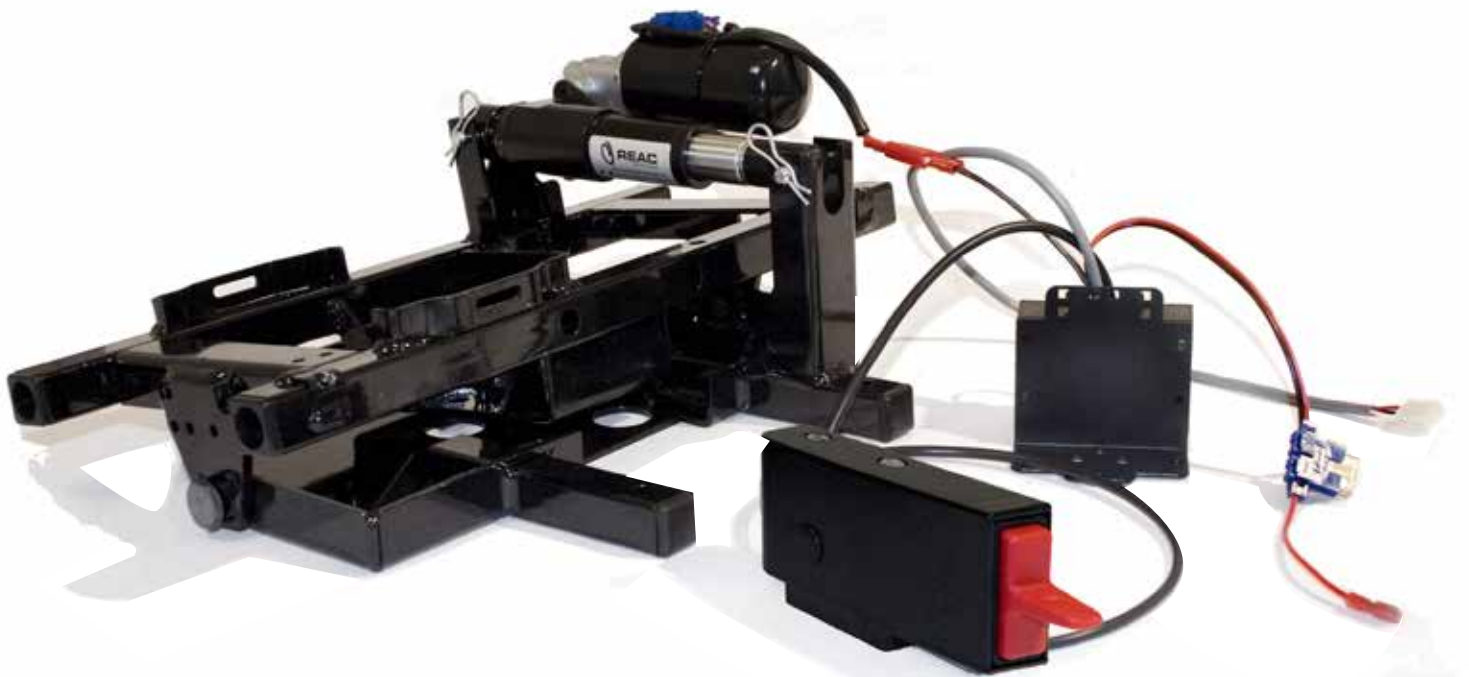

FÖR ATT KOMPLETTERA EN ELSTOL MED ELSITSVINKLING SÅ REKOMMENDERAR VI ATT NI BESTÄLLER SATSERNA - **ART.NR 803000 & 802730**

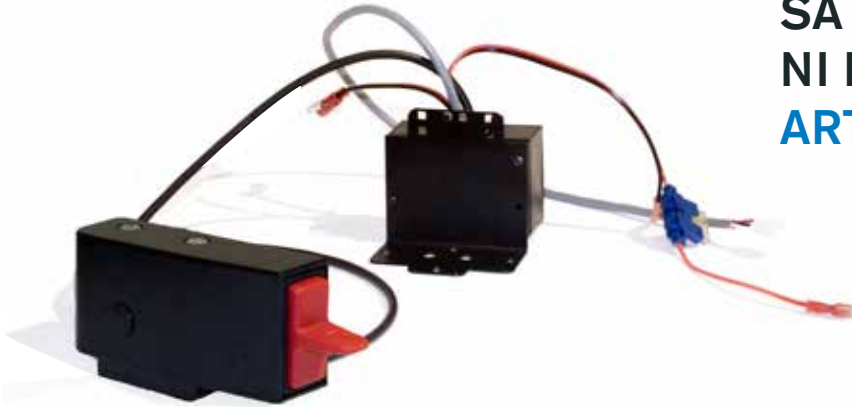

◆ LADDBOX MULTI STEG 1

För att ansluta [Laddbox multi art.nr 803030](#).

Koppla kontakt märkt S till kretskortets kontakt märkt K1.



◆ MANÖVERBOX STEG 1

För att ansluta [Manöverbox art.nr 803035](#).


Koppla kontakt till kretskortets kontakt märkt K1.



◆ LADDBOX ◆ MANÖVERBOX STEG 2

För att ansluta [Kablage för Motor art.nr 802681](#).

Koppla kontakt till kretskortets kontakt märkt K2. Den andra änden kopplas till motorn.

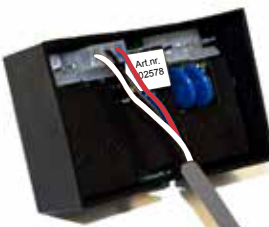

◆ LADDBOX ◆ MANÖVERBOX STEG 3

För att ansluta [Kablage för Strömförsörjning art.nr 802718](#).

Koppla kontakt till kretskortets kontakt märkt K3. OBS! Kabeln kommer från kort för Upp & Ned eller föregående kort.



◆ LADDBOX ◆ MANÖVERBOX STEG 4

För att ansluta [Kablage för Batteri art.nr 802648](#).


Koppla kontakt till kretskortets kontakt märkt K4.

Den andra änden kopplas till batteriet. SVART kabel kopplas till batteriets minuspol. OBS! RÖD kabel kopplas till batteriets pluspol. (Ifall stolen är en multi så används K4 för att strömförsörja nästkommande kort).


MERCADOS NYA ELDON & ELEKTRONIK FÖR RYGGVINKLING

Eftersom den PLUS elektroniken är minusstyrd är den inte bakåtkompatibel. Version 1 & Version 2 Elektronik kan kompletteras med PLUS Elektroniken.

På bilden visas sats 802999 & 802731.

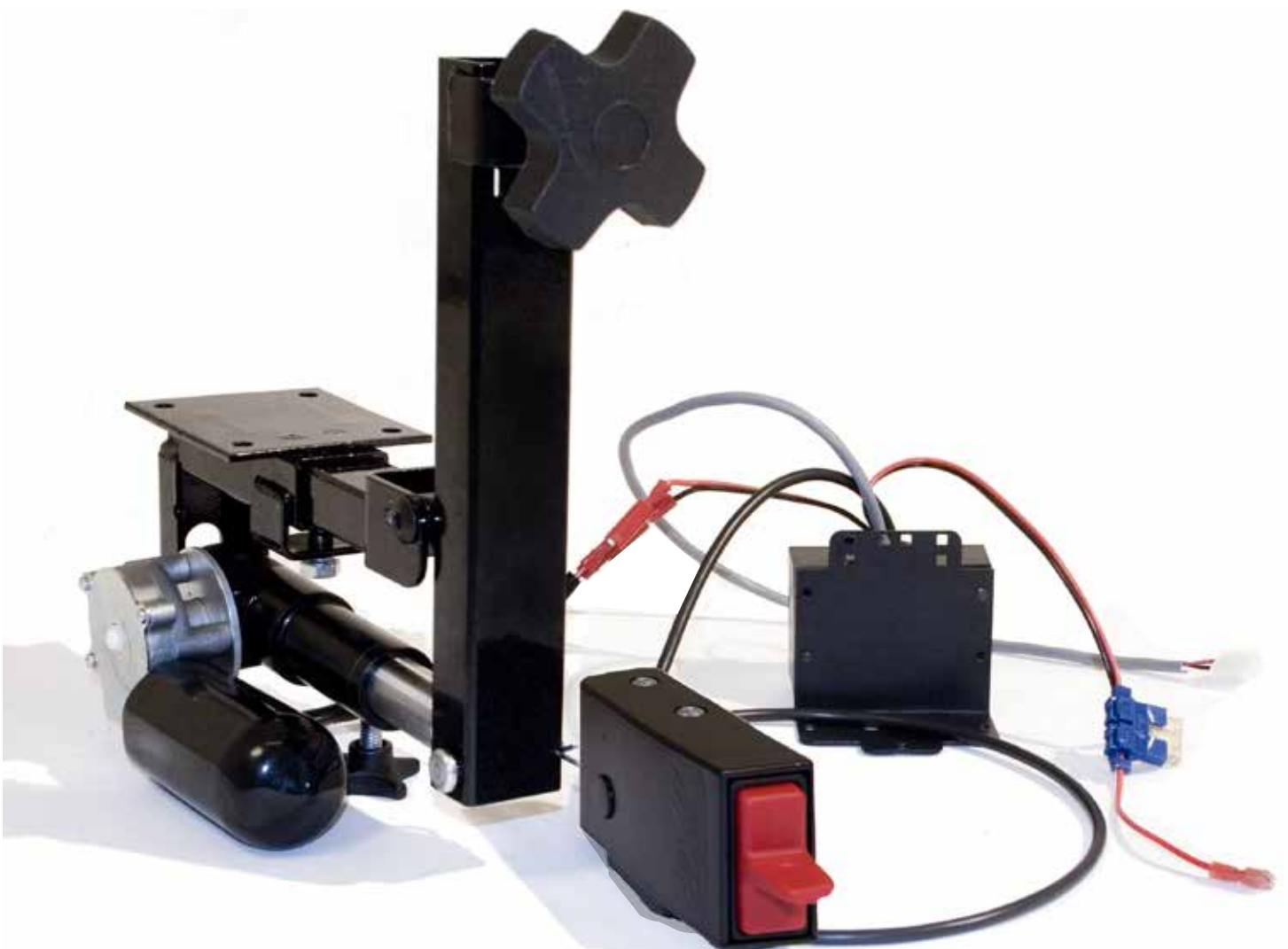

FÖR ATT KOMPLETTERA EN ELSTOL MED ELRYGG SÅ REKOMMENDERAR VI ATT NI BESTÄLLER DESSA SATSER - **ART.NR 802999 & 802731**

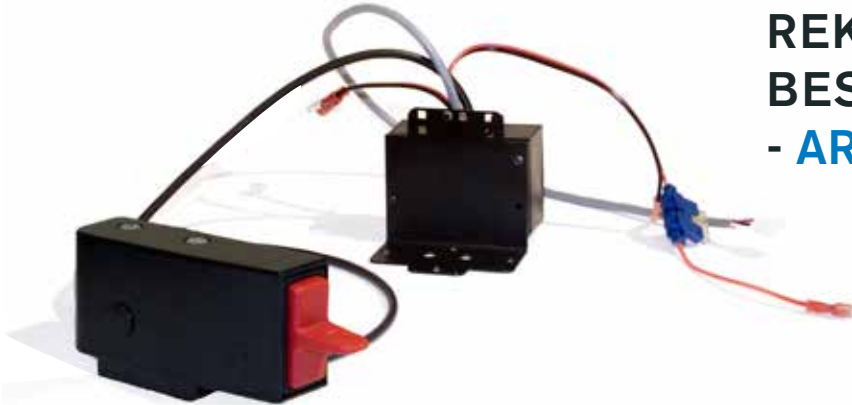

● LADDBOX MULTI STEG 1

För att ansluta [Laddbox multi art.nr 803030](#).

Koppla kontakt märkt R till kretskortets kontakt märkt K1.



● MANÖVERBOX STEG 1

För att ansluta [Manöverbox art.nr 803035](#).


Koppla kontakt till kretskortets kontakt märkt K1.



● LADDBOX ● MANÖVERBOX STEG 2

För att ansluta [Kablage för Motor art.nr 802681](#).

Koppla kontakt till kretskortets kontakt märkt K2. Den andra änden kopplas till motorn.

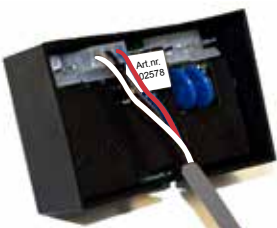

● LADDBOX ● MANÖVERBOX STEG 3

För att ansluta [Kablage för Strömförsörjning art.nr 802718](#).

Koppla kontakt till kretskortets kontakt märkt K3. OBS! Kabeln kommer från kort för Upp & Ned eller föregående kort.



● LADDBOX ● MANÖVERBOX STEG 4

För att ansluta [Kablage för Batteri art.nr 802648](#).

Koppla kontakt till kretskortets kontakt märkt K4.

Den andra änden kopplas till batteriet. SVART kabel kopplas till batteriets minuspol. OBS! RÖD kabel kopplas till batteriets pluspol. (Ifall stolen är en multi så används K4 för att strömförsörja nästkommande kort).

MERCADOS NYA ELBROMS



Eftersom den PLUS elektroniken är minusstyrd är den inte bakåtkompatibel. Version 1 & Version 2 Elektronik kan kompletteras med PLUS Elektroniken.

Separat monteringsanvisning kan beställas från Mercado eller laddas hem från www.mercado.se

På bilden visas sats 803001 & 803037.



FÖR ATT KOMPLETTERA EN
ELSTOL MED ELBROMS SÅ
REKOMMENDERAR VI ATT NI
BESTÄLLER DESSA SATSER
- **ART.NR 803001 & 803037**

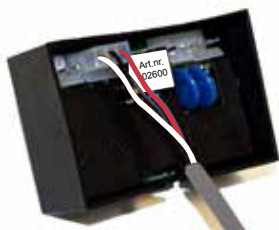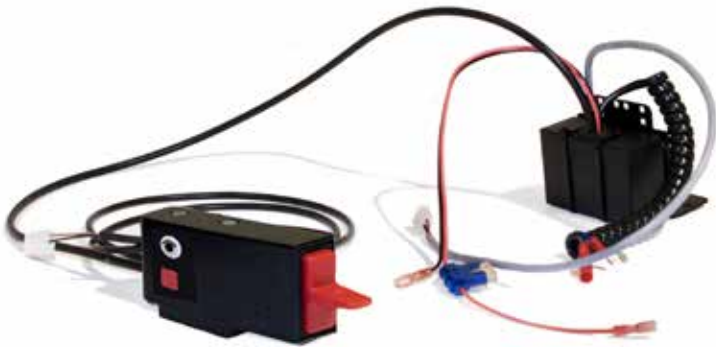

◆ LADDBOX MULTI STEG 1

För att ansluta [Laddbox multi art.nr 803030](#).

Koppla kontakt märkt **B** till kretskortets kontakt märkt **K1**.

◆ MANÖVERBOX STEG 1

För att ansluta [Manöverbox med bromsknapp art. nr 803036](#) (ersätter manöverbox upp/ner 803034).

Koppla sladden med **EN** kontakt till kretskortets kontakt märkt **K1**. Sladd med två kontakter anslut till reläkort för upp/ner.

◆ LADDBOX ◆ MANÖVERBOX STEG 2

För att ansluta [Kablage för Motor art.nr 802719](#).

Koppla kontakt till kretskortets kontakt märkt **K2**. Den andra änden kopplas till motorn.

◆ LADDBOX ◆ MANÖVERBOX STEG 3

För att ansluta [Kablage för Strömförsörjning art. nr 802718](#).

Koppla kontakt till kretskortets kontakt märkt **K3**. OBS! Kabeln kommer från kort för Upp & Ned eller föregående kort.

◆ LADDBOX ◆ MANÖVERBOX STEG 4

För att ansluta [Kablage för Batteri art.nr 802648](#).

Koppla kontakt till kretskortets kontakt märkt **K4**. Den andra änden kopplas till batteriet. SVART kabel kopplas till batteriets minuspol. OBS! RÖD kabel kopplas till batteriets pluspol. (Ifall stolen är en multi så används **K4** för att strömförsörja nästkommande kort).

ARTIKELFÖRTECKNING ÖVER SATSER FÖR MANÖVERBOX

802998 Reläkortssats upp/ner + ladd inkl. manöverbox 9000 PLUS

Art.nr	Benämning	Antal
803034	Manöverbox Plus f upp/ner+ladd kpl m kablage f reläkort	1 ST
802681	Kablage f motor 9100 f reläkort	1 ST
802648	Kablage f batteri kpl 9100 f reläkort	1 ST
803018	Kabelgenomföring 10x14x1.5	1 ST
802692	Manöverknapp med tunga f Reläkort (Röd knapp)	1 ST
800774	Plastplugg Manbox Elstol 50x30	1 ST
802546	Reläkort strömbegränsning Upp-Ner REAL9000	1 ST
802832	Reläkortsbox f reläkort	1 ST
802835	Skyddslock t reläkortsbox f reläkort	1 ST
802833	Lock t reläkortsbox f reläkort	1 ST
802834	Fäste t reläkortsbox f reläkort	1 ST
800438	K6S M4x6 OBH Insexskruv M4x6 Kullersk.	2 ST
800023	Buntband 203x3.6mm svart	2 ST

802999 Reläkortssats ryggvinkel kpl inkl. manöverbox 9000 PLUS

Art.nr	Benämning	Antal
803035	Manöverbox Plus f rygg/sits vinkl kpl m kablage f reläkort	1 ST
802681	Kablage f motor 9100 f reläkort	1 ST
802718	Kablage f strömförsörjningen f reläkort L=500mm	1 ST
803019	Kabelgenomföring 11x14x1.5	1 ST
802692	Manöverknapp med tunga f Reläkort (Röd knapp)	1 ST
800774	Plastplugg Manbox Elstol 50x30	1 ST
801070	Plaststopp höjjust. arm -stöd	1 ST
802578	Reläkort strömbegränsning Sits/Ryggvinkling 16 amp	1 ST
802832	Reläkortsbox f reläkort	1 ST
802835	Skyddslock t reläkortsbox f reläkort	1 ST
802833	Lock t reläkortsbox f reläkort	1 ST
802834	Fäste t reläkortsbox f reläkort	1 ST
800438	K6S M4x6 OBH Insexskruv M4x6 Kullersk.	2 ST
802714	Fästplåt f reläkort	1 ST
802862	MRT-TT FZB M4x6 (skruv till laddbox)	2 ST
800023	Buntband 203x3.6mm svart	4 ST
800057	Buntband 71x1.8mm svart	3 ST

802731 Eldonssats f ryggvinkel f reläkort Real 9000

Art.nr	Benämning	Antal
802644	Eldon REAL f ryggvinkel f Real 9000	1 ST
801354	Cylindrisk bult fzb	2 ST
801725	Låsnål 2mm FZB Typ B f Cylindrisk bult	2 ST
801421	Elrygg fäste justerb Bakdel	1 ST
801422	Elrygg fäste justerb Framdel	1 ST
802744	Elrygg ryggrör nedre f Eldon	1 ST
800837	Ryggfällning fäste Medic Cla/ErgoM	1 ST
800369	M6S M8x16 8.8 FZB Skruv M8x16 FZB	1 ST
801212	Möbelmutter M6 Kullrig skalle	2 ST
800507	MPSH M6x38 FZB Pinnskruv M6x38	1 ST
801566	MF6S M6x16 OBH 10.9 Insex sänkhuvud M6x16	2 ST
800096	MC6S M6x16 FZB 8.8 Insexskruv M6x16 FZB	4 ST
800462	BRB 6.4x12x1.5 svart Bricka 6.4x12x1.5 FZB	4 ST

Vid behov komplettera eldonssatsen med en av följande ryggstolpar:

801265	Ryggstolpe Std. Cla/ErgoM Låg rygg	1 ST
800841	Ryggstolpe Std. Cla/ErgoM Hög rygg	1 ST

803000 Reläkortssats sitsvinkel kpl inkl. manöverbox 9000 PLUS

Art.nr	Benämning	Antal
803035	Manöverbox Plus f rygg/sits vinkl kpl m kablage f reläkort	1 ST
802681	Kablage f motor 9100 f reläkort	1 ST
802718	Kablage f strömförsörjningen f reläkort L=500mm	1 ST
803019	Kabelgenomföring 11x14x1.5	1 ST
802692	Manöverknapp med tunga f Reläkort (Röd knapp)	1 ST
800774	Plastplugg Manbox Elstol 50x30	1 ST
801070	Plaststopp höjjust. arm -stöd	1 ST
802578	Reläkort strömbegränsning Sits/Ryggvinkling 16 amp	1 ST
802832	Reläkortsbox f reläkort	1 ST
802835	Skyddslock t reläkortsbox f reläkort	1 ST
802833	Lock t reläkortsbox f reläkort	1 ST
802834	Fäste t reläkortsbox f reläkort	1 ST
800438	K6S M4x6 OBH Insexskruv M4x6 Kullersk.	2 ST
802714	Fästplåt f reläkort	1 ST
802862	MRT-TT FZB M4x6 (skruv till laddbox)	2 ST
800023	Buntband 203x3.6mm svart	4 ST
800057	Buntband 71x1.8mm svart	3 ST

802730 Eldonssats f sitsvinkel f reläkort REAL 9000

Art.nr	Benämning	Antal
802643	Eldon REAL f sitsvinkel f Real 9000	1 ST
801354	Cylindrisk bult fzb	2 ST
801725	Låsnål 2mm FZB Typ B f Cylindrisk bult	2 ST

803001 Reläkortssats broms kpl inkl. manöverbox 9000 PLUS

Art.nr	Benämning	Antal
803036	Manöverbox Plus f upp/ner broms kpl m kablage f reläkort	1 ST
802719	Kablage f Eldon Broms f reläkort (spiralkabel)	1 ST
802718	Kablage f strömförsörjningen f reläkort L=500mm	1 ST
802642	Kablage f upp/ner och laddning f reläkort	1 ST
803019	Kabelgenomföring 11x14x1.5	1 ST
802692	Manöverknapp med tunga f Reläkort (Röd knapp)	1 ST
800158	Tryckströmställare IPC3SAD6 Bromsknapp IP röd kvadr.	1 ST
800774	Plastplugg Manbox Elstol 50x30	1 ST
802600	Reläkort strömbegränsning Broms 8 amp	1 ST
802832	Reläkortsbox f reläkort	1 ST
802835	Skyddslock t reläkortsbox f reläkort	1 ST
802833	Lock t reläkortsbox f reläkort	1 ST
802834	Fäste t reläkortsbox f reläkort	1 ST
800438	K6S M4x6 OBH Insexskruv M4x6 Kullersk.	2 ST
802714	Fästplåt f reläkort	1 ST
800436	SPAX KXTB 5x20 svart-krom svart stjärnskruv.H-bälte	2 ST
800023	Buntband 203x3.6mm svart	4 ST
800057	Buntband 71x1.8mm svart	3 ST

803037 Eldonssats f elbroms f Plus-stativ Ø20 Axel f reläkort

Art.nr	Benämning	Antal
802645	Eldon REAL f broms f Real 9000	1 ST
800180	Rundstiftshylsa Röd 1504 HO Röd 0.75-1.65mm2	1 ST
800181	Rundstift Röd 1504 HA 0.75-1.65mm2	1 ST
802705	Elbroms Axelfäste Ø20mm f Eldon	1 ST
802707	Elbroms Centrumfäste 9000 f Eldon	1 ST
801354	Cylindrisk bult FZB 1092-801354	2 ST
801725	Låsnål 2mm FZB Typ B f Cylindrisk bult	2 ST
802841	Säkringshållare Blå för fordonssäkring	1 ST
802843	Säkring 15amp Blå fordonssäkring	1 ST

ARTIKELFÖRTECKNING ÖVER SATSER FÖR LADDBOX

OBS ! Komplettera satserna nedan med en laddbox.

803029 Laddbox Hand Fjärr Joystick Upp/ner f reläkort Ver 2

803030 Laddbox Hand Fjärr Joystick Multi f reläkort Ver 2

802748 Reläkortssats upp/ner+ladd kpl exkl. laddbox

Art.nr	Benämning	Antal
802681	Kablage f motor 9100 f reläkort	1 ST
802648	Kablage f batteri kpl 9100 f reläkort	1 ST
803018	Kabelgenomföring 10x14x1.5	1 ST
802546	Reläkort strömbegränsning Upp-Ner REAL 9000	1 ST
802832	Reläkortsbox f reläkort	1 ST
802835	Skyddslock t reläkortsbox f reläkort	1 ST
802833	Lock t reläkortsbox f reläkort	1 ST
802834	Fäste t reläkortsbox f reläkort	1 ST
800438	K6S M4x6 OBH Insexskruv M4x6 Kullersk.	2 ST
800023	Buntband 203x3.6mm svart	4 ST

802750 Reläkortssats ryggvinkel kpl exkl. laddbox

Art.nr	Benämning	Antal
802681	Kablage f motor 9100 f reläkort	1 ST
802718	Kablage f strömförsörjningen f reläkort L=500mm	1 ST
803019	Kabelgenomföring 11x14x1.5	1 ST
802578	Reläkort strömbegränsning Sits/Ryggvinkling 16 amp	1 ST
802832	Reläkortsbox f reläkort	1 ST
802835	Skyddslock t reläkortsbox f reläkort	1 ST
802833	Lock t reläkortsbox f reläkort	1 ST
802834	Fäste t reläkortsbox f reläkort	1 ST
800438	K6S M4x6 OBH Insexskruv M4x6 Kullersk.	1 ST
802714	Fästplåt f reläkort	1 ST
802862	MRT-TT FZB M4x6 (skruv till laddbox)	1 ST
800023	Buntband 203x3.6mm svart	4 ST
800057	Buntband 71x1.8mm svart	3 ST

802731 Eldonssats f ryggvinkel f reläkort Real 9000

Art.nr	Benämning	Antal
802644	Eldon REAL f ryggvinkel f Real 9000	1 ST
801354	Cylindrisk bult fzb	2 ST
801725	Låsnål 2mm FZB Typ B f Cylindrisk bult	2 ST
801421	Elrygg fäste justerb Bakdel	1 ST
801422	Elrygg fäste justerb Framdel	1 ST
802744	Elrygg ryggör nedre f Eldon	1 ST
800837	Ryggfällning fäste Medic Cla/ErgoM	1 ST
800369	M6S M8x16 8.8 FZB Skruv M8x16 FZB	1 ST
801212	Möbelmutter M6 Kullrig skalle	2 ST
800507	MPSH M6x38 FZB Pinnskruv M6x38	1 ST
801566	MF6S M6x16 OBH 10.9 Insex sänkhuvud M6x16	2 ST
800096	MC6S M6x16 FZB 8.8 Insexskruv M6x16 FZB	4 ST
800462	BRB 6.4x12x1.5 svart Bricka 6.4x12x1.5 FZB	4 ST

Vid behov komplettera eldonssatsen med en av följande ryggstolpar:

801265	Ryggstolpe Std. Cla/ErgoM Låg rygg	1 ST
800841	Ryggstolpe Std. Cla/ErgoM Hög rygg	1 ST

802749 Reläkortssats sitsvinkel kpl exkl. laddbox

Art.nr	Benämning	Antal
802681	Kablage f motor 9100 f reläkort	1 ST
802718	Kablage f strömförsörjningen f reläkort L=500mm	1 ST
803019	Kabelgenomföring 11x14x1.5	1 ST
802578	Reläkort strömbegränsning Sits/Ryggvinkling 16 amp	1 ST
802832	Reläkortsbox f reläkort	1 ST
802835	Skyddslock t reläkortsbox f reläkort	1 ST
802833	Lock t reläkortsbox f reläkort	1 ST
802834	Fäste t reläkortsbox f reläkort	1 ST
800438	K6S M4x6 OBH Insexskruv M4x6 Kullersk.	1 ST
802714	Fästplåt f reläkort	1 ST
802862	MRT-TT FZB M4x6 (skruv till laddbox)	1 ST
800023	Buntband 203x3.6mm svart	4 ST
800057	Buntband 71x1.8mm svart	3 ST

802730 Eldonssats f sitsvinkel f reläkort Real 9000

Art.nr	Benämning	Antal
802643	Eldon REAL f sitsvinkel f Real 9000	1 ST
801354	Cylindrisk bult fzb	2 ST
801725	Låsnål 2mm FZB Typ B f Cylindrisk bult	2 ST

802751 Reläkortssats broms kpl exkl. laddbox

Art.nr	Benämning	Antal
802719	Kablage f Eldon Broms f reläkort (spiralkabel)	1 ST
802718	Kablage f strömförsörjningen f reläkort L=500mm	1 ST
803019	Kabelgenomföring 11x14x1.5	1 ST
802600	Reläkort strömbegränsning Broms 8 amp	1 ST
802832	Reläkortsbox f reläkort	1 ST
802835	Skyddslock t reläkortsbox f reläkort	1 ST
802833	Lock t reläkortsbox f reläkort	1 ST
802834	Fäste t reläkortsbox f reläkort	1 ST
800438	K6S M4x6 OBH Insexskruv M4x6 Kullersk.	2 ST
802714	Fästplåt f reläkort	1 ST
800436	SPAX KXTB 5x20 svart-krom svart stjärnskruv.H-bälte	1 ST
800023	Buntband 203x3.6mm svart	4 ST
800057	Buntband 71x1.8mm svart	3 ST

803037 Eldonssats f elbroms f Plus-stativ Ø20 Axel f reläkort

Art.nr	Benämning	Antal
802645	Eldon REAL f broms f Real 9000	1 ST
800180	Rundstiftshylsa Röd 1504 HO Röd 0.75-1.65mm2	1 ST
800181	Rundstift Röd 1504 HA 0.75-1.65mm2	1 ST
802705	Elbroms Axelfäste Ø20mm f Eldon	1 ST
802707	Elbroms Centrumfäste 9000 f Eldon	1 ST
801354	Cylindrisk bult FZB 1092-801354	2 ST
801725	Låsnål 2mm FZB Typ B f Cylindrisk bult	2 ST
802841	Säkringshållare Blå för fordonssäkring	1 ST
802843	Säkring 15amp Blå fordonssäkring	1 ST

ARTIKELFÖRTECKNING ÖVER DETALJER FÖR LADDBOX



LADDBOX DETALJER

	Art.Nr
1 Handkontroll Upp/Ned	802739
2 Handkontroll Mult	802740
3 Fjärrkontroll, Sändare Upp/Ner	801806
4 Fjärrkontroll, Sändare Multi	801808
5 Fjärrkontroll, Sats Upp/Ned	802686
6 Fjärrkontroll, Mottagare Upp/Ne	802737
7 Fjärrkontroll, Mottagare Multi	802738
8 Fjärrkontroll, Sats Multi	802687
9 Fotkontakt elreglage	802688
10 Joystick 3 funk. + broms	802743
Joystick 2 funk. + broms	802742
Joystick 2 funk. ej broms	802741