





STYRKA & FUNKTION

REAL 9000 Version 2.1

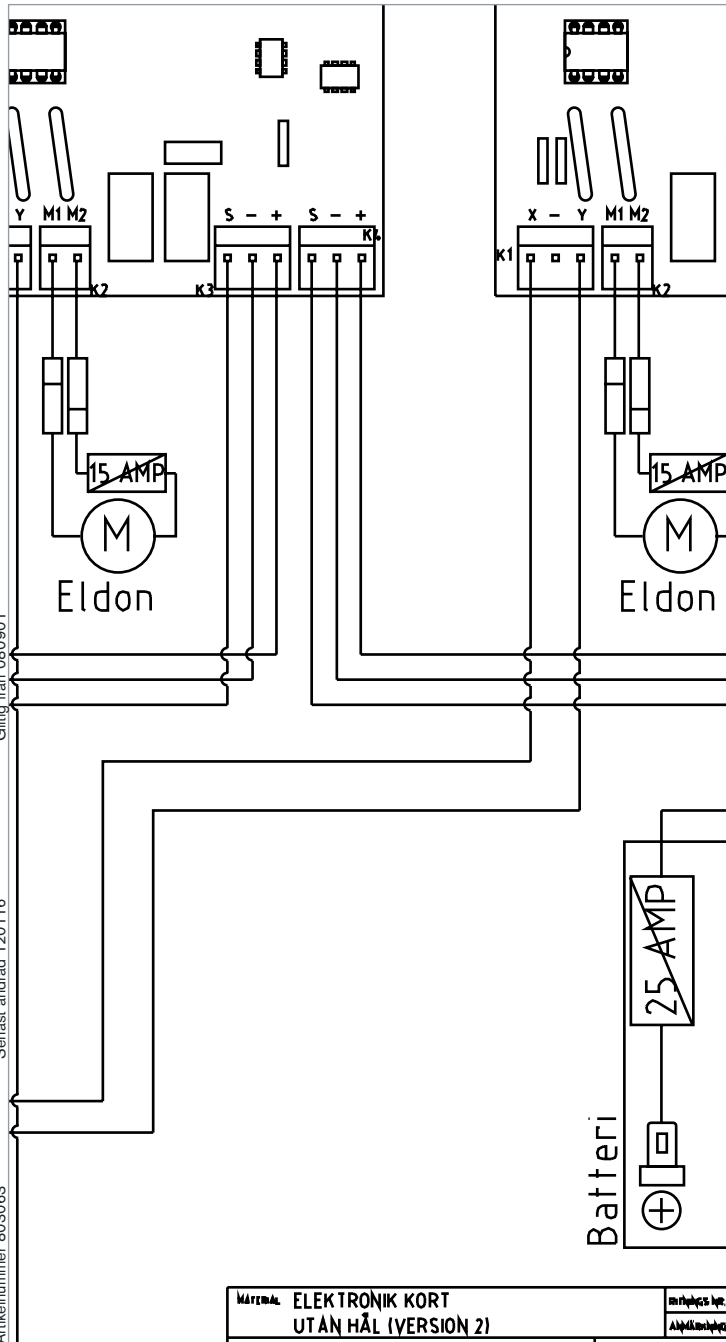


UPP/NER

Artikelnr. 802546

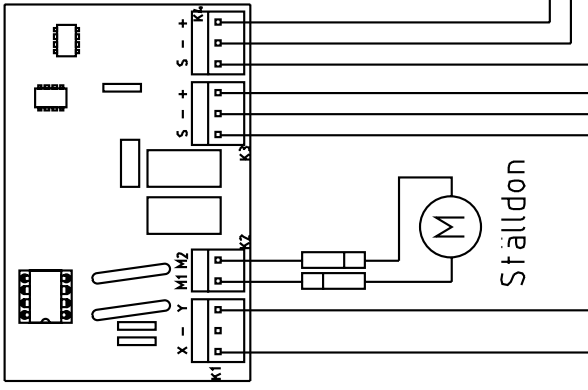


SITSVINKEL

Artikelnr. 802578

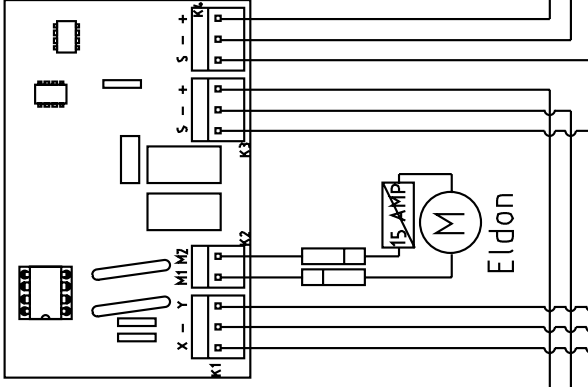






BROMS

Artikelnr. 802600

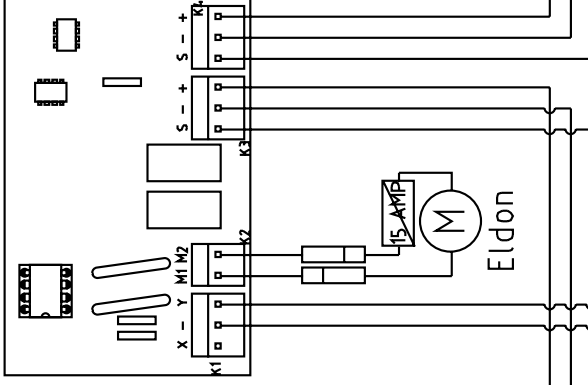

RYGGVINKEL

Artikelnr. 802578

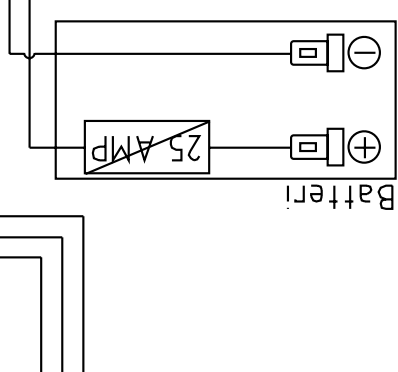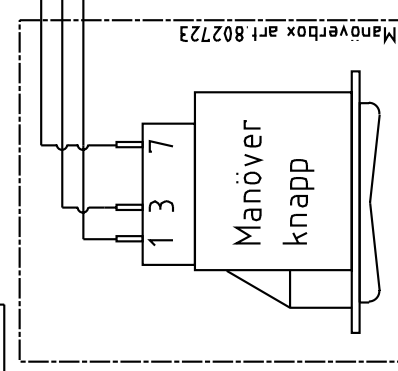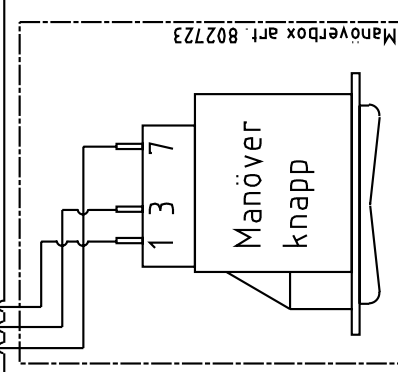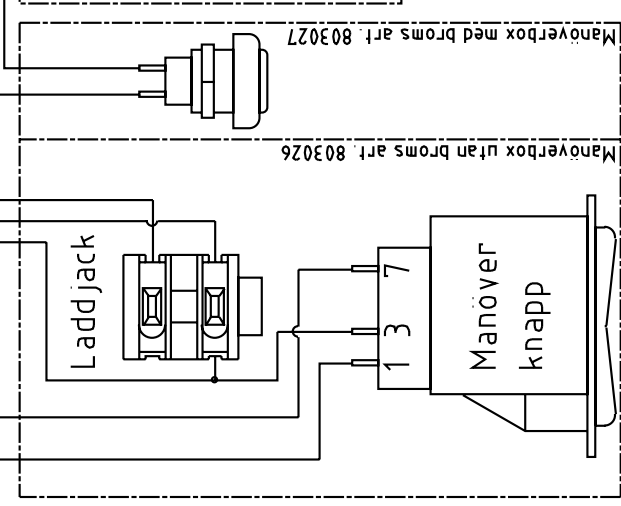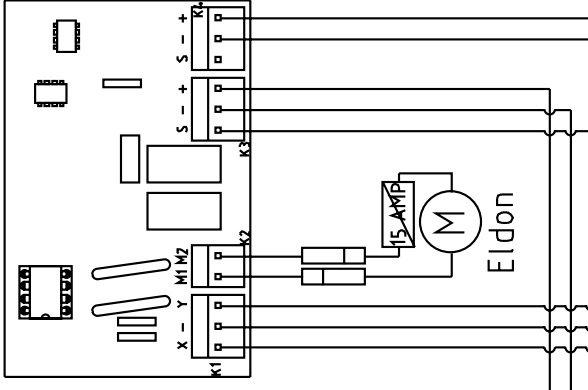

MATERIAL		ELEKTRONIK KORT		11000-00	
UTAN HÅL (VERSION 2)		UTAN HÅL (VERSION 2)			
REVISION	REVISION	UTGIVNING	UTGIVNING		
ÄNDRA	ÄNDRA	REVISION	REVISION		
DATE	DATE	DATE	DATE		
BYGG	BYGG	BYGG	BYGG		
EL SCHEMA FÖR			MANÖVERBOXAR (VERSION 2)		
MATERIAL			REAL EL 9100/91400/9600/9600		
MATERIAL			MULTI		
MATERIAL			ATE		
MATERIAL			15:1		
MATERIAL			DATE		
MATERIAL			28-05-08		



UPP/NER

Artikelnr. 802546

SITSVINKEL


Artikelnr. 802578

BROMS

Artikelnr. 802600

RYGGVINKEL

Artikelnr. 802578

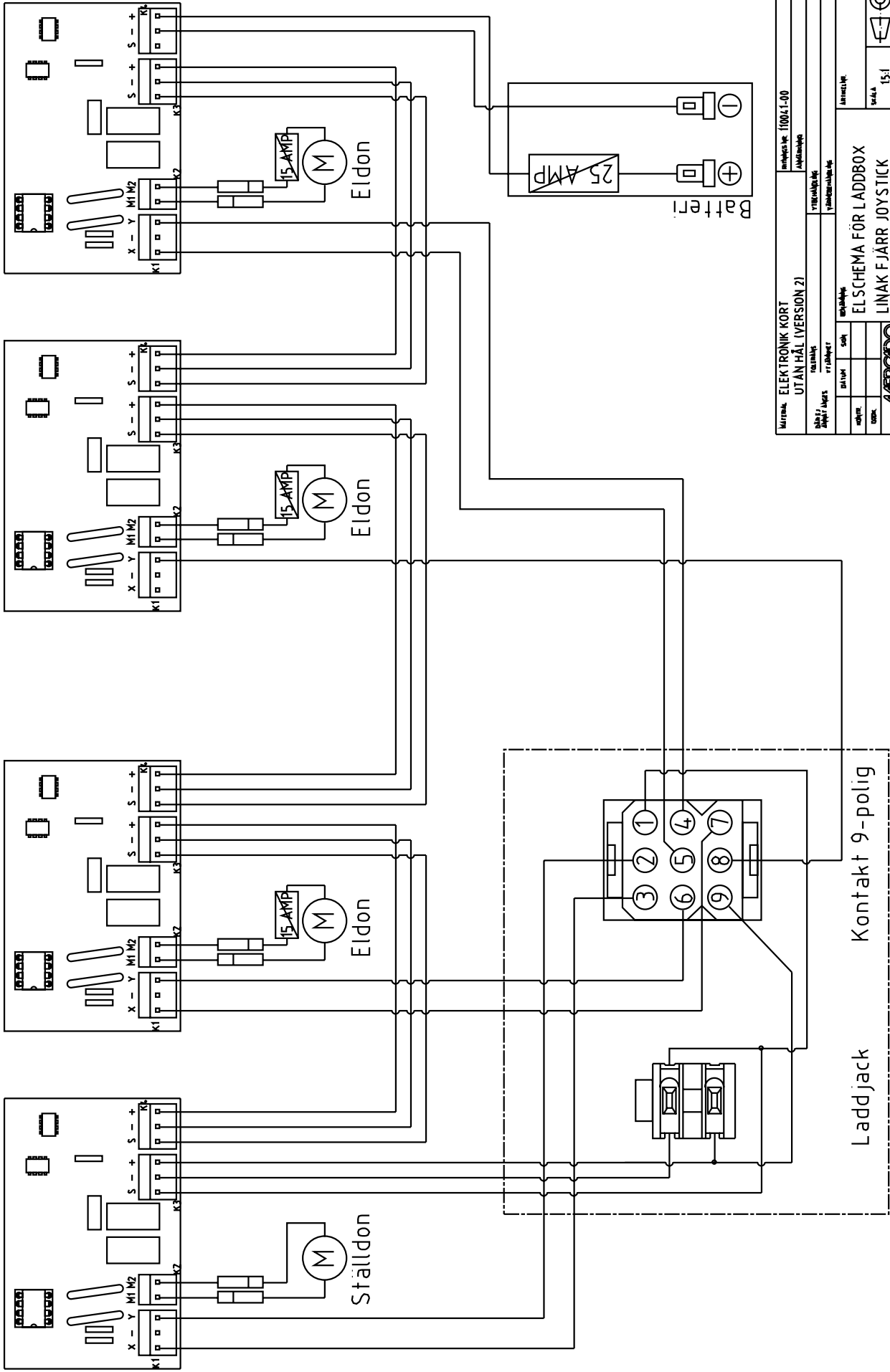

MATERIAL		ELEKTRONIK KORT		11004.1-00	
UTÅN HÅLL (VERSION 2)		REVISJON		10/2008	
ARTIKELLAGES		RYGGVINKEL		15000	
REVISJON		BROMS		15000	
REVISJON		SITSVINKEL		15000	
REVISJON		UPP/NER		15000	
EL SCHEMA FOR LADDBOX					
LINAK FJARR JOYSTICK					
MATERIAL					
REAL EL 9100/9400/9600/9800					
MULTI					
BATTERI					
15s					
DATE					
28-05-08					

Laddbox multi art. 803030 vid fler elfunktioner

MERCADOS NYA ELEKTRONIK FÖR UPP & NER


Eftersom den nya elektroniken är minusstyrd är den inte bakåtkompatibel.


Version 1 Elektronik kan kompletteras med Version 2.

På bilden visas sats 802722 & ellyftomat.



MONTERING AV FÄSTE FÖR RELÄKORTSBOX **1** Montera fästplåten med skruvarna på Ställdonshuset med pilen riktad uppåt mot Ställdonsröret. På Eldonet skall fästplåten monteras på baksidan av den vinkelräta plåtinkeln med pilen uppåt. **2** Fäst locket över boxen med två plastremmar. **3** Skjut ner boxen i skårorna på fästplåten, tills spärren hakar fast.

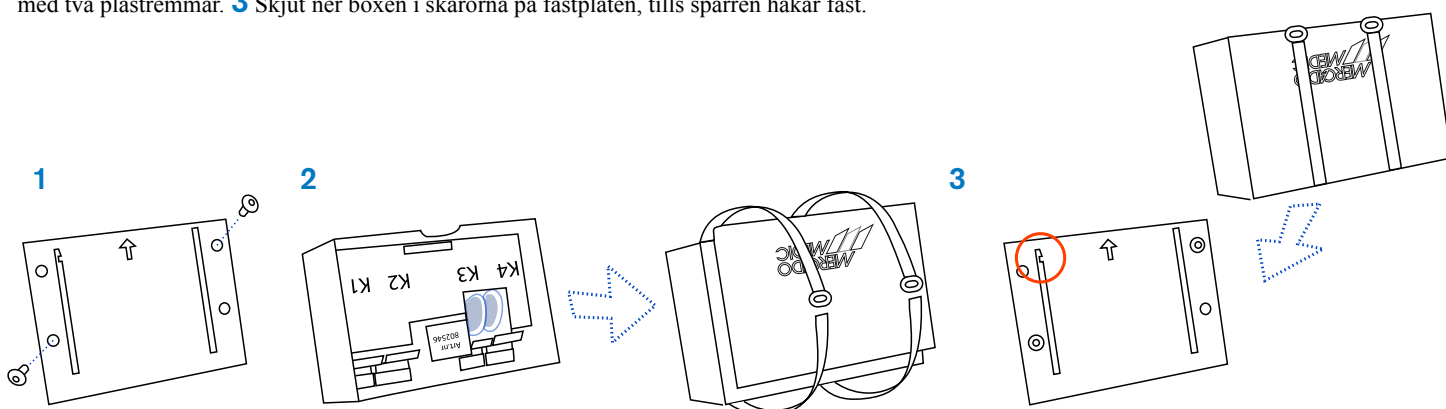

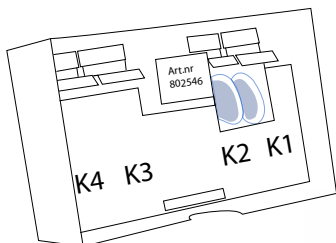

**VILL DU BYGGA IHOP DET SJÄLV GÖR DU SÅ HÄR:
PÅ KRETSKORTET FINNS MOLEXKONTAKTERNA
K1-K4.**



**VI REKOMMENDERAR ATT NI BESTÄLLER DENNA SATS MED
ART.NR 802722. DET INNEHÅLLER ALLT.**




● LADDBOX UPP/NED STEG 1

För att ansluta [Laddbox upp/ned art.nr 803029](#).
Koppla kontakten med **TVÅ** ledare till kretskortets kontakt märkt **K1** och kontakten med **TRE** ledare till kontakt märkt **K3**.



● LADDBOX MULTI STEG 1

För att ansluta [Laddbox multi art.nr 803030](#).
Använd sladd med **TVÅ** kontakter.
Koppla kontakten med **TVÅ** ledare till kretskortets kontakt märkt **K1** och kontakten med **TRE** ledare till kontakt märkt **K3**.

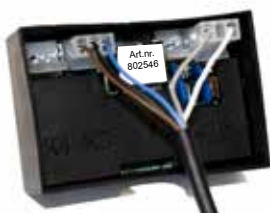

● MANÖVERBOX STEG 1

För att ansluta [Manöverbox art.nr 802721](#).
Koppla kontakten med **TVÅ** ledare till kretskortets kontakt märkt **K1** och kontakten med **TRE** ledare till kontakt märkt **K3**.



● LADDBOX ● MANÖVERBOX STEG 2

För att ansluta [Kablage för Motor art.nr 802681](#).
Koppla kontakt till kretskortets kontakt märkt **K2**. Den andra änden kopplas till motorn.



● LADDBOX ● MANÖVERBOX STEG 3


För att ansluta [Kablage för Batteri art.nr 802648](#).
Koppla kontakt till kretskortets kontakt märkt **K4**. Den andra änden kopplas till batteriet. SVART kabel kopplas till batteriets minuspol. OBS! RÖD kabel kopplas till batteriets pluspol. (Ifall stolen är en multi så används **K4** för att strömförsörja nästkommande kort).

MERCADOS NYA ELDON & ELEKTRONIK FÖR SITSVINKLING


Eftersom den nya elektroniken är minusstyrd är den inte bakåtkompatibel.

Version 1 Elektronik kan kompletteras med Version 2.

På bilden visas sats 802724 samt 802730 monterat på vinkelställbart sittkryss.

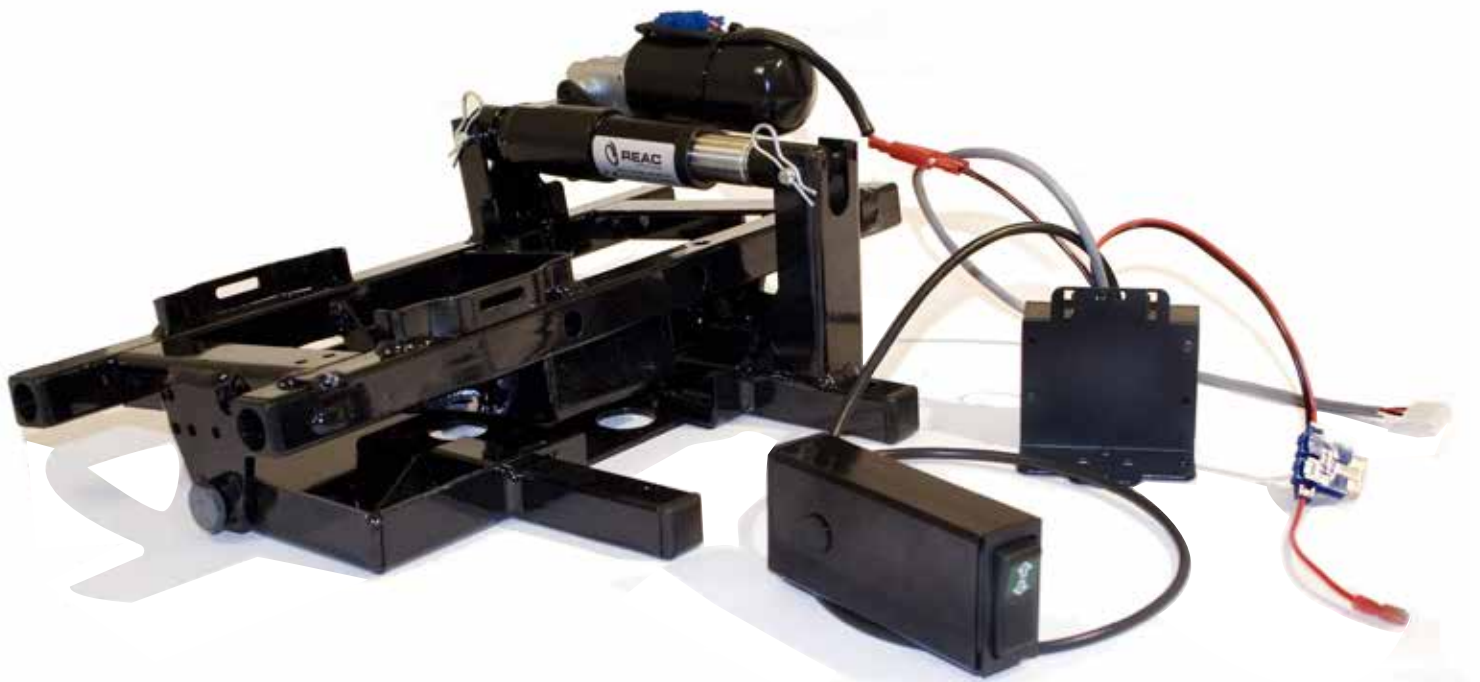

FÖR ATT KOMPLETTERA EN STOL MED ELSITSVINKLING SÅ REKOMMENDERAR VI ATT NI BESTÄLLER SATSERNA - **ART.NR 802724 & 802730**

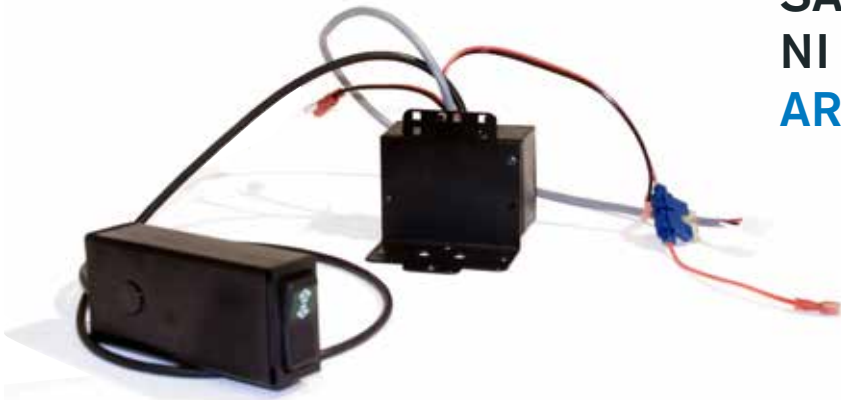

◆ LADDBOX MULTI STEG 1

För att ansluta [Laddbox multi art.nr 803030](#).
Koppla kontakt märkt **S** till kretskortets kontakt
märkt **K1**.




◆ MANÖVERBOX STEG 1

För att ansluta [Manöverbox art.nr 802723](#).
Koppla kontakt till kretskortets kontakt märkt **K1**.



◆ LADDBOX ◆ MANÖVERBOX STEG 2

För att ansluta [Kablage för Motor art.nr 802681](#).
Koppla kontakt till kretskortets kontakt
märkt **K2**. Den andra änden kopplas till motorn.

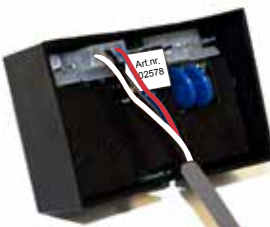

◆ LADDBOX ◆ MANÖVERBOX STEG 3

För att ansluta [Kablage för Strömförsörjning art. nr 802718](#). Koppla kontakt till kretskortets kontakt
märkt **K3**. OBS! Kabeln kommer från kort för
Upp & Ned eller föregående kort.



◆ LADDBOX ◆ MANÖVERBOX STEG 4


För att ansluta [Kablage för Batteri art.nr 802648](#).
Koppla kontakt till kretskortets kontakt märkt **K4**.
Den andra änden kopplas till batteriet. SVART kabel
kopplas till batteriets minuspol. OBS! RÖD kabel
kopplas till batteriets pluspol. (Ifall stolen är en multi
så används **K4** för att strömförsörja nästkommande
kort).

MERCADOS NYA ELDON & ELEKTRONIK FÖR RYGGVINKLING


Eftersom den nya elektroniken är minusstyrd är den inte bakåtkompatibel.

Version 1 Elektronik kan kompletteras med Version 2.

På bilden visas sats 802726 & 802731.

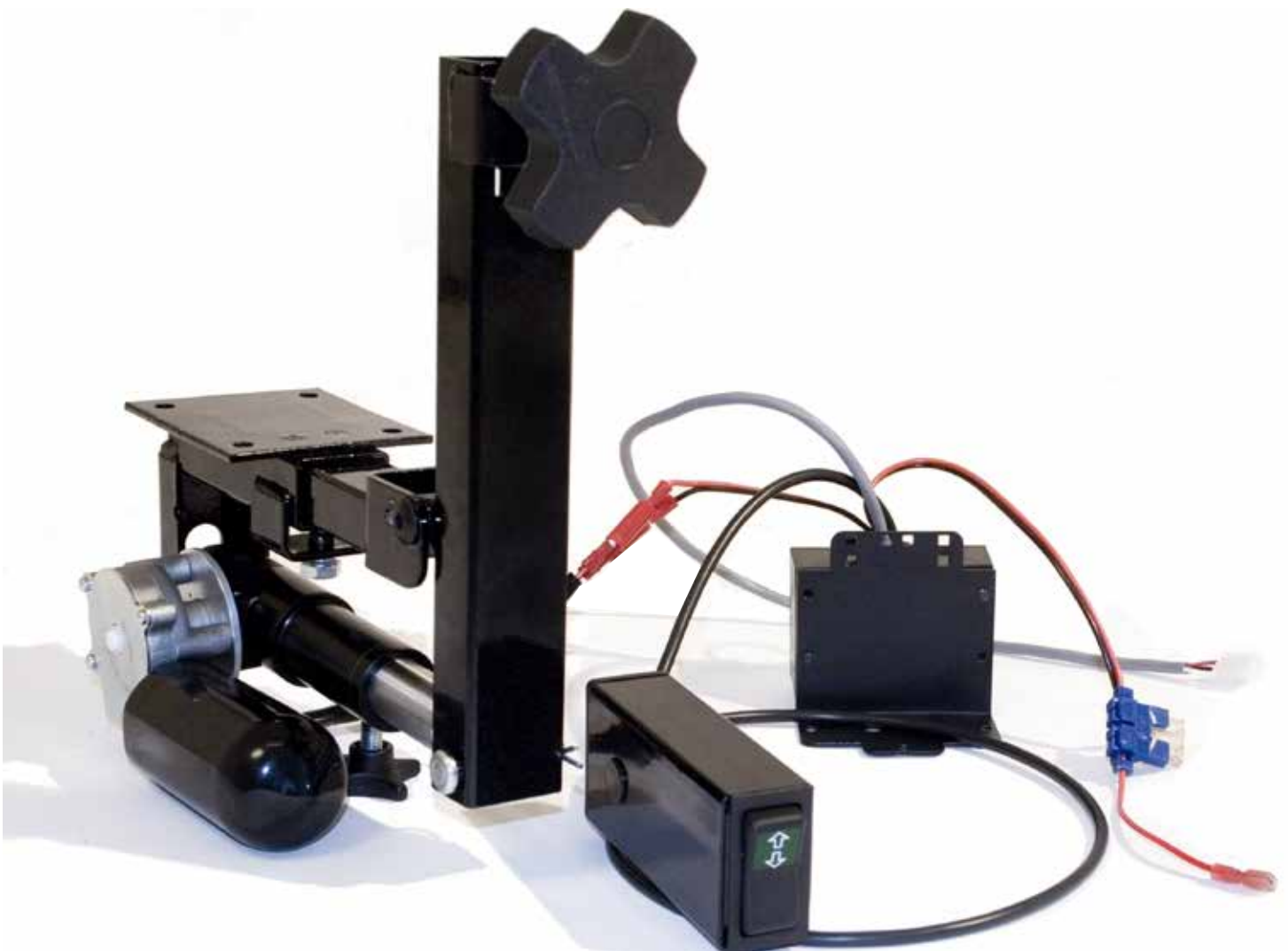

FÖR ATT KOMPLETTERA EN STOL MED ELRYGG SÅ REKOMMENDERAR VI ATT NI BESTÄLLER DESSA SATSER - **ART.NR 802726 & 802731**

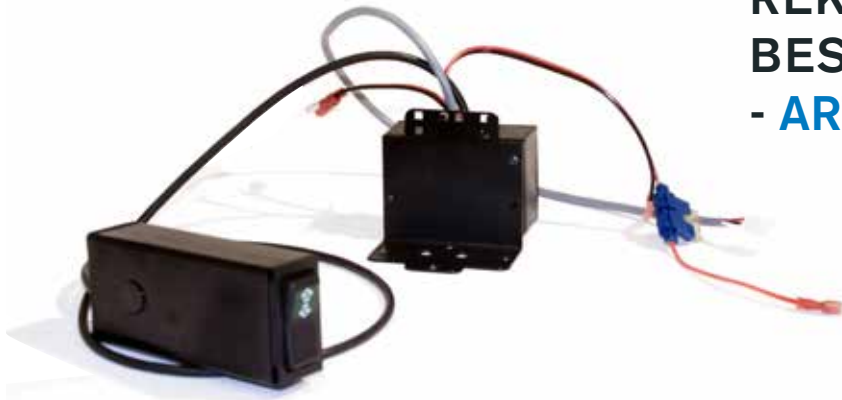

● LADDBOX MULTI STEG 1

För att ansluta [Laddbox multi art.nr 803030](#).
Koppla kontakt märkt R till kretskortets kontakt
märkt K1.




● MANÖVERBOX STEG 1

För att ansluta [Manöverbox art.nr 802723](#).
Koppla kontakt till kretskortets kontakt märkt K1.



● LADDBOX ● MANÖVERBOX STEG 2

För att ansluta [Kablage för Motor art.nr 802681](#).
Koppla kontakt till kretskortets kontakt
märkt K2. Den andra änden kopplas till motorn.

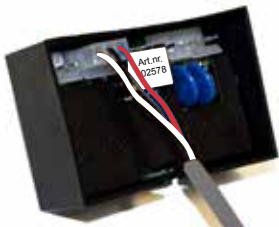

● LADDBOX ● MANÖVERBOX STEG 3

För att ansluta [Kablage för Strömförsörjning art.nr 802718](#). Koppla kontakt till kretskortets kontakt
märkt K3. OBS! Kabeln kommer från kort för Upp
& Ned eller föregående kort.



● LADDBOX ● MANÖVERBOX STEG 4

För att ansluta [Kablage för Batteri art.nr 802648](#).
Koppla kontakt till kretskortets kontakt märkt K4.
Den andra änden kopplas till batteriet. SVART
kabel kopplas till batteriets minuspol. OBS! RÖD
kabel kopplas till batteriets pluspol. (Ifall stolen är
en multi så används K4 för att strömförsörja näst-
kommande kort).

MERCADOS NYA ELBROMS

Eftersom den nya elektroniken är minusstyrd är den inte bakåtkompatibel.



Version 1 Elektronik kan kompletteras med Version 2.

Separat monteringsanvisning kan beställas från Mercado eller laddas hem från www.mercado.se

På bilden visas sats 802728 & 802732.



FÖR ATT KOMPLETTERA EN
STOL MED ELBROMS SÅ
REKOMMENDERAR VI ATT NI
BESTÄLLER DESSA SATSER
- **ART.NR 802728 & 802732**

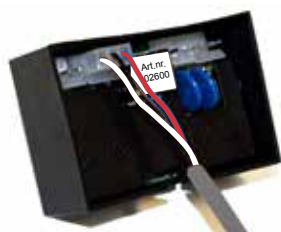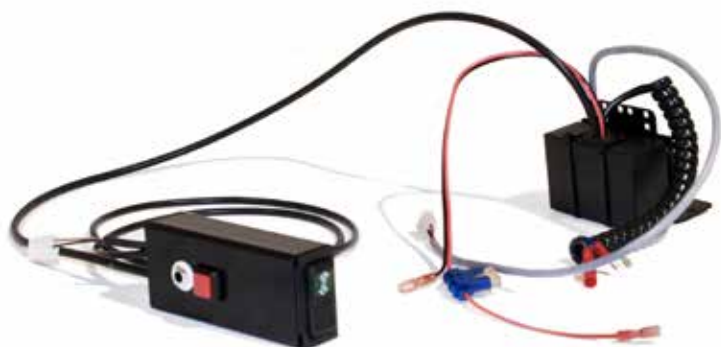

● LADDBOX MULTI STEG 1

För att ansluta [Laddbox multi art.nr 803030](#).

Koppla kontakt märkt **B** till kretskortets kontakt märkt **K1**.

● MANÖVERBOX STEG 1

För att ansluta [Manöverbox med bromsknapp art. nr 803027](#) (ersätter manöverbox upp/ner 802721).

Koppla sladden med **EN** kontakt till kretskortets kontakt märkt **K1**. Sladd med två kontakter anslut till reläkort för upp/ner.

● LADDBOX ● MANÖVERBOX STEG 2

För att ansluta [Kablage för Motor art.nr 802719](#).

Koppla kontakt till kretskortets kontakt märkt **K2**. Den andra änden kopplas till motorn.

● LADDBOX ● MANÖVERBOX STEG 3

För att ansluta [Kablage för Strömförsörjning art. nr 802718](#).

Koppla kontakt till kretskortets kontakt märkt **K3**. OBS! Kabeln kommer från kort för Upp & Ned eller föregående kort.

● LADDBOX ● MANÖVERBOX STEG 4

För att ansluta [Kablage för Batteri art.nr 802648](#).

Koppla kontakt till kretskortets kontakt märkt **K4**. Den andra änden kopplas till batteriet. SVART kabel kopplas till batteriets minuspol. OBS! RÖD kabel kopplas till batteriets pluspol. (Ifall stolen är en multi så används **K4** för att strömförsörja nästkommande kort).

ARTIKELFÖRTECKNING ÖVER SATSER FÖR MANÖVERBOX

802722 Reläkortssats upp/ner+ladd kpl inkl. manöverbox 9000

Art.nr	Benämning	Antal
803026	Manöverbox f upp/ner+ladd kpl m kablage f reläkort	1 ST
802681	Kablage f motor 9100 f reläkort	1 ST
802648	Kablage f batteri kpl 9100 f reläkort	1 ST
803018	Kabelgenomföring 10x14x1.5	1 ST
802696	Manöverknapp f Reläkort	1 ST
800774	Plastplugg Manbox Elstol 50x30	1 ST
802546	Reläkort strömbegränsning Upp-Ner REAL9000	1 ST
802832	Reläkortsbox f reläkort	1 ST
802835	Skyddslock t reläkortsbox f reläkort	1 ST
802833	Lock t reläkortsbox f reläkort	1 ST
802834	Fäste t reläkortsbox f reläkort	1 ST
800438	K6S M4x6 OBH Insexskruv M4x6 Kullersk.	2 ST
800023	Buntband 203x3.6mm svart	2 ST

802726 Reläkortssats ryggvinkel kpl inkl. manöverbox 9000

Art.nr	Benämning	Antal
802723	Manöverbox f sits/ryggvinkel kpl m kablage f reläkort	1 ST
802681	Kablage f motor 9100 f reläkort	1 ST
802718	Kablage f strömförsörjningen f reläkort L=500mm	1 ST
803019	Kabelgenomföring 11x14x1.5	1 ST
802696	Manöverknapp f Reläkort	1 ST
800774	Plastplugg Manbox Elstol 50x30	1 ST
801070	Plaststopp höjjust. arm -stöd	1 ST
802578	Reläkort strömbegränsning Sits/Ryggvinkling 16 amp	1 ST
802832	Reläkortsbox f reläkort	1 ST
802835	Skyddslock t reläkortsbox f reläkort	1 ST
802833	Lock t reläkortsbox f reläkort	1 ST
802834	Fäste t reläkortsbox f reläkort	1 ST
800438	K6S M4x6 OBH Insexskruv M4x6 Kullersk.	2 ST
802714	Fästplåt f reläkort	1 ST
802862	MRT-TT FZB M4x6 (skruv till laddbox)	2 ST
800023	Buntband 203x3.6mm svart	4 ST
800057	Buntband 71x1.8mm svart	3 ST

802731 Eldonssats f ryggvinkel f reläkort Real 9000

Art.nr	Benämning	Antal
802644	Eldon REAL f ryggvinkel f Real 9000	1 ST
801354	Cylindrisk bult fzb	2 ST
801725	Låsnål 2mm FZB Typ B f Cylindrisk bult	2 ST
801421	Elrygg fäste justerb Bakdel	1 ST
801422	Elrygg fäste justerb Framdel	1 ST
802744	Elrygg ryggrör nedre f Eldon	1 ST
800837	Ryggfällning fäste Medic Cla/ErgoM	1 ST
800369	M6S M8x16 8.8 FZB Skruv M8x16 FZB	1 ST
801212	Möbelmutter M6 Kullrig skalle	2 ST
800507	MPSH M6x38 FZB Pinnskruv M6x38	1 ST
801566	MF6S M6x16 OBH 10.9 Insex sänkhuvud M6x16	2 ST
800096	MC6S M6x16 FZB 8.8 Insexskruv M6x16 FZB	4 ST
800462	BRB 6.4x12x1.5 svart Bricka 6.4x12x1.5 FZB	4 ST

Vid behov komplettera eldonssatsen med en av följande ryggstolpar:

801265	Ryggstolpe Std. Cla/ErgoM Låg rygg	1 ST
800841	Ryggstolpe Std. Cla/ErgoM Hög rygg	1 ST

802724 Reläkortssats sitsvinkel kpl inkl. manöverbox 9000

Art.nr	Benämning	Antal
802723	Manöverbox f sits/ryggvinkel kpl m kablage f reläkort	1 ST
802681	Kablage f motor 9100 f reläkort	1 ST
802718	Kablage f strömförsörjningen f reläkort L=500mm	1 ST
803019	Kabelgenomföring 11x14x1.5	1 ST
802696	Manöverknapp f Reläkort	1 ST
800774	Plastplugg Manbox Elstol 50x30	1 ST
801070	Plaststopp höjjust. arm -stöd	1 ST
802578	Reläkort strömbegränsning Sits/Ryggvinkling 16 amp	1 ST
802832	Reläkortsbox f reläkort	1 ST
802835	Skyddslock t reläkortsbox f reläkort	1 ST
802833	Lock t reläkortsbox f reläkort	1 ST
802834	Fäste t reläkortsbox f reläkort	1 ST
800438	K6S M4x6 OBH Insexskruv M4x6 Kullersk.	2 ST
802714	Fästplåt f reläkort	1 ST
802862	MRT-TT FZB M4x6 (skruv till laddbox)	2 ST
800023	Buntband 203x3.6mm svart	4 ST
800057	Buntband 71x1.8mm svart	3 ST

802730 Eldonssats f sitsvinkel f reläkort Real 9000

Art.nr	Benämning	Antal
802643	Eldon REAL f sitsvinkel f Real 9000	1 ST
801354	Cylindrisk bult fzb	2 ST
801725	Låsnål 2mm FZB Typ B f Cylindrisk bult	2 ST

802728 Reläkortssats broms kpl inkl. manöverbox 9000

Art.nr	Benämning	Antal
803027	Manöverbox f upp/ner+ladd+broms kpl m kablage f reläkort	1 ST
802719	Kablage f Eldon Broms f reläkort (spiralkabel)	1 ST
802718	Kablage f strömförsörjningen f reläkort L=500mm	1 ST
802642	Kablage f upp/ner och laddning f reläkort	1 ST
803019	Kabelgenomföring 11x14x1.5	1 ST
802696	Manöverknapp f Reläkort	1 ST
800158	Tryckströmställare IPC3SAD6 Bromsknapp IP röd kvadr.	1 ST
800774	Plastplugg Manbox Elstol 50x30	1 ST
802600	Reläkort strömbegränsning Broms 8 amp	1 ST
802832	Reläkortsbox f reläkort	1 ST
802835	Skyddslock t reläkortsbox f reläkort	1 ST
802833	Lock t reläkortsbox f reläkort	1 ST
802834	Fäste t reläkortsbox f reläkort	1 ST
800438	K6S M4x6 OBH Insexskruv M4x6 Kullersk.	2 ST
802714	Fästplåt f reläkort	1 ST
800436	SPAX KXTB 5x20 svart-krom svart stjärnskruv.H-bälte	2 ST
800023	Buntband 203x3.6mm svart	4 ST
800057	Buntband 71x1.8mm svart	3 ST

802732 Eldonssats f elbroms X/H-stativ Ø12 Axel

Art.nr	Benämning	Antal
802645	Eldon REAL f broms f Real 9000	1 ST
802706	Elbroms Axelfäste Ø12mm f Eldon	1 ST
802707	Elbroms Centrumfäste 9000 f Eldon	1 ST
801354	Cylindrisk bult fzb	2 ST
801725	Låsnål 2mm FZB Typ B f Cylindrisk bult	2 ST

ARTIKELFÖRTECKNING ÖVER SATSER FÖR LADDBOX

OBS ! Komplettera satserna nedan med en laddbox.

803029 Laddbox Hand Fjärr Joystick Upp/ner f reläkort Ver 2

803030 Laddbox Hand Fjärr Joystick Multi f reläkort Ver 2

802748 Reläkortssats upp/ner+ladd kpl exkl. laddbox

Art.nr	Benämning	Antal
802681	Kablage f motor 9100 f reläkort	1 ST
802648	Kablage f batteri kpl 9100 f reläkort	1 ST
803018	Kabelgenomföring 10x14x1.5	1 ST
802546	Reläkort strömbegränsning Upp-Ner REAL 9000	1 ST
802832	Reläkortsbox f reläkort	1 ST
802835	Skyddslock t reläkortsbox f reläkort	1 ST
802833	Lock t reläkortsbox f reläkort	1 ST
802834	Fäste t reläkortsbox f reläkort	1 ST
800438	K6S M4x6 OBH Insexskruv M4x6 Kullersk.	2 ST
800023	Buntband 203x3.6mm svart	4 ST

802750 Reläkortssats ryggvinkel kpl exkl. laddbox

Art.nr	Benämning	Antal
802681	Kablage f motor 9100 f reläkort	1 ST
802718	Kablage f strömförsörjningen f reläkort L=500mm	1 ST
803019	Kabelgenomföring 11x14x1.5	1 ST
802578	Reläkort strömbegränsning Sits/Ryggvinkling 16 amp	1 ST
802832	Reläkortsbox f reläkort	1 ST
802835	Skyddslock t reläkortsbox f reläkort	1 ST
802833	Lock t reläkortsbox f reläkort	1 ST
802834	Fäste t reläkortsbox f reläkort	1 ST
800438	K6S M4x6 OBH Insexskruv M4x6 Kullersk.	1 ST
802714	Fästplåt f reläkort	1 ST
802862	MRT-TT FZB M4x6 (skruv till laddbox)	1 ST
800023	Buntband 203x3.6mm svart	4 ST
800057	Buntband 71x1.8mm svart	3 ST

802731 Eldonssats f ryggvinkel f reläkort Real 9000

Art.nr	Benämning	Antal
802644	Eldon REAL f ryggvinkel f Real 9000	1 ST
801354	Cylindrisk bult fzb	2 ST
801725	Låsnål 2mm FZB Typ B f Cylindrisk bult	2 ST
801421	Elrygg fäste justerb Bakdel	1 ST
801422	Elrygg fäste justerb Framdel	1 ST
802744	Elrygg ryggör nedre f Eldon	1 ST
800837	Ryggfällning fäste Medic Cla/ErgoM	1 ST
800369	M6S M8x16 8.8 FZB Skruv M8x16 FZB	1 ST
801212	Möbelmutter M6 Kullrig skalle	2 ST
800507	MPSH M6x38 FZB Pinnskruv M6x38	1 ST
801566	MF6S M6x16 OBH 10.9 Insex sänkhuvud M6x16	2 ST
800096	MC6S M6x16 FZB 8.8 Insexskruv M6x16 FZB	4 ST
800462	BRB 6.4x12x1.5 svart Bricka 6.4x12x1.5 FZB	4 ST

Vid behov komplettera eldonssatsen med en av följande ryggstolpar:

801265	Ryggstolpe Std. Cla/ErgoM Låg rygg	1 ST
800841	Ryggstolpe Std. Cla/ErgoM Hög rygg	1 ST

802749 Reläkortssats sitsvinkel kpl exkl. laddbox

Art.nr	Benämning	Antal
802681	Kablage f motor 9100 f reläkort	1 ST
802718	Kablage f strömförsörjningen f reläkort L=500mm	1 ST
803019	Kabelgenomföring 11x14x1.5	1 ST
802578	Reläkort strömbegränsning Sits/Ryggvinkling 16 amp	1 ST
802832	Reläkortsbox f reläkort	1 ST
802835	Skyddslock t reläkortsbox f reläkort	1 ST
802833	Lock t reläkortsbox f reläkort	1 ST
802834	Fäste t reläkortsbox f reläkort	1 ST
800438	K6S M4x6 OBH Insexskruv M4x6 Kullersk.	1 ST
802714	Fästplåt f reläkort	1 ST
802862	MRT-TT FZB M4x6 (skruv till laddbox)	1 ST
800023	Buntband 203x3.6mm svart	4 ST
800057	Buntband 71x1.8mm svart	3 ST

802730 Eldonssats f sitsvinkel f reläkort Real 9000

Art.nr	Benämning	Antal
802643	Eldon REAL f sitsvinkel f Real 9000	1 ST
801354	Cylindrisk bult fzb	2 ST
801725	Låsnål 2mm FZB Typ B f Cylindrisk bult	2 ST

802751 Reläkortssats broms kpl exkl. laddbox

Art.nr	Benämning	Antal
802719	Kablage f Eldon Broms f reläkort (spiralkabel)	1 ST
802718	Kablage f strömförsörjningen f reläkort L=500mm	1 ST
803019	Kabelgenomföring 11x14x1.5	1 ST
802600	Reläkort strömbegränsning Broms 8 amp	1 ST
802832	Reläkortsbox f reläkort	1 ST
802835	Skyddslock t reläkortsbox f reläkort	1 ST
802833	Lock t reläkortsbox f reläkort	1 ST
802834	Fäste t reläkortsbox f reläkort	1 ST
800438	K6S M4x6 OBH Insexskruv M4x6 Kullersk.	2 ST
802714	Fästplåt f reläkort	1 ST
800436	SPAX KXTB 5x20 svart-krom svart stjärnskruv.H-bälte	1 ST
800023	Buntband 203x3.6mm svart	4 ST
800057	Buntband 71x1.8mm svart	3 ST

802732 Eldonssats f elbroms X/H-stativ Ø12 Axel

Art.nr	Benämning	Antal
802645	Eldon REAL f broms f Real 9000	1 ST
802706	Elbroms Axelfäste Ø12mm f Eldon	1 ST
802707	Elbroms Centrumfäste 9000 f Eldon	1 ST
801354	Cylindrisk bult fzb	2 ST
801725	Låsnål 2mm FZB Typ B f Cylindrisk bult	2 ST

ARTIKELFÖRTECKNING ÖVER DETALJER FÖR LADDBOX



LADDBOX DETALJER

	Art.Nr
1 Handkontroll Upp/Ned	802739
2 Handkontroll Mult	802740
3 Fjärrkontroll, Sändare Upp/Ner	801806
4 Fjärrkontroll, Sändare Multi	801808
5 Fjärrkontroll, Sats Upp/Ned	802686
6 Fjärrkontroll, Mottagare Upp/Ner	802737
7 Fjärrkontroll, Mottagare Multi	802738
8 Fjärrkontroll, Sats Multi	802687
9 Fotkontakt elreglage	802688
10 Joystick 3 funk. + broms	802743
Joystick 2 funk. + broms	802742
Joystick 2 funk. ej broms	802741