





REAL-STOLARNA ÄR MEDICINTEKNISKA
PRODUKTER OCH CE-MÄRKTA I ENLIGHET MED
LÄKEMEDELSVERKET'S FÖRESKRIFTER 2003:11.

Skapad: 2007-06-01
Ändrad: 2020-10-08

⊕ REAL® 9000 PLUS BARN

Vi har barnasinnet kvar!

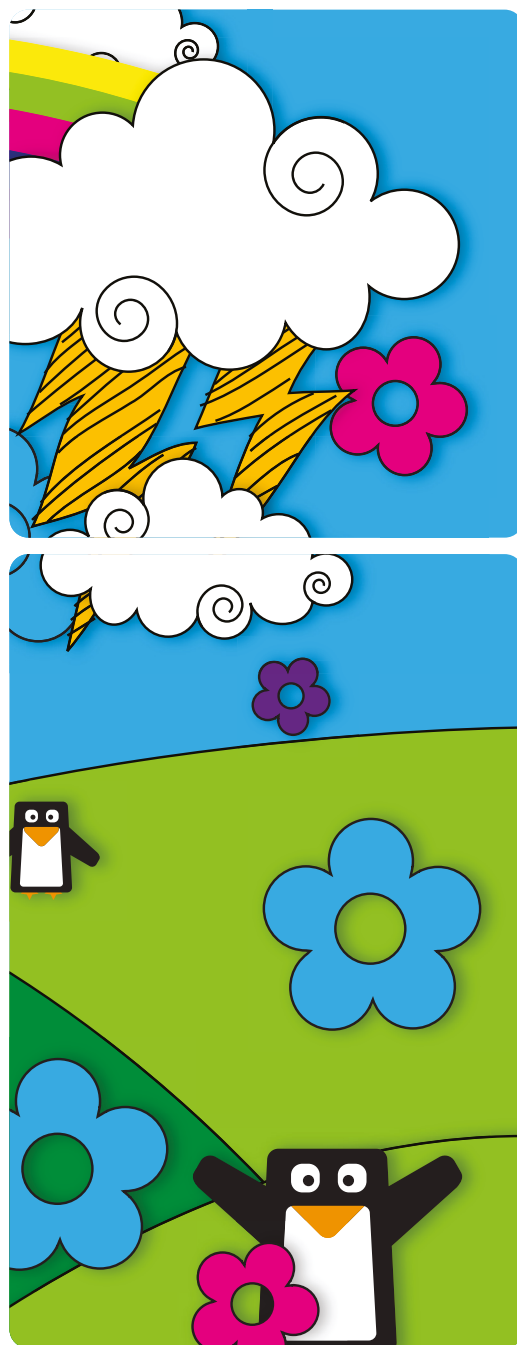

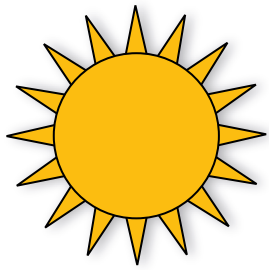

Aktivt sittande med stora möjligheter

Många barn med funktionsnedsättningar kan sitta utmärkt vid ett bord utan omfattande stöd, men då behövs en stol med speciella egenskaper. Bland annat måste sitsen lätt kunna vinklas samtidigt som ett stabilt stöd för ryggen och fötterna erbjuds. REAL 9000 PLUS BARN MANUELL/EL för barn är modulstolen där behoven bestämmer utförandet.

Enkel att anpassa

I en REAL 9000 PLUS BARN MANUELL/EL med plus-stativ får funktionshindrade barn möjlighet att sitta aktivt vid till exempel en skolbänk eller ett bord. Sitthöjden kan enkelt ställas in för olika bordshöjder och bromsen kan skötas med hand eller fot. Det medför att man lämnar stolen tryggt på den plats man har bestämt. Tack vare att stolen är moduluppbyggd är den enkel att anpassa och komplettera då barnet växer.

Hög kvalitet

REAL 9000 PLUS BARN MANUELL/EL för barn är flexibel och dimensionerad för att fungera under en lång följd av år. Det är funktion som har styrt utformningen. Produkterna tillverkas vid egna anläggningar i Lidingö och Halmstad. ErgoMedic PLUS – ergonomi utöver det vanliga. För att ytterligare öka sittkomforten på real-

stolarna har vi dessutom utvecklat komfortsittsystemet ergomedic plus. Det passar utmärkt till barn med sittproblematik. Systemet består av fyra samverkande delar; sits, rygg, armstöd och nackstöd. Sitsen har mycket form, kombinerad med rätt mjukhet, just för att för att stabiliteten och komforten ska vara optimal.

Det höga ryggstödet nedre del är format så att man kan sitta med bäckenstöd även om även om ryggstödet är vinklat bakåt. Det finns även höga ryggplattor utrustade med förlängd sidokil på var sida för extra god komfort och positionering (se vår broschyr "Ergonomiska sittsystem").

”

Barn med funktionsnedsättningar får möjlighet att sitta aktivt vid exempelvis en skolbänk eller ett bord. Tack vare att stolen är moduluppbyggd är den enkel att anpassa då barnet växer.

Valfrihet

Till REAL 9000 PLUS BARN MANUELL/EL för barn kan man välja mellan olika många typer av sits- och ryggvinklingar, alternativa sitsstorlekar, samt en stor mängd funktionella tillbehör. Se vidare på sid 5-6 och i vår tillbehörsbroschyr.

PLUS-stativ 43 BARN

Det lilla smidiga plus-stativet tillåter enkel förflyttning av stolen även i trånga utrymmen. plus-stativet kombineras med det nya plus-armstödet. Nya Medic benstöd med smalare fotplattor finns som tillbehör.

Handreglage

För att lätt kunna reglera stolens funktioner har vi utrustat REAL 9000 PLUS BARN MANUELL/EL med ergonomiskt utformade handreglage. Dessa

är lättåtkomliga och enkla att greppa (kan även monteras bakåt för vårdarmanövrering).

Reglagen är även märkta med symbol för avsedd funktion.

Ny mekanism för sitsvinkling

Vår nya patenterade mekanism för sitsvinkling har utökad intervall (+15/-23°) och är ställbar i tre olika lägen (se bild nr 7 på sid 6). Detta tillval passar till alla våra sitsar och sitsvinklingar. Med ett enkelt handgrepp kan du ändra mellan de olika lägena.

Du har även valfrihet att välja om armstöden ska följa med vinklingen eller inte. På den extraförstärkta mekanismen finns inbyggt benstödsfäste.



REAL® 9000 PLUS BARN

Vi har barnasinnen kvar!



Hos Mercado skräddarsys stolen efter barnets unika behov.

Ett system där barnets **UNIKA** behov bestämmer **utförandet**

SITTPLATTA
I olika
storlekar och
material.



**SITS-
VINKLING**
(+15 till -8°)
El, vev eller
gas .



**RYGGPLATTA
& MEKANISM**
Välj önskat
utförande.



SITTHÖJD
EL eller
MANUELL.



REGLAGE
Välj utförande
och placering.




PLUS-STATIV
I olika
varianter.




HJUL
För olika golv
och i flera
storlekar.




KLÄDSEL
Finns i plysch,
vävt tyg och
konstläder.


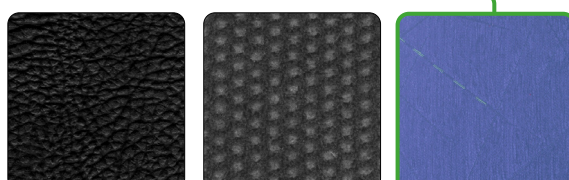




TILLBEHÖR
Valfrihet med
stort utbud.

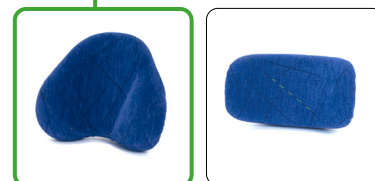

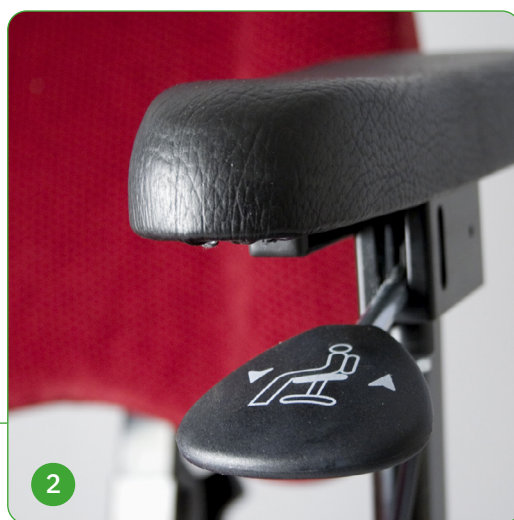

DETALJER 9000 PLUS BARN

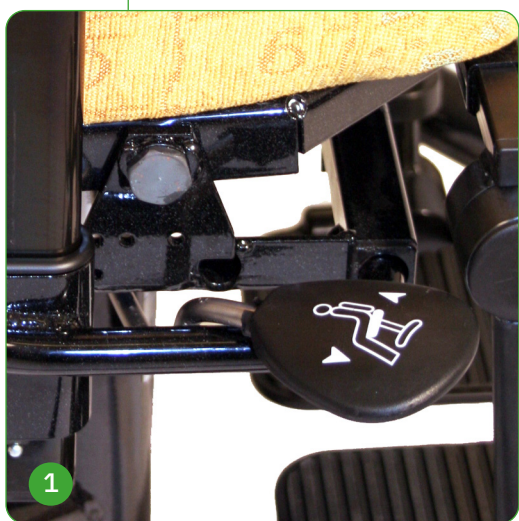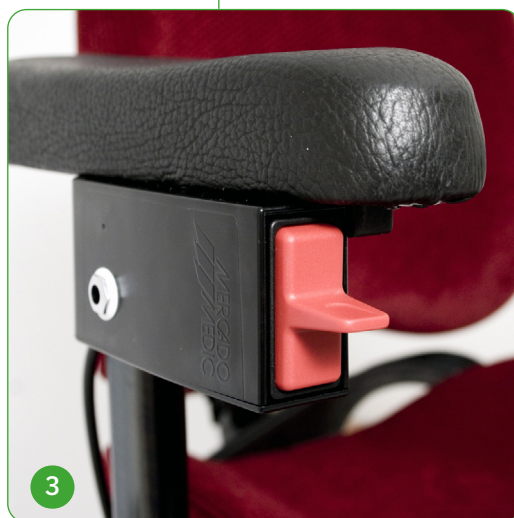

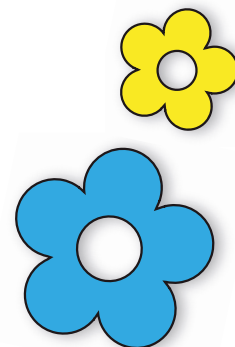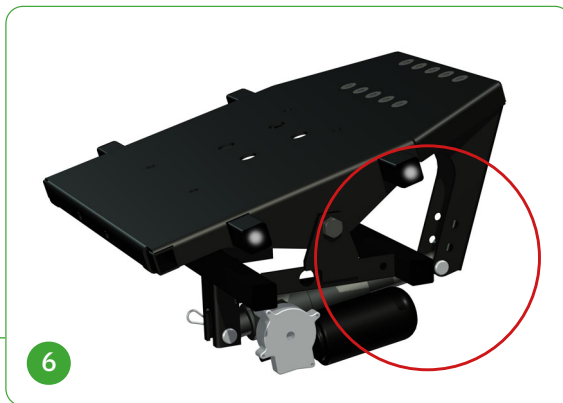

- 1 Paddelreglage PLUS för höj/sänk, vid sits (manuell stol).
- 2 Paddelreglage höj/sänk PLUS (alt. gasvinkling) vid armstöd (manuell stol).
- 3 Elreglage PLUS för höj/sänk vid armstöd (El-stol).
- 4 PLUS-stativ 43 MINI (43 x 48 cm). PLUS-stativ 43 BARN (43 x 53 cm).
- 5 Höj-, vinkel- och sidojusterbara sidostöd PLUS.
- 6 Ställbart förstärkt sittkryss 9000 BARN, +15 /-23. Ställbart i tre lägen (tillval).
- 7 Benstöd MINI MEDIC, med delad fotplatta (alt. hel fotplatta).
- 8 Sittsystemet ERGOMEDIC PLUS (tillval).
- 9 Benstöd mobil (BARN, MINI).
- 10 Dubbel hög MEDIC ryggstödsmechanism (tillval).
- 11 Körhandtag Optimal.
- 12 Körbygel PLUS.

REAL® 9000 PLUS BARN

systemöversikt

AB	MODELL	PLUS-stativ barn 43x53 cm (brxdj)
93	REAL 9000 PLUS Barnstol Manuell	Med PLUS-stativ 43. Manuell Fixlyftomat.
94	REAL 9000 PLUS Barnstol EL	Med PLUS-stativ 43. Elektrisk Fixlyftomat.

C	SITSTILT	
0	Utan sitstilt	Ej vinkelställbar (ej sits för 29x32 cm).
2	Vevreglerad sitstilt*	Vevreglage +15° / -8°.
3	Gasfjäder, reglage vid sits*	Gasfjäder +15° / -8°.
4	Gasfjäder, reglage på armstöd*	Gasfjäder +15° / -8°. Reglage på armst.
5	Elreglerad sitstilt (EL)*	Eldriven +15° / -8°. För elektrisk stol.
6	Förberedd för sitstilt*	Fast stag.

*Förstärkt ställbart sittkryss kan monteras.

D	LÅG RYGG	
0	Standard ryggmekanism	Inställning av höjd, vinkel och djup.
1	Medic ryggmekanism	Utökad djupledsinställning.
2	Comfort ryggmekanism	Gasfjäderreglerad inställning*.
3	Elreglerad ryggmekanism (EL)	Elektrisk inställning. För elektrisk stol*.

* Minsta sitsdjup 43 cm.

	HÖG RYGG	
5	Standard ryggmekanism	Inställning av höjd, vinkel och djup.
6	Medic ryggmekanism**	Utökad djupledsjustering.
7	Comfort ryggmekanism	Gasfjäderreglerad inställning*.
8	Elreglerad ryggmekanism (EL)	Elektrisk inställning. För elektrisk stol*.

** Dubbel Hög Medic kan monteras.

* Minsta sitsdjup 43 cm.

E	HJUL	
0	Standard hjul, XL 100 mm	För alla typer av underlag.
2	Extra lätttrullat hjul, SL 100 mm	Hjul med smal hjulbana för hårt underlag.
3	Extra brett lätttrullat hjul, BXL 100 mm	XL-hjul med bred hjulbana. Fler alt. finns (125, 150 mm)

F	SITTHÖJD*	Samtliga intervall går att justera +6cm/-2cm.
0	Standard sitthöjd	Manuell 40 - 60 cm. Elektrisk 43 - 71 cm.
1	Låg sitthöjd	Manuell 32 - 46 cm. Elektrisk 36 - 56 cm.

G	SITS	(bredd x djup)	Tillhörande ryggar (bxh):	Armstöd:
5	Barn (7-12 år)	36 x 39 cm	Låg 30x26 cm, hög 30x34 cm.	30 cm.
6	Barn (5-7 år)	33 x 35 cm	Låg 27x22 cm, hög 27x32 cm.	25 cm.
7	Junior (13-16 år)	36 x 43 cm	Låg 30x26 cm, hög 30x34 cm.	30 cm.
8	Mini (3-5 år)*	29 x 32 cm	Låg 23x20 cm, hög 27x23 cm.	25 cm.

* PLUS-stativ barn "mini" 43x48 cm (brxdj)

H	ANVÄNDARENS VIKT	
0	55 - 75 kg	Manuell lyftomat
1	< 55 kg	Manuell lyftomat
3	0 - 75 kg	EL lyftomat Max brukarvikt 75 kg.

*Mätt utan sitstilt från golv till underkant sits, med sits i planläge.
Med sitstilt +1 cm. Med sitstilt "allvinkelsittkryss" + 2 cm.