


REAL-stolen har utbytbara komponenter, tillbehör och funktioner med inställningsmöjligheter för individuell anpassning. Stolen skall endast brukas av den person och för det ändamål för vilken den är avsedd för. Stolen är avsedd för inomhusbruk och skall ej utsättas för vatten, andra vätskor eller kemikalier. Ej heller hög värme eller långvarig och intensiv solbelysning eller annan strålning. Stolen får ej utrustas med andra tillbehör eller komponenter än vad som godkänts av Mercado Medic AB. Reparationer och andra tekniska åtgärder får endast utföras av personal auktoriserad av Mercado Medic AB. Läs noga igenom denna bruksanvisning innan stolen tas i bruk.


Ryggstöd

Det finns två typer av ryggmekanismer: Standard och Medic. Ryggen finns i lågt respektive högt utförande (illustrerade stolar har låg rygg). Alla ryggmekanismer har separata reglage för höjd (1) och vinkel (2). Lossa vredet, ställ in önskad höjd/vinkel och lås därefter vredet. Medicmodellen kan justeras i djupled med vredet (3). Vinkeln på själva ryggen justeras med vredet (4). **OBS!** Säkerställ att Medic ryggfällning justeras in i fästet så att fjädersnäppet låser och ryggfällningen ej kan dras ur.

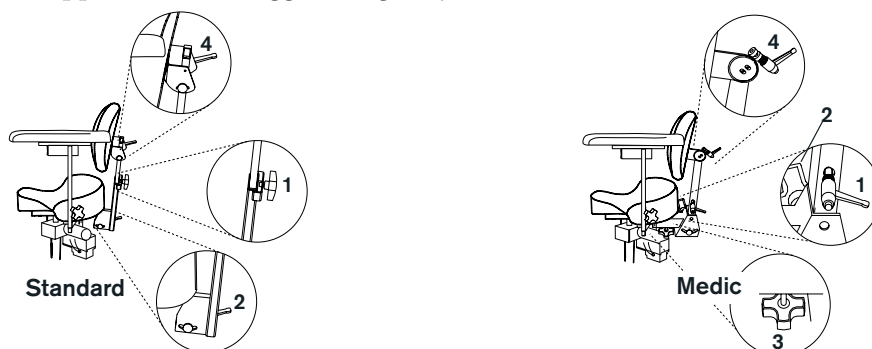


Armstöd

Armstöden kan justeras i höjdlid och i sidled på respektive armstödsbåge. Lossa vredet för justering av höjd (1) eller bredd (2), ställ in önskad bredd/höjd och lås därefter vredet.

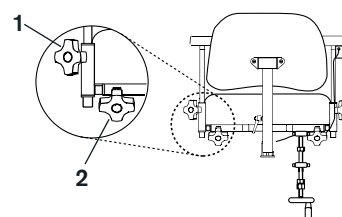


Sitthöjd

Höjden regleras med spaken (1) under armstödet ena sida (standard höger). Lyft spaken för att ändra höjdställningen. På EL-stol justeras sitthöjden med vippströmbrytaren (2). För att höja sitsen tryck på strömbrytarens övre del, för att sänka: tryck på strömbrytarens nedre del.

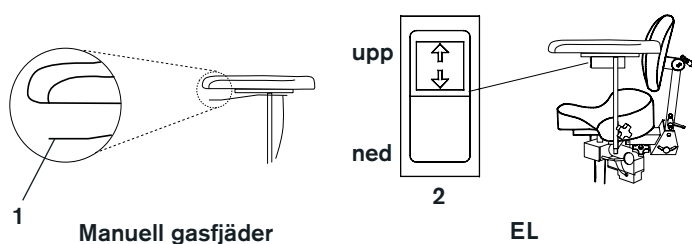


Rotationsfrigörare (tillval, ej REAL 9600 EL)

Stolar utrustade med rotationsfrigörare manövreras med vredet (1). Vrides medurs för att frikoppla, moturs för att låsa. OBS! Rotationen skall vara i låst läge när man sätter sig och reser sig.

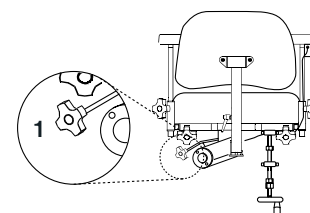


Handbroms

Bromsen regleras med spak (1). För att låsa: för spaken bakåt. Bromsspaken går att flytta till valfri sida av stolen. Stolen är utrustad med H-stativ och kan även bromsas med foten (2). OBS! Stolen skall alltid vara bromsad när man sätter sig och reser sig. Bromsen skall kontrolleras regelbundet. Vid slitage bytes bromsfot av gummi. Bromsfunktionen kan vara nedsatt på ojämnt underlag.

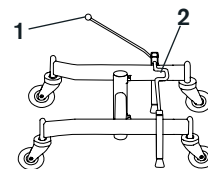

Sitstilt

Sitstiltan är vevreglerad. Den manövreras med veven (1). Intervalllet på sitstiltan kan ställas in med muttrarna (2).

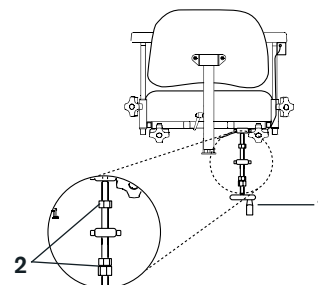

Rengöring, underhåll och laddning


Stolen skall torkas av och hållas ren från damm och smuts.

Klädsel tvättas med skumtvätt:

1. Ta bort lös smuts, smulor och liknande.
2. Applicera ett tunt skikt med skum, gnid skummet jämnt med en fuktig trasa.
3. Eftertorka med en ren och lätt fuktad trasa.
4. Dammsug väl när allt torkat.

Sits, ryggstöd och övriga stoppningsdetaljer är av funktionella skäl ej tillverkade i slutet material. Av hygieniska skäl skall vid byte av klädsel alltid även sittplatta och stoppningsmaterial bytas ut.

Fixlyftmaten skall regelbundet kontrolleras med avseende på damm och smuts: kör upp sittplattan till högsta läge. Gör rent med trasa. Vatten eller något lösningsmedel får ej användas. Smörj sedan in cylindern med ett tunt lager teflon- eller siliconbaserat smörjfett. Dessa kladdar ej som mineraloljebaserade fetter.

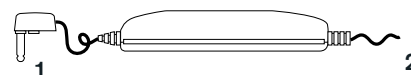

Laddning av batteriet (REAL 9600 EL) bör ske regelbundet, om möjligt en gång per dygn. Det är viktigt för batteriets livslängd att det aldrig blir helt urladdat. Anslut laddningsproppen (1) på laddaren till jacket på boxen där vippströmbrytaren för höjning och sänkning av stolen är placerad. Anslut därefter laddarens stickpropp (2) till ett vägguttag. Lysdioden på laddaren indikerar att laddning sker. När lysdioden ändrar färg ifrån gult till grönt är batteriet färdigladdat. Endast laddningsaggregat avsedda för REAL-stolen får användas. Stolen går att höja och sänka när laddning pågår. Detta gäller EL-stolar levererade från v. 11 2013 eller tidigare levererade uppdaterade stolar.

OBS!

Laddning av batteriet är särskilt viktigt på de stolar som har **elbroms** då funktionen kräver hög batterikapacitet för att fungera och inte förlora funktionen. Undvik detta genom att **ladda en gång per dygn.**

Om stolens elektriska funktion upphör att fungera är det förmodligen en säkring som gått. Kontrollera säkringarna i säkringshållarna som är placerade under sitsen på sladden mellan batteri och ställdon. Byt trasig säkring mot ny 16 A säkring. Nödvändiga verktyg, fett, med mera, för skötsel av stolen kan beställas från Mercado Medic AB.