



Stolen på bilderna 1-4 är en REAL 9000. Bild 5 visar en REAL 9000 PLUS. Bild 6 visar en REAL 6100.

NYTT TILTBAART SITTKRYSS

SITTKRYSS 6100/9000 +15°/-23° – NY STÄLLBAR MEKANISM FÖR SITSTILT

Vår nya patenterade mekanism för sitstilt har utökad intervall (+15°/-23°) och är ställbar i tre olika lägen (se punkt 1-3 nedan). Detta tillval passar till alla våra sitsar och sitstiltar. Med ett enkelt handgrepp kan du ändra mellan de olika lägena. Du har även valfrihet att välja om armstöden ska följa med sitstiltens eller inte. På den extraförstärkta mekanismen finns inbyggt benstödsfäste.

Bild 1,2 och 3 visas med standardsittplatta. Specialsitsar med inbyggt tråkil kommer successivt att utgå.

OBS! Sittkrysset medför att sitthöjdsintervallet höjs. Kontakta Mercado för mer information.

Du kan inom intervallet 15°/-23° välja 3 olika lägen.

- 1 Fram 15°, bak 8° - Standard sitstilt
- 2 Fram 8°, bak 15° - Omvänd sitstilt
- 3 Fram 0°, bak 23° - All sitstilt bakåt

OBS! Om du väljer all sitstilt bakåt på REAL 9000 / REAL 6100 **SKALL** stolen utrustas med stativförlängare bakåt. Även vid **vevreglerad sitstilt**, då stoppmuttern justerar intervallet mer än 15° bakåt, krävs stativförlängare.

Artikelnummer och benämning för REAL 9000

803070 Sittkryss 9000 Vs 15°/-23°
Överdel Br40-54 Vuxen.

803071 Sittkryss 9000 Vs 15°/-23°
Överdel Br36-40 Barn.

- 4 800821 Stativförlängare REAL 9000 X-stativ Par
- 800822 Stativförlängare REAL 9000 H-stativ Par

Artikelnummer och benämning REAL 6100

803072 Sittkryss 6100 Vs 15°/-23°
Överdel Br40-54 Vuxen.

803073 Sittkryss 6100 Vs 15°/-23°
Överdel Br36-40 Barn.

- 5 802871 Stativförlängare REAL 9000 PLUS Bak, Par
- 6 600283 Stativförlängare REAL 6100 Par



Mercado Medic AB
Tryffelslingan 14
181 57 Lidingö

Telefon & Fax
Tel 08 555 143 00
Fax 08 555 143 99

E-post & Internet
E-post info@mercado.se
Internet www.mercado.se