

Amputationsstöd

REAL 9000 PLUS, REAL 6100 PLUS

Artikelnr: 800747

Ändrad: 1701

Giltig från: 9606

Artikel

Amputationsstödsfäste Hö+Vä
 Amputations Mek H eller V
 Amputationsstöd kudde 25x21
 Amputationsstödsmekanism u fäste o stoppdetalj
XX färgkoder finns i prislisan och i utprovningsprotokollet.

Art.nr.

800786
 AS13
 AS10XX
 800827

Nödvändiga verktyg

Insexnyckel 6 mm
 Ringnyckel 13 mm

Utförande

Montera fästet för amputationsstöd(1) med medföljande skruv på sittkrysets framsida. Observera att om stolen är vinkelställbar monteras fästet i sittkrysets övre del. Lås med låsmutter. Brickor skall användas på båda sidor. Amputationsstödet(2) monteras i öppningarna(3) och låses med skruvar(4). Justera amputationsstödet i höjd(5) och vinkel(6) så att amputationsstödsudden ej kommer ovanför sittplattan och i en vinkel som ej ger sträckning i knäleden.

