

# Armstödsplatta

REAL 9000 PLUS, REAL 6100 PLUS, REAL 2000

Artikelnr: 803308

Ändrad: 1701

Giltig från: 0601

Artikel	Art.nr.
Armstöd platta ErgoMedic	AR10xxx
Armstöd platta ErgoMedic Mini	AR11xxx
Armstöd platta ErgoMedic f fällbart	AR15xxx
Armstöd platta ErgoMedic Plus	AR20xxx
Armstöd platta Mobil	AR30xxx
Armstöd platta Mobil 9000 Borråd	AR31xxx
Armstöd platta Hemiplegi 45x12cm	AR4060xx
Armstöd platta Comfort	AR50xxx
Armstöd platta extra soft	AR51xxx
K6S M6x25 Svartkromaterad Möbelskruv M6x25	802039

xx: avgör storlek(25-40cm) eller sida(ErgoMedic PLUS)

xx: avgör färg, färgkoder finns i prislisan och i utprovingsprotokollet.

## Nödvändiga verktyg

T-nyckel 5mm (Mercado-nyckeln)

800897

## Instruktioner

För att montera på en ny armstödsplatta, skruva loss skruv på undersidan av armstödsplattan med Mercadonyckeln. Montera därefter på den nya armstödsplattan och drag åt skruv.

