



HANDBROMSSPAKAR

BD1020



BD1010



BD1030



BD1040



ART. NR.

BESKRIVNING

BD1020 25 cm med låsskruv

BD1010 35 cm

BD1030 45 cm

BD1040 55 cm

PASSAR TILL FÖLJANDE MODELLER

REAL 9000P	Arbetsstol REAL 9000 PLUS VUXEN MANUELL max 140 kg
REAL 9100P	Arbetsstol REAL 9000 PLUS VUXEN EL max 150 kg
REAL 9300P	Arbetsstol REAL 9000 PLUS BARN MANUELL max 75 kg
REAL 9300PM	Arbetsstol REAL 9000 PLUS MINI MANUELL max 50 kg
REAL 9400P	Arbetsstol REAL 9000 PLUS BARN EL max 75 kg
REAL 9400PM	Arbetsstol REAL 9000 PLUS MINI EL max 50 kg
REAL 9700P	Arbetsstol REAL 9000 PLUS COXIT MANUELL max 140 kg
REAL 9800P	Arbetsstol REAL 9000 PLUS COXIT EL max 150 kg

BDX

DOK.BDX.1404

2014.04.03



BRUKSANVISNING

Bromsa din stol genom att pressa handbromsspaken framåt.
Har ditt stativ omvänd broms (gäller 48-stativet) eller är av typen 43x53 / 43x48 så bromsas det genom att dra handbromsspaken bakåt istället.

MONTERINGSANVISNING

1. Längst bak på stativets sidor hittar du ett handbromsspaksfäste på vardera sida.
2. Tag din handbromsspak och håll den i kulan. Placera därefter den smalnande nedre delen i handbromsspaksfästet.

Handbromsspaksfästena går även att justera i längd vid behov;

3. Lossa skruven som låser handbromsspaksfästet.
4. Drag nu ut eller skjut in ditt handbromsspaksfäste till önskad bredd.
5. Fäst ditt handbromsspaksfäste med hjälp av skruven du lossade på i steg 1.

1



2



3



4



5



forts. MONTERINGSANVISNING

Handbromsspaksfästet finns i två modeller – standardmodellen med två låslägen (802799) samt en modell med utökad breddjustering med sju låslägen (802800).



802799



802800

Handbromsspakarna har även utbytbara kulor för ökad greppvänlighet. Kulorna kommer i fem modeller;

Liten kula, röd, 35 mm (LB1020)

Stor kula, röd, 50 mm (LB1030)

Liten kula, svart, 35 mm (LB1000)

Stor kula, svart, 50 mm (LB1010)

Liten kula, gummi, svart, 40 mm (LB1040)



LB1020



LB1030



LB1000



LB1010



LB1040

DESTRUKTIONSANVISNING

HANDBROMSSPAKAR

- sorteras som *stål*

KULA

- sorteras som *brännbart*



Mercado Medic AB
Tryffelsgatan 14
181 57 Lidingö

Telefon & Fax
Tel 08 555 143 00
Fax 08 555 143 99

Email & Internet
Email info@mercado.se
Internet www.mercado.se