

Benstöd PLUS

REAL 9000 PLUS

Artikelnr: 802896
Ändrad: 1506
Giltig från: 070601

Artikel	Art.nr.
Benstöd PLUS delat Barn	802872
Benstöd PLUS delat Vuxen	802873
Nödvändiga verktyg	
T-nyckel 5 mm insexverktyg (Mercadonyckeln)	800897

Instruktioner

Montera det fyrkantiga infästningsröret (1) i benstödsfästet under sitsens framkant. Justera till rätt bredd i sidled och drag åt skruven i benstödsfästet med T-nyckeln.

Benstödet vinkel ställs in med hjälp av skruven (2).

Justera benstödet längd med skruven (3) så att låret vilar mot sitsen, ställ in vinkeln på fotplattan med låsskruven (4) så att foten får avlastning mot hela fotplattan utan att glida av.

Bilden visar höger benstöd.

OBS! Glöm inte att dra åt skruvar hårt efter injustering!

