

Bricka

REAL 9000 PLUS, REAL 6100 PLUS

Artikelnr: 802122

Ändrad: 1701

Giltig från: 0706

Artikel

Bricka 45x30 kpl Real 6100/Real 9000

Art.nr.

TA1020

Nödvändiga verktyg

5 mm insexnyckel (Mercadonyckeln)

800897

Utförande

Montera adaptorn(1) på vänster eller höger armstödsbåge (2). **OBS! De ovala hålen ska vara placerade ut från stolen.** Fäst armstödsbågen(2) i sittkrysset. Ställ in rätt armstödsbredd och lås fast. Lås därefter fast adaptorn i rätt läge genom att dra åt skruvarna(3) med T-nyckeln. Brickans djupledsläge justeras med hjälp av ratten(4). Brickan kan höjas/sänkas och svängas med vred(5). Under brickan finns vred(6) som låser brickans rotation. Bricka går att montera på höger eller vänster sida. Se till att rattar och vred är låsta när brickan belastas.

