



BYTE AV DRIVENHET



PASSAR TILL FÖLJANDE MODELLER

REAL 6160PB	Elektrisk rullstol inomhusbruk PLUS BARN
REAL 6160PV	Elektrisk rullstol inomhusbruk PLUS VUXEN

BYTE AV DRIVENHET

DELMOMENT I

Riktningar refereras från att man sitter i stolen.
Du behöver: *insexnyckelsats*.

1. Skruva loss rattarna (A) och lossa lätt på ratt (B).



2. Resultatet ska se ut som på bilden nedan.



3. Lyft upp och drag den bakre chassikåpan utåt/bakåt.



4. Resultatet ska se ut som på bilden nedan.



5. Koppla loss givaren (A) och lyft av den främre chassikåpan (B).



6. Koppla loss motorkabeln (A) ur elektronikboxen.



7. Vänd på elrullstolen så att du kommer åt bromsfrigöraren (A) och drivdäcket på den sida du ska byta drivmotor.



8. Lägg klossar (A) som är minst 4,5 cm höga under frambenets infästning.




9. Skruva loss skruvarna (A) med insexnyckel med plan skalle.



10. Resultatet ska se ut som på bilden nedan.




11. Lyft av drivdäcket.

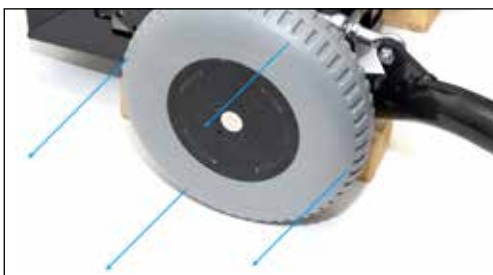

12. Resultatet ska se ut som på bilden nedan.




13. Rotera elrullstolen medurs 90 grader så att du kommer åt bromsfrigöraren framifrån.

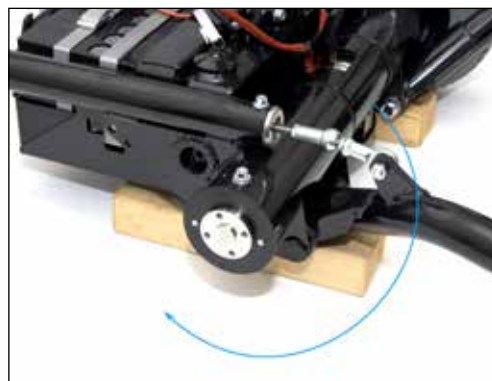

14. Resultatet ska se ut som på bilden nedan.




15. Skjut fram bromsfrigöraren (A).

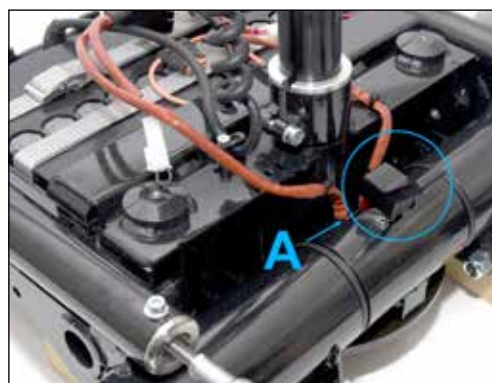

16. Drag loss bromsfrigöraren uppåt (A).



17. Skjut bak de två spakarna (A).

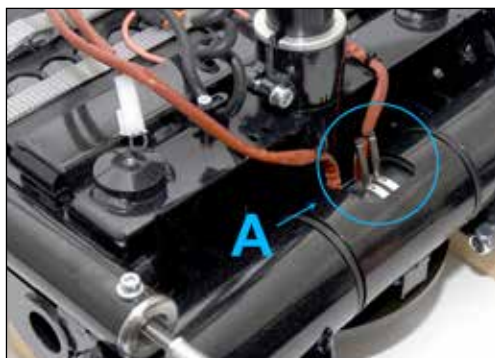

18. Skruva loss spaken tillhörande drivmotorn du önskar demontera (A).



19. Skruva loss skruven (A).



20. Drag ur drivmotorn genom att dra i den svarta plåtringen vid motornavet.



21. Kontrollera att hålet (B) är placerat snett ned åt höger när hålet (A) är riktat rakt uppåt. Lossa de två stoppskruvarna (D) vid spaken (C) så att den yttre ringen är fri från den inre ringen, spaken ska löpa mellan lägena enligt bilderna nedan.



22. Ställ in drivmotorn så att spaken (C) är riktad rakt uppåt och hålen (B) och (A) är positionerade som på bilden nedan.



23. Skruva åt skruven till vänster om spaken (A) om du ställer in höger drivmotor.



24. Skruva åt skruven till höger om spaken (A) om du ställer in vänster drivmotor.



25. Skruva loss spaken (A).



DELMOMENT III - MONTERING AV DRIVMOTOR

26. Skjut in drivmotorn tills dess du får tag i kontakten (A), drag upp kabeln (A) samtidigt som du försiktigt skjuter in drivmotorn hela vägen.




27. Motorn är på plats. Placera distansbrickan (A) så att urfasningen följer radien på röret och spåret i brickan ligger parallellt med röret.




28. Placera nordlockbrickan (A) ovanpå distansbrickan.



29. Montera skruven (A) och drag åt med 9,5 Nm moment. Skruva sedan fast spaken (B).

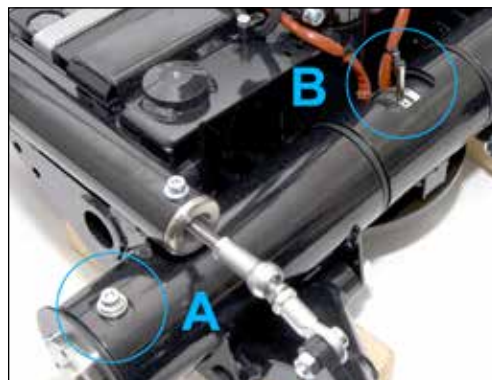


30. Lossa den främre stoppskruven (A) så att den yttre ringen är fri dvs. att spaken är rörlig.

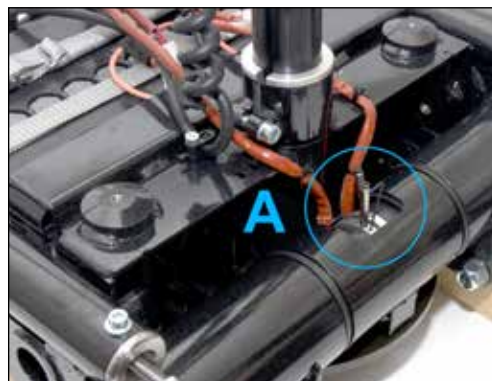

31. Skjut på bromsfrigöraren (A) på spakarna, för sedan bromsfrigöraren bakåt emot klämförbandet för ellyftmaten.



32. Där efter dras den främre stoppskruven fast (A).

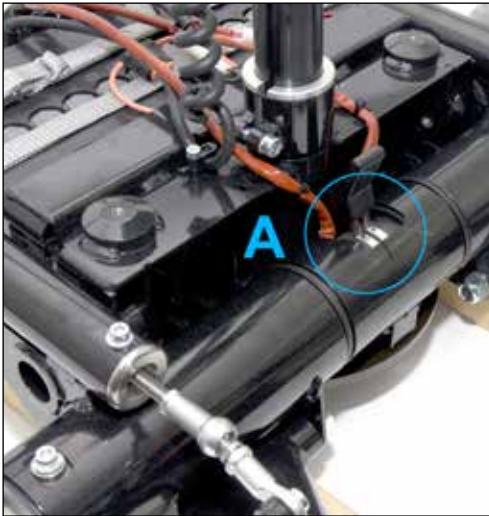


33. Skjut fram bromsfrigöraren (A).




34. Drag loss bromsfrigöraren (A).



35. Drag därefter fast den bakre stoppskruven (A).

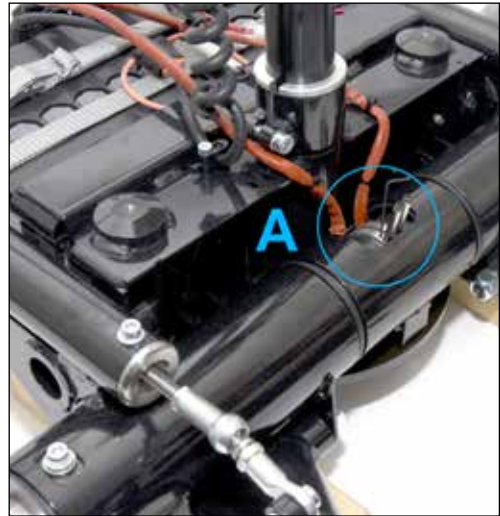

36. Skjut på bromsfrigöraren (A) på spakarna, för sedan bromsfrigöraren bakåt emot klämförbandet för ellyftmaten.

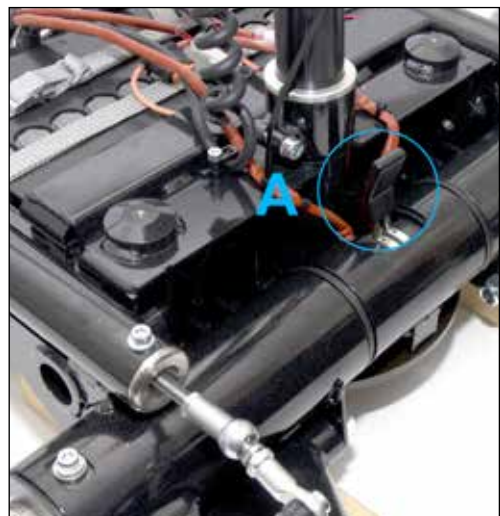

37. Fäst motorkabeln i chassit med hjälp av ett buntband draget genom hålen (A).



38. Sätt tillbaka den främre chassikåpan.
Tryck ned kabelgenomföringen (A).




39. Lyft på drivdäcket.



40. Skruva i och drag åt skruvarna (A) med insetnyckel med plan skalle.



41. Plugga in motorkabel (A) i elektronikboxen samt montera buntbanden enligt (B).

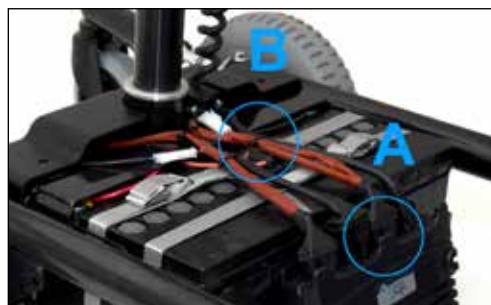

42. Placera den bakre chassikåpan under den främre och pressa ned den.



43. Skruva åt rattarna (A) medan du applicerar ett lätt tryck på chassit (B) snett nedåt och framåt.



44. Drag åt ratt (A) medans du applicerar ett lätt tryck på kåpan (B) snett nedåt och framåt.
Monteringen är klar. 🚩



BESÖK VÅR WEBGUIDE/-SHOP!
SHOP.MERCADO.SE



Mercado Medic AB
Tryffelslingan 14
181 57 Lidingö

Telefon & Fax
Tel 08 555 143 00
Fax 08 555 143 99

Email & Internet
Email info@mercado.se
Internet www.mercado.se