

## Artiklar

Fotring 1/4 uppfällbar 9200 f stativförlängare framåt  
Stativförlängare X-stativ M12, PAR

## Art.nr.

802045  
800821

## Nödvändiga verktyg

Insexnyckel 6 mm  
Ringnyckel 13 mm  
Ringnyckel 19 mm

## Utförande

För att montera stativförlängarna skruvar du loss framhjulen från stativet (1). För att göra detta använder du enklast en fast ringnyckel med nyckelvidden 19 mm.

Montera stativförlängarna genom att dra M12 skruven (2) hårt. Montera sedan hjulen på stativförlängaren. Skruvarna drages med 80-90 Nm och limmas med Loctite 243. Stativförlängarna ska peka rakt framåt med fästblecken på utsidan av benen.

Demontera fotringen och fäst dess bläck med stativförlängarens bläck enligt bild (3), drag åt hårt. Montera fast fotringen igen med dess distanser. Dra inte åt allt för hårt och testa därefter att den enkelt går att vinkla upp och ned. Fotringen ska i nedfällt läge vila på stolens hjulbygels ovansida.

