

Grenkil/Knädelare

REAL 9000 PLUS, REAL 6100 PLUS

Artikelnr: 802219

Ändrad: 1701

Giltig från: 9606

Artikel

Grenkil fäste 115 mm kpl u stoppdetalj
 Grenkil fäste 175 mm kpl u stoppdetalj
 Grenkil fäste 57 mm kpl u stoppdetalj
 Grenkil/knädelarmekanism kpl u stoppdetalj
 Grenkil Liten 11x11
 Grenkil Stor 15x15
 XX-färgkoder finns i prislistan och i utprovningsprotokollet

Art.nr.

LD16
 LD17
 LD15
 LD25
 LD10XX
 LD20XX

Nödvändiga verktyg

T-Nyckel 5 mm insexverktyg (Mercadonyckeln)

800897

Utförande

Montera fästet (1) i sittkrysets framkant och fixera med skruvarna (2). Skjut in fästet och lås med låsskruvarna (3).
 Montera Grenkil eller Knädelare enligt bilden(A). Justera i höjddled och lås med skruv (4), justera i djupled och lås med skruv (3).

