

### Artikelnummer

LD16	Grenkil fäste 115 mm kpl u stoppdetalj
LD17	Grenkil fäste 175 mm kpl u stoppdetalj
LD15	Grenkil fäste 57 mm kpl u stoppdetalj
LD25	Grenkil/knädelarmekanism kpl u stoppdetalj
LD10XX	Grenkil Liten 11x11
LD20XX	Grenkil Stor 15x15

**XX-färgkoder finns i prislistan och i utprovingsprotokollet.**

### Innehåll

2 st skruv MC6S M8

2 st skruv MLC6S M6

### Nödvändiga verktyg

800897 T-Nyckel 5 mm insexverktyg (Mercadonyckeln)

### Utförande

Montera fästet (1) i sittkrysets framkant och fixera med skruvarna (2) samt de två främre av skruvarna som håller sittplattan på plats.

Skjut in det enkla magstödsfästet (dubbelt om både magstöd och grenkil används), lås med låsskruvarna (3).

Montera Grenkil, Magstöd eller båda enligt bilden.

Justera i höjddled och lås med skruv (4), justera i djupled och lås med skruv (3).

