

Bromsspaksfästen

REAL 9000 PLUS

Artikelnr: 803022

Ändrad: 1701

Giltig från: 0706

Artikel

Bromsspaksfäste för PLUS-stativ, justerbart (två lägen)

Art.nr.

802799

Nödvändiga verktyg

Insexnyckel 6 mm

Utförande

Lossa skruven (1) med 6 mm insexnyckel. Justera bromsspaksfästet till valfri bredd. Drag åt.

Kontrollera funktionen med brukaren i stolen.

Bromsspaken skall justeras i bredd så att avståndet mellan bromsspak och armstöd aldrig understiger 25 mm under bromsspakens hela rörelse.

