

Hjulbyte länkhjul

REAL 9000 PLUS

Artikelnr: 803189

Ändrad: 1701

Giltig från: 0706

Artikel

Länkhjul 100 XL M12
Länkhjul 100 SL M12
Länkhjul 100 BXL M12
Länkhjul 125 mm
Länkhjul 150 mm

Art.nr.

801213
801144
803162
800904
800905

Nödvändiga verktyg

Ringnyckel 19 mm

Utförande

För att ta bort det gamla hjulet används fast ringnyckel 19 mm för att lossa på bulten (1).

Alternativt skruvas hjulet bort med två insexnycklar (5 mm), varefter den gamla bygeln skruvas loss med hjälp av till exempel en hylsnyckel.

Montera sedan det nya hjulet. Bultarna skall säkras med Loctite 243 och dras med 80-90 Nm

