

Artikelnummer

HB1010 Höftbälte S 51-71 cm inkl fästen och skruvar

HB1020 Höftbälte M 63-83 cm inkl fästen och skruvar

HB1030 Höftbälte L 83-103 cm inkl fästen och skruvar

Innehåll

1 st Höftbälte

2 st fästen

6 st skruvar

Nödvändiga verktyg

Stjärnskruvmejsel/Skruvdragare

Utförande

Skruva fast fästena (2) på båda sidor i de förborrade hålen som är placerade undertill i sitsens bakre hörn.

Fäst bältet (1) i fästena (2).

Spänn bältet med kardborrelåsningen först. Knäpp snäpplåsningsen sedan lagom längd uppnåtts och dra sedan åt remmen till snäpplåsningsen.

För övriga positioneringstillbehör se kombinationsavtal på www.mercado.se/sv/dokument