

Artikelnummer

803784 Nackstöd Mek. f Twin rygg u stoppdetalj

Nödvändiga verktyg

800897 T-nyckel 5 mm insexverktyg (Mercadonyckeln)

Utförande

Lossa på ryggmekanismens två skruvar (1). Montera fast nackstödsfästet i ryggmekanismen. Upprepa proceduren på ryggens andra mekanism. Skjut ned nackstödet i fästet. Justera så att nackstödet kommer bra i höjd och ger bra stöd i nacken.

Lås alla plastrattar och vred.

