


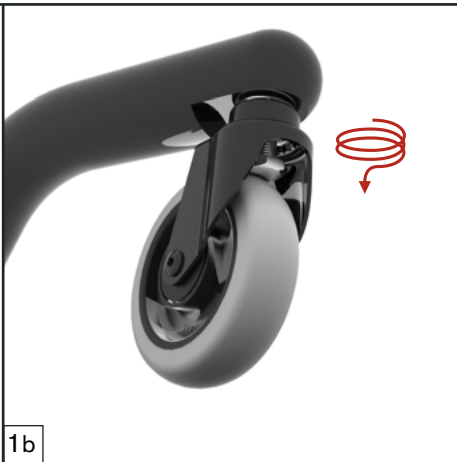
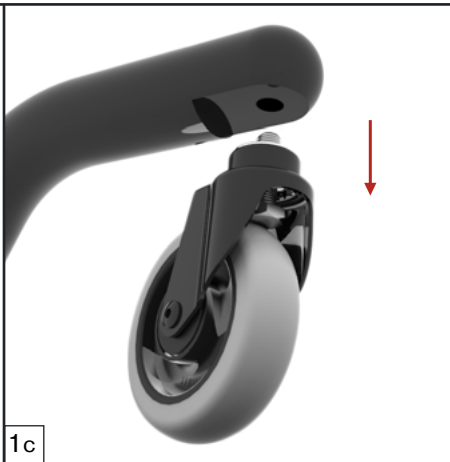
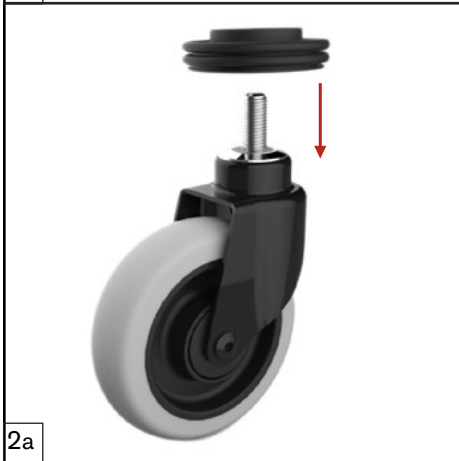
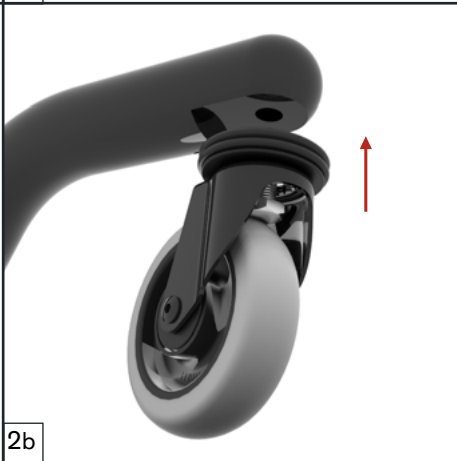


Påkörningsskydd

REAL 6100 PLUS

Artikelnr: 804460

Ändrad: 1506

Giltig från: 150601

Artikel	Art.nr.			
Påkörningsskydd 6100 PLUS kpl 4 st, kit	IP1020			
Nödvändiga verktyg				
Loctite 243 Gänglåsning Blocknyckel U/RING 19mm	800553			
Instruktioner				
<p>1a. Lokalisera sexkantskruven som håller länkhjulet på plats</p> <p>1b. Skruva loss länkhjulet genom att gänga ur skruven moturs</p> <p>1c. Separera länkhjulet ifrån chassit</p> <p>2a. Skjut på Påkörningsskyddet på länkhjulet</p> <p>2b. Applicera loctite och för sedan samman länkhjulet och chassit</p> <p>2c. Skruva fast länkhjulet medurs</p>				
 <p>1a</p>	 <p>1b</p>	 <p>1c</p>		
 <p>2a</p>	 <p>2b</p>	 <p>2c</p>		
	<p>Mercado Medic AB Tryffelslingan 14 181 57 Lidingö</p>	<p>Telefon & Fax Tel 08 555 143 00 Fax 08 555 143 99</p>	<p>Email & Internet Email info@mercado.se Internet www.mercado.se</p>	