




REAL PLUS

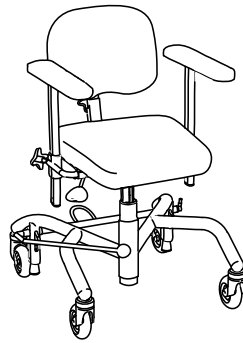


REAL PLUS KINDEREN/MINI

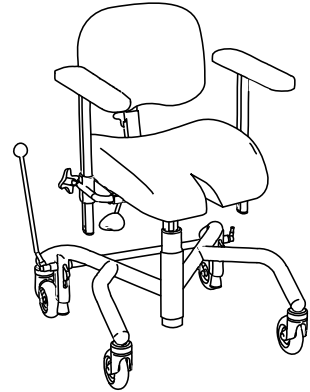


REAL PLUS COXIT

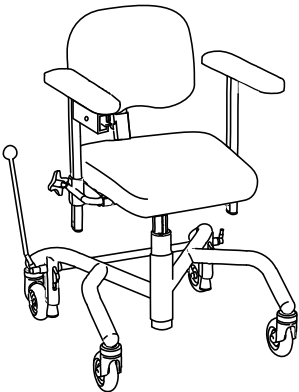

REAL PLUS EL

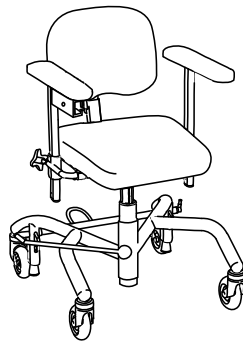

REAL PLUS KINDEREN/MINI EL

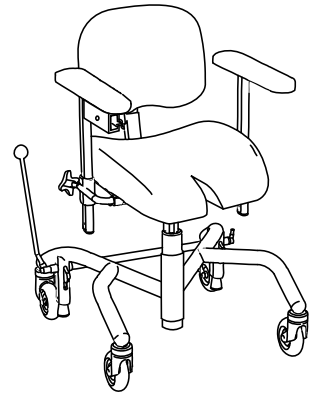

REAL PLUS COXIT EL

LEER UW REAL 9000 PLUS KENNEN

CONTROLEPUNTEN VOOR GEBRUIK

1. Zet de armsteunen op de juiste hoogte en vergrendel de knop voor de hoogteregeling.
2. Monteer de rugpaal op de juiste bevestiging en vergrendel de knop voor de hoogteregeling van de rugsteun.
3. Monteer de remhendel op de juiste bevestiging (aan de linker- of rechterkant). Geldt niet voor de elektrische rem.
4. Alle knoppen en hendels moeten zijn aangedraaid voordat u in de stoel gaat zitten.
5. De stoel moet altijd op de rem staan wanneer u gaat zitten of opstaat.
6. Om de elektrische functies te kunnen gebruiken, trekt u de rode transportbeveiliging uit de laadaansluiting (van toepassing op de elektrische stoel).
7. Laad de stoel voor het eerste gebruik op volgens de bijgevoegde instructie (van toepassing op de elektrische stoel).

BELANGRIJKE INFORMATIE EN KLASSERING

De REAL-stoel heeft verwisselbare onderdelen, accessoires en functies met instellingsmogelijkheden voor individuele aanpassing. De stoel dient alleen te worden gebruikt door de persoon en voor het doel waarvoor deze is bedoeld. De stoel is bedoeld voor gebruik binnenshuis en mag niet worden blootgesteld aan water, andere vloeistoffen of chemicaliën. De stoel mag ook niet worden blootgesteld aan extreme hitte of langdurige en intensieve zonneshijn of andere straling. De stoel mag alleen worden uitgerust met accessoires of onderdelen die door Mercado Medic AB zijn goedgekeurd. Reparaties en andere technische maatregelen mogen alleen worden uitgevoerd door personeel dat hiertoe door Mercado Medic AB is goedgekeurd. Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voordat de stoel in gebruik wordt genomen.

- REAL PLUS EL valt onder beschermingsklasse II, interne batterij.
- REAL PLUS EL valt onder beschermingstype B.
- REAL PLUS EL is getest door EMC en volgens EN 60601-1-1 en EN 60601-1-2 en dient daarom te worden gebruikt volgens onze gebruiks- en onderhoudsaanwijzing.
- De EMC-bijlage kan worden gedownload op <http://www.mercado.se/pdf/swe/3/emc.pdf>.
- De REAL PLUS EL kan worden gestoord door mobiele telefoons of andere radiofrequente communicatieapparatuur.
- Max. gebruikersgewicht: REAL PLUS 130 kg. REAL PLUS EL 130 kg.
- De stoel moet in de juiste verpakking op een pallet worden getransporteerd. Binnenshuis bewaren bij ten minste +10 °C.
- Alleen elektrische apparatuur van Mercado Medic AB mag worden gebruikt op de REAL PLUS EL.
- Let op! De elektrische functies van de REAL PLUS EL-stoelen mogen slechts 10% van de tijd worden gebruikt (max. 6 min/u), als deze grens wordt overschreden, kan de stoel defect raken.
- Dit symbool waarschuwt voor een beknellingsrisico.




REM


Let op! De stoel moet altijd op de rem staan wanneer u gaat zitten of opstaat. De rem moet regelmatig worden gecontroleerd. Bij slijtage moet de rubberen remvoet worden vervangen. De werking van de rem kan worden beperkt op een ongelijkmatige ondergrond.

ER ZIJN DRIE REMTYPES:


Remhendel, voetrem en elektrische rem.

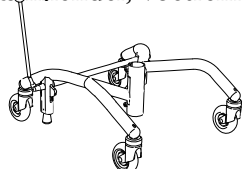

Handrem.

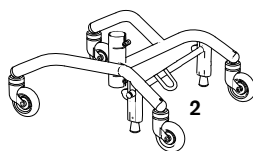

Voetrem.

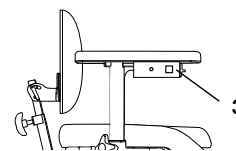

Elektrische rem (optioneel).


BEDIENING

1. Rem, PLUS-frame 48: breng hendel naar voren.
2. Rem, PLUS-frame 43: breng hendel naar voren, pedaal naar beneden.
3. Elektrische rem: druk op knop.


ZITHOOGTE/LIFTEN

ER ZIJN TWEE LIFTTYPES:

Met gasveer en elektrisch. Er is een standaard- en lage zithoogte beschikbaar. De bediening voor de gasveer kan onder de zitting of de armsteun worden geplaatst. De elektrische bediening wordt standaard onder de armsteun gemonteerd. Let op! Lichte personen hebben mogelijk hulp nodig bij het verhogen en verlagen van de ziteenheid met gasveer.

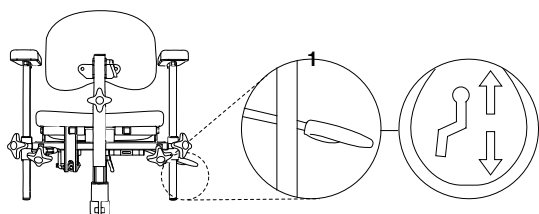


Bediening van gasveer onder de zitting.

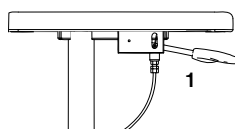

Bediening van gasveer onder de armsteun (optioneel).

BEDIENING

1. Zithoogte. Gasveer: breng de hendel omhoog.
2. Zithoogte. Elektrisch: breng de hendel omhoog/omlaag.

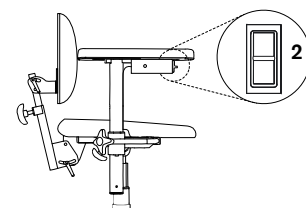


Elektrische bediening.*

* Elektrische bediening is optioneel verkrijgbaar met los kastje/joystick/afstandsbediening.


ZITTINGKANTELING (OPTIONEEL)

ER ZIJN DRIE TYPES ZITTINGKANTELING:


Met zwengel of gasveer, en elektrisch. De bediening voor de gasveer kan links achterop de zitting of onder de armsteun worden geplaatst. De elektrische bediening wordt standaard onder de armsteun gemonteerd. De standaardinterval voor de hoek is $+15^{\circ}/-8^{\circ}$.

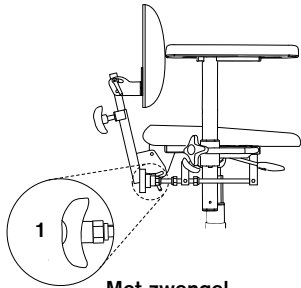


Met zwengel.

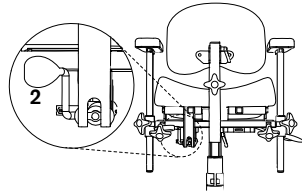

Bediening van gasveer onder de zitting.

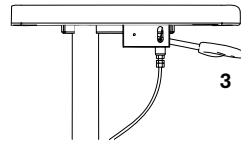

Bediening van gasveer onder de armsteun.

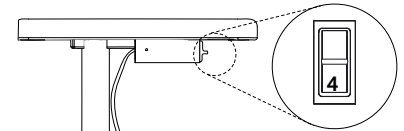

Elektrische bediening.


BEDIENING

1. Zittingkanteling. Met zwengel: draai aan de bediening.
2. Zittingkanteling. Met gasveer: breng de hendel naar achteren.
2. Zittingkanteling. Gasveer: breng de hendel omhoog.
4. Zittingkanteling. Elektrisch: breng de hendel omhoog/omlaag.


RUGMECHANISME

ER ZIJN VIER TYPES RUGMECHANISMEN:


Standaard, Medic, Comfort en Elektrisch. Ze zijn allemaal beschikbaar in een lage of hoge uitvoering (de afgebeelde stoelen hebben allemaal een lage rug). De hoogte, diepte en hoek kunnen op alle rugmechanismen afzonderlijk worden ingesteld. Het Medic-model heeft een vergrote diepte-instelling.

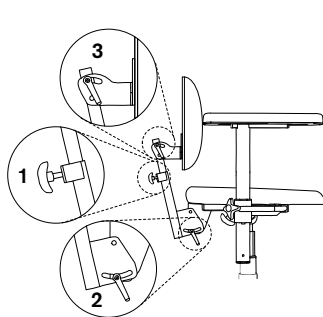


Standaard.

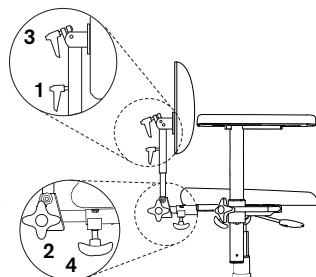

Medic (optioneel).

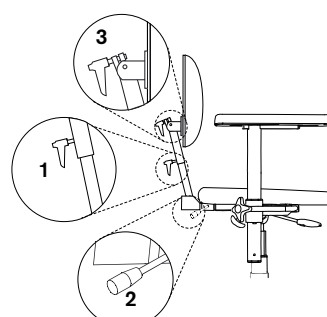

Comfort (optioneel).

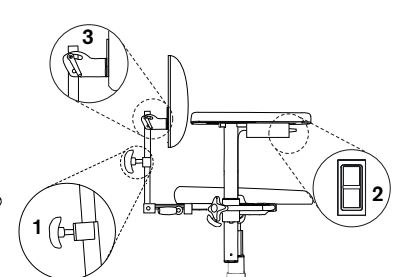

Elektrische bediening (optioneel).


BEDIENING

1. Hoogte.
2. Hoek van rugmechanisme.
3. Hoek van rugplaat.
4. Diepte.

ARMSTEUN

BEDIENING

1. Hoogteregeling.
2. Breedteregeling.
3. Kanteling.

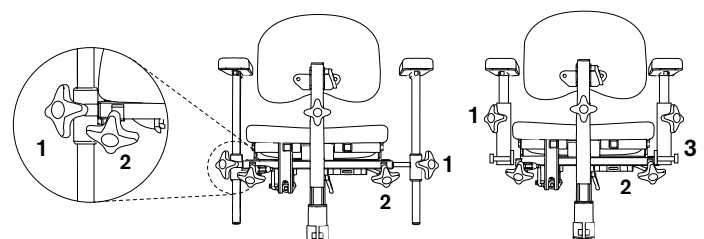

Standaard.


Inklapbare armsteunen (optioneel).

ROTATIEVRIJGEVING (OPTIONEEL)

Let op! De rotatie moet altijd zijn vergrendeld wanneer u gaat zitten of opstaat. Controleer of de vergrendeling is vastgeklikt.

BEDIENING

1. Met de klok meedraaien voor vrijgeven, tegen de klok in om te vergrendelen.

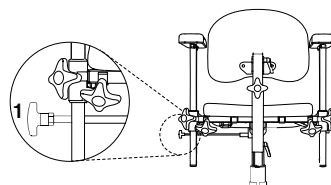


INSTELLEN VAN COXIT-DELEN

REAL PLUS COXIT/EL

De coxit-delen kunnen op twee manieren worden ingesteld. Op stoelen zonder zittingkanteling zit de bediening onder de voorzijde van de zitting. Op stoelen met zittingkanteling zit de bediening onder de achterzijde van de zitting.

BEDIENING

1. Losdraaien, de gewenste hoek instellen en vastdraaien.
2. Draai de bediening om de delen omlaag/omhoog te zetten.

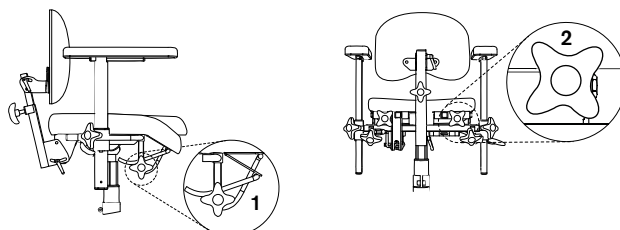

SCHOONMAKEN, ONDERHOUD EN OPLADEN

De stoel kan worden afgenomen om deze vrij te houden van stof en vuil. De bekleding kan worden gewassen met droog schuim. De zitting, rugsteun en overige gevulde onderdelen zijn uit praktische overwegingen niet vervaardigd van gesloten materiaal. Bij renovatie moeten de gevulde onderdelen uit hygiënische overwegingen worden vervangen. De elektrische liften moeten regelmatig worden gecontroleerd op stof, vuil en stabiliteit: Zet de zitplaat op de hoogste stand. Reinig met een doek. Gebruik geen water of schoonmaakmiddel. Smeer de cilinder vervolgens met een dunne laag smeermiddel op basis van teflon of siliconen.

We raden aan om de batterijlader Real 9000 Type 2240-12 V met artikelnummer 802289 te gebruiken voor het opladen van de stoel. Neem contact op met Mercado Medic BV voor schriftelijke toestemming als u een andere lader wilt gebruiken. Laad de batterij regelmatig op, indien mogelijk één keer per dag. Voor de levensduur van de batterij is het van belang dat deze nooit helemaal ontladend.



OPLADEN (VAN TOEPASSING OP DE ELEKTRISCHE STOEL)

Sluit de oplaadstekker van de lader aan op de oplaadaansluiting (1) op het kastje met de schakelaar voor het verhogen en verlagen van de stoel. Sluit de stekker van de lader vervolgens aan op een stopcontact. De led op de lader geeft aan dat er wordt opgeladen. De batterij is volledig

opgeladen wanneer de led verandert van oranje naar groen. De stoel kan worden verhoogd en verlaagd tijdens het opladen. Dit betreft elektrische stoelen verlost van week 11 2013 of eerder geleverde opgewaardeerde stoelen.

Let op! Het opladen van de batterij is vooral van belang op stoelen met elektrische rem, elektrische zittingkanteling en elektrische rug, aangezien voor deze functies een hoge batterijcapaciteit vereist is. Garandeer deze functionaliteit door de batterij een keer per dag op te laden. Zorg bij het verwisselen van de batterij (typeaanduiding: HP7-12 12 V 7,2 Ah) dat de rood gemarkeerde batterijkabel wordt aangesloten op de pluspool van de batterij en de minkabel op de minpool. Als de elektrische functie van de stoel niet meer werkt, is er waarschijnlijk een zekering uitgevallen. Controleer de zekeringen. Deze zijn geplaatst onder de zitting op het snoer tussen de batterij en de instelling. Vervang de defecte zekering door een nieuwe zekering van 25 A.

Houd rekening met het volgende wanneer u omgaat met batterijen: Sluit de batterij nooit kort. • Stel de batterij niet bloot aan krachtige stoten of open vuur. • Bij contact met de batterijzuur gedurende circa 30 min. spoelen met water. Raadpleeg een arts. • Leg de batterijen moeten correct worden ingezameld.

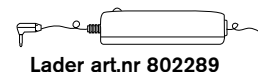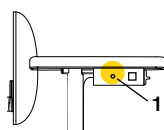

Lader art.nr 802289