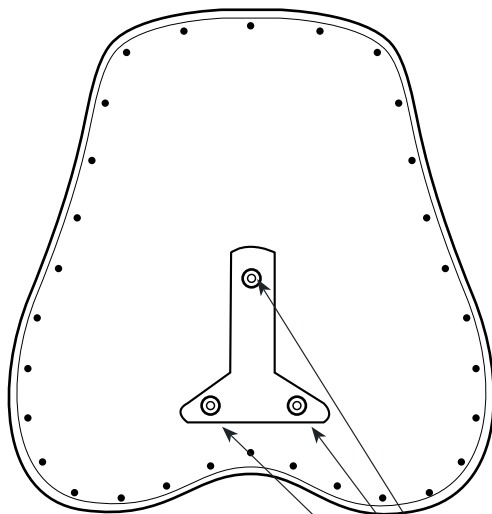
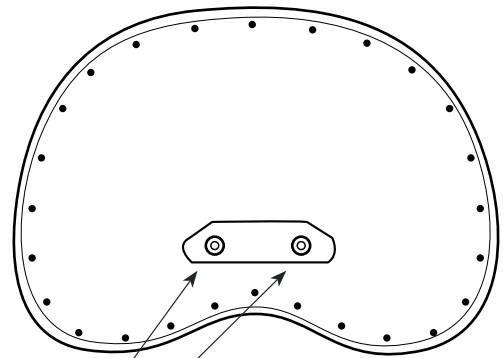


Nödvändiga verktyg

800897 T-nyckel 5 mm insexverktyg (Mercadonyckeln)

Utförande

För att montera på en ny rygg-/magplatta, skruva loss skruvarna (1) på baksidan av rygg-/magplattan (tre skruvar på hög ryggplatta respektive två skruvar på låg rygg-/magplatta) med Mercadonyckeln. Montera därefter på den nya rygg-/magplattan och skruva åt skruvarna igen.

Hög ryggplatta**Låg rygg-/magplatta**

1