




REAL® 9000 PLUS 24V



**SERVICEMANUAL FÖR BATTERIBYTE
REAL 9000 PLUS 24V**

Artikelnr 804428
Ändrad 150423
Giltig från 150101

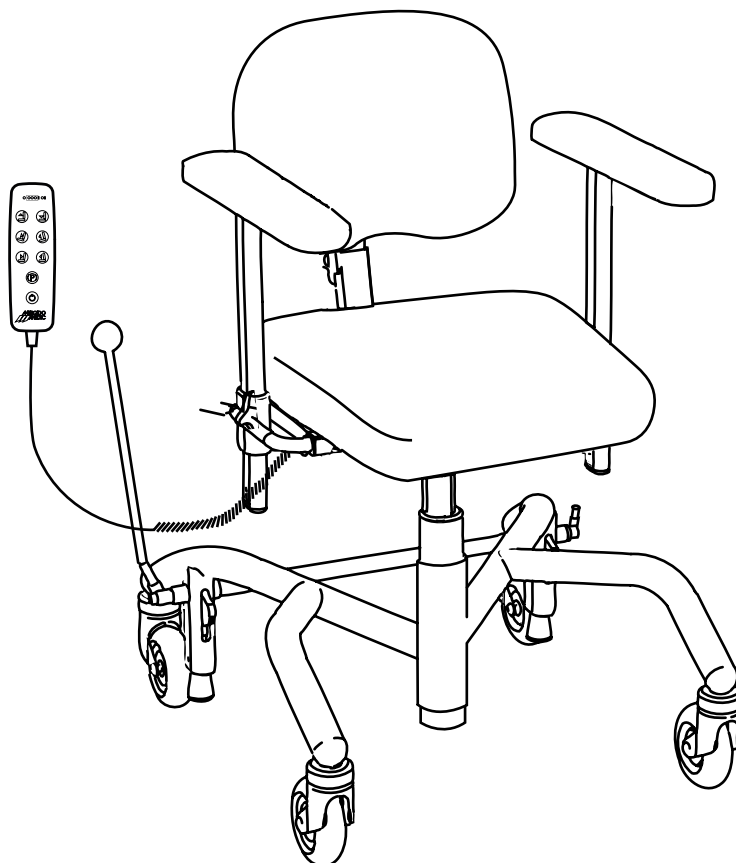

OBS!

TÄNK PÅ FÖLJANDE NÄR DU HANDSKAS MED BATTERIER:

- Kortslut aldrig batteriet.
- Utsätt inte batteriet för kraftiga stötar eller för öppen eld.
- Vid kontakt med batterisyra, skölj med vatten i ca 30 min. Kontakta läkare.
- Uttjänta batterier skall lämnas på miljöstationer.



Mercado Medic AB
Tryffelslingan 14
181 57 Lidingö

Telefon & Fax
Tel 08 555 143 00
Fax 08 555 143 99

Email & Internet
Email info@mercado.se
Internet www.mercado.se

UTRUSTNING/VERKTYG

UTRUSTNING OCH VERKTYG VID BYTE AV BATTERI:


- Torxmejsel (TX15)
- Skyddsglasögon
- Flackstång eller motsvarande kan krävas

FÖRBEREDELSE


- Montera av rygg enligt Brukarmanual för **REAL® 9000 PLUS**
- Vänd stolen upp och ned så att den vilar på armstödsplattorna
- Lossa på spännbandet som håller fast elektronikboxen
- Drag ut sladdarna för de elektriska funktionerna från elektronikboxen
- Avlägsna elektronikboxen från stolen

BATTERIBYTE


1. Avlägsna de självhäftande gummiplattorna från boxen

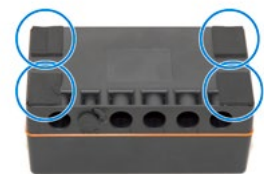

2. Lossa på skruvarna som håller samman boxen

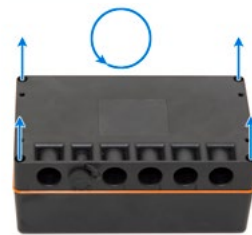


3. Öppna boxen, koppla loss plus- och minuskablarna (Flackstång kan behövas för detta steg) och avlägsna de gamla batterierna

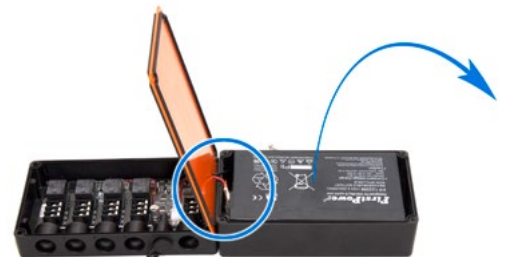


4. Placera de nya batterierna i boxen och koppla fast plus- och minuskablarna (Obs! Gnista kan uppstå vid inkoppling av plus- och minuskablarna, använd skyddsglasögon)



5. Återförslut boxen och skruva i skruvarna som håller den samman

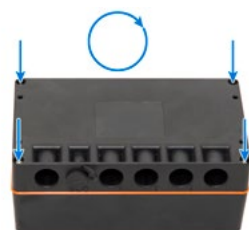

6. Fäst de självhäftande gummiplattorna på boxen

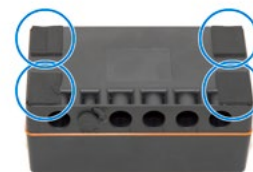

SLUTMONTERING

- Placera åter elektronikboxen i hållarna på sittkryset
- Anslut sladdarna för de elektriska funktionerna till elektronikboxen
- Spänn fast elektronikboxen i sittkryset med spännband
- Vänd stolen till upprät läge
- Montera rygg enligt Brukarmanual för **REAL® 9000 PLUS**