

**Artikelnummer**

803950	Sidostöd f fällbart armstöd
SS40XX	Sidostöds kudde L 30x16 cm
SS30XX	Sidostöds kudde M 25x14 cm
SS20XX	Sidostöds kudde S 28x8 cm

*XX färgkoder finns i prislistan och i utprovingsprotokollet.*

**Nödvändiga verktyg**

800897	T-Nyckel 5 mm insexverktyg (Mercadonyckeln)
--------	---

**Utförande**

Montera enligt bilden nedan.

Lossa ratten som håller fast överdelen på armstödet (1). Drag sedan ut överdel på armstödet (2). Trä över fästet (3) för sidostöds kudden över cylindern (4) på den nedre delen av armstödet. Om sidostöds kudden skall monteras under ratten på armstödet (1), måste skruven som i klämförbandet (5) dras ut för att sidostödsfästet ska kunna träs förbi ratten (1). Drag nu åt skruven i sidostöds kuddens klämförband (3). Trä in monteringsaxeln på sidostöds kudden (6) i fästet och drag åt skruven (7).

För att justera sidostöds kuddens rotation lossa skruv (7). Ställ in rotation. Drag åt skruv (7).

För att justera sidostöds kuddens höjd och vinkel lossa skruv (5). Ställ in. Drag åt skruv (5).

