

Vadstöd Medic

REAL 9000 PLUS, REAL 6100 PLUS

Artikelnr: 800742

Ändrad: 1701

Giltig från: 9606

Artikel

LS109001 Benstöd fäste Medic ≥ 43 dj sits
 LS109002 Benstöd fäste Medic ≤ 40 dj sits
 LS151310 Benstöd Medic delat L 28-41 cm
 LS151110 Benstöd Medic delat S 18-24 cm
 CS1038 Vadstöd Kудde 15x13cm f B37

LS161310 Benstöd Mini Medic delat L H+V 28-41 cm
 LS111410 Benstöd Mini Medic helt XL 38-51 cm
 LS151210 Benstöd Medic delat M 23-32 cm
 LS151410 Benstöd Medic delat XL 38-51 cm
 802214 Vadstöd mekanism kpl Medic Benstöd B37

Nödvändiga verktyg

800897 T-Nyckel 5 mm insexverktyg (Mercadonyckeln)
 Insexnyckel 5/6 mm

Utförande

För montering och justering av benstöd, se monteringsanvisning "Benstöd Medic".

Ring (1) måste lossas (**OBS! Två st skruvar**) för att kunna montera vadstödsfäste (2). Återmontera därefter ring (1). Montera axel (3) i vadstödsfästet. Lossa sedan skruvarna (4) på kuddfästet och montera det på axel (3). Drag åt skruvarna (4).

Justera vadplattan i djup och höjd genom att vrida axeln i fästet (10). Justera kudden för att ge största möjliga avlastningsyta.

