

Vadstöd Mittmonterat

REAL 9000 PLUS, REAL 6100 PLUS

Artikelnr: 802300

Ändrad: 1701

Giltig från: 9606

Artikel	Art.nr.
Vadstöd mekanism kpl Mobil Benstöd B32	802216
Nödvändiga verktyg	
T-Nyckel 5 mm insexverktyg (Mercadonyckeln)	800897

Utförande

1. Fäst ringen(1) på övre benstödsröret(2). **OBS! Ratten(3) på rörets baksida måste skruvas ut innan montering av vadstödsfäste.**
2. Fäst bågen(4) i fästet(1).
3. Skruva fast fäste(5) på vadstöds kudde(6).
4. Montera vadstödkudden med fäste på bågen(4).
5. Montera vadstödmekanismen på benstödet.

Justera vadstödet i höjd-/djupled genom att justera ringen(1) i höjddled och bågen(2) i rotation och drag sedan åt i önskad position.

