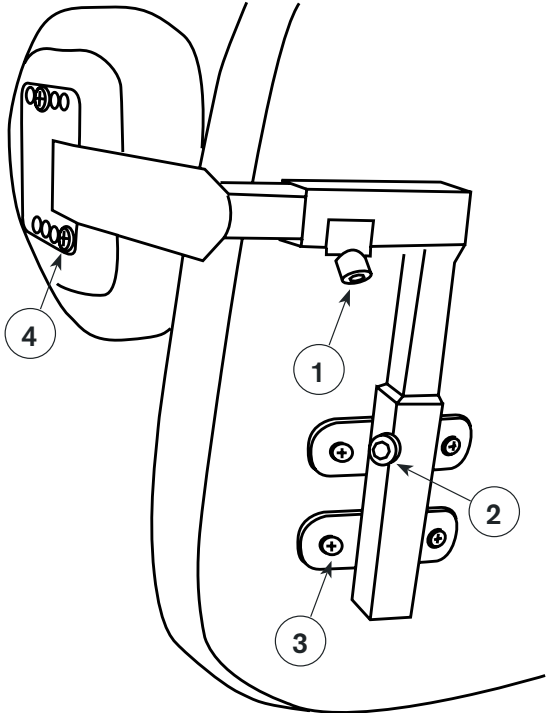



Bålstöd

REAL MOBIL 6100, REAL 6100 PLUS, REAL 9000, REAL 9000 PLUS

Artikelnr: 802023
Ändrad: 1505
Giltig från: 960601

Artikel	Art.nr.			
Bålstödsmech. Medic Rak Hö u stoppdetalj	TS11			
Bålstödsmech. Medic Rak Vä* u stoppdetalj	TS12			
Bålstödsmech. Medic Svängd Hö u stoppdetalj	TS21			
Bålstödsmech. Medic Svängd Vä u stoppdetalj	TS22			
Bålstöd kudde 15x13	TS10XX			
	XX färgkoder finns i prislistan och i utprovningsprotokollet.			
* Visas på bild.				
Nödvändiga verktyg	Art.nr.			
T-Nyckel 5 mm insexverktyg (Mercadonyckeln)	800897			
Stjärnmejsel/Skruvdragare				
Utförande				
<p>Montera ihop bålstödet enligt bilden.</p> <p>Skruva i skruvarna (4) i de befintliga gängorna på bålstödsudden, de kan justeras i fyra olika lägen i djupled.</p> <p>Justera bålstödet höjd/bredd till mitt i justeringen innan montering. Prova ut lämplig placering av bålstöden och skruva fast bålstödsfästena i ryggplattan med de medföljande självborrande träskruvarna (3).</p> <p>Bålstödet justeras i höjd med skruven (2), i sidled med skruven (1). Bålstödsplattans placering i djupled kan justeras genom att flytta skruvarna (4) inom bågens hålbild.</p>				
				
	<p>Mercado Medic AB Tryffelslingan 14 181 57 Lidingö</p>	<p>Telefon & Fax Tel 08 555 143 00 Fax 08 555 143 99</p>	<p>Email & Internet Email info@mercado.se Internet www.mercado.se</p>	