

Artikelnummer

- 803820 **Komplett benstöd EL-comfort, Hö och Vä**
 802436 Benstöd El-Comfort Vä inkl vadstöd
 803811 Benstöd Fäste El-Comfort Vä u mittdel med kontakt
 802437 Benstöd El-Comfort Hö inkl vadstöd
 803810 Benstöd Fäste El-Comfort Hö u mittdel med kontakt
 802979 Benstödsfäste för El-benstöd Comfort mittdel inkl skruv
- 803813 **Komplett benstöd El-Comfort Vä inkl vadstöd med fäste under sits**
 802436 Benstöd El-Comfort Vä inkl vadstöd
 803811 Benstöd Fäste El-Comfort Vä u mittdel med kontakt
 802979 Benstödsfäste f El-benstöd Comfort mittdel inkl skruv
- 803814 **Komplett benstöd El-Comfort Hö inkl vadstöd med fäste under sits**
 802437 Benstöd El-Comfort Hö inkl vadstöd
 803810 Benstöd Fäste El-Comfort Hö u mittdel med kontakt
 802979 Benstödsfäste för El-benstöd Comfort mittdel inkl skruv

Nödvändiga verktyg

- 800897 T-nyckel 5 mm insexverktyg (Mercadonyckeln)
 insexnycklar 4 och 6 mm

Utförande

Montera adaptern (1) på vänster eller höger armstödsbåge i de främre eller bakre hålen beroende på sitsens storlek.

OBS! De ovala hålen ska vara placerade ut från stolen.

Montera benstödsadapter (2) i benstödsfästet. Håll inne avtryckaren (3), för sedan ner benstödet med del (4) i adaptern. Släpp sedan avtryckaren och kontrollera att benstödet är fixerat i adaptern. Använd insexnycklar i storlek 4, 5 och 6 mm för att göra justeringar i längd, höjd och vinkel.

Justera benstödet längd med skruven (5) insexnyckel 4 mm så att låret vilar mot sitsen. Ställ in vinkeln på fotplattan genom att justera skruven (5) med T-nyckeln, så att foten får avlastning mot hela fotplattan utan att glida av.

