

**Artikelnummer**

LS202X10 Benstöd Hel Mittmonterad Fotpl B32xD24, Längd L-XL 30-53  
 LS212X10 Benstöd Hel Mittmonterad Fotpl Mini B25xD18, Längd L-XL 30-53  
 LS222X10 Benstöd Hel Mittmonterad Fotpl Smal B32xD10, Längd L-XL 30-53  
 LS262X10 Benstöd Hel Mittmonterad Fotpl B29xD24, Längd L-XL 30-53  
 600106 Benstöd mobil 6100 kpl. Vuxen 37-53 cm  
 600254 Benstöd mobil 6100 kpl. Barn 30-38 cm  
 600319 Benstöd mobil Mini 6100 kpl. Vuxen 37-53 cm  
 600320 Benstöd mobil Mini 6100 kpl. Barn 30-38 cm  
**X: 1 För Längd L 30-38cm 2 För Längd XL 37-53cm**

**Nödvändiga verktyg**

800897 Insexnyckel 6 mm

**Utförande**

Montera fotplattan med skruvarna (2) i sittkrysset (1).

Justera benstödet med ratten (3) så att låret vilar mot sitsen. Ställ in vinkeln på fotplattan genom att justera skruven (4) med T-nyckeln, så att foten får avlastning mot hela fotplattan utan att glida av. Ställ in vinkeln på benstödet genom att släppa på låsskruv (5). Montera in skruven (5) i något av vinkelalternativen. Drag åt.

