

Artikelnummer

ADAPTER PAR

AD2010 Comfort
AD4010 Cross

ADAPTER HÖGER

AD2011 Comfort
AD4011 Cross

ADAPTER VÄNSTER

AD2012 Comfort
AD4012 Cross

Nödvändiga verktyg

800897 T-nyckel 5 mm insexverktyg (Mercadonyckeln)

Utförande

Montera adaptorn (1) på vänster eller höger armstödsbåge (2) i de främre eller bakre hålen, beroende på sitsens storlek. **OBS! De ovala hålen ska vara placerade ut från stolen.**

Fäst armstödsbågen (2) på sittkrysset (3). Ställ in rätt armstödsbredd och lås fast med ratt (4). Lås därefter fast adaptorn i rätt läge genom att dra åt skruvarna (5) med T-nyckeln. Justera till rätt djup och lås med ratten (6). Häng på benstödet i adapterfästet och justera benstödet längd med vredet (7) så att låret vilar mot sitsen.

Ställ in vinkeln på fotplattan genom att släppa på skruvarna (8) med T-nyckeln, så att foten får avlastning mot hela fotplattan utan att glida av.

OBS! Stolen får inte lyftas med hjälp av benstöden.

