

**Artikelnummer**

TA1010	Bord 60x45 cm kpl f REAL 9000 Armstöd PLUS
TA1030	Bord 60x45 cm f fällbart armstöd
TA1015	Bord 45x37 cm kpl f REAL 9000 Armstöd PLUS
TA1035	Bord 45x37 cm f fällbart armstöd

**Nödvändiga verktyg**

800897 T-Nyckel 5 mm insexverktyg (Mercadonyckeln)

**Utförande**

Montera bordet enligt bild A och sedan bild B på vänster armstöd.

Återmontera armstöden i lämplig höjd så att det ger ett stöd för armbågen med axeln i nedsänkt läge.

Justera fästet (1) till önskad höjd, fritt från andra eventuella reglage. Bordet justeras i höjd så man kan arbeta på bordsytan utan att lyfta axlarna. Placera bordet på armstöden och centrera i bredd med hjälp av skruven (3). Djupledsjustera med ratten (2).

Bordet kan fällas undan alternativt tas bort för åtkomlighet till stolen. I båda fallen används endast ratten (2).

