

Artikelnummer

TA1020 Bricka 45x30 kpl Real 6100/Real 9000

Nödvändiga verktyg

800897 T-Nyckel 5 mm insexverktyg (Mercadonyckeln)

Utförande

Montera adaptern (1) på vänster eller höger armstödsbåge (2).

OBS! De ovala hålen ska vara placerade ut från stolen.

Fäst armstödsbågen (2) på sittkrysset (3). Ställ in rätt armstödsbredd och lås fast med ratt (4).

Lås därefter fast adaptern i rätt läge genom att dra åt skruvarna (5) med T-nyckeln.

Brickans djupledsläge justeras med hjälp av skruvarna (8).

Brickans lägsta höjd justeras med låsring (7).

Brickan kan höjas/sänkas och svängas med ratt (6). Vid belastning skall ratt (6) vara åtdragen.

På undersidan av brickan finns ratt (9) som låser brickans rotation.

Bricka går att montera på höger eller vänster sida.

Se till att rattar och vred är låsta när brickan belastas.

