

## Viktigt säkerhetsmedelande till marknaden

### REAL 9000, REAL 9000 PLUS

### Uppdatering av monteringsanvisning för Fixlyftomat

#### Aktuella produkter

REAL9000, REAL 9300, REAL 9700

REAL 9000 Plus Manuell Vuxen, Real 9300 Plus Manuell Barn, Real 9700 Plus Coxit

Mercado Medic AB vill informera om att en fixlyftomat har glidit i klämlåset 3 centimeter och slagit i golvet på en av våra stolar.

Detta kan hända på alla stolar med fixlyftomat, om fixlyftomaten på stolen bytts och monteringsanvisningen inte har följts.

Om fixlyftomaten inte monteras korrekt kan den glida ner, precis som beskrivit ovan, och orsaka obehag för brukaren.


När en stol är inne för ombyggnation eller rekonditionering kontrollera åtdragningsmomentet på skruvaran i klämlåset, samt funktionen på fixlyftomaten. Använd monteringsinstruktionen för fixlyftomat, se bild 1.

För att försäkra att detta inte inträffar igen se till att skicka ut denna FSN till alla berörda enheter.

För mer information kontakta vår kundtjänst under kontorstid så kommer de att guida dig till rätt avdelning.

Föra att förstärka och förenkla montering av fixlyftomater utvecklar vi ett grövre ytterrör till fixlyftomaten. Detta tillåter ett högre åtdragningsmoment vid montage av fixlyftomaten i stolen.

Fixlyftomater åtdragningsmoment		CE
REAL 9000, REAL 9000 PLUS		Artikelnr: 802910
<b>MONTERINGSANVISNING</b>		Mars 2012
		Giltig från 960601

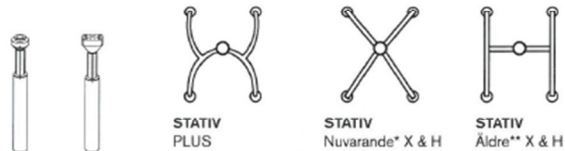

TYP AV FIXLYFTOMAT	ARTIKELNUMMER		Klämförband		Klämförband		Klämförband	
	Rotation	Alufäste	Övre	Undre	Övre	Undre	Övre	Undre
140 mm <55 kg	801042	801041	***	24 Nm	***	18 Nm	***	24 Nm
140 mm 55-90 kg	801038	801037	***	24 Nm	***	18 Nm	***	24 Nm
140 mm 90-130 kg	801046	801045	***	24 Nm	***	18 Nm	***	24 Nm
200 mm <55 kg	801030	801029	***	24 Nm	***	18 Nm	***	24 Nm
200 mm 55-90 kg	801026	801025	***	24 Nm	***	18 Nm	***	24 Nm
200 mm 90-130 kg	801034	801033	***	24 Nm	***	18 Nm	***	24 Nm

#### FIXLYFTOMATER MED GROVT YTERRÖR

TYP AV FIXLYFTOMAT	ARTIKELNUMMER		Klämförband		Klämförband		Klämförband	
	Rotation	Alufäste	Övre	Undre	Övre	Undre	Övre	Undre
140 mm <55 kg	803980	803979	24 Nm	24 Nm	18 Nm	18 Nm	24 Nm	24 Nm
140 mm 55-90 kg	803982	803981	24 Nm	24 Nm	18 Nm	18 Nm	24 Nm	24 Nm
140 mm 90-130 kg	809084	803983	24 Nm	24 Nm	18 Nm	18 Nm	24 Nm	24 Nm
200 mm <55 kg	803986	803985	24 Nm	24 Nm	18 Nm	18 Nm	24 Nm	24 Nm
200 mm 55-90 kg	803988	803987	24 Nm	24 Nm	18 Nm	18 Nm	24 Nm	24 Nm
200 mm 90-130 kg	803990	803989	24 Nm	24 Nm	18 Nm	18 Nm	24 Nm	24 Nm

Provet är utfört på "nya" fixlyftomater från Suspa samt anojade skruvar.


\*Se bild 1 \*\*Se bild 2

#### SLITSEN

På Mercados äldre stativ är slitsen vid klämförbanden inte lika djup som på våra nuvarande stativ.

\*\*\*

Klämförbandet dras så hårt att slitsen med lätthet går att manövrera upp och ned.

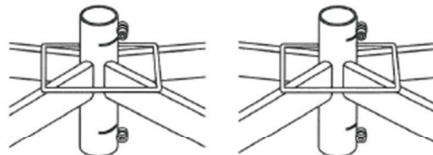

\*Bild 1, visar nuvarande stativ med djupare slits.

\*\*Bild 2, visar äldre stativ med grundare slits.

Bild 1

Med vänlig hälsning

Fredrik Nyblom

Mercado Medic AB