

Monteringssatsen innehåller

BRCXXXXXX Överdrag Rygg

Förklaring

X:en i artikelnumret är en synonym för samtliga sifferkoder. De två första X:en utgör modell på överdraget, de två mellersta utgör storleken och de två sista utgör material och färg.

Modeller BRCXXXXXX

10: Basker	11: Basker Slowrecovery	12: ErgoMedic
20: ErgoMedic PLUS Basker	22: ErgoMedic PLUS Slowrecovery Basker	25: ErgoMedic PLUS Sidokil Basker

Storlekar BRCXXXXXX

10: 46x43	15: 42x43	25: 33x36	30: 40x34	35: 30x34	45: 27x32	50: 23x27
55: 38x26	60: 33x26	65: 30x26	70: 27x22	85: 23x20	90: 33x16	

Material/Färg BRCXXXXXX

Plysch:

41: Vinröd	42: Brun	44: Marinblå	45: REAL-blå	46: Grå	48: Svart
------------	----------	--------------	--------------	---------	-----------

Övriga material:

66: Inkontinens	73: Bomullstyg Barn Gul	74: Bomullstyg Barn Blå	75: Väv Vuxen Blå
81: Väv Barn Röd	85: Väv Barn Blå	89: Väv Barn Gul	

Utförande

Trä överdraget över stoppdetaljen, vid plastad frotté ska frottématerialet vara vänt utåt. Notera att lappen för storlek och skötselanvisning placeras över ryggens bakkant. Var noggrann att sömmen på överdraget är trätt jämnt över ryggens kant. Fäst överdraget med de två kardborrebanden (1).

Överdragen är formsydda till de olika stoppdetaljerna och varianterna.

Se www.mercado.se eller kontakta Mercado för mer information om överdrag till stoppdetaljer.

