

Sittplatta

REAL 9000 PLUS, REAL 6100 PLUS, REAL 9200, REAL 2000

Artikelnr: 803311

Ändrad: 1611

Giltig från: 0601

Nödvändiga verktyg

T-Nyckel 5 mm insexverktyg (Mercadonyckeln)

Art.nr.

800897

Utförande

För att montera sittplattan på sittkrysset, skruva fast skruvarna med 5 mm insexnyckel genom sittkryssets ram enligt bild nedan. Sitsar med sitsdjup 39 cm och kortare har sedan 2012-04-01 två möjliga positioner med 5 cm intervall. Detta för att kunna montera eventuella benstöd som bygger på sittkrysset i framkant.

Antalet nödvändiga skruvar för montering varierar (från 4 till 10 st) med modell av sittkryss.

