

**Artikelnummer**

802216 Vadstöd mekanism kpl Mobil Benstöd B32

**Nödvändiga verktyg**

800897 T-nyckel 5 mm insexnyckel (Mercadonyckeln)

**Utförande**

1. Fäst ringen (1) på vänster eller höger benstöd (5).
2. Fäst bågen (2) i fästet (1).
3. Skruva fast fäste (3) på vadstöds kudde (4).
4. Montera vadstödkudden med fäste på bågen (2).
5. Montera vadstödmekanismen på benstödet.

Justera vadstödet i höjd-/djupled genom att justera ringen (1) i höjddled och bågen (2) i rotation och drag sedan åt i önskad position.

