

# Benstödsfäste Medic

REAL 9000 PLUS, REAL 6100 PLUS

Artikelnr: 802896  
Ändrad: 1608  
Giltig från: 070601

Artikel	Art.nr.
Benstödsfäste Medic f B37 f sitsdjup $\geq$ 48	LS109001
Benstödsfäste Medic f B37 f sitsdjup $\leq$ 44	LS109002
Benstödsfäste Medic f B25 f sitsdjup $\leq$ 48	LS109003
Nödvändiga verktyg	
T-nyckel 5 mm insexverktyg (Mercadonyckeln) alt. T-nyckel 6 mm	800897

## Instruktioner

Montera benstödsfästet (1), (2) eller (3) med två M8-skrivar genom hålen (4) på fästet och genom motsvarande hål på sittkryssets (5) framsida (Observera att om stolen är vinkelställbar monteras fästet i sittkryssets övre del).

Fäst benstödsfästet för stor sits(1) genom att mäta med benstödsfästet och markera hålbilden i sittplattan. Borra 10 mm hål genom sittplattan. Montera sedan i medföljande insatsgångor. Skruva sedan fast benstödsfästet genom att dra skruvar i hålen.

