

Benstöd Medic

REAL 9000 PLUS, REAL 6100 PLUS

Artikelnr: 802896
Ändrad: 1608
Giltig från: 070601

Artikel	Art.nr.
Benstöd Medic Hel Fotplatta	LS10xxxx
Benstöd Medic Hel Fotplatta Mini	LS11xxxx
Benstöd Medic Delad Fotplatta	LS15xxxx
Benstöd Medic Delad Fotplatta Mini	LS16xxxx

Nödvändiga verktyg

T-nyckel 5 mm insexverktyg (Mercadonyckeln) 800897

Instruktioner

Montera det fyrkantiga infästningsröret (1) i benstödsfästet under sitsens framkant. Justera till rätt bredd i sidled och drag åt skruven i benstödsfästet med T-nyckeln.

Benstödetets vinkel ställs in med hjälp av skruven (2).

Justera benstödetets längd med skruven (3) så att låret vilar mot sitsen, ställ in vinkeln på fotplattan med låsskruven (4) så att foten får avlastning mot hela fotplattan utan att glida av.

OBS! Glöm inte att dra åt skruvar hårt efter injustering!

