



REAL-STOELN ZIJN MEDISCHE HULPMIDDELEN
EN VOORZIEN VAN CE-MARKERING IN OVEREENSTEMMING
MET DE VOORSCHRIFTEN VAN DE GENEESMIDDELENRAAD
LVFS 2003:11

+ REAL[®] 6100 PLUS

Compacte elektrische rolstoel voor kinderen en volwassenen



Bewegingsvrijheid en keuzevrijheid met REAL 6100 PLUS

Bij zwakke benen hebt u een stoel nodig om in te zitten en om u in te verplaatsen. Dat stelt hoge eisen aan functionaliteit en kwaliteit. De stoel moet comfortabel zijn, zorgen voor een ergonomische zithouding en u daar brengen waar u wilt.

Bewegingsvrijheid

DE REAL 6100 PLUS is een elektrisch aangedreven rolstoel voor gebruik binnenshuis. De stoel is gemaakt om de gebruiker thuis, op het werk of op school maximale bewegingsvrijheid te geven.

Het chassis is slechts 570 mm breed, waardoor de stoel zeer praktisch is op kleine oppervlakken. De hoogte kan worden ingesteld met een bereik van maar liefst 280 mm, waardoor de gebruiker hoogtes kan bereiken die normaal niet mogelijk zijn voor iemand die zit.

Dankzij de aandrijving op de middelste wielen kan de REAL 6100 PLUS rond zijn eigen as draaien, en door de individuele wielophanging kunnen hindernissen tot 40 mm worden genomen.

Keuzevrijheid

DE REAL 6100 PLUS kan op vele mogelijke manieren worden aangepast aan de behoeften en wensen van de gebruiker. In de standaarduitvoering heeft de elektrische rolstoel een ergonomisch zitsysteem en

armsteunen die omlaag geklapt kunnen worden om gemakkelijk zijwaarts de stoel in en uit te komen. De beensteun heeft een stabiele voetplaat en de hoek en hoogte zijn verstelbaar.

Groot aanbod opties en accessoires

DE REAL 6100 PLUS biedt keuzevrijheid met een groot aanbod opties en accessoires. U kunt kiezen uit verschillende soorten zittingen en rugsteunen, alternatieve zittingformaten, ERGOMEDIC PLUS-zitsysteem en een groot aantal accessoires zoals neksteunen, zijsteunen, rompsteunen en dergelijke. Zie onze brochure met accessoires voor meer informatie.

En we kunnen met trots het brede assortiment elektronische accessoires van Dynamic Controls aanbieden voor nog betere individuele aanpassing.

Ga voor meer informatie naar:

<http://www.dynamiccontrols.com/designers-and-manufacturers/products>



Een systeem waarbij uw behoeften bepalend zijn voor de uitvoering

ZITTING

In verschillende maten en materialen.



ZITHOEK-VERSTELLING

(+15° tot -8°)
Gasveer, zwengel of elektrisch.




RUGLEUNING EN MECHANISME

Kies de gewenste vorm.



ELEKTRISCHE ZITHOOGTE

Hoog of laag.

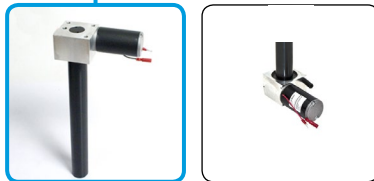

BEDIENINGS-KASTJES

Verschillende soorten elektronica.




FRAME

570x795 mm.



BEKLEDING

Verkrijgbaar in pluche, stof of kunstleer.

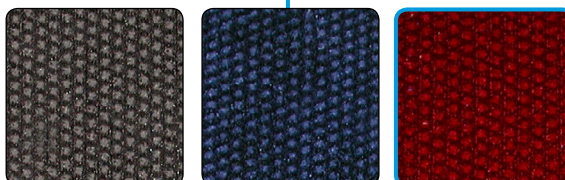

ACCESSOIRES

Keuzevrijheid met een groot aanbod.



=





⊕ REAL® 6100 PLUS

TECHNISCHE GEGEVENS

Max. gebruikersgewicht	135 kg
Max. snelheid	4,5 km/u
Draairuimte 180°	870 mm
Aandrijfwielen	beide middelste wielen
Bereik per lading	ca. 15 km
Max. hindernissen	40 mm
Gewicht	76 kg incl. batterij
Oplaadtijd	ca. 6-8 uur
Oplader getest en goedgekeurd door Mercado Medic AB	Mentzer 2,5A, ECB-801 Easy buddy 4A
Batterij getest en goedgekeurd door Mercado Medic AB	Sonnenschein 2st 12V 25 Ah

PROGRAMMERINGSMOGELIJKHEDEN

Verschillende mogelijke programmeringsfuncties:

- Snelheid vooruit
- Versnelling vooruit
- Remweg vooruit
- Snelheid achteruit
- Versnelling achteruit
- Remweg achteruit
- Draaisnelheid
- Draaiversnelling
- Remmen bij draaien
- Gevoeligheid van joystick
- Gebruik van externe joystick
- Omgekeerde werking van joystick

STANDAARDAFMETINGEN

Totale breedte	570 mm
Lengte	795 mm
Wielen voor/achter	Ø 125 mm
Aandrijfwielen	Ø 210 mm
Zithoogte	460-740 mm*, 380-580 mm*, 330-480 mm
Lengte beensteun	370-530 mm
Breedte zitting	290-480 mm
Diepte zitting	320-530 mm
Hoek zitting	-15° +8°, -8° +15°, 0° +23°
Hoogte rugsteun	330-430 mm
Hoek rugsteun	-15 – +45°

* Kan traploos omlaag versteld worden met maximaal 3 cm. Gemeten zonder zittingkanteling, van de vloer tot de onderkant van de zitting, met de zitting in de vlakke stand.

Met zittingkanteling +1 cm. Met zittingkanteling met verstelbaar zitkruis +2 cm.



BIJ MERCADO WORDT UW STOEL AANGEPAST AAN UW UNIEKE BEHOEFTE. GA NAAR ONZE ONLINE GIDS EN ONTWERP UW EIGEN STOEL!**

**shop.mercado.se



Mercado Medic Nederland BV
Nobelweg 22
3899 BN Zeewolde
Nederland

Telefoon & Fax
Tel +31 (0) 36 521 99 95
Fax +31 (0) 36 521 99 90

Email & Internet
Email info@mercado-medic.nl
Internet www.mercado-medic.nl