

Längdkompenserande Elbenstöd

REAL 6100 PLUS

Artikelnr: 804695

Ändrad: 1612

Giltig från: 1601

Artikel

Eldonssats Elbenstöd

OBS! LS313110 skall endast monteras på sittkryss med art.nr:
802829, 802830 alt. 803072, 803073.

Art.nr.

LS313110

Nödvändiga verktyg

5 mm insexnyckel

19 mm ringnyckel

Utförande

Skruva fast benstödsfästet med medföljande M8-skrivar och muttrar (A).

Montera elbenstödet i benstödsfästet enligt bild (B), skruva fast med ett par av medföljande passbultar med 19 mm ringnyckel.

Passa in vinkelfästet på benstödet i de nedre hålen på benstödsfästet, säkra elbenstödet i benstödsfästet med de två resterande passbultarna (C).

Koppla in och programmera elbenstödet enligt ”Programmeringsanvisning för elbenstöd”, kapitel 3.

