

Elbroms 24V 1G

REAL 9000 PLUS

Artikelnr: 804668
Ändrad: 1611
Giltig från: 1601

Artikel

Eldonssats broms 24V 1G

Art.nr.

804498

Nödvändiga verktyg

5 mm insexnyckel

6 mm insexnyckel

Utförande

1. Demontera överfallet (A) från axelfästet genom att lossa på de fyra M6-skruvarna.
2. Centrumfästet (B) monteras på stativet i höjd med spår enligt streckad linje på bild. Drag åt den bakre M8-skruven. Se till att centralfästets två överfall lämnar ett spelrum på ca 1 mm till eldonets fäste. Drag sedan åt de främre M8- skruvarna (C) med handkraft.
3. Se till att stolen är bromsad. Montera tillbaka överfallet (A) på axelfästet (D) så att det är fäst runt bromsaxeln. Drag åt M6-skruvarna för hand (lås ej). Koppla in elen. Aktivera broms så att eldonet är i maximalt utlägg.
4. Lås de två främre M8-skruvarna (C) i centralfästet, de två plåtarna ska sitta ihop. Lås därefter de fyra M6-skruvarna på axelfästet (D) hårt, med moment 9,8 Nm.
Kontrollera funktion på elbromsen.

