

Elbroms Twin 24V 1G

REAL 9200 TWIN

Artikelnr:
Ändrad: 1611
Giltig från: 1601

Artikel

Eldonssats broms 24V 1G

Art.nr.

804498

Nödvändiga verktyg

5 mm insexnyckel (Mercadonyckeln)

6 mm insexnyckel

Utförande

1. Demontera överfallet (A) från axelfästet genom att lossa på de fyra M6-skruvarna (D).
2. Centralfästet (B) monteras på stativet i mellan centralrören enligt bild. Montera med M8-skruvarna (C), drag åt skruvarna ordentligt.
3. Se till att stolen är bromsad. Montera tillbaka överfallet (A) på axelfästet (D) så att det är fäst runt bromsaxeln. Drag åt M6-skruvarna för hand (lås ej). Koppla in elen. Aktivera broms så att eldonet är i maximalt utläge.
4. Lås de fyra M6-skruvarna på axelfästet (D) hårt, med moment 9,8 Nm.

Kontrollera funktion på elbromsen.

