

Bordsfäste f Joystick

REAL 6100 PLUS

Artikelnr: 804785

Ändrad: 1706


Giltig från: 1601

Artikel	Art.nr.
Bordsfäste f sekundär Joystick DX2 Compact	804464
Nödvändiga verktyg	
Insexnyckel 5 mm (Mercadonyckel) Ringnyckel 13 mm	800897


Utförande

1. Hitta en passande plats för joysticken så att brukaren sitter i en ergonomisk korrekt position vid användning. Borra/såga ut hål enligt mall 1 (se nästa sida).
2. Placera fästet under bordsskivan med sidan med två hål upp emot bordsskivan så att sidan med åtta hål hamnar under hålet enligt bild. Skruva fast fästet med hjälp av två möbelskruvar samt två låsmuttrar.
3. Placera joysticken ovanpå fästets del med de åtta hålen. Skruva fast joysticken underifrån i lämpligt läge med de två M6-skruvarna.

1

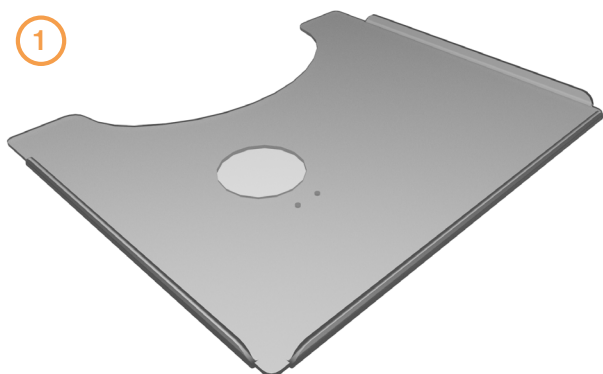

2

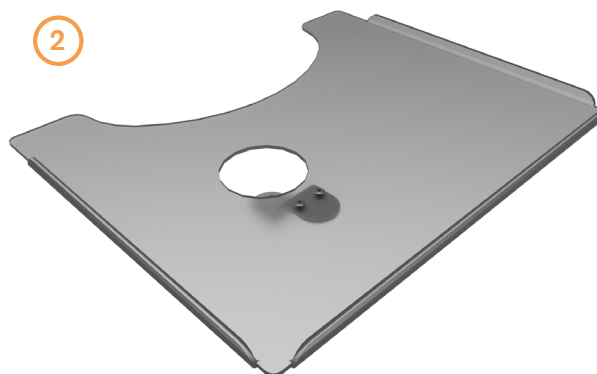

3



Bordsfäste f Joystick

REAL 6100 PLUS

Artikelnr: 804785

Ändrad: 1706

Giltig från: 1601

Mall 1

