

Armstöd PLUS Hemiplegi

REAL 6100 PLUS, REAL 9000 PLUS

Artikelnr: 804798
Ändrad: 1708
Giltig från: 160101

Artikel	Art.nr.
Armstödsmek Plus Hemiplegi Armstödsplatta Hemiplegi 45x12 cm	ARM2XXX AR4060XX
Nödvändiga verktyg	
T-nyckel 5mm (Mercado-nyckeln)	800897

Instruktioner

- Fäst armstödsplatta (se monteringsanvisning "Armstödsplatta").
För ner armstödsröret i breddbågen, säkra med vred på breddbågen.
- Sätt in armstödsmekanismen i sittkryset, säkra med vred eller skruv i sittkryset.

