




REAL® 9000 PLUS 12V – SPRÄNGSKISS
REAL® 9000 PLUS 12V – EXPLODED DIAGRAM

Dok.nr/Doc no 19-05769
Ändrad/Changed 2020-05-01
Giltig från/Valid from 2007-06-01



VERSION 09

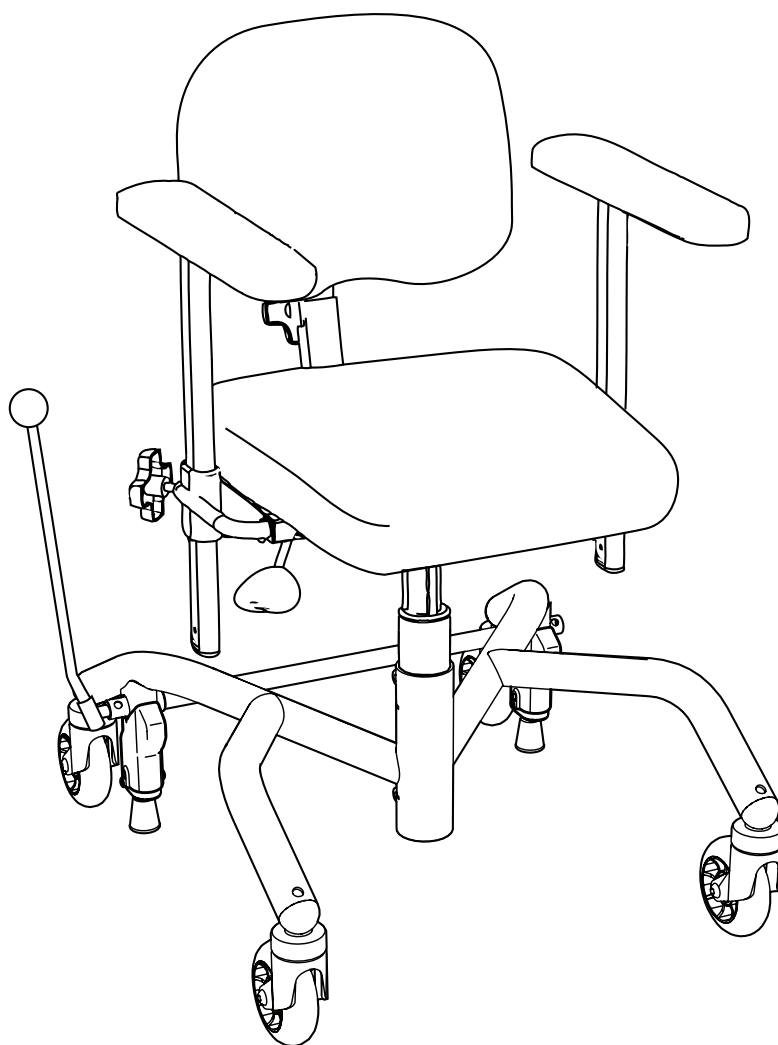

Mercado Medic AB
Tryffelslingan 14
181 57 Lidingö

Telefon & Fax
Tel 08 555 143 00
Fax 08 555 143 99

Email & Internet
info@mercado.se
www.mercado.se

Innehållsförteckning

Table of content

Detalj <i>Detail</i>	Sida <i>Page</i>
KLÄDSLAR OCH FÄRGKODER/ <i>UPHOLSTERY AND COLOUR CODES</i>	3
SITTPLATTA/ <i>SEAT</i>	4
SITTKRYSS/ <i>SEAT FRAME</i>	10
REGLAGE/ <i>CONTROLS</i>	13
LYFTOMATER/ <i>LIFTOMATS</i>	15
RYGGPLATTA/ <i>BACKREST</i>	17
RYGGMEKANISM/ <i>BACKREST MECHANISM</i>	24
ARMSTÖD/ <i>ARMRESTS</i>	29
ARMSTÖDSMEKANISMER/ <i>ARMREST MECHANISMS</i>	30
STATIV OCH BROMSAR/ <i>BASE AND BRAKES</i>	31
HJUL/ <i>CASTORS</i>	33
MANÖVERBOX/ <i>REMOTE</i>	35
LADDBOX/ <i>CHARGERBOX</i>	37

FÖRKLARING AV SYMBOLER

EXPLANATION OF THE SYMBOLS



Artikel för REAL 9000 PLUS VUXEN
Article for REAL 9000 PLUS ADULT



Artikel för REAL 9000 PLUS BARN
Article for REAL 9000 PLUS CHILD



Artikel för REAL 9000 PLUS MINI
Article for REAL 9000 PLUS MINI



Artikel för alla REAL 9000 PLUS
Article for all REAL 9000 PLUS



Stativförlängare måste användas
Base extension must be applied

Friskrivning


Artiklar i dokumentet kan vara föremål för ändringar eller utgått ur sortimentet. Vår målsättning är att alla dessa ändringar ska kommuniceras tre månader i förväg till avtalskunder via tekniska ändringsmeddelanden (ECN). Det kan i sällsynta fall kan innebära att de inte är tillgängliga för försäljning under en period. Den senaste revisionen av detta dokument finns tillgängligt på mercado.se.

Disclaimer

Articles included in this document may be subject to change or may be discontinued. Our aim is that all these changes should be communicated three months in advance to contract customers via engineering change notices (ECN). It can in rare cases mean that they are not available for sale for a period of time. The latest revision of this document is available on mercado.se.

Klädslar och färgkoder

Upholstery and colour codes

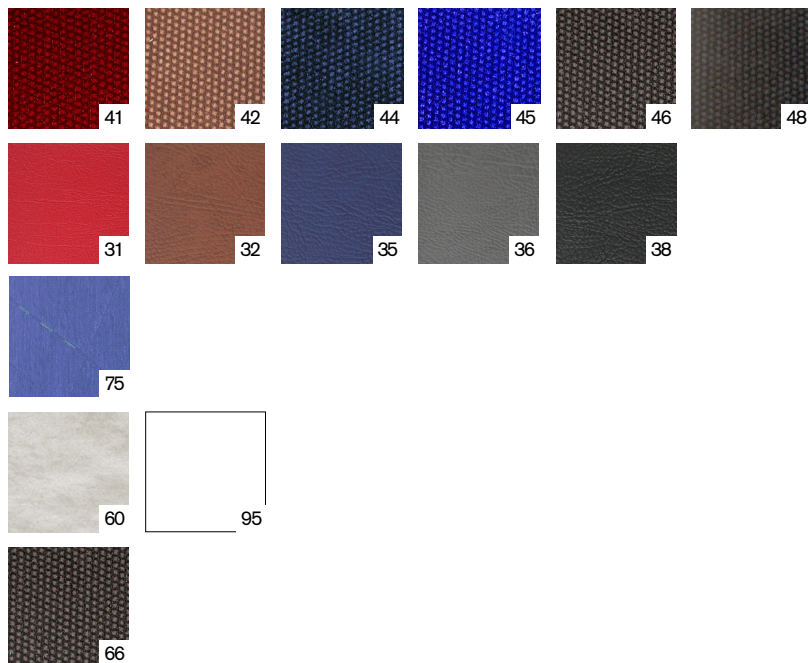

SIFFERKOD KLÄDSLAR (SIFFRA 7 OCH 8) DIGITCODE UPHOLSTERY (DIGIT 7 AND 8)

Plysch/*Plush*

41 Vinröd/ <i>Bordeaux</i>	42 Brun/ <i>Brown</i>
44 Marin/ <i>Navy Blue</i>	45 Realblå/ <i>Royal blue</i>
46 Grå/ <i>Grey</i>	48 Svart/ <i>Black</i>

Konstläder/*Skai*

31 Röd/ <i>Red</i>	32 Brun/ <i>Brown</i>
35 Blå/ <i>Blue</i>	36 Grå/ <i>Grey</i>
38 Svart/ <i>Black</i>	

Väv mönstrad Vuxen/*Patterned fabric, Adult* 75 Blå/*75 Blue*

Alternativ klädsel/*Alternative covering*

60 Hygienväv/ <i>Hygiene fabric</i>
95 Utan klädsel/ <i>Without clothing</i>

Överdragsklädsel/*Covering*

66 Inkontinensöverdrag grå plastad frotté/ <i>Incontinence cover, grey plastic-coated terry</i>
--

FÖRKLARING TILL STOPPDETALJERS ARTIKELNUMMER Art.nr: ST101546. = "Sits ErgoMedic, plysch grå 44x48 cm"

EXPLANATION OF THE ARTICLE NUMBERS STRUCTURE Article No: ST101546. = "ErgoMedic seat, plush grey 44x48 cm"

Siffror 1-2 = Typ av stoppningsartikel (ST=sits, BR=ryggplatta etc.)
 Digit 1-2 = Type of upholstered article (1=seat, 2=back panel etc.)
 Siffror 3-4 = Sittsystem (ErgoMedic, ErgoMedic PLUS etc.)
 Digits 3-4 = Seat system (ErgoMedic, ErgoMedic PLUS etc.)
 Siffror 5-6 = Storlek
 Digit 5-6 = Size
 Siffror 7 = Material (plysch, konstläder etc.)
 Digit 7 = Material (plush, skai etc.)
 Siffror 8 = Färg
 Digit 8 = Colour

PREFIX FÖR UPPBYGGNADEN AV ARTIKELNUMMER


PREFIX FOR THE STRUCTURE OF THE ARTICLE NUMBER

AD	<i>Adapter</i>	Adapter	LD	<i>Leg divider</i>	Grenkil
AR	<i>Armrest</i>	Armstöd	LDC	<i>Leg divider cover</i>	Grenkil överdrag
ARM	<i>Armrest mechanism</i>	Armstödsmekanism	LS	<i>Leg support</i>	Benstöd
AS	<i>Amputation support</i>	Amputationsstöd	NS	<i>Neck support</i>	Nackstöd
ASC	<i>Amputation support cover</i>	Amputationsstöds överdrag	NSC	<i>Neck support cover</i>	Nackstöd överdrag
BD	<i>Brake device</i>	Handbroms	PB	<i>Push bar</i>	Körbygel
BE	<i>Base</i>	Stativ	RC	<i>Rheumatic cross</i>	Reumatikerkryss
BEA	<i>Break accessory</i>	Bromstillbehör	SA	<i>Seat angle mechanism</i>	Sitsvinkel
BEX	<i>Base extender</i>	Stativförlängare	SAR	<i>Seat angle regulation</i>	Sitsvinklins reglage
BR	<i>Back rest</i>	Rygg	SAP	<i>Seat angle placement</i>	Sitsvinklins placering
BRC	<i>Back rest cover</i>	Rygg överdrag	SH	<i>Seat height</i>	Sithöjd
BRM	<i>Back rest mechanism</i>	Ryggmekanism	SS	<i>Side support</i>	Sidostöd
CS	<i>Calf support</i>	Vadstöd	SSC	<i>Side support cover</i>	Sidostöds överdrag
CSC	<i>Calf support cover</i>	Vadstöds överdrag	ST	<i>Seat</i>	Sits
FR	<i>Foot ring</i>	Fotring	STC	<i>Seat cover</i>	Sits överdrag
HB	<i>Hip belt</i>	Höftbälte	TA	<i>Table</i>	Bord
KS	<i>Knee support</i>	Knästopp	TS	<i>Trunk support</i>	Bålstöd
KSC	<i>Knee support cover</i>	Knästopps överdrag	TSC	<i>Trunk support cover</i>	Bålstöd överdrag
LB	<i>Large ball</i>	Stor kula	WE	<i>Wheel</i>	Hjul

Stycklista - Sittplatta


Part list - Seat

A01 Sits ErgoMedic
 Seat ErgoMedic

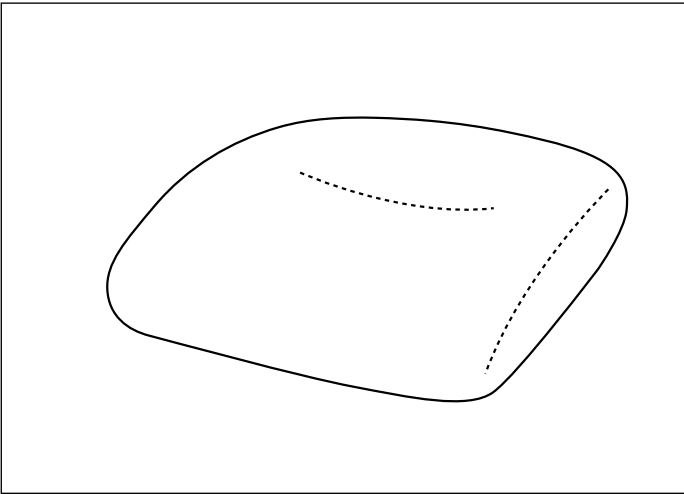


Pos	Art.nr	Benämning
Pos	Art.no	Name
A01 1	ST100846	Sits ErgoMedic 48x53 Plysch Grå Seat ErgoMedic 48x53 Plush Grey
2	ST101346	Sits ErgoMedic 44x53 Plysch Grå Seat ErgoMedic 44x53 Plush Grey
3	ST101546	Sits ErgoMedic 44x48 Plysch Grå 150460 Seat ErgoMedic 44x48 Plush Grey
4	ST101046	Sits ErgoMedic 48x48 Plysch Grå 150461 Seat ErgoMedic 48x48 Plush Grey
5	ST102046	Sits ErgoMedic 44x43 Plysch Grå 150462 Seat ErgoMedic 44x43 Plush Grey
6	ST102546	Sits ErgoMedic 40x48 Plysch Grå 150469 Seat ErgoMedic 40x48 Plush Grey
7	ST103046	Sits ErgoMedic 40x43 Plysch Grå 150463 Seat ErgoMedic 40x43 Plush Grey
8	ST103546	Sits ErgoMedic 40x39 Plysch Grå 150464 Seat ErgoMedic 40x39 Plush Grey
9	ST104046	Sits ErgoMedic 36x43 Plysch Grå 150467 Seat ErgoMedic 36x43 Plush Grey
10	ST104546	Sits ErgoMedic 36x39 Plysch Grå 150465 Seat ErgoMedic 36x39 Plush Grey
11	ST105046	Sits ErgoMedic 33x35 Plysch Grå 150466 Seat ErgoMedic 33x35 Plush Grey
12	ST105546	Sits ErgoMedic 29x32 Plysch Grå 150468 Seat ErgoMedic 29x32 Plush Grey

B01 Sits ErgoMedic Slow Recovery
 Seat ErgoMedic Slow Recovery

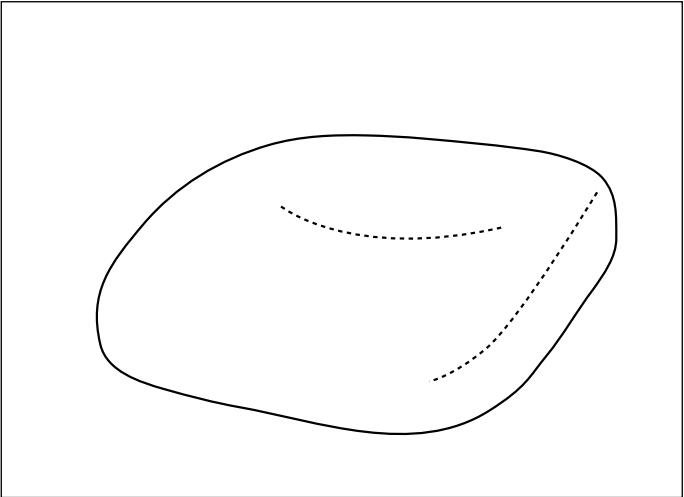

B01 1	ST111546	Sits ErgoMedic Slow Recovery 44x48 Plysch Grå 155460 Seat ErgoMedic Slow Recovery 44x48 Plush Grey
2	ST111046	Sits ErgoMedic Slow Recovery 48x48 Plysch Grå 155461 Seat ErgoMedic Slow Recovery 48x48 Plush Grey
3	ST112046	Sits ErgoMedic Slow Recovery 44x43 Plysch Grå 155462 Seat ErgoMedic Slow Recovery 44x43 Plush Grey
4	ST112546	Sits ErgoMedic Slow Recovery 40x48 Plysch Grå 155469 Seat ErgoMedic Slow Recovery 40x48 Plush Grey
5	ST113046	Sits ErgoMedic Slow Recovery 40x43 Plysch Grå 155463 Seat ErgoMedic Slow Recovery 40x43 Plush Grey
6	ST113546	Sits ErgoMedic Slow Recovery 40x39 Plysch Grå 155464 Seat ErgoMedic Slow Recovery 40x39 Plush Grey
7	ST114046	Sits ErgoMedic Slow Recovery 36x43 Plysch Grå 155467 Seat ErgoMedic Slow Recovery 36x43 Plush Grey
8	ST114546	Sits ErgoMedic Slow Recovery 36x39 Plysch Grå 155465 Seat ErgoMedic Slow Recovery 36x39 Plush Grey
9	ST115046	Sits ErgoMedic Slow Recovery 33x35 Plysch Grå 155466 Seat ErgoMedic Slow Recovery 33x35 Plush Grey

C01

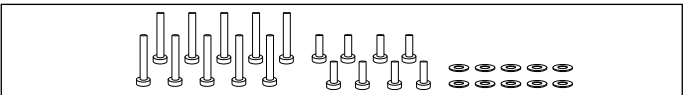


C01 803269 Skruvsats f montering av sittplatta
Screw kit for seat assembly

Stycklista - Sittplatta


Part list - Seat

D01 Sits ErgoMedic PLUS
 Seat ErgoMedic PLUS

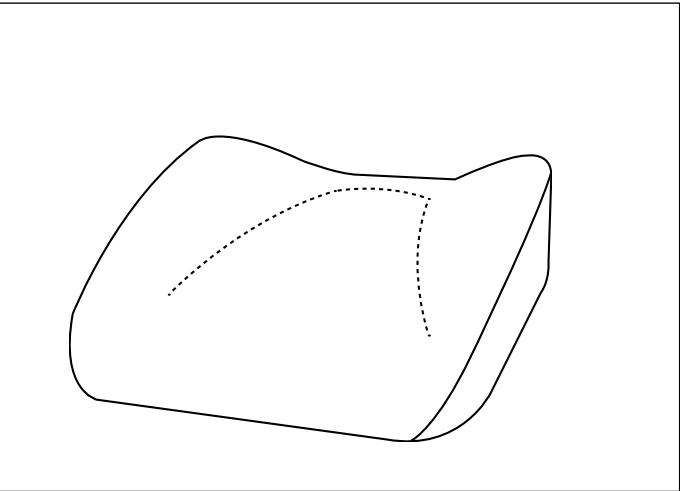


Pos	Art.nr	Benämning
Pos	Art.no	Name
D01 1	ST200846	Sits ErgoMedic PLUS 48x53 Plysch Grå Seat ErgoMedic PLUS 48x53 Plush Grey
2	ST201346	Sits ErgoMedic PLUS 44x53 Plysch Grå Seat ErgoMedic PLUS 44x53 Plush Grey
3	ST201046	Sits ErgoMedic PLUS 48x48 Plysch Grå 151461 Seat ErgoMedic PLUS 48x48 Plush Grey
4	ST201546	Sits ErgoMedic PLUS 44x48 Plysch Grå 151460 Seat ErgoMedic PLUS 44x48 Plush Grey
5	ST202046	Sits ErgoMedic PLUS 44x43 Plysch Grå 151462 Seat ErgoMedic PLUS 44x43 Plush Grey
6	ST202546	Sits ErgoMedic PLUS 40x48 Plysch Grå 151469 Seat ErgoMedic PLUS 40x48 Plush Grey
7	ST203046	Sits ErgoMedic PLUS 40x43 Plysch Grå 151463 Seat ErgoMedic PLUS 40x43 Plush Grey
8	ST203546	Sits ErgoMedic PLUS 40x39 Plysch Grå 151464 Seat ErgoMedic PLUS 40x39 Plush Grey
9	ST204046	Sits ErgoMedic PLUS 36x43 Plysch Grå 151467 Seat ErgoMedic PLUS 36x43 Plush Grey
10	ST204546	Sits ErgoMedic PLUS 36x39 Plysch Grå 151465 Seat ErgoMedic PLUS 36x39 Plush Grey
11	ST205046	Sits ErgoMedic PLUS 33x35 Plysch Grå 151466 Seat ErgoMedic PLUS 33x35 Plush Grey
12	ST205546	Sits ErgoMedic PLUS 29x32 Plysch Grå 151468 Seat ErgoMedic PLUS 29x32 Plush Grey

E01 Sits ErgoMedic PLUS Slow Recovery
 Seat ErgoMedic Slow Recovery

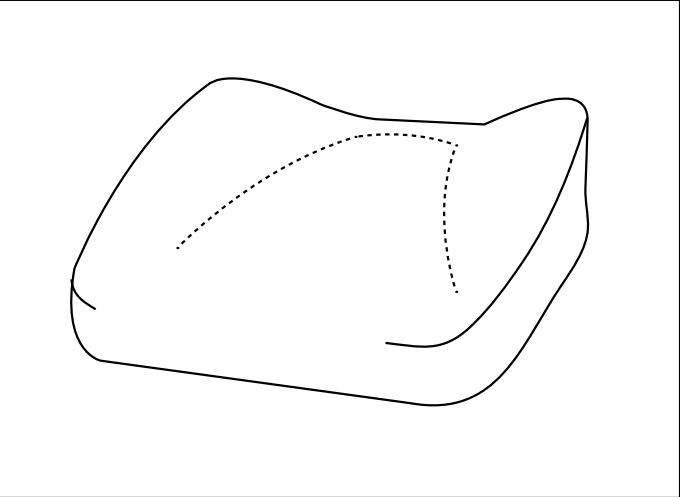

E01 1	ST210846	Sits EM PLUS Slow Recovery 48x53 Plysch Grå Seat ErgoMedic PLUS 48x53 Plush Grey
2	ST211346	Sits EM PLUS Slow Recovery 44x53 Plysch Grå Seat ErgoMedic PLUS 44x53 Plush Grey
3	ST211046	Sits EM PLUS Slow Recovery 48x48 Plysch Grå 156461 Seat EM PLUS Slow Recovery 48x48 Plush Grey
4	ST211546	Sits EM PLUS Slow Recovery 44x48 Plysch Grå 156460 Seat EM PLUS Slow Recovery 44x48 Plush Grey
5	ST212046	Sits EM PLUS Slow Recovery 44x43 Plysch Grå 156462 Seat EM PLUS Slow Recovery 44x43 Plush Grey
6	ST212546	Sits EM PLUS Slow Recovery 40x48 Plysch Grå 156469 Seat EM Slow PLUS Recovery 40x48 Plush Grey
7	ST213046	Sits EM PLUS Slow Recovery 40x43 Plysch Grå 156463 Seat EM PLUS Slow Recovery 40x43 Plush Grey
8	ST213546	Sits EM PLUS Slow Recovery 40x39 Plysch Grå 156464 Seat EM PLUS Slow Recovery 40x39 Plush Grey
9	ST214046	Sits EM PLUS Slow Recovery 36x43 Plysch Grå 156467 Seat EM PLUS Slow Recovery 36x43 Plush Grey
10	ST214546	Sits EM PLUS Slow Recovery 36x39 Plysch Grå 156465 Seat EM PLUS Slow Recovery 36x39 Plush Grey
11	ST215046	Sits EM PLUS Slow Recovery 33x35 Plysch Grå 156466 Seat EM PLUS Slow Recovery 33x35 Plush Grey

F01

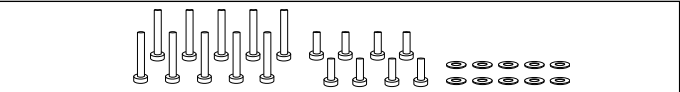


F01	803269	Skrusats f monterig av sittplatta Screw kit for seat assembly
-----	--------	--

Stycklista - Sittplatta Coxit


Part list - Seat Coxit

A01 Sits Coxit ErgoMedic
 Seat Coxit ErgoMedic

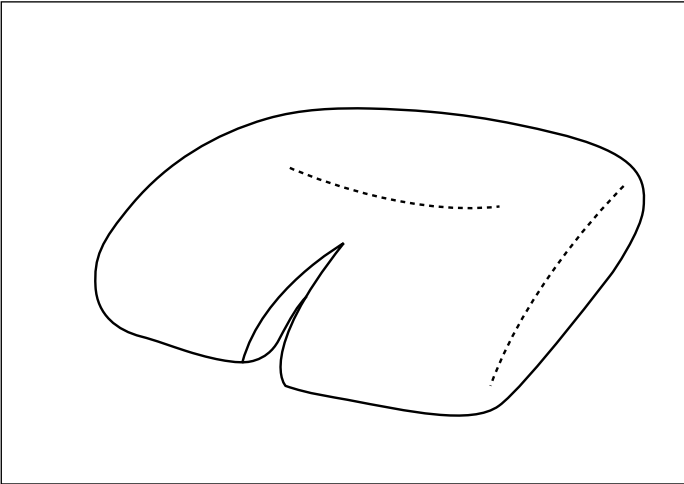


Pos	Art.nr	Benämning
Pos	Art.no	Name
A01 1	ST131546 160460	Sits Coxit Int ErgoMedic 44x48 Plysch Grå Seat Coxit Int ErgoMedic 44x48 Plush Grey
2	ST131046 160461	Sits Coxit Int ErgoMedic 48x48 Plysch Grå Seat Coxit Int ErgoMedic 48x48 Plush Grey
3	ST132046 160462	Sits Coxit Int ErgoMedic 44x43 Plysch Grå Seat Coxit Int ErgoMedic 44x43 Plush Grey
4	ST132546 160469	Sits Coxit Int ErgoMedic 40x48 Plysch Grå Seat Coxit Int ErgoMedic 40x48 Plush Grey
5	ST133046 160463	Sits Coxit Int ErgoMedic 40x43 Plysch Grå Seat Coxit Int ErgoMedic 40x43 Plush Grey
6	ST133546 160464	Sits Coxit Int ErgoMedic 40x39 Plysch Grå Seat Coxit Int ErgoMedic 40x39 Plush Grey

B01 Sits Coxit ErgoMedic Slow Recovery
 Seat Coxit ErgoMedic Slow Recovery

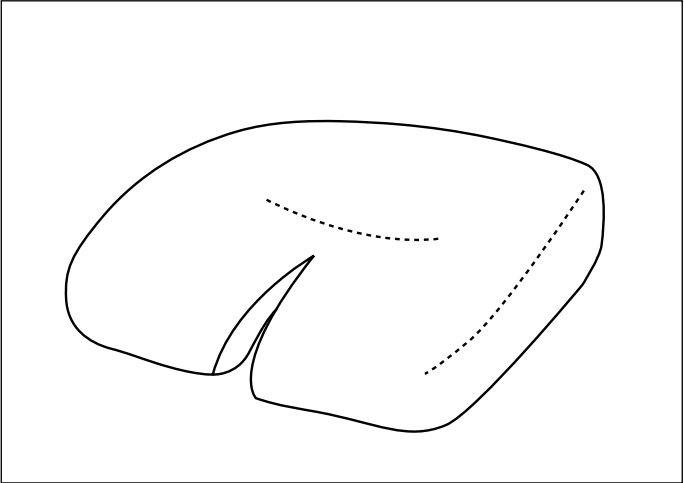

B01 1	ST141546 165460	Sits Coxit Int ErgoMedic Slow 44x48 Plysch Grå Seat Coxit Int ErgoMedic Slow 44x48 Plush Grey
2	ST141046 165461	Sits Coxit Int ErgoMedic Slow 48x48 Plysch Grå Seat Coxit Int ErgoMedic Slow 48x48 Plush Grey
3	ST142046 165462	Sits Coxit Int ErgoMedic Slow 44x43 Plysch Grå Seat Coxit Int ErgoMedic Slow 44x43 Plush Grey
4	ST142546 165469	Sits Coxit Int ErgoMedic Slow 40x48 Plysch Grå Seat Coxit Int ErgoMedic Slow 40x48 Plush Grey
5	ST143046 165463	Sits Coxit Int ErgoMedic Slow 40x43 Plysch Grå Seat Coxit Int ErgoMedic Slow 40x43 Plush Grey
6	ST143546 165464	Sits Coxit Int ErgoMedic Slow 40x39 Plysch Grå Seat Coxit Int ErgoMedic Slow 40x39 Plush Grey

C01

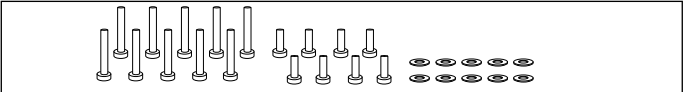


C01	803269	Skrufsats f montering av sittplatta Screw kit for seat assembly
-----	------------------------	--

Stycklista - Sittplatta Coxit


Part list - Seat Coxit

D01 Sits Coxit ErgoMedic PLUS
Seat Coxit ErgoMedic PLUS

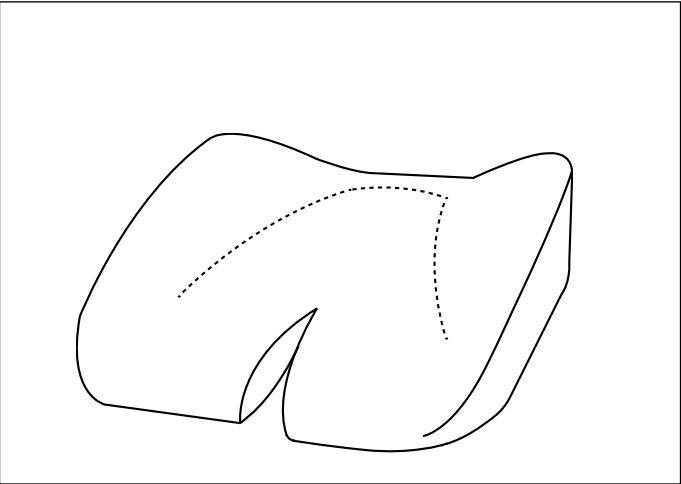


Pos	Art.nr	Benämning
Pos	Art.no	Name
D01 1	ST231546 161460	Sits Coxit Int EM PLUS 44x48 Plysch Grå Seat Coxit Int EM PLUS 44x48 Plush Grey
2	ST231046 161461	Sits Coxit Int EM PLUS 48x48 Plysch Grå Seat Coxit Int EM PLUS 48x48 Plush Grey
3	ST232046 161462	Sits Coxit Int EM PLUS 44x43 Plysch Grå Seat Coxit Int EM PLUS 44x43 Plush Grey
4	ST232546 161469	Sits Coxit Int EM PLUS 40x48 Plysch Grå Seat Coxit Int EM PLUS 40x48 Plush Grey
5	ST233046 161463	Sits Coxit Int EM PLUS 40x43 Plysch Grå Seat Coxit Int EM PLUS 40x43 Plush Grey
6	ST233546 161464	Sits Coxit Int EM PLUS 40x39 Plysch Grå Seat Coxit Int EM PLUS 40x39 Plush Grey

E01 Sits Coxit ErgoMedic PLUS Slow Recovery
Seat Coxit ErgoMedic PLUS Slow Recovery

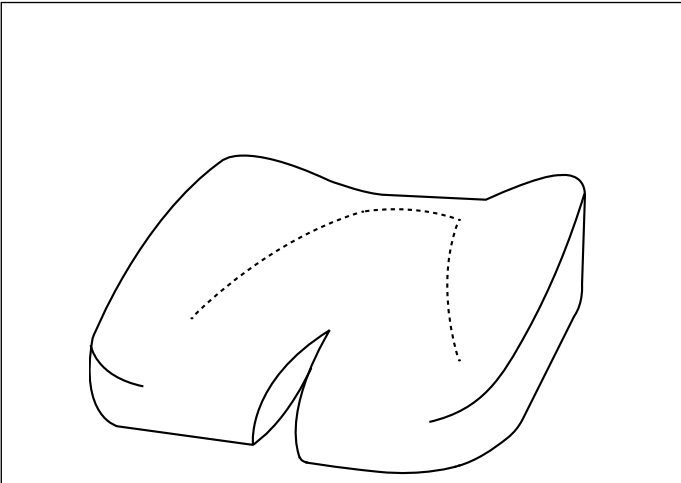

E01 1	ST241546 166460	Sits Coxit Int EM PLUS Slow 44x48 Plysch Grå Seat Coxit Int EM PLUS Slow 44x48 Plush Grey
2	ST241046 166461	Sits Coxit Int EM PLUS Slow 48x48 Plysch Grå Seat Coxit Int EM PLUS Slow 48x48 Plush Grey
3	ST242046 166462	Sits Coxit Int EM PLUS Slow 44x43 Plysch Grå Seat Coxit Int EM PLUS Slow 44x43 Plush Grey
4	ST242546 166469	Sits Coxit Int EM PLUS Slow 40x48 Plysch Grå Seat Coxit Int EM Slow PLUS 40x48 Plush Grey
5	ST243046 166463	Sits Coxit Int EM PLUS Slow 40x43 Plysch Grå Seat Coxit Int EM PLUS Slow 40x43 Plush Grey
6	ST243546 166464	Sits Coxit Int EM PLUS Slow 40x39 Plysch Grå Seat Coxit Int EM PLUS Slow 40x39 Plush Grey

F01

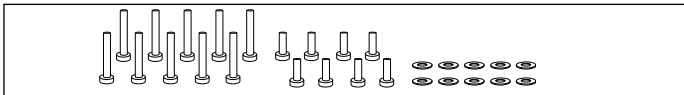


F01 [803269](#) Skruvsats f montering av sittplatta
Screw kit for seat assembly

Stycklista - Sittplatta


Part list - Seat

A01 Sittplatta endast träplatta
Seat woodenplate whitout fabric

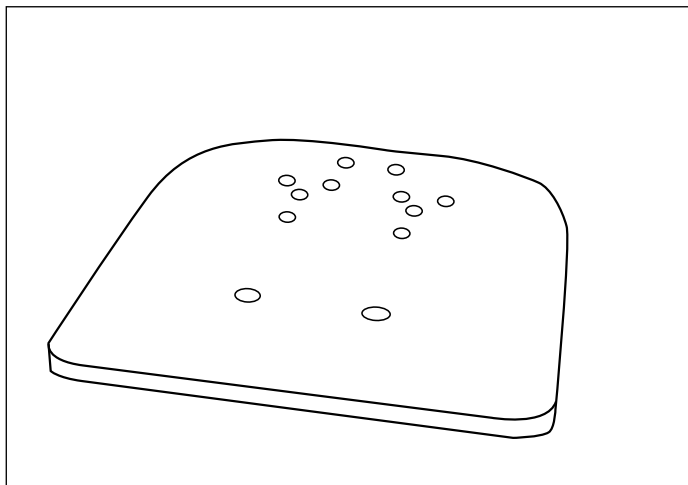


Pos	Art.nr	Benämning
Pos	Art.no	Name
A01 1	ST100890	Sits ErgoMedic 48x53 Träplatta u Stoppning Seat ErgoMedic 48x53 Woodenplate Without fabric
2	ST101390	Sits ErgoMedic 44x53 Träplatta u Stoppning Seat ErgoMedic 44x53 Woodenplate Without fabric
3	ST101590	Sits ErgoMedic 44x48 Träplatta u Stoppning 150900 Seat ErgoMedic 44x48 Woodenplate Without fabric
4	ST101090	Sits ErgoMedic 48x48 Träplatta u Stoppning 150901 Seat ErgoMedic 48x48 Woodenplate Without fabric
5	ST102090	Sits ErgoMedic 44x43 Träplatta u Stoppning 150902 Seat ErgoMedic 44x43 Woodenplate Without fabric
6	ST102590	Sits ErgoMedic 40x48 Träplatta u Stoppning 150909 Seat ErgoMedic 40x48 Woodenplate Without fabric
7	ST103090	Sits ErgoMedic 40x43 Träplatta u Stoppning 150903 Seat ErgoMedic 40x43 Woodenplate Without fabric
8	ST103590	Sits ErgoMedic 40x39 Träplatta u Stoppning 150904 Seat ErgoMedic 40x39 Woodenplate Without fabric
9	ST104090	Sits ErgoMedic 36x43 Träplatta u Stoppning 150907 Seat ErgoMedic 36x43 Woodenplate Without fabric
10	ST104590	Sits ErgoMedic 36x39 Träplatta u Stoppning 150905 Seat ErgoMedic 36x39 Woodenplate Without fabric
11	ST105090	Sits ErgoMedic 33x35 Träplatta u Stoppning 150906 Seat ErgoMedic 33x35 Woodenplate Without fabric
12	ST105590	Sits ErgoMedic 29x32 Träplatta u Stoppning 150908 Seat ErgoMedic 29x32 Woodenplate Without fabric

B01 Sittplatta Träplatta med antiglid
Seat woodenplate with antiglide

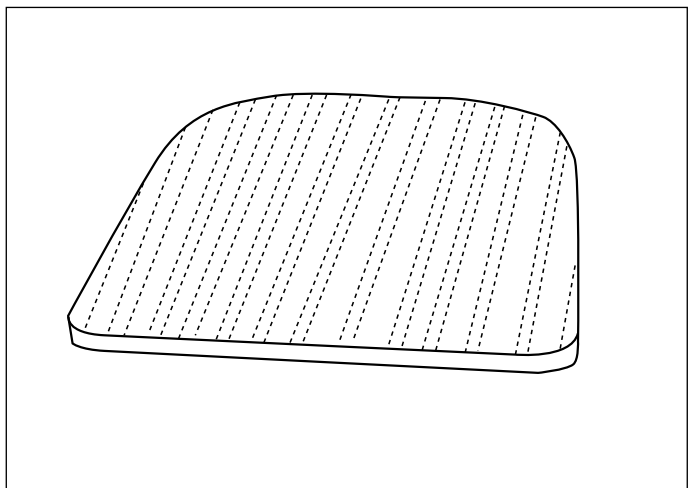

B01 1	ST100861	Sits ErgoMedic 48x53 Antiglid matta Seat ErgoMedic 48x53 Antiglide
2	ST101361	Sits ErgoMedic 44x53 Antiglid matta Seat ErgoMedic 44x53 Antiglide
3	ST101561	Sits ErgoMedic 44x48 Antiglid matta 150610 Seat ErgoMedic 44x48 Antiglide
4	ST101061	Sits ErgoMedic 48x48 Antiglid matta 150611 Seat ErgoMedic 48x48 Antiglide
5	ST102061	Sits ErgoMedic 44x43 Antiglid matta 150612 Seat ErgoMedic 44x43 Antiglide
6	ST102561	Sits ErgoMedic 40x48 Antiglid matta 150619 Seat ErgoMedic 40x48 Antiglide
7	ST103061	Sits ErgoMedic 40x43 Antiglid matta 150613 Seat ErgoMedic 40x43 Antiglide
8	ST103561	Sits ErgoMedic 40x39 Antiglid matta 150614 Seat ErgoMedic 40x39 Antiglide
9	ST104061	Sits ErgoMedic 36x43 Antiglid matta 150617 Seat ErgoMedic 36x43 Antiglide
10	ST104561	Sits ErgoMedic 36x39 Antiglid matta 150615 Seat ErgoMedic 36x39 Antiglide
11	ST105061	Sits ErgoMedic 33x35 Antiglid matta 150616 Seat ErgoMedic 33x35 Antiglide
12	ST105561	Sits ErgoMedic 29x32 Antiglid matta 150618 Seat ErgoMedic 29x32 Antiglide

C01

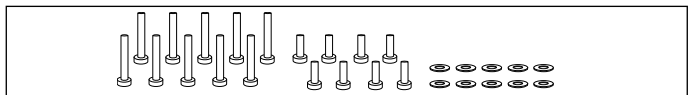


C01 803269 Skruvsats f montering av sittplatta
Screw kit for seat assembly

Stycklista - Sittplatta Coxit

Part list - Seat Coxit


D01 Sittplatta Coxit endast träplatta
Seat Coxit woodenplate whitout fabric

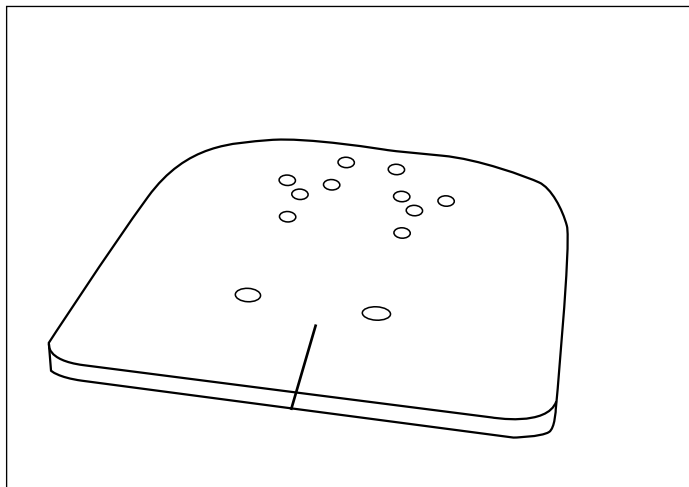

Pos	Art.nr	Benämning
Pos	Art.no	Name


D01	1	ST131590	Sits ErgoM Coxit 44x48 Träplatta u Stoppning
		160900	Seat ErgoM Coxit 44x48 Woodenplate Without fabric
	2	ST131090	Sits ErgoM Coxit 48x48 Träplatta u Stoppning
		160901	Seat ErgoM Coxit 48x48 Woodenplate Without fabric
	3	ST132090	Sits ErgoM Coxit 44x43 Träplatta u Stoppning
		160902	Seat ErgoM Coxit 44x43 Woodenplate Without fabric
	4	ST132590	Sits ErgoM Coxit 40x48 Träplatta u Stoppning
		160909	Seat ErgoM Coxit 40x48 Woodenplate Without fabric
	5	ST133090	Sits ErgoM Coxit 40x43 Träplatta u Stoppning
		160903	Seat ErgoM Coxit 40x43 Woodenplate Without fabric
	6	ST133590	Sits ErgoM Coxit 40x39 Träplatta u Stoppning
		160904	Seat ErgoM Coxit 40x39 Woodenplate Without fabric

E01 Sittplatta Träplatta Coxit med antiglid
Seat ErgoMedic Coxit with antiglide

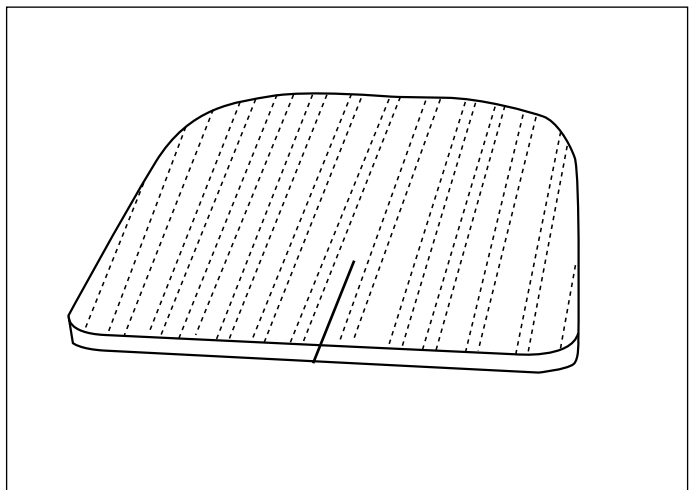

E01	1	ST131561	Sits ErgoMedic Coxit 44x48 Antiglid matta
		160610	Seat ErgoMedic Coxit 44x48 Antiglide
	2	ST131061	Sits ErgoMedic Coxit 48x48 Antiglid matta
		160611	Seat ErgoMedic Coxit 48x48 Antiglide
	3	ST132061	Sits ErgoMedic Coxit 44x43 Antiglid matta
		160612	Seat ErgoMedic Coxit 44x43 Antiglide
	4	ST132561	Sits ErgoMedic Coxit 40x48 Antiglid matta
		160619	Seat ErgoMedic Coxit 40x48 Antiglide
	5	ST133061	Sits ErgoMedic Coxit 40x43 Antiglid matta
		160613	Seat ErgoMedic Coxit 40x43 Antiglide
	6	ST133561	Sits ErgoMedic Coxit 40x39 Antiglid matta
		160614	Seat ErgoMedic Coxit 40x39 Antiglide

F01

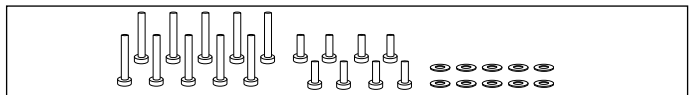


F01 [803269](#) Skruvsats f montering av sittplatta
Screw kit for seat assembly

Stycklista - Sittkryss

Part list - Seatframe


A01 Sittkryss vinkelfast
Seatframe without angle adjustment

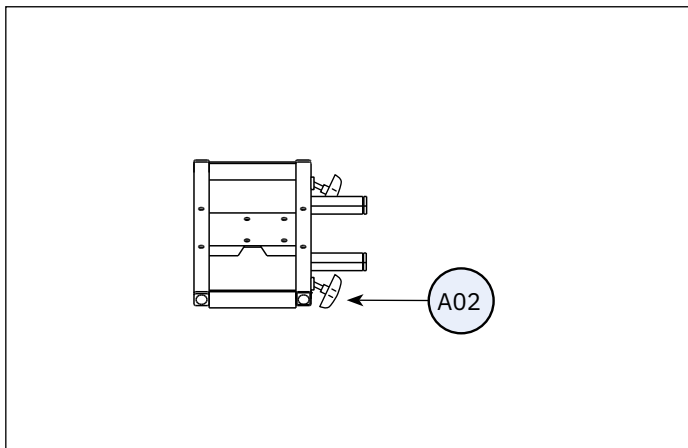

Pos Art.nr Benämning
Pos Art.no Name


A01	1	800852	Sittkryssmekanism 9000/9100 Vf Br40-54 cm Seatframe 9000/9100 without angle adjustment 40-54 cm
	2	800853	Sittkryssmekanism 9100 Vf Br33-39 cm Seatframe 9100 without angle adjustment 33-39 cm
	3	803297	Sittkryssmekanism 9100 Vf Br25-32 cm Seatframe 9100 without angle adjustment 25-32 cm
A02		803005	Stjärnratt Plus M8x40 (Braga gummerad) Gummed knob PLUS M8x40

B01 Sittkryss vinkelställbart
Angle adjustable seatframe

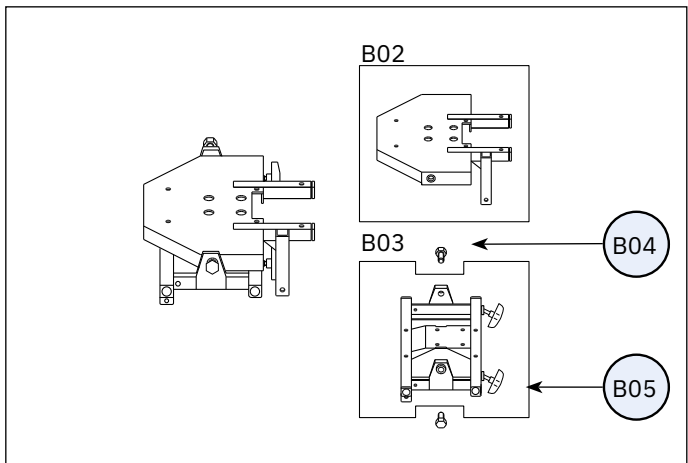


B01	1	801703	Sittkryssmekanism 9100 Vs Br40-54 cm (Vuxen) Seatframe 9100 angle adjustment width 40-54 cm
	2	801824	Sittkryssmekanism 9100 Vs Br33-39 cm Seatframe 9100 angle adjustment width 33-39 cm
B02		800857	Sittkryss Vs Övre 9000/9100 Br33-54 cm Seatframe 9000/9100 angle adj. upper sect. width 33-54 cm
B03	1	800855	Sittkryss Vs Undre 9100/9800 Br40-54 cm (Vuxen) Seatframe 9100/9800 angle adj. lower sect. width 40-54 cm
	2	800856	Sittkryss Vs Undre 9100/9800 Br33-39 cm (Barn) Seatframe 9100/9800 angle adj. lower sect. width 33-39 cm
B04		801224	Lagerskruv vinkelställb. Screw angle adjustable
B05		803005	Stjärnratt Plus M8x40 (Braga gummerad) Gummed knob PLUS M8x40

C01 Sittkryss allvinkel
Allangle seatframe

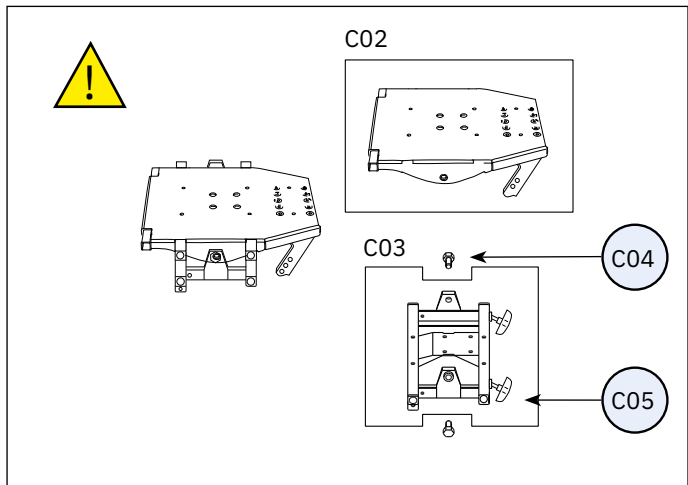

C01	1	803070	Sittkryss 9000 Vs -15/+23 gr. Överdel/Underdel Br40-54 Vuxen Seatframe 9000 adj. angle 15-23° upper/lower width 40-54
	2	803071	Sittkryss 9000 Vs -15/+23 gr. Överdel/Underdel Br33-39 Barn Seatframe 9000 adj. angle 15-23° upper/lower width 33-39
C02	1	802827	Sittkryss 9000 Vs -15/+23 gr. Överdel Br40-54 Vuxen Seatframe 9000 adj. angle 15/23° upperpart width 40-54
	2	802828	Sittkryss 9000 Vs -15/+23 gr. Överdel Br33-39 Barn Seatframe 9000 adj. angle 15/-23° upperpart width 33-39
C03	1	800855	Sittkryss Vs Undre 9100/9800 Br40-54 (Vuxen) Seatframe 9100/9800 angle adj. lower section width 40-54
	2	800856	Sittkryss Vs Undre 9100/9800 Br33-39 (Barn) Seatframe 9100/9800 angle adj. lower section width 33-39
C04		801224	Lagerskruv vinkelställb. Screw angle adjustable
C05		803005	Stjärnratt Plus M8x40 (Braga gummerad) Gummed knob PLUS M8x40

D01 Skruvsats för lyftomat
Screw kit for liftomat assembly

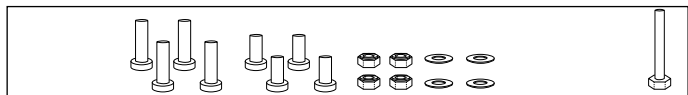


D01 803268 Skruvsats f montering av manuell eller el-lyftomat
Screw kit for liftomat assembly or electric liftomat


Stycklista - Sittkryss

Part list - Seatframe


E01 Sittkryss vinkelställbart
Angle adjustable seatframe

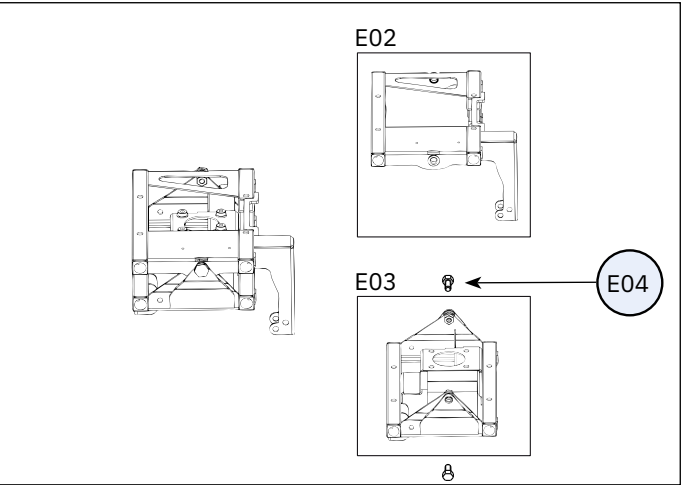

F01 Sittkryss vinkelställbart Mini
Angle adjustable seatframe Mini

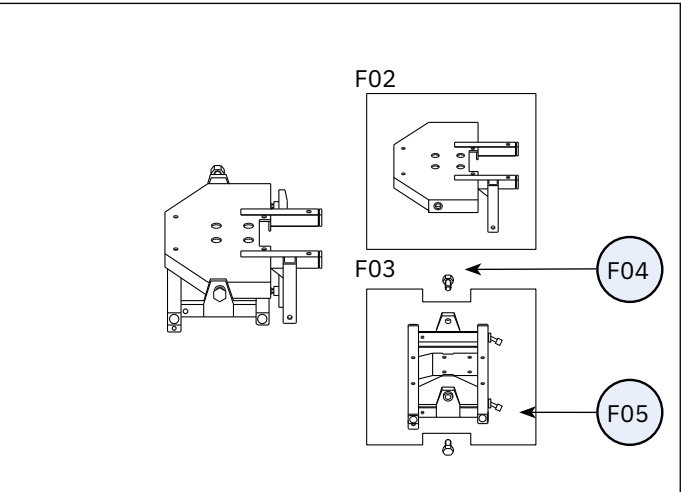

G01 Skruvsats för lyftomat
Screw kit for liftomat assembly

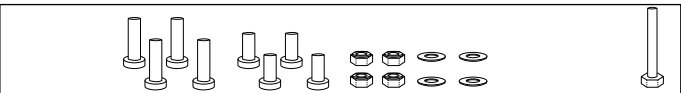

Pos	Art.nr	Benämning
Pos	Art.no	Name
E01	803527	Sittkryssmek 9000/EL Vs-15/+15 Br29-33 Max brukarvikt 55 kg Seatframe 9000/EL angle adj. -15/+15 width 29-39 cm max user weight 55 kg
E02	804605	Sittkryss Vs Under 9000 -15/+15 Br29-33 Mini 12V Seatframe lower sect. 9000 -15/+15° width 29-33 12V
E03	804563	Sittkryss Vs Över 6100/9000 -15/+15 Br 29-33 Mini/Barn Seatframe upper sect. 6100/9000 -15/+15° width 29-33
E04	803578	Lagerskruv f vinkelställbara sittkryss M8 gänga Screw for angle adjustable seat frames M8


F01	802770	Sittkryss 9000 Mini Vs kpl Br25-32 (Barn) Seatframe 9000 Mini angle adj. cpl. width 25-32 (Child)
F02	803164	Sittkryss 9000 Mini Vs Överdel Br25-32 (Barn) Seatframe 9000 Mini angle adj. upper part width 25-32 (Child)
F03	803163	Sittkryss 9000 Mini Vs Underdel Br25-32 (Barn) Seatframe 9000 Mini angle adj. lower part width 25-32 (Child)
F04	801224	Lagerskruv vinkelställbar Screw angle adjustable
F05	800371	MLC6S M8x25 FZB 8.8 MLC6S M8x25 FZB 8.8

G01	803268	Skruvsats f monteringen av manuell eller el-lyftomat Screw kit for liftomat assembly or electric liftomat
-----	--------	--


Stycklista - Sittkryss Coxit

Part list - Seatframe Coxit


A01 Sittkryss vinkelfast coxit
Seatframe coxit without angle adjustment

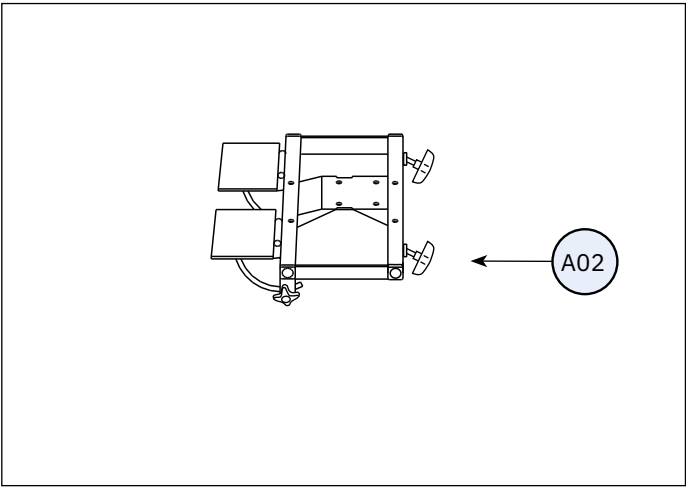

B01 Sittkryss vinkelställbart coxit
Angle adjustable coxit seatframe

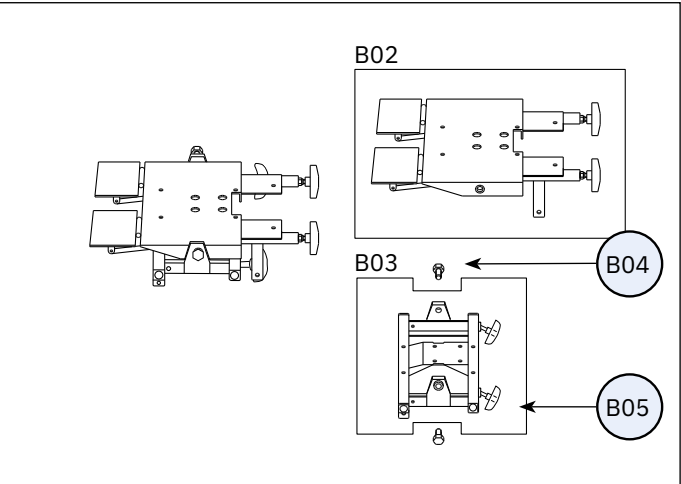

C01 Skruvsats för lyftomat
Screw kit for liftomat assembly

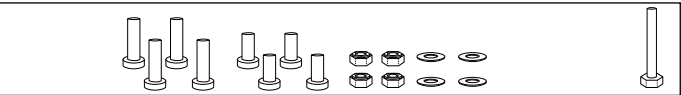


Pos Pos	Art.nr Art.no	Benämning Name
A01	800854	Sittkryssmekanism 9800 Vf Br40-54 (Coxit) Seatframe 9800 without angle adjustment 40-54 cm
A02	803005	Stjärnratt Plus M8x40 (Braga gummerad) Gummed knob PLUS M8x40
B01	801953	Sittkryssmekanism 9800 Vs Br40-54 cm (Coxit) Seatframe 9800 angle adjustment width 40-54 cm
B02	800858	Sittkryss Vs Övre 9700+9800 Br40-54 cm (Coxit) Seatframe 9700+9800 angle adjustment upper section width 40-54
B03	800855	Sittkryss Vs Undre 9100/9800 Br40-54 cm (Vuxen) Seatframe 9100/9800 angle adj. lower section width 40-54
B04	801224	Lagerskruv vinkelställb. Screw angle adjustable
B05	803005	Stjärnratt Plus M8x40 (Braga gummerad) Gummed knob PLUS M8x40

C01 803268 Skruvsats f montering av manuell eller el-lyftomat
Screw kit for liftomat assembly or electric liftomat

Stycklista - Reglage för sitstilt

Part list - Controls for seat angle adjustment

A

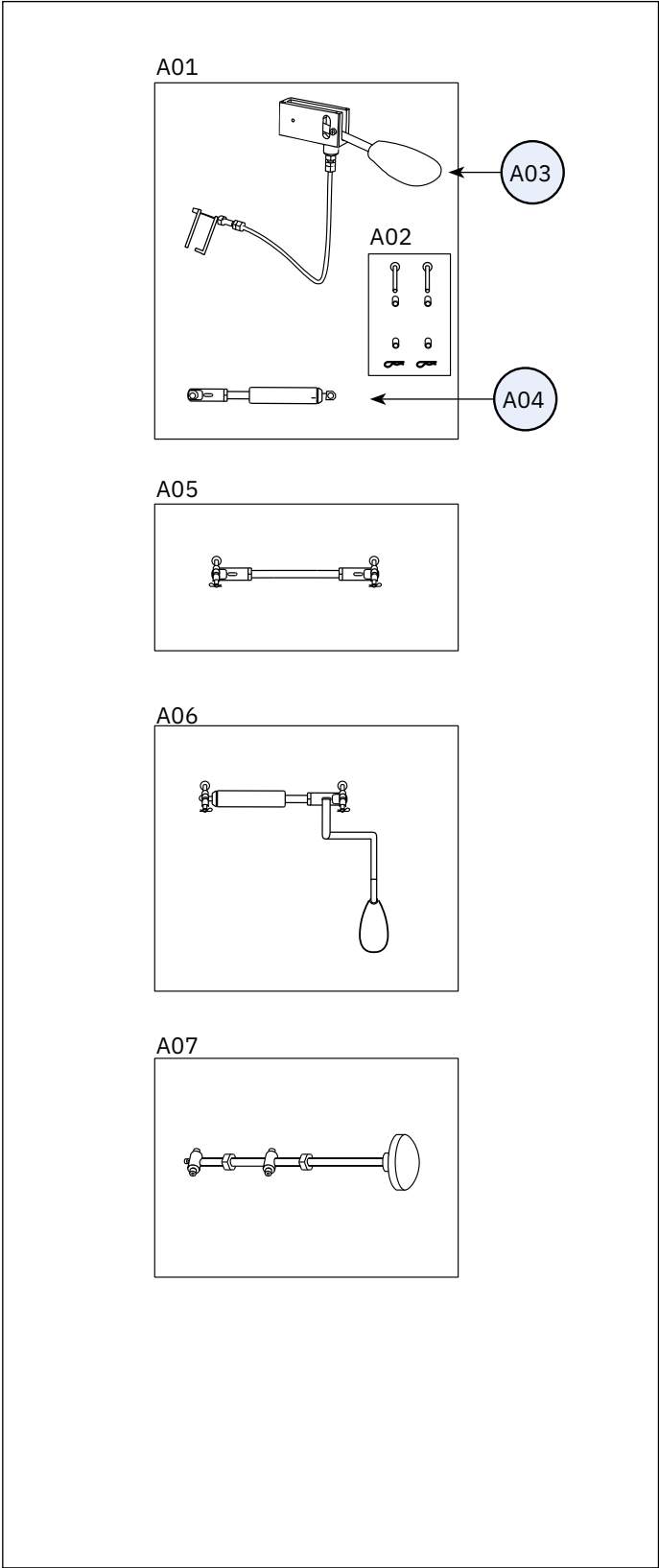


Pos	Art.nr	Benämning
Pos	Art.no	Name
A01	SAR31 802767	Sitstiltreglage PLUS u armstöd inkl gasfjäder Seat angle control PLUS under armrest including gasspring
A02	803508	Cylindriskbult Låsnål Distans för sitstiltkolv Cylindrical bolt, locking pin spacer for seat angle piston
A03	803265	Sitstiltreglage PLUS u armstöd exklusive gasfjäder Seat angle control excluding gas spring
A04	801145	Gasfjäder 250 N/ 46 mm t Tiltsits Gasspring 250 N/ 46 mm for seat angle
A05	SAR10 802236	Sitstiltkit Vf f vinkelkruss ersätter vev/gas/elvinkel Seat angle kit for seatframe with fixed angle, replaces crank/gasspring/electric angling
A06	SAR30 803267	Sitstiltreglage PLUS u sits inkl gasfjäder Seat angle control PLUS under seat including gasspring
A07	SAR20 800829	Vevreglage sitstilt 9000 Komplet sats Handlecontrol seat angle 9000 complete kit

Reglage för elrelgerad sitstilt, se sid 35.
Control for electric seat angle adjustment, view page 35.

Stycklista - Reglage för sitthöjd

Part list - Controls for seat height

B

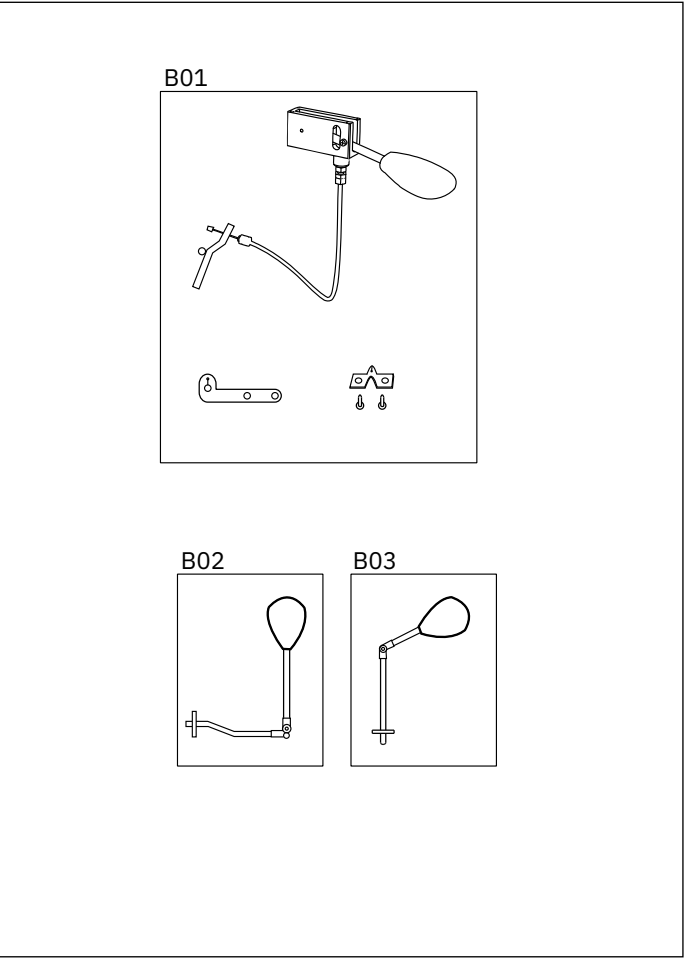

Pos	Art.nr	Benämning
Pos	Art.no	Name
B01 1	803116	Sitthöjdsreglage under armstöd f vf i PLUS-utförande Seat height control under armrest for fixed seat angle
2	803117	Sitthöjdsreglage under armstöd f vs i PLUS-utförande Seat height control under armrest for seat angle adjustment
3	803506	Sitthöjdsreglage under armstöd f vf/vs i PLUS-utförande Seat height control under armrest for both fixed seat angle and seat angle adjustment


B02 1	802908	Sitthöjdsreglage u sits f Vs 9000 Vuxen PLUS Hö/Vä Seat height control under seat for seat angle adjustment, Adult
2	803016	Sitthöjdsreglage u sits f Vs 9000 Barn PLUS Hö/Vä Seat height control under seat for seat angle adjustment, Child
3	803017	Sitthöjdsreglage u sits f Vs 9000 Mini PLUS Hö/Vä Seat height control under seat for seat angle adjustment, Mini

B03 1	802974	Sitthöjdsreglage u sits f Vf 9000 Vuxen PLUS Hö/Vä Seat height control under seat for fixed seat angle, Adult
2	803033	Sitthöjdsreglage u sits f Vf 9000 Barn PLUS Hö/Vä Seat height control under seat for fixed seat angle, Child


Stycklista - Ellyftomat

Part list - Ellyftomat


A Utan rotation Without rotation

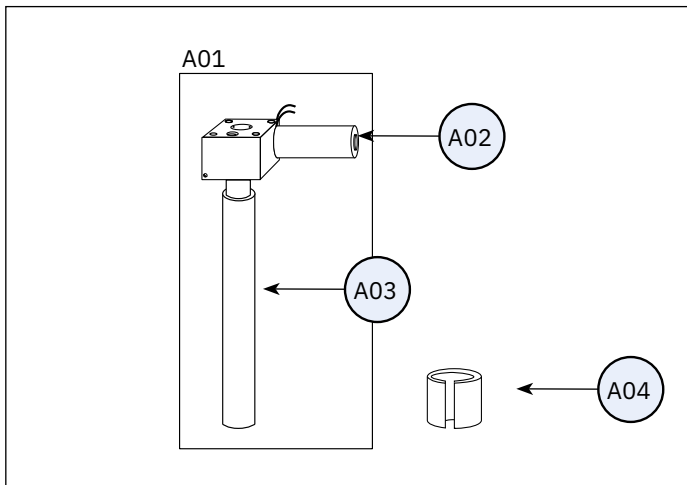


B Rotation för vinkelfast sittkryss Rotation for non angle adjustable seatframe

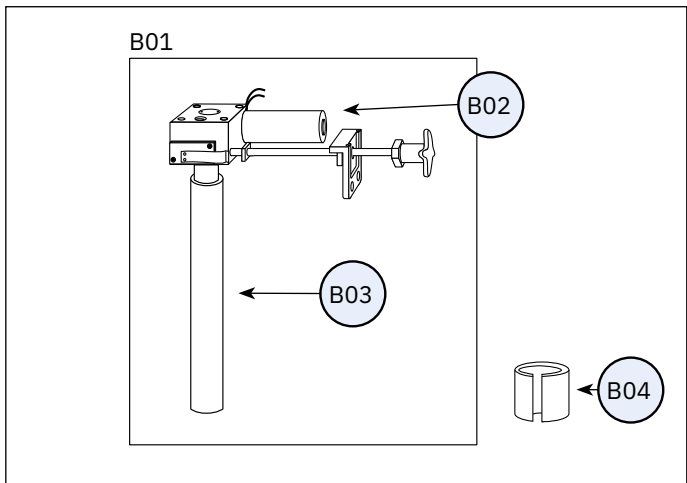

C Rotation för vinkelställbart sittkryss Rotation for angle adjustable seatframe

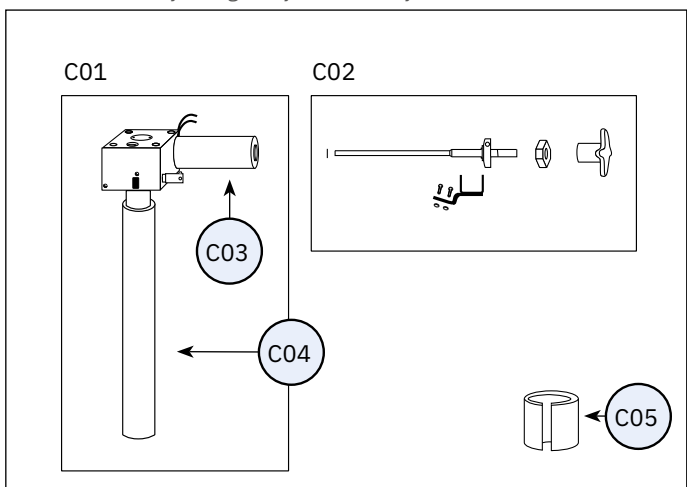

D01 Skruv sats för lyftomat Screw kit for liftomat assembly

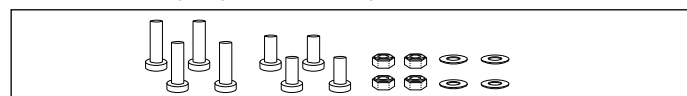


Pos	Art.nr	Benämning
Pos	Art.no	Name
A01	1 801094	Ellyftomat 28 cm Electric height adjustment 28 cm
	2 801106	Ellyftomat 20 cm Electric height adjustment 20 cm
	3 804369	Ellyftomat 15 cm Electric height adjustment 15 cm
A02	800271	Motor M48x50/I 12Vdc 6400rpm 6400rpm Motor 6400 rpm
A03	1 802524	Ytterrör+Spärrör+Kil linjärstyrning 280 Outer tube+track tube 280
	2 802525	Ytterrör+Spärrör+Kil linjärstyrning 200 Outer tube+track tube 200
	3 804388	Ytterrör+Spärrör+Kil linjärstyrning 150 Outer tube+track tube 150
A04	801177	Plastinsats för Ellyftomat Klämförbandsinsats Plastic inset for Electric liftomat clamps lining
B01	1 801095	Ellyftomat 28 cm Rotation Höger Electric height adjustment 28 cm Rotation right
	2 801101	Ellyftomat 28 cm Rotation Vänster Electric height adjustment 28 cm Rotation left
	3 801107	Ellyftomat 20 cm Rotation Höger Electric height adjustment 20 cm Rotation right
	4 801114	Ellyftomat 20 cm Rotation Vänster Electric height adjustment 20 cm Rotation left
	5 801110	Ellyftomat 20 cm Rotation Höger t sits 40 cm och < Electric height adjustment 20 cm Rot.right, to seat 40 cm or <
	6 801097	Ellyftomat 20 cm Rotation Vänster t sits 40 cm och < Electric height adjustment 20 cm Rot.left, to seat 40 cm or <
B02	800271	Motor M48x50/I 12Vdc 6400rpm 6400rpm Motor 6400 rpm
B03	1 802839	Ytterrör+Spärrör f rotation + Kil linjärstyrning 280 Outer tube+track tube 280
	2 802840	Ytterrör+Spärrör f rotation + Kil linjärstyrning 200 Outer tube+track tube 200
B04	801177	Plastinsats för Ellyftomat Klämförbandsinsats Plastic inset for Electric liftomat clamps lining
C01	1 801098	Ellyftomat 28 cm Rotation Höger f böjlig axel Electric height adjustment 28 cm Rotation right f flexible axle
	2 801103	Ellyftomat 28 cm Rotation Vänster f böjlig axel Electric height adjustment 28 cm Rotation left f flexible axle
	3 801111	Ellyftomat 20 cm Rotation Höger f böjlig axel Electric height adjustment 20 cm Rotation right f flexible axle
	4 801117	Ellyftomat 20 cm Rotation Vänster f böjlig axel Electric height adjustment 20 cm Rotation left f flexible axle
C02	801133	Axel Rot.spärr Böjlig El- lyftomat kpl Axis bendable
C03	800271	Motor M48x50/I 12Vdc 6400rpm 6400rpm Motor 6400 rpm
C04	1 802839	Ytterrör+Spärrör f rot + Kil linjärstyrning 280 Outer tube+track tube 280
	2 802840	Ytterrör+Spärrör f rot+Kil linjärstyrning 200 Outer tube+track tube 200
C05	801177	Plastinsats för Ellyftomat Klämförbandsinsats Plastic inset for Electric liftomat clamps lining
D01	803268	Skruvsats f montering av manuell eller el-lyftomat Screw kit for liftomat assembly or electric liftomat

Stycklista - Fixlyftomat


Part list - Fixlyftomat

E01 Fixlyftomat
Fixliftomat

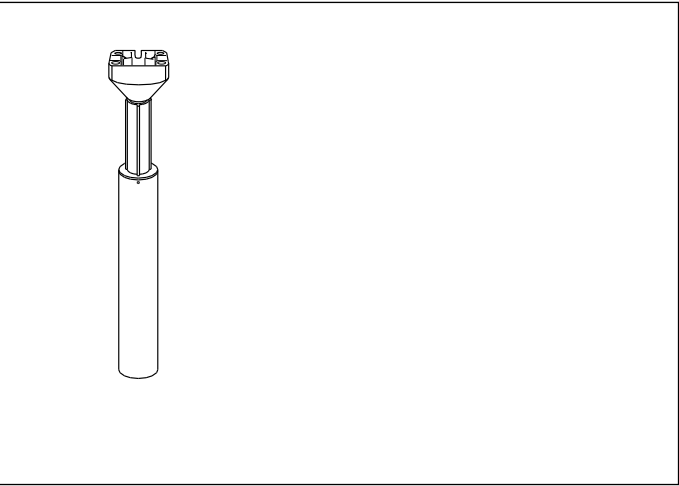


Pos	Art.nr	Benämning
Pos	Art.no	Name
E01 1	803987	Fixlyftomat 200mm 55-90 kg tryck m Alufäste <i>Fixliftomat 200mm 55-90 kg with aluminium grip</i>
2	803985	Fixlyftomat 200mm <55 kg tryck m Alufäste <i>Fixliftomat 200mm <55-90 kg with aluminium grip</i>
3	803989	Fixlyftomat 200mm 90-130 kg tryck m Alufäste <i>Fixliftomat 200mm 90-130 kg with aluminium grip</i>
4	803981	Fixlyftomat 140mm 55-90 kg tryck m Alufäste <i>Fixliftomat 140mm 55-90 kg with aluminium grip</i>
5	803979	Fixlyftomat 140mm <55-90 kg tryck m Alufäste <i>Fixliftomat 140mm <55-90 kg with aluminium grip</i>
6	803983	Fixlyftomat 140mm 90-130 kg tryck m Alufäste <i>Fixliftomat 140mm 90-130 kg with aluminium grip</i>

F Fixlyftomat med rotation
Fixliftomat with rotation

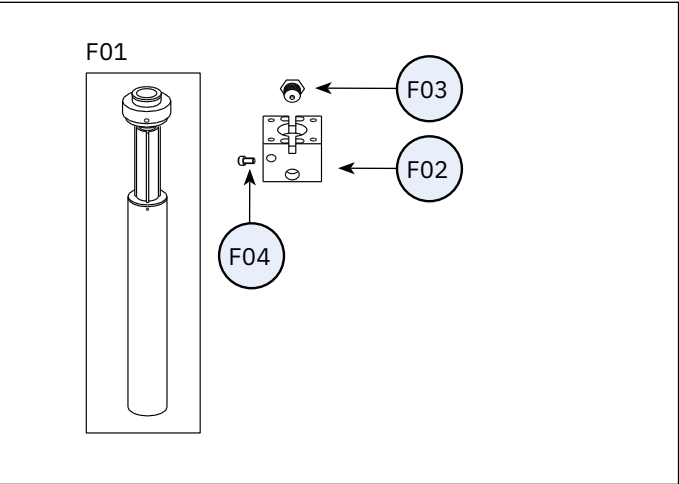


F01 1	803988	Fixlyftomat 200mm 55-90 kg tryck m Rotation <i>Fixliftomat 200mm 55-90 kg with rotation</i>
2	803986	Fixlyftomat 200mm <55 kg tryck m Rotation <i>Fixliftomat 200mm <55-90 kg with rotation</i>
3	803990	Fixlyftomat 200mm 90-130 kg tryck m Rotation <i>Fixliftomat 200mm 90-130 kg with rotation</i>
4	803982	Fixlyftomat 140mm 55-90 kg tryck m Rotation <i>Fixliftomat 140mm 55-90 kg with rotation</i>
5	803980	Fixlyftomat 140mm 200N <55 kg tryck m Rotation <i>Fixliftomat 140mm <55-90 kg with rotation</i>
6	803984	Fixlyftomat 140mm 90-130 kg tryck m Rotation <i>Fixliftomat 140mm 90-130 kg with rotation</i>
F02	801055	Hus Manuell Vs. std.+rot <i>House</i>
F03	801225	Låsskruv Fixlyft M18x1 <i>Locking screw fixliftomat M18x1</i>
F04	800414	MC6S M5x10 O.B.H 12.9 Insexskruv M5x10 <i>MC6S M5x10 O.B.H 12.9 Insexskruv M5x10</i>

G Spakar för rotation
Levers for rotation

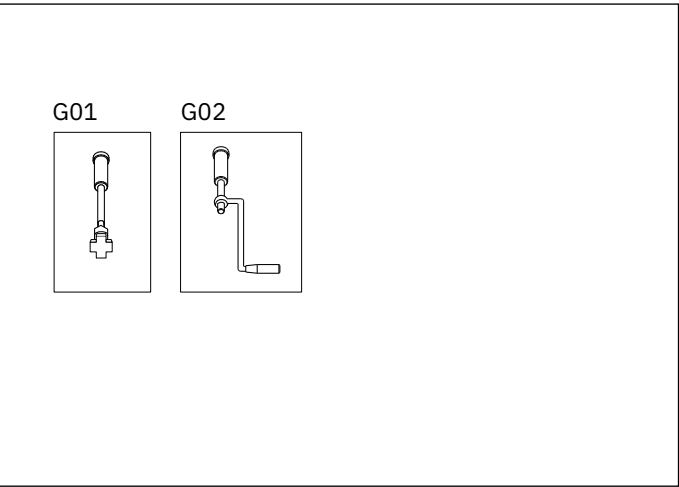

G01	801151	Rotation låsspak t Vf. Sits manuell <i>Rotationlock lever for non adjustable manual seat</i>
G02	801545	Rotation låsspak kpl.Vs. Sits manuell <i>Rotationlock lever for seat angle adjustment. Manual seat</i>


H01 Skruvsats för lyftomat
Screw kit for liftomat assembly

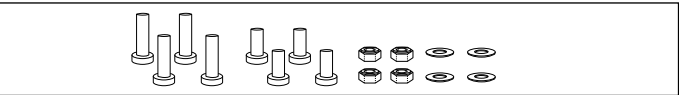


H01	803268	Skruvsats f montering av manuell eller el-lyftomat <i>Screw kit for liftomat assembly or electric liftomat</i>
-----	--------	---

Stycklista - Ryggplatta Part list - Backrest

A Ryggar ErgoMedic
Backrest ErgoMedic

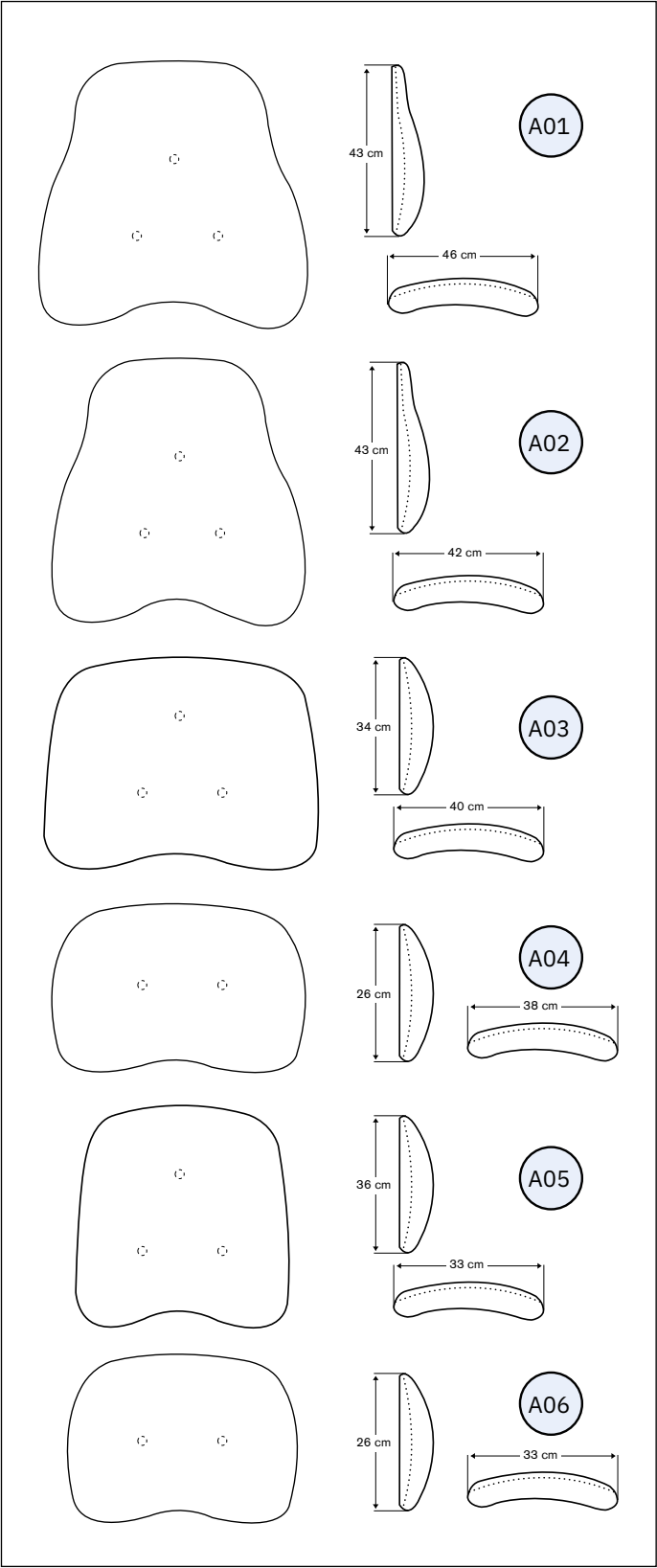


B01 Skruv sats för montering av rygg och ryggfällning
Screw kit for backrest assembly

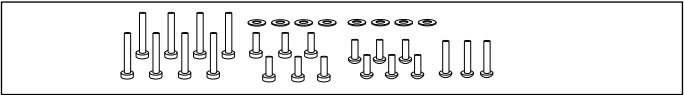


Pos	Art.nr	Benämning
Pos	Art.no	Name
A01	1 BR101046	Rygg ErgoMedic 46x43 Plysch Grå Back ErgoMedic 46x43 Plush Grey
	2 BR131046	Rygg ErgoMedic Support 46x43 Plysch Grå Back ErgoMedic Support 46x43 Plush Grey
A02	1 BR101546	Rygg ErgoMedic 42x43 Plysch Grå 210468 Backrest ErgoMedic 42x43 Plush Grey
	2 BR111546	Rygg ErgoMedic 42x43 Plysch Grå Slowrec. 215468 Back ErgoMedic 42x43 Plush Grey Slowrec.
	3 BR131546	Rygg ErgoMedic Support 42x43 Plysch Grå Back ErgoMedic Support 42x43 Plush Grey
	4 BR132046	Rygg ErgoMedic Support 35x43 Plysch Grå Back ErgoMedic Support 35x43 Plush Grey
A03	1 BR103046	Rygg ErgoMedic 40x34 Plysch Grå 210461 Backrest ErgoMedic 40x34 Plush Grey
	2 BR303046	Rygg ErgoM. f bålstöd 40x34 Plysch Grå 211461 Backr. ErgoM. trunks. 40x34 Plush Grey
	3 BR113046	Rygg ErgoMedic 40x34 Plysch Grå Slowrec. 215461 Back ErgoMedic 40x34 Plush Grey Slowrec.
	4 BR313046	Rygg ErgoM. f bålstöd 40x34 Plysch Grå Slowrec. 216461 Backr. ErgoM. trunks. 40x34 Plush Grey Slowrec.
A04	1 BR105546	Rygg ErgoMedic 38x26 Plysch Grå 210460 Backrest ErgoMedic 38x26 Plush Grey
	2 BR115546	Rygg ErgoMedic 38x26 Plysch Grå Slowrec. 215460 Back ErgoMedic 38x26 Plush Grey Slowrec.
A05	1 BR102546	Rygg ErgoMedic 33x36 Plysch Grå 210463 Backrest ErgoMedic 33x36 Plush Grey
	2 BR112546	Rygg ErgoMedic 33x36 Plysch Grå Slowrec. 215463 Back ErgoMedic 33x36 Plush Grey Slowrec.
A06	1 BR106046	Rygg ErgoMedic 33x26 Plysch Grå 210462 Backrest ErgoMedic 33x26 Plush Grey
	2 BR116046	Rygg ErgoMedic 33x26 Plysch Grå Slowrec. 215462 Back ErgoMedic 33x26 Plush Grey Slowrec.
B01	803270	Skruvsats f montering av rygg och ryggfällning Screw kit for backrest assembly

Stycklista - Ryggplatta Part list - Backrest

C Ryggar ErgoMedic
Backrest ErgoMedic

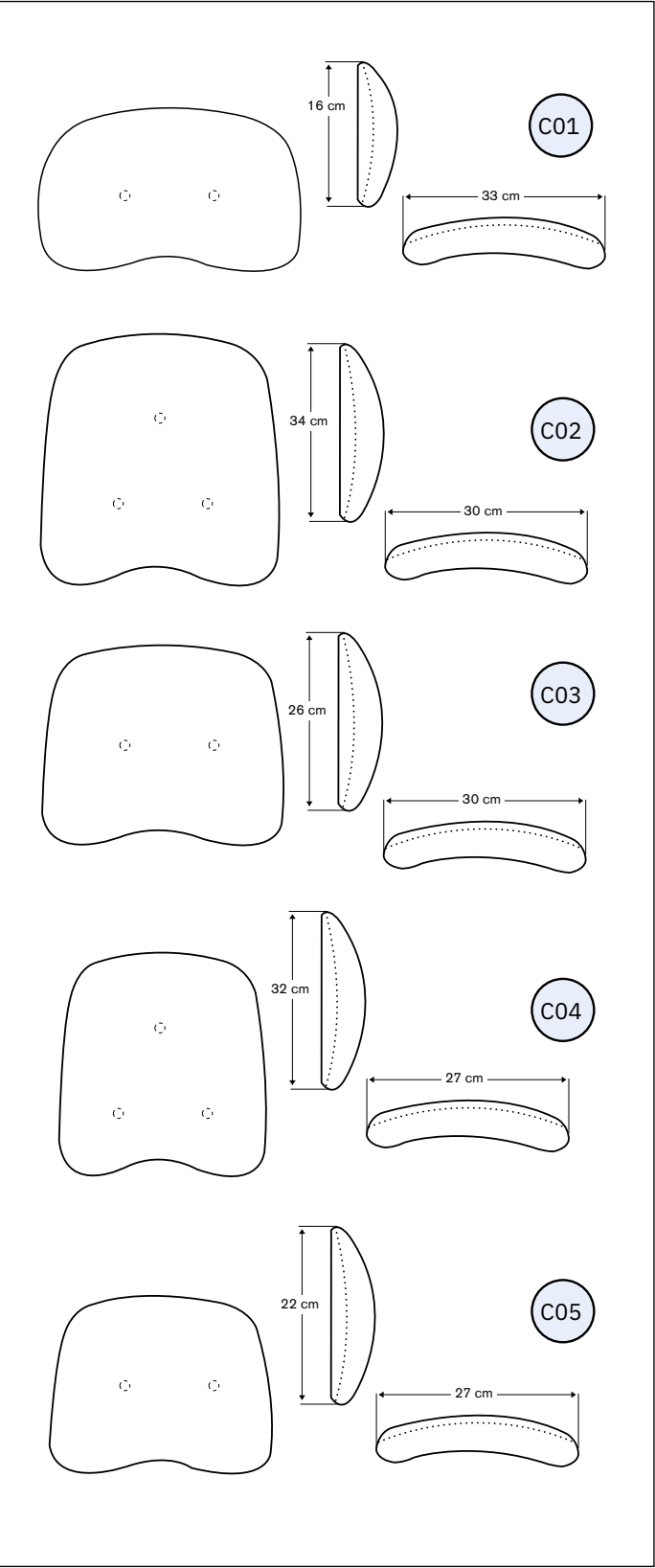

D01 Skruv sats för montering av rygg och ryggfällning
Screw kit for backrest assembly

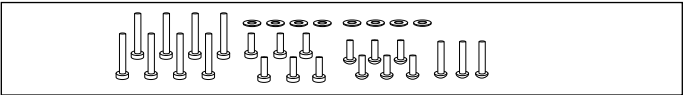

Pos	Art.nr	Benämning
Pos	Art.no	Name
C01	BR109046 230461	Magplatta/Rygg Classic 33x16 Plysch Grå Stomach support/Backrest Classic 33x16 Plush Grey

C02	1	BR103546 210465	Rygg ErgoMedic 30x34 Plysch Grå Backrest ErgoMedic 30x34 Plush Grey
	2	BR113546 215465	Rygg ErgoMedic 30x34 Plysch Grå Slowrec. Back ErgoMedic 30x34 Plush Grey Slowrec.

C03	1	BR106546 210464	Rygg ErgoMedic 30x26 Plysch Grå Backrest ErgoMedic 30x26 Plush Grey
	2	BR116546 215464	Rygg ErgoMedic 30x26 Plysch Grå Slowrec. Back ErgoMedic 30x26 Plush Grey Slowrec.

C04	1	BR104546 210467	Rygg ErgoMedic 27x32 Plysch Grå Backrest ErgoMedic 27x32 Plush Grey
	2	BR114546 215467	Rygg ErgoMedic 27x32 Plysch Grå Slowrec. Back ErgoMedic 27x32 Plush Grey Slowrec.


C05	1	BR107046 210466	Rygg ErgoMedic 27x22 Plysch Grå Backrest ErgoMedic 27x22 Plush Grey
	2	BR117046 215466	Rygg ErgoMedic 27x22 Plysch Grå Slowrec. Back ErgoMedic 27x22 Plush Grey Slowrec.

D01	803270	Skruvsats f montering av rygg och ryggfällning Screw kit for backrest assembly
-----	------------------------	---


Stycklista - Ryggplatta

Part list - Backrest

A Ryggar ErgoMedic PLUS
Backrest ErgoMedic PLUS

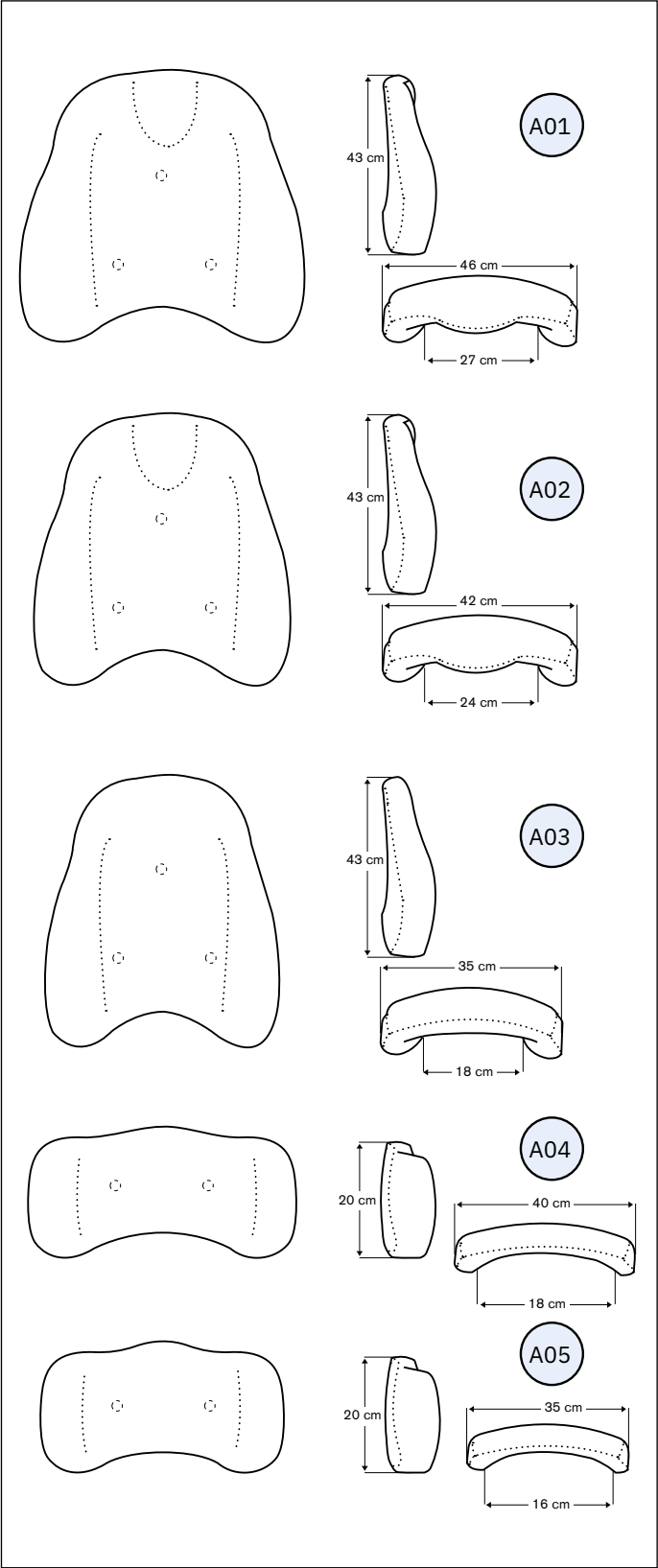

B01 Skruv sats för montering av rygg och ryggfällning
Screw kit for backrest assembly

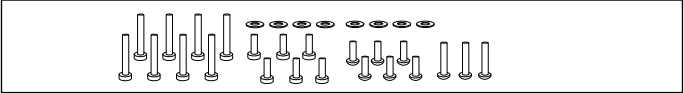

Pos	Art.nr	Benämning
Pos	Art.no	Name
A01 1	BR201046 251469	Rygg ErgoMedic PLUS 46x43 Plysch Grå Backrest ErgoMedic PLUS 46x43 Plush Grey
2	BR221046 256469	Rygg ErgoMedic 46x43 Plysch Grå Slowrec. Back ErgoMedic 46x43 Plush Grey Slowrec.

A02 1	BR201546 251468	Rygg ErgoMedic PLUS 42x43 Plysch Grå Backrest ErgoMedic PLUS 42x43 Plush Grey
2	BR221546 256468	Rygg ErgoMedic 42x43 Plysch Grå Slowrec. Back ErgoMedic 42x43 Plush Grey Slowrec.

A03 1	BR202046 251463	Rygg ErgoMedic PLUS 35x43 Plysch Grå Backrest ErgoMedic PLUS 35x43 Plush Grey
2	BR222046 256463	Rygg ErgoMedic 35x43 Plysch Grå Slowrec. Back ErgoMedic 35x43 Plush Grey Slowrec.

A04 1	BR207546 251460	Rygg ErgoMedic PLUS 40x20 Plysch Grå Backrest ErgoMedic PLUS 40x20 Plush Grey
2	BR227546 256460	Rygg ErgoMedic 40x20 Plysch Grå Slowrec. Back ErgoMedic 40x20 Plush Grey Slowrec.


A05 1	BR208046 251462	Rygg ErgoMedic PLUS 35x20 Plysch Grå Backrest ErgoMedic PLUS 35x20 Plush Grey
2	BR228046 256462	Rygg ErgoMedic 35x20 Plysch Grå Slowrec. Back ErgoMedic 35x20 Plush Grey Slowrec.

B01	803270	Skruvsats f montering av rygg och ryggfällning Screw kit for backrest assembly
-----	--------	---

Stycklista - Ryggplatta

Part list - Backrest

C Ryggar ErgoMedic PLUS
Backrest ErgoMedic PLUS

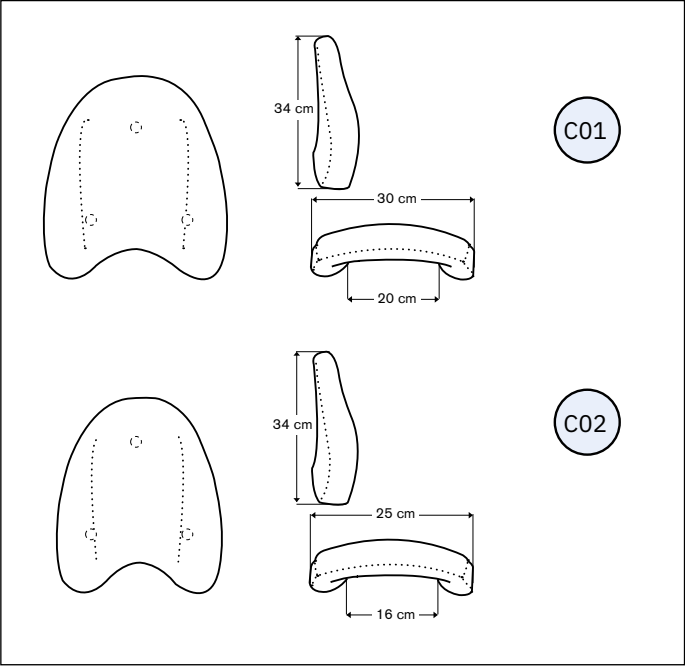


Pos	Art.nr	Benämning
Pos	Art.no	Name
C01	1 BR203546 251465	Rygg ErgoMedic PLUS 30x34 Plysch Grå Backrest ErgoMedic PLUS 30x34 Plush Grey
	2 BR223546 256465	Rygg ErgoMedic 30x34 Plysch Grå Slowrec. Back ErgoMedic 30x34 Plush Grey Slowrec.

C02	1 BR204046 251464	Rygg ErgoMedic PLUS 25x34 Plysch Grå Backrest ErgoMedic PLUS 25x34 Plush Grey
	2 BR224046 256464	Rygg ErgoMedic 25x34 Plysch Grå Slowrec. Back ErgoMedic 25x34 Plush Grey Slowrec.

Stycklista - Ryggplatta

Part list - Backrest


D Ryggar ErgoMedic
Backrest ErgoMedic

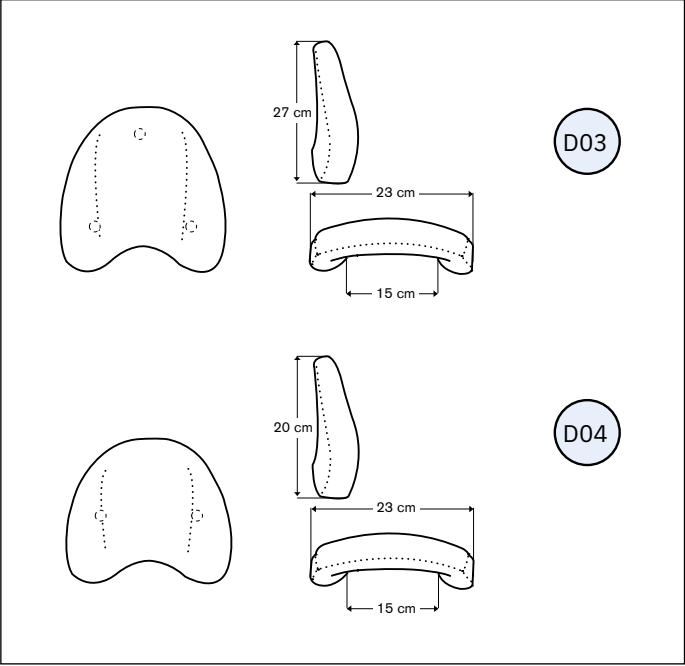

D03	BR105046 213461	Rygg ErgoMedic 23x27 Plysch Grå Backrest ErgoMedic 23x27 Plush Grey
-----	-----------------	--

D04	BR108546 213460	Rygg ErgoMedic 23x20 Plysch Grå Backrest ErgoMedic 23x20 Plush Grey
-----	-----------------	--

E01 Skruv sats för montering av rygg och ryggfällning
Screw kit for backrest assembly

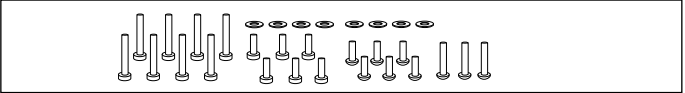


E01	803270	Skrivsats f montering av rygg och ryggfällning Screw kit for backrest assembly
-----	--------	---

Stycklista - Ryggplatta

Part list - Backrest

F Ryggar ErgoMedic PLUS med sidokil
Backrest ErgoMedic PLUS with wedge

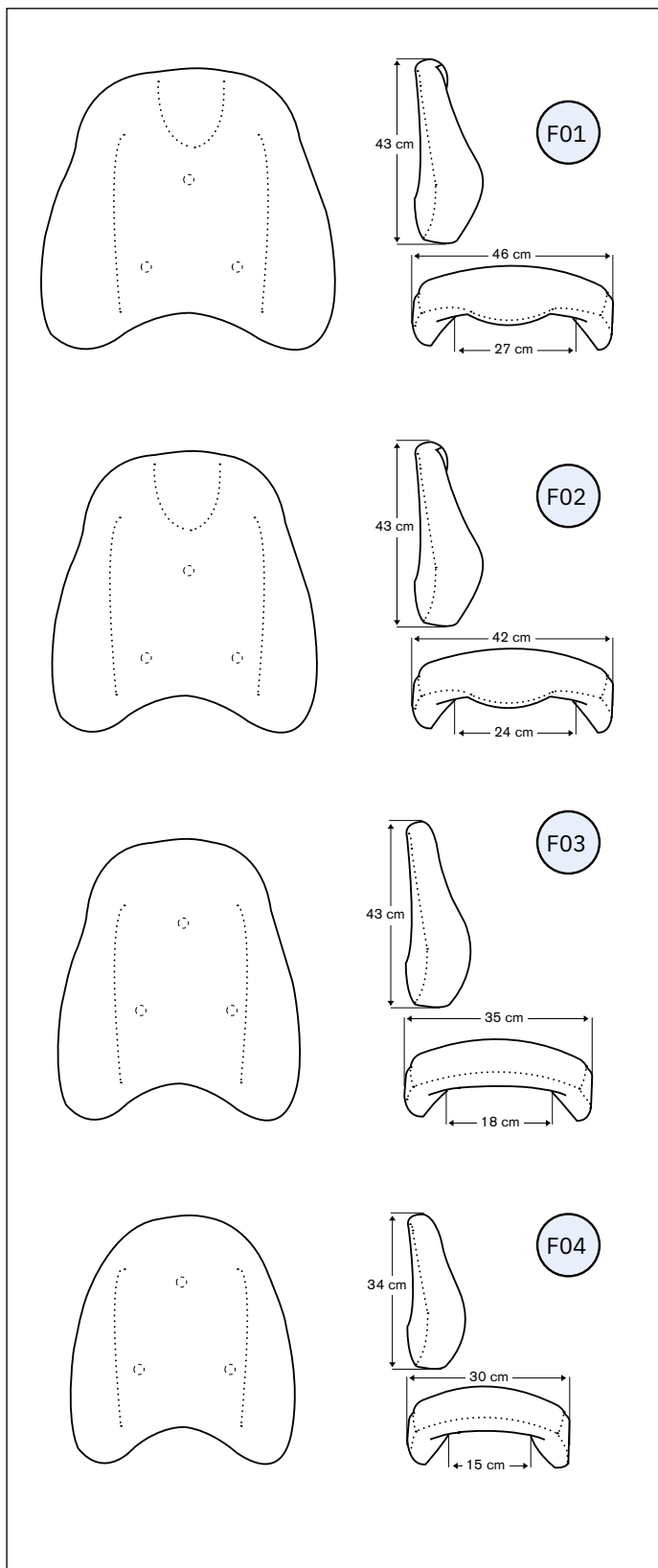

G01 Skruv sats för montering av rygg och ryggfällning
Screw kit for backrest assembly



Pos Art.nr Benämning
Pos Art.no Name

F01 1 [BR251046](#) Rygg EM PLUS m Sidokil 46x43 Plysch Grå
252469 Backrest EM PLUS w sidewedge 46x43 Plush Grey
2 [BR351046](#) Rygg EM PLUS med förstärkt Sidokil 46x43 cm Plysch Grå
257469 Backrest EM PLUS w reinforced sidewedge 46x43 Plush Grey

F02 1 [BR251546](#) Rygg EM PLUS m Sidokil 42x43 Plysch Grå
252468 Backrest EM PLUS w sidewedge 42x43 Plush Grey
2 [BR351546](#) Rygg EM PLUS med förstärkt Sidokil 42x43 cm Plysch Grå
257468 Backrest EM PLUS w reinforced sidewedge 42x43 Plush Grey

F03 1 [BR252046](#) Rygg EM PLUS m Sidokil 35x43 Plysch Grå
252463 Backrest EM PLUS w sidewedge 35x43 Plush Grey
2 [BR352046](#) Rygg EM PLUS med förstärkt Sidokil 35x43 cm Plysch Grå
257463 Backrest EM PLUS w reinforced sidewedge 35x43 Plush Grey


F04 [BR253546](#) Rygg EM PLUS m Sidokil 30x34 Plysch Grå
252465 Backrest EM PLUS w sidewedge 30x34 Plush Grey

G01 [803270](#) Skruvsats f montering av rygg och ryggfällning
Screw kit for backrest assembly


Stycklista - Ryggplatta

Part list - Backrest

A Ryggar ErgoMedic PLUS Comfort
Backrest ErgoMedic PLUS comfort

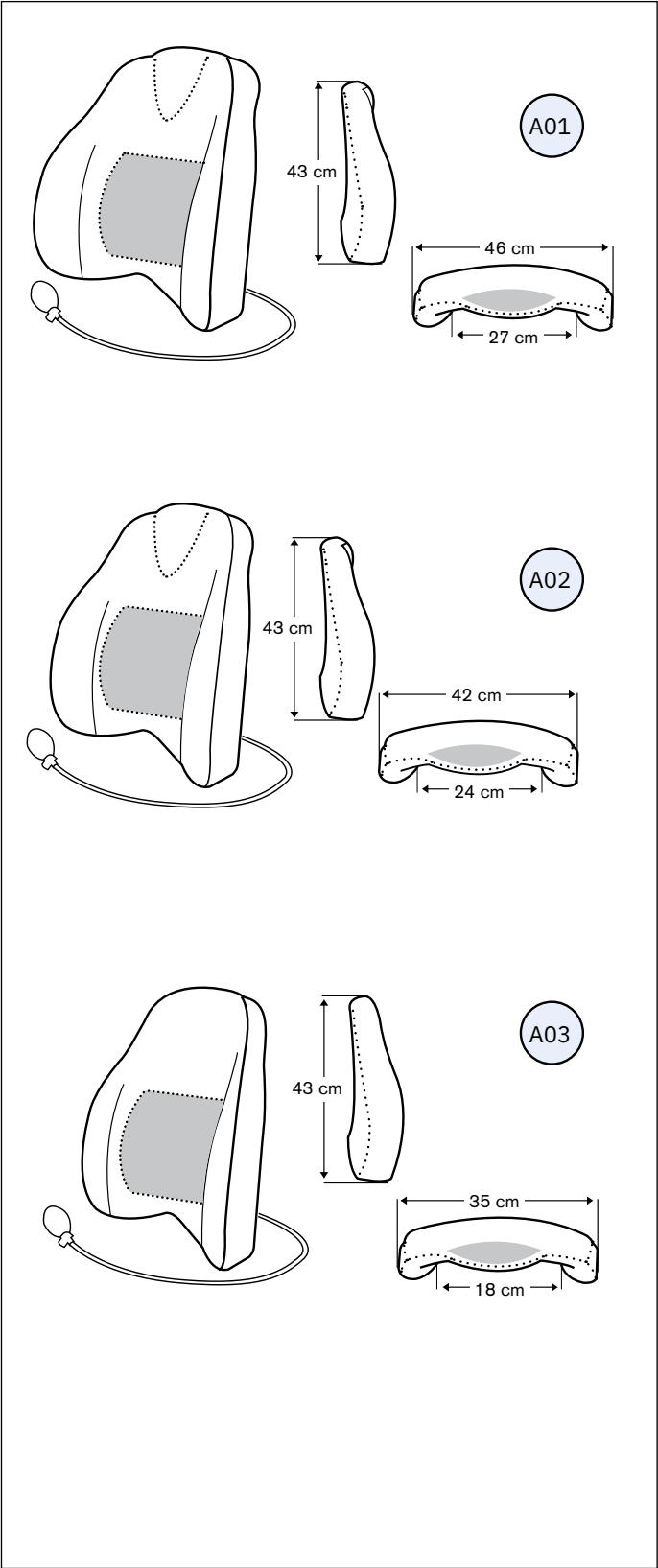

B01 Skruv sats för montering av rygg och ryggfällning
Screw kit for backrest assembly

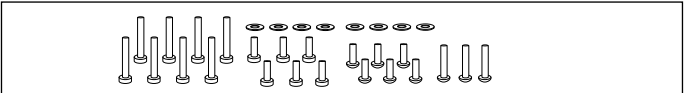

Pos Art.nr Benämning
Pos Art.no Name

A01 BR211046 Rygg ErgoMedic PLUS 46x43 Comfort Plysch Grå
254469 Backrest ErgoMedic PLUS 46x43 Comfort Grey Plush

A02 BR211546 Rygg ErgoMedic PLUS 42x43 Comfort Plysch Grå
254468 Backrest ErgoMedic PLUS 42x43 Comfort Grey Plush


A03 BR212046 Rygg ErgoMedic PLUS 35x43 Comfort Plysch Grå
254463 Backrest ErgoMedic PLUS 35x43 Comfort Grey Plush

B01 803270 Skruvsats f montering av rygg och ryggfällning
Screw kit for backrest assembly


Stycklista - Ryggplatta

Part list - Backrest

C Ryggar ErgoMedic PLUS Comfort med sidokil
Backrest ErgoMedic PLUS Comfort with wedge

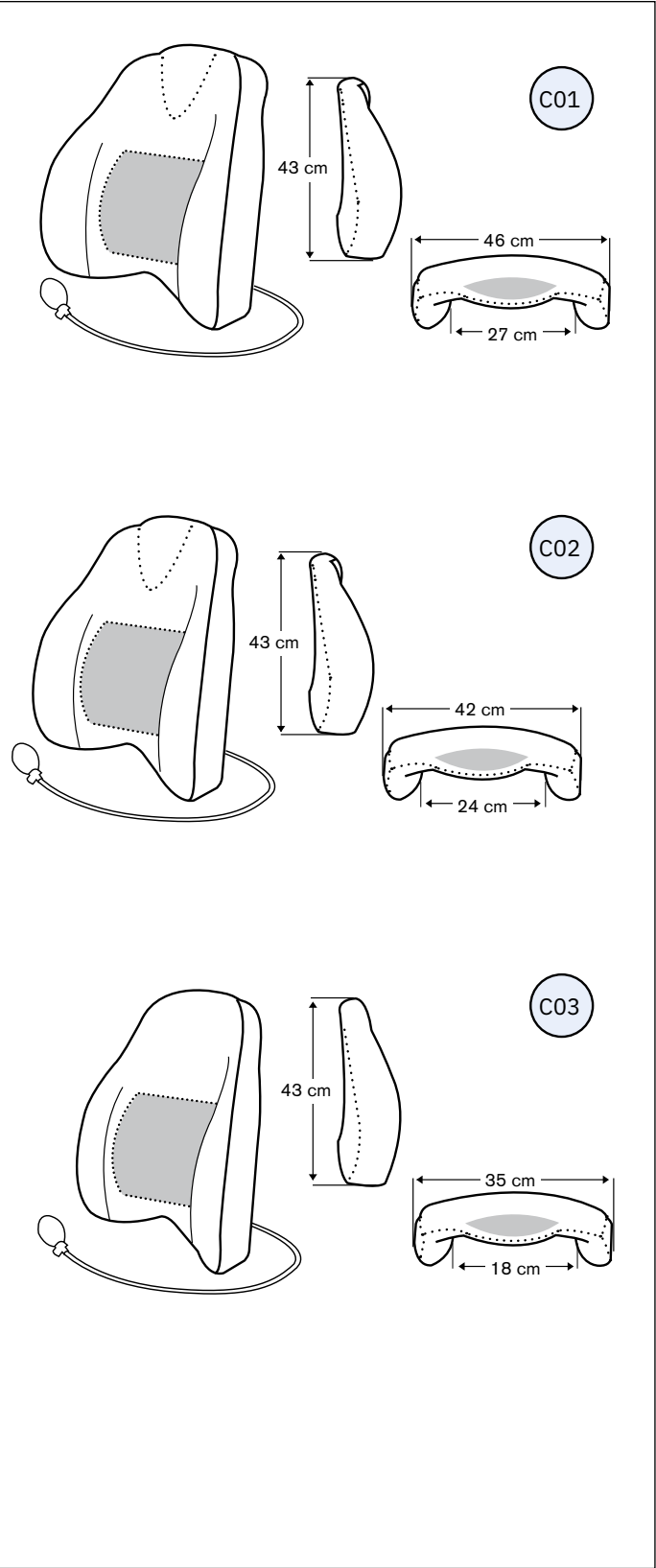

D01 Skruv sats för montering av rygg och ryggfällning
Screw kit for backrest assembly

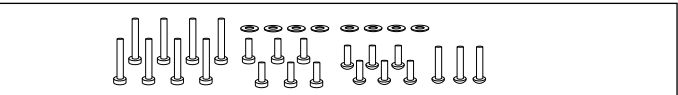

REAL 9000 PLUS 12V – SPRÄNGSKISS
REAL 9000 PLUS 12V – EXPLODED DIAGRAM

Pos Art.nr Benämning
Pos Art.no Name

C01 1 BR261046 Rygg EM PLUS m Sidokil 46x43 Comfort Plysch Grå
255469 Backrest EM PLUS w Sidewedge 46x43 Comfort Grey Plush
2 BR361046 Rygg EM PLUS med förstärkt Sidokil 46x43 cm Comfort
258469 Plysch Grå Backrest EM PLUS w reinforced wedge Comfort 46x43

C02 1 BR261546 Rygg EM PLUS m Sidokil 42x43 Comfort Plysch Grå
255468 Backrest EM PLUS w Sidewedge 42x43 Comfort Grey Plush
2 BR361546 Rygg EM PLUS med förstärkt Sidokil 42x43 cm Comfort
258468 Plysch Grå Backrest EM PLUS w reinforced wedge Comfort 42x43


C03 1 BR262046 Rygg EM PLUS m Sidokil 35x43 Comfort Plysch Grå
255463 Backrest EM PLUS w Sidewedge 35x43 Comfort Grey Plush
2 BR362046 Rygg EM PLUS med förstärkt Sidokil 35x43 cm Plysch Grå
258463 Backrest EM PLUS w reinforced wedge Comfort 35x43

D01 803270 Skruvsats f montering av rygg och ryggfällning
Screw kit for backrest assembly

Stycklista - Ryggmekanism Standard, EL & Comfort


Part list - Backrest mechanism

A01 Standard ErgoMedic Standard ErgoMedic

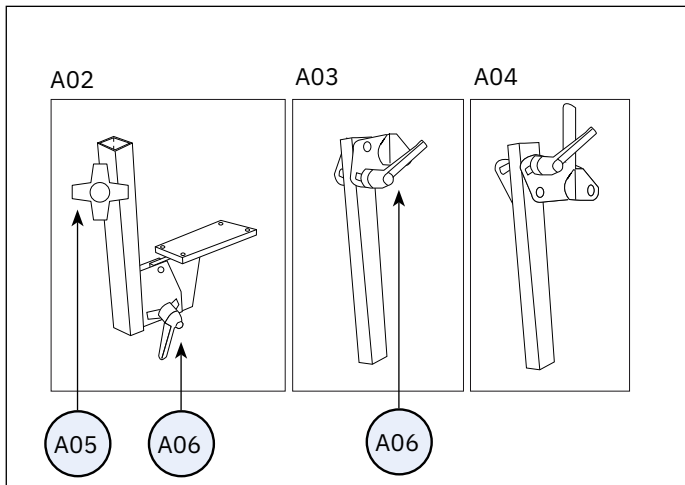

Pos	Art.nr	Benämning
Pos	Art.no	Name
A01 1	BRM1000 801748	Ryggmekanism Standard ErgoMedic Låg rygg Backrest adjustment Standard ErgoMedic Low back
2	BRM4000 801747	Ryggmekanism Standard ErgoMedic Hög rygg Backrest adjustment Standard ErgoMedic High back
A02	800842	Ryggfällning Std. Cla/ErgoM Backrest mechanism Std.Cla/ErgoM
A03	801265	Ryggstolpe Standard. ErgoMedic Låg rygg Back pole Std Cla/ ErgoMedic Low back
A04	800841	Ryggstolpe Standard ErgoMedic Hög rygg Back pole Standard ErgoMedic High back
A05	803004	Stjärnratt Plus M8x20 (braga gummerad) Gummed knob M8x20 PLUS
A06	803006	Låsspak Plus M8 (inv gänga) (braga gummerad) Gummed handle M8 PLUS


B01 EL Electric

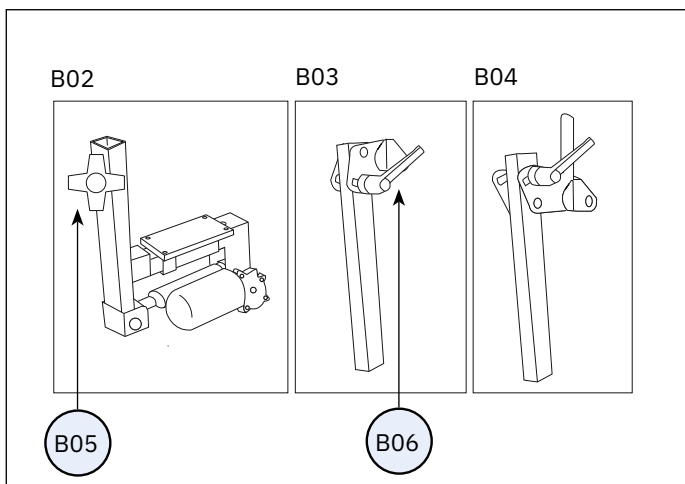

B01 1	801300	Ryggmekanism EL Låg rygg Electric backrest adjustment Low back
2	801817	Ryggmekanism EL Hög rygg Electric backrest adjustment High back
B02	802731	Eldonssats f ryggvinkel f reläkort Real 9000 Electric kit f. backrest angle
B03	801265	Ryggstolpe Std. ErgoM Låg rygg Back pole Std Cla/ Ergo Medic Low back
B04	800841	Ryggstolpe Std. ErgoM Hög rygg Back pole Std. Ergo Medic High back
B05	803004	Stjärnratt Plus M8x20 (braga gummerad) Gummed knob M8x20 PLUS
B06	803006	Låsspak Plus M8 (inv gänga) (braga gummerad) Gummed handle M8 PLUS


Se sid 36 för reglage

C01 Comfort Comfort

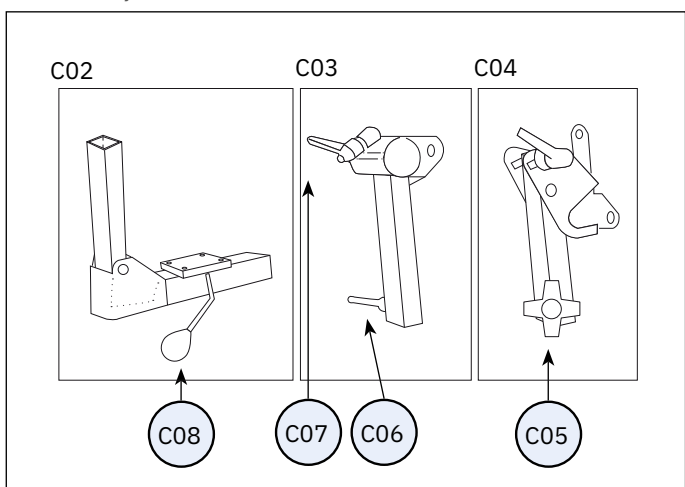

C01 1	801743	Ryggmekanism Comfort ErgoM Grund Låg rygg Back adjustment Comfort ErgoM Shallow Low back
2	801742	Ryggmekanism Comfort ErgoM Grund Hög rygg Back adjustment Comfort ErgoM Shallow High back
C02	801770	Ryggfällning Comfort ErgoM 350 N Grunt sittdjup Backrest mech Comfort ErgoM 350 N Shallow seatdepth
C03	801088	Ryggstolpe Medic/Comfort ErgoM Låg rygg Back pole Medic/Comfort ErgoM Low back
C04	801737	Ryggstolpe Medic/Comfort ErgoM Hög rygg Back pole Medic/Comfort ErgoM High back
C05	803004	Stjärnratt Plus M8x20 (braga gummerad) Plastic knob Plus M8x20
C06	803012	Låsspak Plus M6x10 (braga gummerad) Gummed handle M6x10 PLUS
C07	803013	Låsspak Plus M6x20 (braga gummerad) Gummed handle M6x20 PLUS
C08	803011	Spak till Comfortryggmekanism Plus Lever for backrest mechanism Comfort PLUS

D01 Skruv sats för montering av rygg och ryggfällning Screw kit for backrest assembly

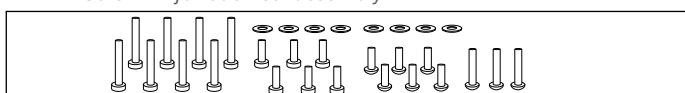


D01	803270	Skrivsats för montering av rygg och ryggfällning Screw kit for backrest assembly
-----	------------------------	---

Stycklista - Ryggmekanism Comfort Coxit


Part list - Backrest mechanism

E01 Comfort Coxit
 Comfort Coxit

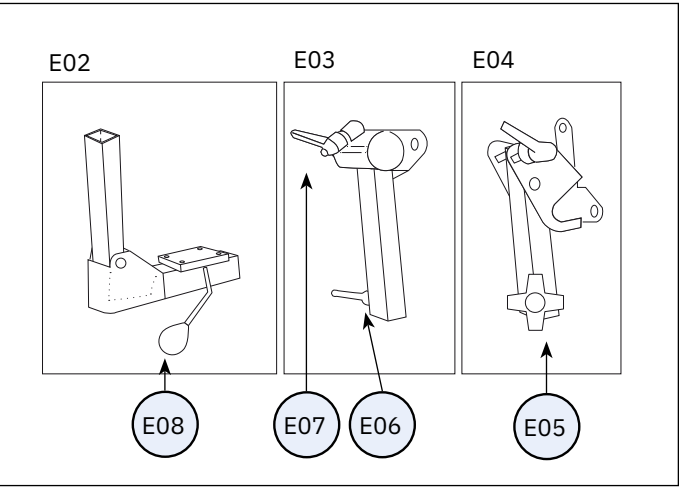

Pos	Art.nr	Benämning
Pos	Art.no	Name
E01 1	801745	Ryggmekanism Comfort ErgoMedic Djup Låg rygg Backrest adjustment Comfort ErgoMedic Depht Low back
2	801744	Ryggmekanism Comfort ErgoMedic Djup Hög rygg Backrest adjustment Comfort ErgoMedic Depht High back
E02	801771	Ryggfällning Comfort ErgoMedic Djup 350 N Djupt sittdjup Backrest mech Comfort ErgoMedic 350 N Deep seatdepth
E03	801088	Ryggstolpe Medic/Comfort ErgoMedic Låg rygg Back pole Medic/Comfort ErgoMedic Low back
E04	801737	Ryggstolpe Medic/Comfort ErgoMedic Hög rygg Back pole Medic/Comfort ErgoMedic High back
E05	803004	Stjärnratt Plus M8x20 (braga gummerad) Plastic knob Plus M8x20
E06	803012	Låsspak Plus M6x10 (braga gummerad) Gummed handle M6x10 PLUS
E07	803013	Låsspak Plus M6x20 (braga gummerad) Gummed handle M6x20 PLUS
E08	803011	Spak till Comfortryggmekanism Plus Lever for backrest mechanism Comfort PLUS

F01 Skruv sats för montering av rygg och ryggfällning
 Screw kit for backrest assembly

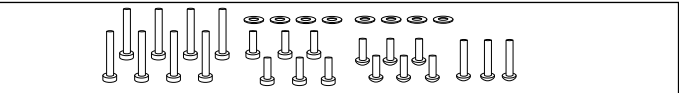


F01 803270 Skruvsats f montering av rygg och ryggfällning
 Screw kit for backrest assembly


Stycklista - Ryggmekanism Medic 112 Rygg

Part list - Backrest mechanism


A01 200 x 112 mm (hxd)

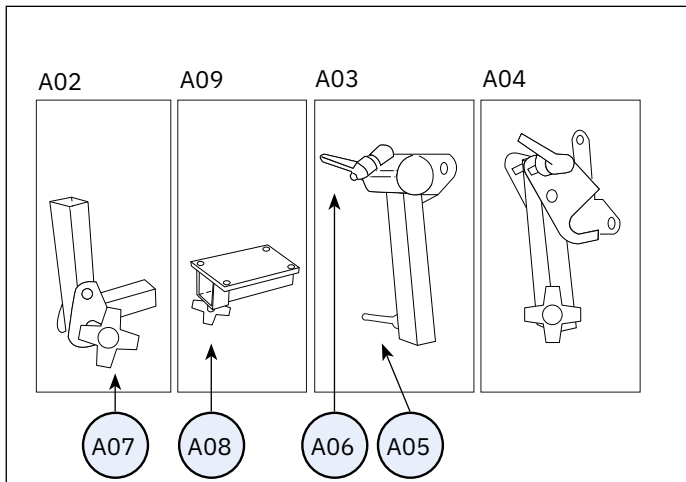


B01 240 x 112 mm (hxd)

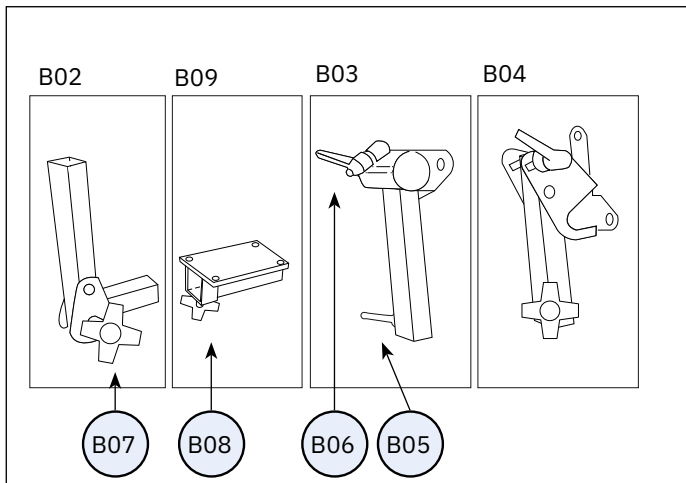

C01 340 x 112 mm (hxd)

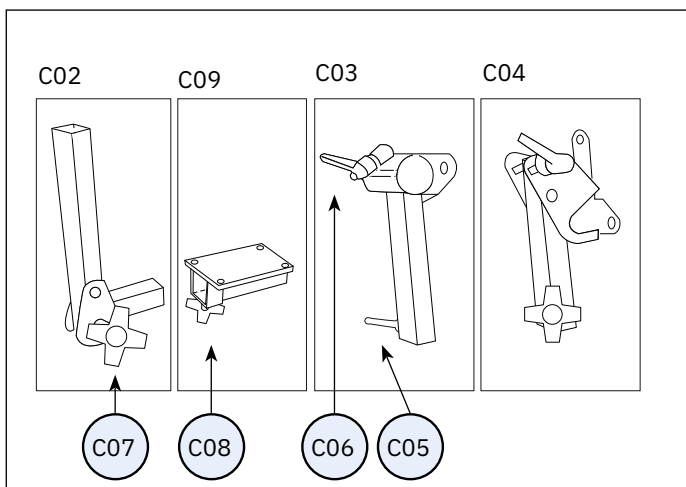

D01 Skruv sats för montering av rygg och ryggfällning
Screw kit for backrest assembly

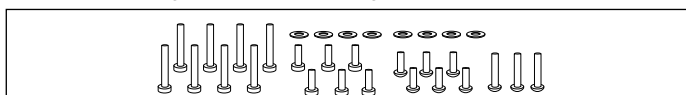


Pos	Art.nr	Benämning
Pos	Art.no	Name
A01	1	BRM1800 Ryggmekanism Medic ErgoMedic S 112 Låg rygg 801930 Backrest adjustment Medic ErgoMedic S Low back 112 mm
	2	BRM4800 Ryggmekanism Medic ErgoMedic S 112 Hög rygg 801932 Backrest adjustment Medic ErgoMedic S High back 112 mm
A02	801923	Ryggfällning Medic 112mm S Cla/ErgoM 200mm Backrest mechanism Medic 112 mm S Cla/ErgoM 200 mm
A03	801928	Ryggstolpe Medic ErgoM S Låg rygg Back pole ErgoM S
A04	801737	Ryggstolpe Medic/Comfort ErgoMedic Hög rygg Back pole Medic/Comfort ErgoMedic High back
A05	803012	Låsspak PLUS M6x10 (braga gummerad) Gummed handle M6x10 PLUS
A06	803013	Låsspak PLUS M6x20 (braga gummerad) Gummed handle M6x20 PLUS
A07	803007	Stjärnratt PLUS M8x1 special (braga gummerad) Gummed knob M8x1
A08	803004	Stjärnratt PLUS M8x20 (braga gummerad) Gummed knob M8x20 PLUS
A09	800837	Ryggfällning fäste Medic Cla/ErgoM Backrestmecanism Medic hold
B01	1	BRM1900 Ryggmekanism Medic ErgoMedic L 112 Låg rygg 801739 Backrest adjustment Medic ErgoMedic L Low back 112 mm
	2	BRM4900 Ryggmekanism Medic ErgoMedic L 112 Hög rygg 801741 Backrest adjustment Medic ErgoMedic L High back 112 mm
B02	801083	Ryggfällning Medic 112mm L Cla/ErgoM 240mm Backrest mechanism Medic 112 mm L Cla/ErgoM 340 mm
B03	801088	Ryggstolpe Medic/Comfort ErgoMedic Låg rygg Back pole Medic/Comfort ErgoMedic Low back
B04	801737	Ryggstolpe Medic/Comfort ErgoMedic Hög rygg Back pole Medic/Comfort ErgoMedic High back
B05	803012	Låsspak PLUS M6x10 (braga gummerad) Gummed handle M6x10 PLUS
B06	803013	Låsspak PLUS M6x20 (braga gummerad) Gummed handle M6x20 PLUS
B07	803007	Stjärnratt PLUS M8x1 special (braga gummerad) Gummed knob M8x1
B08	803004	Stjärnratt PLUS M8x20 (braga gummerad) Gummed knob M8x20 PLUS
B09	800837	Ryggfällning fäste Medic Cla/ErgoM Backrestmecanism Medic hold
C01	1	BRM2000 Ryggmekanism Medic ErgoMedic XL 112 Låg rygg 801934 Backrest adjustment Medic ErgoMedic XL Low back 112 mm
	2	BRM5000 Ryggmekanism Medic ErgoMedic XL 112 Hög rygg 801936 Backrest adjustment Medic ErgoMedic XL High back 112 mm
C02	801085	Ryggfällning Medic 112mm XL Cla/ErgoM 340mm Backrest mechanism Medic 112 mm XL Cla/ErgoM 340 mm
C03	801088	Ryggstolpe Medic/Comfort ErgoMedic Låg rygg Back pole Medic/Comfort ErgoMedic Low back
C04	801737	Ryggstolpe Medic/Comfort ErgoMedic Hög rygg Back pole Medic/Comfort ErgoMedic High back
C05	803012	Låsspak PLUS M6x10 (braga gummerad) Gummed handle M6x10 PLUS
C06	803013	Låsspak PLUS M6x20 (braga gummerad) Gummed handle M6x20 PLUS
C07	803007	Stjärnratt PLUS M8x1 special (braga gummerad) Gummed knob M8x1
C08	803004	Stjärnratt PLUS M8x20 (braga gummerad) Gummed knob M8x20 PLUS
C09	800837	Ryggfällning fäste Medic Cla/ErgoM Backrestmecanism Medic hold
D01	803270	Skruvsats f montering av rygg och ryggfällning Screw kit for backrest assembly


Stycklista - Ryggmekanism Medic 155 Rygg

Part list - Backrest mechanism


E01 200 x 155 mm (hxd)

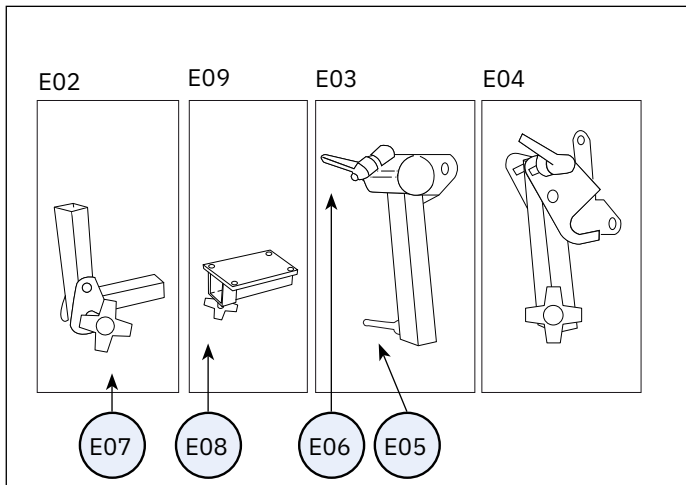


F01 240 x 155 mm (hxd)

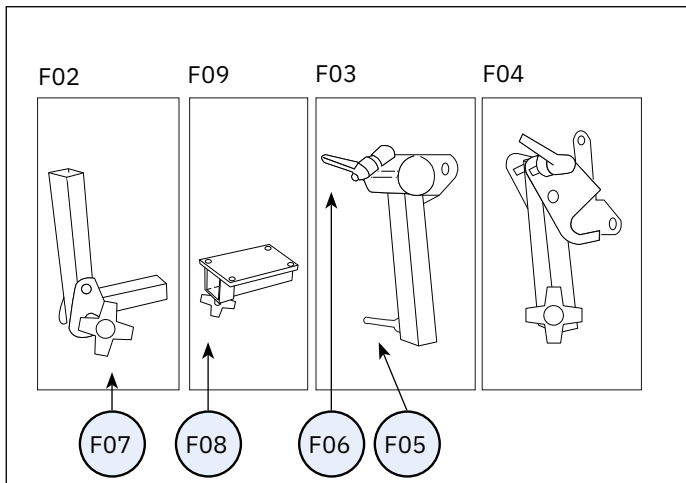

G01 340 x 155 mm (hxd)

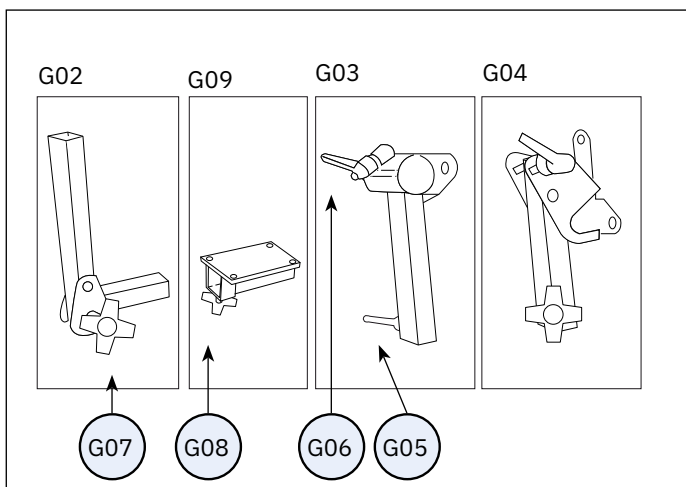

H01 Skruv sats för montering av rygg och ryggfällning
Screw kit for backrest assembly

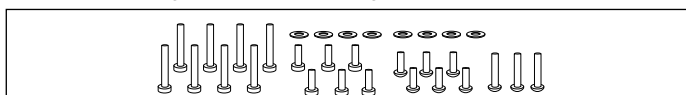


Pos	Art.nr	Benämning
Pos	Art.no	Name
E01	1	BRM1500 Ryggmekanism Medic ErgoMedic S 155 Låg rygg 801929 Backrest adjustment Medic ErgoM S Low back 155 mm
	2	BRM4500 Ryggmekanism Medic ErgoMedic S 155 Hög rygg 801931 Backrest adjustment Medic ErgoM S High back 155 mm
E02	801922	Ryggfällning Medic 155mm S Cla/ErgoM 200mm Backrest mechanism Medic 155 mm S Cla/ErgoM 200 mm
E03	801928	Ryggstolpe Medic ErgoM S Låg rygg Back pole ErgoM S
E03	801737	Ryggstolpe Medic/Comfort ErgoMedic Hög rygg Back pole Medic/Comfort ErgoM High back
E05	803012	Låsspak PLUS M6x10 (braga gummerad) Gummed handle M6x10 PLUS
E06	803013	Låsspak PLUS M6x20 (braga gummerad) Gummed handle M6x20 PLUS
E07	803007	Stjärnratt PLUS M8x1 special (braga gummerad) Gummed knob M8x1
E08	803004	Stjärnratt PLUS M8x20 (braga gummerad) Gummed knob M8x20 PLUS
E09	800837	Ryggfällning fäste Medic Cla/ErgoM Backrestmecanism Medic hold
F01	1	BRM1600 Ryggmekanism Medic ErgoMedic L 155 Låg rygg 801738 Backrest adjustment Medic ErgoMedic L Low back 155 mm
	2	BRM4600 Ryggmekanism Medic ErgoMedic L 155 Hög rygg 801740 Backrest adjustment Medic ErgoMedic L High back 155 mm
F02	801082	Ryggfällning Medic 155mm L Cla/ErgoM 240mm Backrest mechanism Medic 155 mm L Cla/ErgoM 240 mm
F03	801088	Ryggstolpe Medic/Comfort ErgoMedic Låg rygg Back pole Medic/Comfort ErgoMedic L Low back
F04	801737	Ryggstolpe Medic/Comfort ErgoMedic Hög rygg Back pole Medic/Comfort ErgoM High back
F05	803012	Låsspak PLUS M6x10 (braga gummerad) Gummed handle M6x10 PLUS
F06	803013	Låsspak PLUS M6x20 (braga gummerad) Gummed handle M6x20 PLUS
F07	803007	Stjärnratt PLUS M8x1 special (braga gummerad) Gummed knob M8x1
F08	803004	Stjärnratt PLUS M8x20 (braga gummerad) Gummed knob M8x20 PLUS
F09	800837	Ryggfällning fäste Medic Cla/ErgoM Backrestmecanism Medic hold
G01	1	BRM1700 Ryggmekanism Medic ErgoM XL 155 Låg rygg 801933 Backrest adjustment Medic ErgoM XL Low back 155 mm
	2	BRM4700 Ryggmekanism Medic ErgoM XL 155 Hög rygg 801935 Backrest adjustment Medic ErgoM XL High back 155 mm
G02	801084	Ryggfällning Medic 155mm XL Cla/ErgoM 340mm Backrest mechanism Medic 155 mm XL Cla/ErgoM 340 mm
G03	801088	Ryggstolpe Medic/Comfort ErgoM Låg rygg Back pole Medic/Comfort ErgoML Low back
G04	801737	Ryggstolpe Medic/Comfort ErgoM Hög rygg Back pole Medic/Comfort ErgoM High back
G05	803012	Låsspak PLUS M6x10 (braga gummerad) Gummed handle M6x10 PLUS
G06	803013	Låsspak PLUS M6x20 (braga gummerad) Gummed handle M6x20 PLUS
G07	803007	Stjärnratt PLUS M8x1 special (braga gummerad) Gummed knob M8x1
G08	803004	Stjärnratt PLUS M8x20 (braga gummerad) Gummed knob M8x20 PLUS
G09	800837	Ryggfällning fäste Medic Cla/ErgoM Backrestmecanism Medic hold
H01	803270	Skruvsats f montering av rygg och ryggfällning Screw kit for backrest assembly

Stycklista - Ryggmekanism Dubbel Medic


Part list - Backrest mechanism Double Medic

A01 240 x 155 mm (hxd)

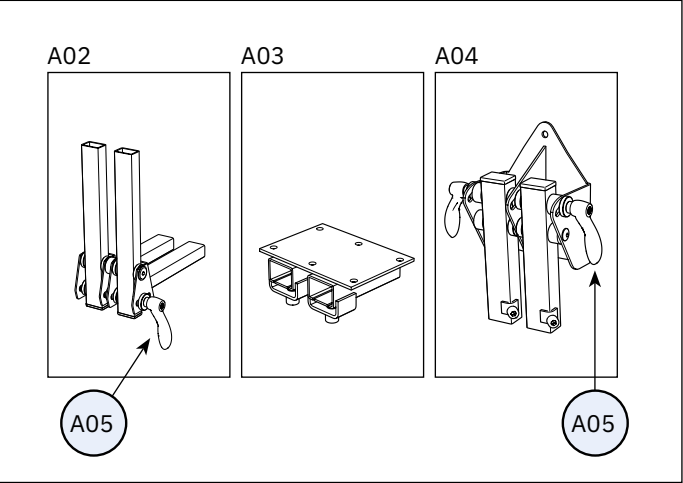


Pos	Art.nr	Benämning
Pos	Art.no	Name
A01	BRM5600 803585	Ryggmekanism Dubbel Medic L DJ 155 Hj 240 Hög rygg Backrest adjustment Double Medic 240 mm high back
A02	805099	Ryggfällning Dubbel Medic 155mm L Cla/ErgoM (Övrerör 240mm) Backrestmecha. Double Medic 155 mm L Ergom/Clas. 240 mm
A03	802859	Ryggfällning fäste Medic Dubbel ryggfällning Backrest mechanism Double Medic hold
A04	802860	Ryggstolpe Medic Dubbel ryggfälln plats f nackstöd Back pole Double Medic
A05	803006	Låsspak Plus M8 (inv gänga) (braga gummerad) Lock handle Plus M8 Internal thread (Braga rubberized)

B01 340 x 155 mm (hxd)

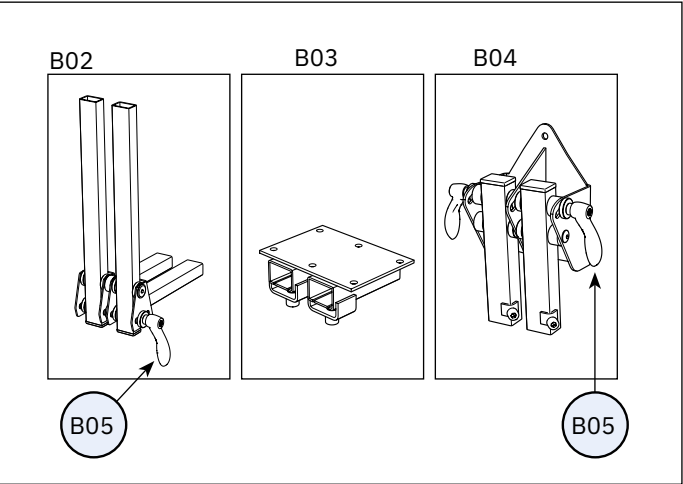

B01	BRM5700 803586	Ryggmekanism Dubbel Medic XL DJ 155 Hj 340 Hög rygg Backrest adjustment Double Medic 340 mm high back
B02	805100	Ryggfällning Dubbel Medic 155mm XL Cla/ErgoM (Övrerör 340mm) Backrestmecha. Double Medic 155 mm XL Ergom/Clas. 340 mm
B03	802859	Ryggfällning fäste Medic Dubbel ryggfällning Backrest mechanism Double Medic hold
B04	802860	Ryggstolpe Medic Dubbel ryggfälln plats f nackstöd Back pole Double Medic
B05	803006	Låsspak Plus M8 (inv gänga) (braga gummerad) Lock handle Plus M8 Internal thread (Braga rubberized)

D01 Skruvsats för montering av rygg och ryggfällning
Screw kit for backrest assembly

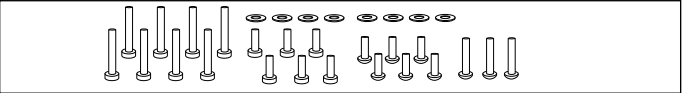


D01	803270	Skruvsats f montering av rygg och ryggfällning Screw kit for backrest assembly
-----	------------------------	---


Stycklista - Armstöd

Part list - Armrests


A01 ErgoMedic för samtliga armstödsmekanismer
ErgoMedic for all armrest mechanisms

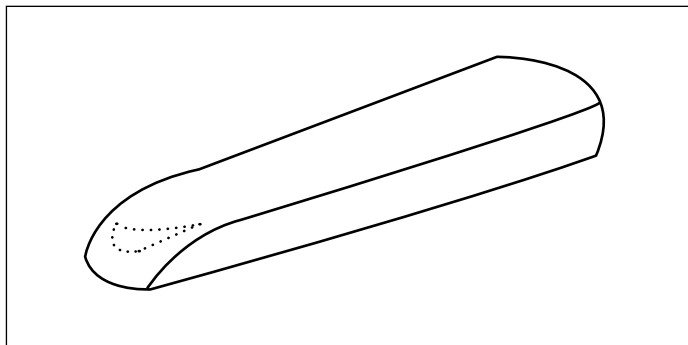


B01 Extra Soft för samtliga armstödsmekanismer
Extra Soft for all armrest mechanisms

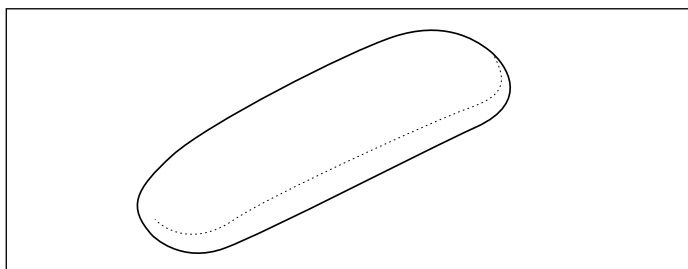


C Mobil för samtliga armstödsmekanismer
Mobil for all armrest mechanisms

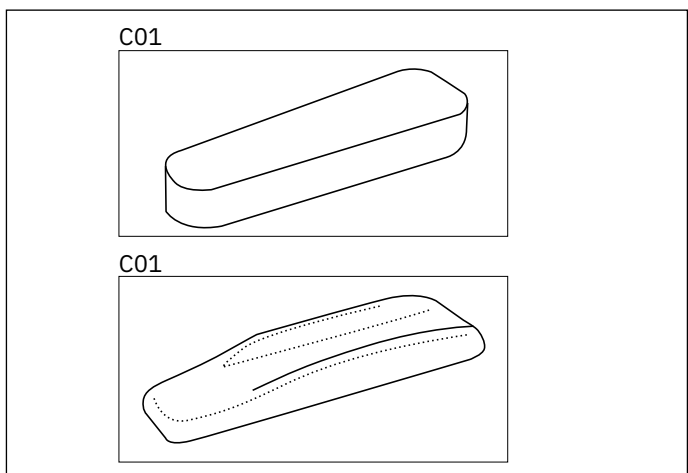

D ErgoMedic PLUS för samtliga armstödsmekanismer
ErgoMedic PLUS for all armrest mechanisms

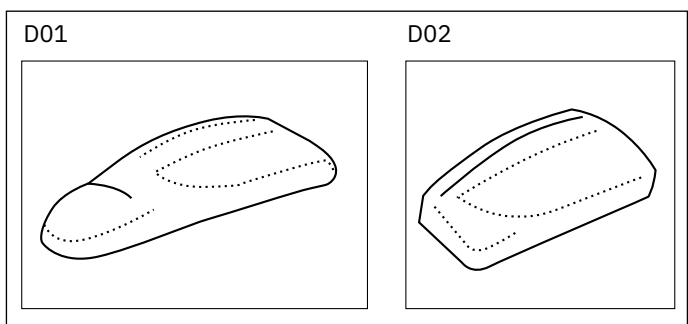

E01 Skruvsats för montering av armstöd
Screw kit for armrest assembly

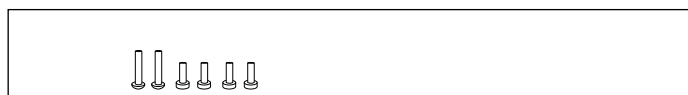

REAL 9000 PLUS 12V – SPRÄNGSKISS
REAL 9000 PLUS 12V – EXPLODED DIAGRAM

Pos Art.nr Benämning
Pos Art.no Name

A01	1	AR103038	Armstöd platta ErgoMedic 35 cm Konstläder Svart Armrest Classic 35 cm Skai Black
	2	AR102038	Armstöd platta ErgoMedic 30 cm Konstläder Svart Armrest Classic 30 cm Skai Black
	3	AR101038	Armstöd platta ErgoMedic 25 cm Konstläder Svart Armrest Classic 25 cm Skai Black
	4	AR104038	Armstöd platta ErgoMedic 40 cm Konstläder Svart Armrest Classic 40 cm Skai Black
	5	AR112038	Armstöd platta Mini 30 cm Konstläder Svart Armrest Mini 30 cm Skai Black
	6	AR111038	Armstöd platta Mini 25 cm Konstläder Svart Armrest Mini 25 cm Skai Black

B01	1	AR513038	Armstöd platta extra soft 35 cm Konstläder Svart Armrest Extra soft 35 cm Skai Black
	2	AR512038	Armstöd platta extra soft 30 cm Konstläder Svart Armrest Extra soft 30 cm Skai Black
	3	AR511038	Armstöd platta extra soft 25 cm Konstläder Svart Armrest Extra soft 25 cm Skai Black

C01	1	AR303038	Armstöd platta Mobil 35 cm Konstläder Svart Armrest Mobile 35 cm Skai Black
	2	AR302038	Armstöd platta Mobil 30 cm Konstläder Svart Armrest Mobile 30 cm Skai Black
	3	AR301038	Armstöd platta Mobil 25 cm Konstläder Svart Armrest Mobile 25 cm Skai Black
	4	AR304038	Armstöd platta Mobil 40 cm Konstläder Svart Armrest Mobile 40 cm Skai Black
C02		AR406038	Armstöd platta Hemiplegi 45x12 cm Konstläder Svart Armrest Hemiplegi 45x12 cm Skai Black

D01	1	AR205138	Armstöd platta ErgoM PLUS Hö 42 cm Konstläder Svart Armrest ErgoMedic PLUS Right 42 cm Skai Black
	2	AR205238	Armstöd platta ErgoM PLUS Vä 42 cm Konstläder Svart Armrest ErgoMedic PLUS Left 42 cm Skai Black
D02	1	AR202138	Armstöd platta ErgoM PLUS Hö 30 cm Konstläder Svart Armrest ErgoMedic PLUS Right 30 cm Skai Black
	2	AR202238	Armstöd platta ErgoM PLUS Vä 30 cm Konstläder Svart Armrest ErgoMedic PLUS Left 30 cm Skai Black


D01	803271	Skruvsats f montering armstöd Screw kit for armrest assembly
-----	------------------------	---

Stycklista - Armstödsmekanismer

Part list - Armrest mechanisms

A Armstödsmekanism PLUS


Armrest mechanism PLUS

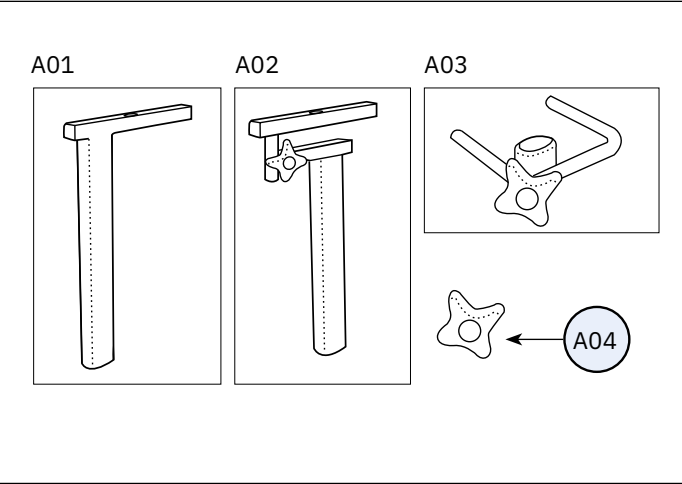

Pos	Art.nr	Benämning
Pos	Art.no	Name
A01 1	802700	Armstöd PLUS Höger Höjd 32 <i>Armrest PLUS right, Height 32</i>
2	802702	Armstöd PLUS Vänster Höjd 32 <i>Armrest PLUS left, Height 32</i>
3	802701	Armstöd PLUS Höger Höjd 38 <i>Armrest PLUS right, Height 38</i>
4	802703	Armstöd PLUS Vänster Höjd 38 <i>Armrest PLUS left, Height 38</i>
5	802773	Armstöd Plus Mini Höger <i>Armrest PLUS Mini right</i>
6	802774	Armstöd Plus Mini Vänster <i>Armrest PLUS Mini left</i>
A02 1	802992	Armstöd Hemiplegi Höjd 32 PLUS armstöd Höger <i>Hemiplegic armrest Height 32 PLUS armrest right</i>
2	802993	Armstöd Hemiplegi Höjd 32 PLUS armstöd Vänster <i>Hemiplegic armrest Height 32 PLUS armrest left</i>
A03 1	802698	Armstöd Breddbåge PLUS Höger 9000/6100 <i>U-bar for width adjustment PLUS Right</i>
2	802699	Armstöd Breddbåge PLUS Vänster 9000/6100 <i>U-bar for width adjustment PLUS Left</i>
3	802771	Armstöd Breddbåge Plus Mini Höger <i>U-bar for width adjustment PLUS Mini Right</i>
4	802772	Armstöd Breddbåge Plus Mini Vänster <i>U-bar for width adjustment PLUS Mini Left</i>
A04	803004	Stjärnratt Plus M8x20 (Braga gummerad) <i>Gummed knob M8x20 PLUS</i>

B Armstödsmekanism fällbar

Foldable armrest mechsanim

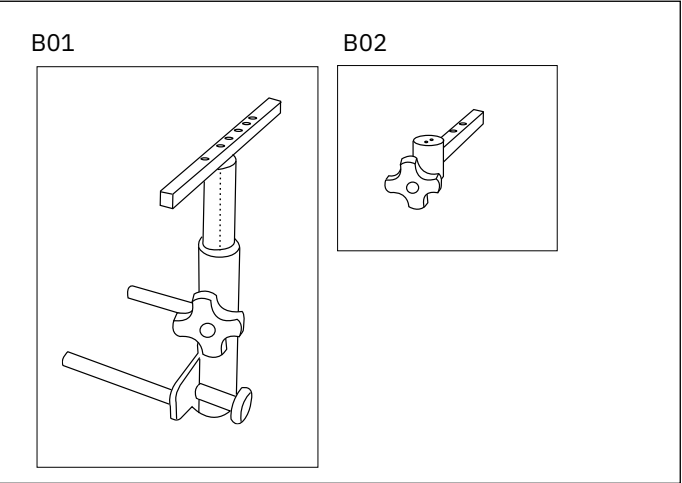


B01 1	ARM3011	Armstöd mekanism 6100 kpl. Höger B >40 (Vuxen) <i>600126 Armrest mecanism 6100 right Compl. >40</i>
2	ARM3012	Armstöd mekanism 6100 kpl. Vänster B >40 (Vuxen) <i>600125 Armrest mecanism 6100 left Compl. >40</i>
3	ARM1311	Armstöd mekanism 6100 kpl. Vs Höger Br>40 (Vuxen) <i>600170 Armrest mecanism 6100 right Compl. angle adjustable >40</i>
4	ARM3112	Armstöd mekanism 6100 kpl. Vs Vänster Br>40 (Vuxen) <i>600169 Armrest mecanism 6100 left Compl. angle adjustable >40</i>
B02 1	802991	Hemiplegi mekanism för fällbara armstöd Hö+Vä <i>Hemiplegic mechanism for foldable armrest Right+Left</i>
2	802989	Hemiplegi mekanism för fällbara armstöd Höger <i>Hemiplegic mechanism for foldable armrest Right</i>
3	802990	Hemiplegi mekanism för fällbara armstöd Vänster <i>Hemiplegic mechanism for foldable armrest Left</i>

Stycklista - Stativ REAL 9000 PLUS

Part list - Base REAL 9000 PLUS

A

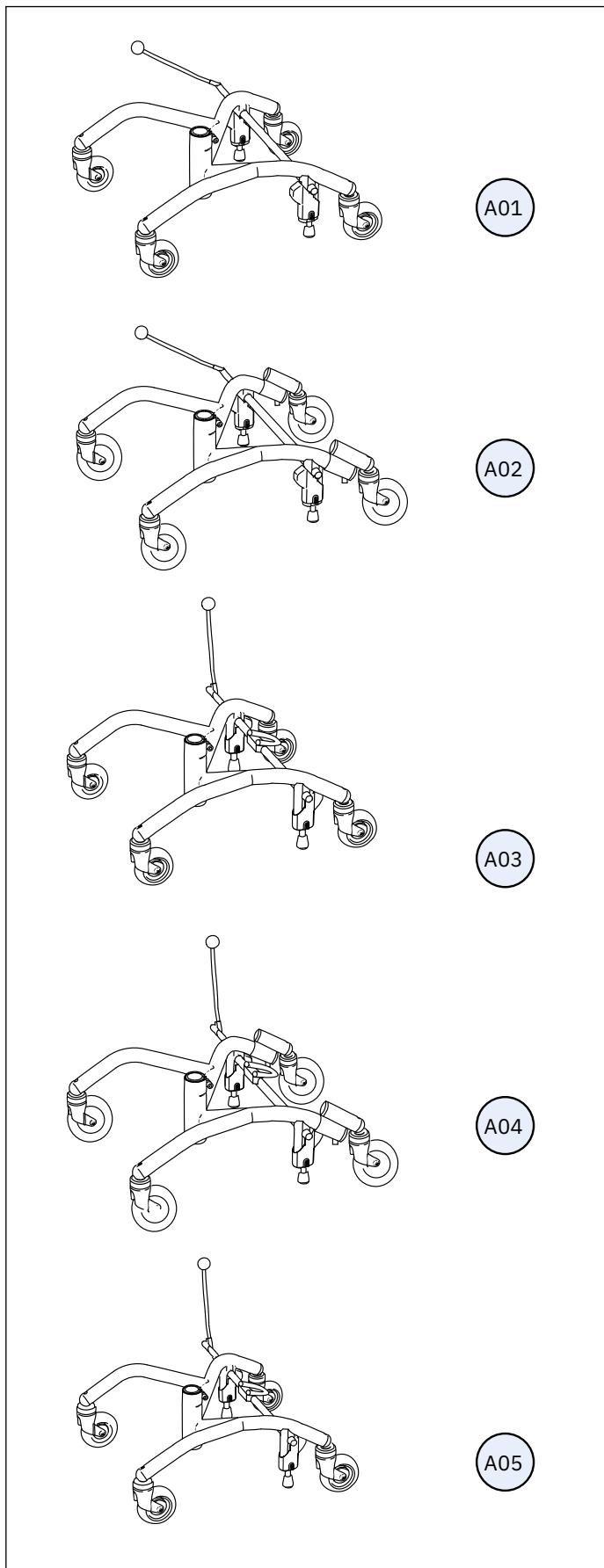

Pos	Art.nr	Benämning
Pos	Art.no	Name

A01	1	802659 Stativ 9000 PLUS 48 100 XL Svart Base 9000 PLUS 48 100 XL Black
	2	802660 Stativ 9000 PLUS 48 100 SL Svart Base 9000 PLUS 48 100 SL Black
	3	803500 Stativ 9000 PLUS 48 100 BXL Svart Base 9000 PLUS 48 100 BXL Black

A02	1	803292 Stativ 9000 PLUS 48 125 XL m Stativförlängare bak Base 9000 PLUS 48 125 XL base extensions back
	2	803293 Stativ 9000 PLUS 48 150 XL m Stativförlängare bak Base 9000 PLUS 48 150 XL base extensions back

A03	1	803090 Stativ 9000 PLUS 48 klinik Omvänd broms 100 XL Svart Base 9000 PLUS reversed brake 48 100 XL Black
	2	803290 Stativ 9000 PLUS 48 klinik Omvänd broms 100 SL Svart Base 9000 PLUS reversed brake 48 100 SL Black
	3	803501 Stativ 9000 PLUS 48 klinik Omvänd broms 100 BXL Svart Base 9000 PLUS reversed brake 48 100 BXL Black


A04	1	803294 Stativ 9000 PLUS Klinik 48 125 XL m Stativförlängare bak Base 9000 PLUS Clinic 48 125 XL base extensions back
	2	803295 Stativ 9000 PLUS Klinik 48 150 XL m Stativförlängare bak Base 9000 PLUS Clinic 48 150 XL base extensions back

A05	1	802657 Stativ 9000 PLUS 43 100 XL Base 9000 PLUS 43 100 XL
	2	802658 Stativ 9000 PLUS 43 100 SL Base 9000 PLUS 43 100 SL
	3	803299 Stativ 9000 PLUS 43 100 BXL Base 9000 PLUS 43 100 BXL
	4	803085 Stativ 9000 PLUS 43 mini 100 XL Svart Base 9000 PLUS 43 mini 100 XL Black
	5	803086 Stativ 9000 PLUS 43 mini 100 SL Svart Base 9000 PLUS 43 mini 100 SL Black
	6	803087 Stativ 9000 Plus 43 mini 100 BXL Svart Base 9000 PLUS 43 mini 100 BXL Black


Stycklista - Stativ och bromsar

Part list - Base and brakes

B Fyrpunktsbroms Fourpoint brake

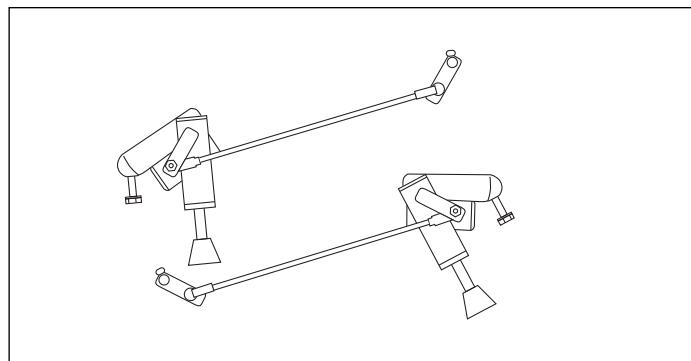

C Bromsar och stativförlängare Brakes and base extenders

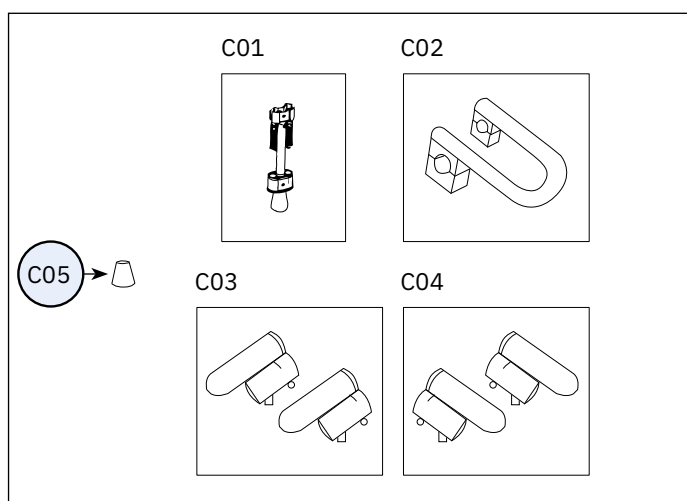


Pos	Art.nr	Benämning
Pos	Art.no	Name

B01	1	803503	Fyrbroms kit till PLUS-stativ 43/48 inkl stativförlängare fram Fourpoint brake for PLUS frame 48 incl. base extensions in front
-----	---	---------------	--

C01	1	802810	Bromsben 9000 f PLUS-stativ f 100mm hjul Brake leg for PLUS base for castors 100 mm
	2	803504	Bromsben 9000 f PLUS-stativ f 125mm Hjul kpl m alla fästet. Brake leg for PLUS base for castors 125 mm
	3	803505	Bromsben 9000 f PLUS-stativ f 150mm Hjul kpl m alla fästet. Brake leg for PLUS base for castors 150 mm

C02	802865	Bromspedal för PLUS-stativ 20mm bromsaxeldiameter Brake pedal for PLUS base
C03	BEX10 802936	Stativförlängare fram f PLUS-stativ M12 Base extensions front
C04	BEX20 802871	Stativförlängare bak f PLUS-stativ M12 Base extensions back
C05	801264	Bromsfot Diam 32 mm Brake rubber 32 mm

D Broms Brake

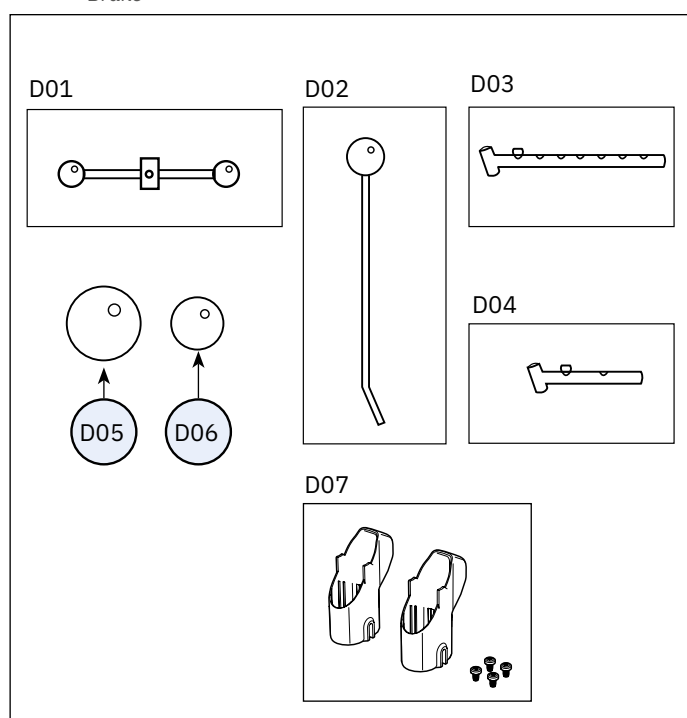


D01	1	RC1010 800785	Reumatikerkryss till Handbromsspak Rheumatic cross for hand brake lever
D02	1	BD1020 800881	Handbromsspak 25 cm f PLUS-stativ Brake lever 25 cm for PLUS-base
	2	BD1010 802866	Handbromsspak 35 cm Vinklad f PLUS-Stativ Brake lever 35 cm, angled for PLUS-base
	3	BD1030 802868	Handbromsspak 45 cm Vinklad f PLUS-stativ Brake lever 45 cm, angled for PLUS-base
	4	BD1040 800885	Handbromsspak 55 cm vinklad f PLUS-base Brake lever 55 cm, angled for PLUS-base
D03		802800	Bromsspaksfäste f PLUS-stativ justerbart (7 lägen) Bracket for brake lever, 7 positions
D04		802799	Bromsspaksfäste f PLUS-stativ justerbart (2 lägen) Bracket for brake lever, 2 positions
D05		LB1010 801625	Kula handbromsspak diam 50mm Large ball grip 50 mm for brake lever
D06		801014	Kula Handbromsspak Diam 35mm Large ball grip 35 mm for brake lever
D07		805192 805193	Klämskydd H+V kit f bromskam f PLUS-stativ svart Pinch protection R+L kit f brake cam f PLUS base black Klämskydd H+V kit f bromskam f PLUS-stativ vit Pinch protection R+L kit f brake cam f PLUS base white


Stycklista - Hjul

Part list - Castors


A XL Hjul - Allround
 XL castor -Allround

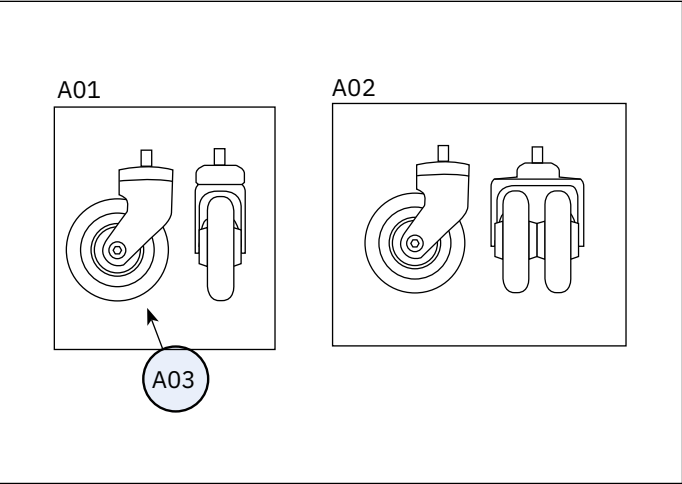

B SL Hjul - För hårda golv
 SL castor -Hard surfaces

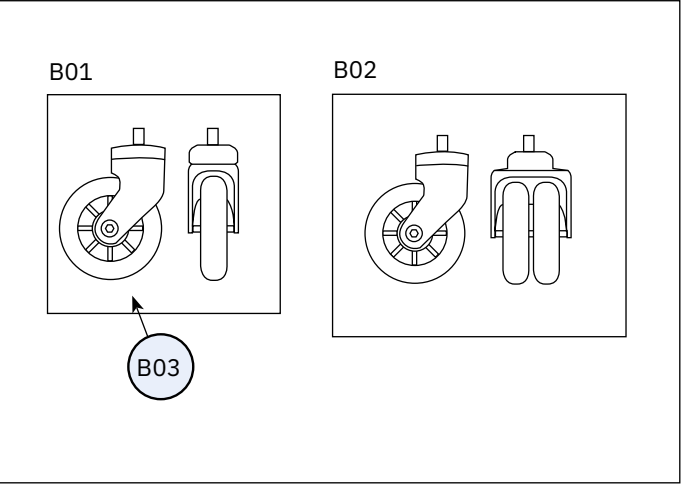

C BXL Hjul - För mjuka golv
 BXL castor -Soft surfaces

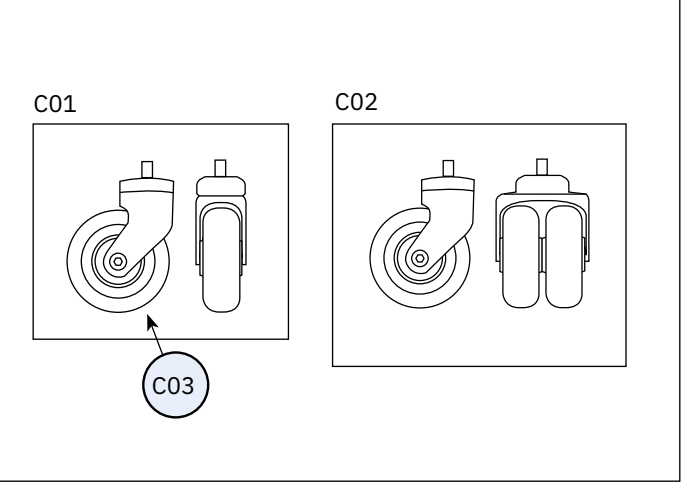


Pos	Art.nr	Benämning
Pos	Art.no	Name
A01	1 801213	Länkhjul 100 XL M12 Castor 100mm XL M12
	2 800903	Länkhjul 100 XL tröga M12 Castors 100mm XL stagnant M12
A02	802942	Länkhjul Dubbelt 100 XL M12 Castor double100mm XL M12
A03	801360	Hjul 100 XL m kullager utan bygel Castors without fork 100 mm XL with SKF-Ball bearing
B01	801144	Länkhjul 100 SL M12 Castor 100mm SL M12
B02	802943	Länkhjul Dubbelt100 SL M12 Castor double 100mm SL M12
B03	801638	Hjul 100 SL inklusive kullager utan bygel Castors without fork 100 mm SL with SKF-Ball bearing
C01	803162	Extra brett lätttrullat länkhjul, BXL 100 mm Extra wide easy-rolled castor
C02	803181	Extra brett lätttrullat dubbelt länkhjul, BXL 100 mm Extra wide easy-rolled double castor
C03	803161	Hjul 100 BXL Polyuretan Extra brett XL-hjul utan bygel Castors without fork 100 BXL polyutrthane black

Stycklista - Hjul

Part list - Castors


D01 Länkhjul 125 mm - För trösklar
125 castor - Threshold

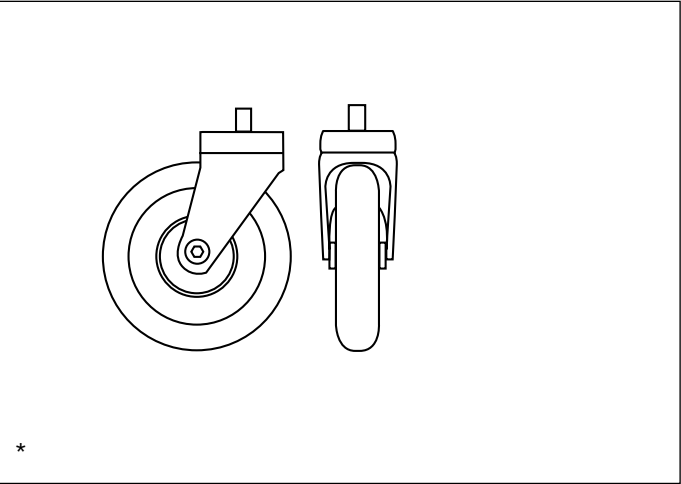

Pos	Art.nr	Benämning
Pos	Art.no	Name


D01	800904	Länkhjul 125 mm XL Castor 125 mm M12
-----	--------	---

E01 Länkhjul 150 mm - För trösklar
150 castor - Threshold

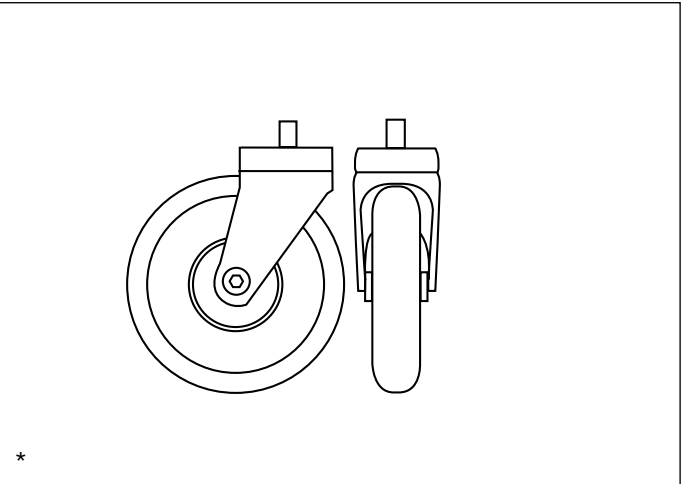

E01	800905	Länkhjul 150 mm XL Castor 150 mm M12
-----	--------	---

F01 ESD hjul
ESD castor

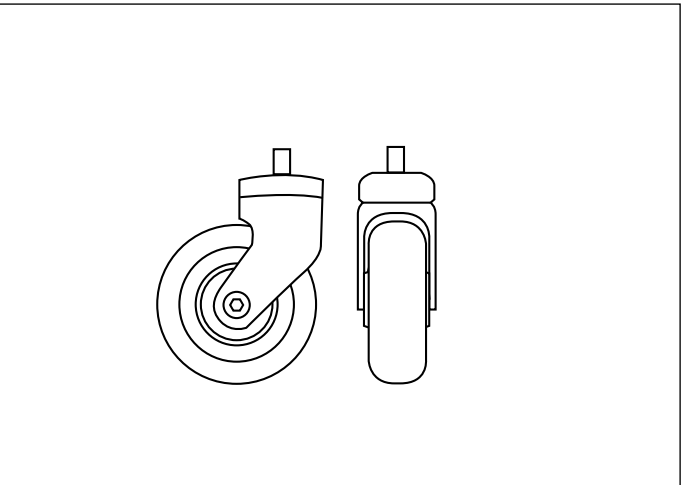


F01	802066	Länkhjul 100 mm ESD M12 kpl. m bygel. Extra bred bana Castor 100 mm ESD M12, extra wide wheel path
-----	--------	---

*Stativförlängare måste användas !
*Base extenders must be used !


Stycklista - EL manöverbox

Part list - Electric remote


A01 Elektronik för upp & ner
Electronics for up & down

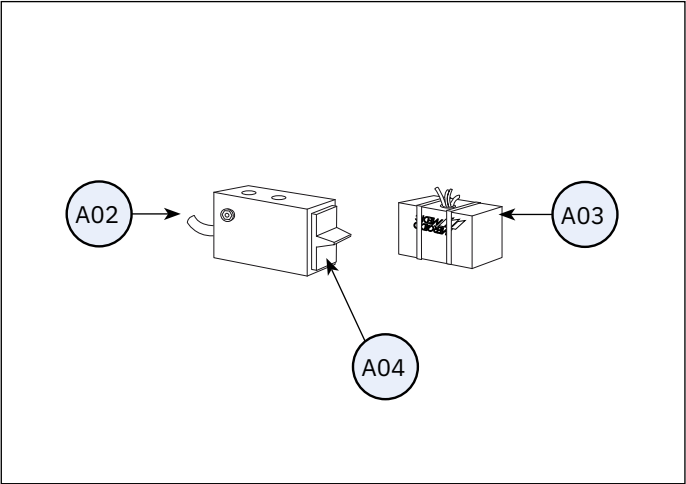

B01 Elektronik för sitsvinkling
Electronics for seat angle adjustment

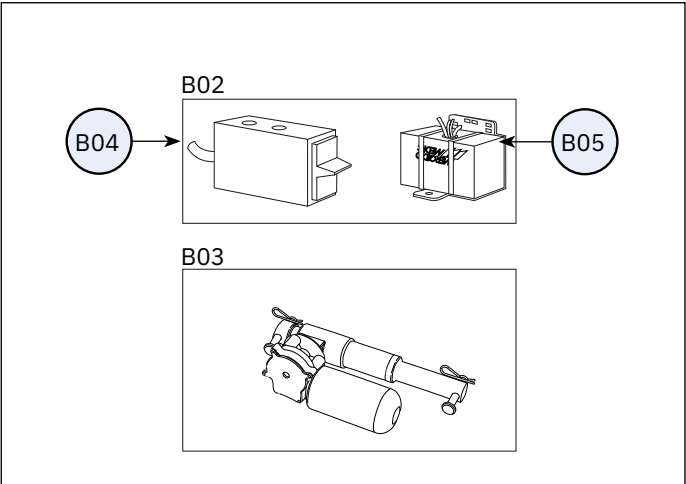

C01 Elektronik för broms
Electronics for brake

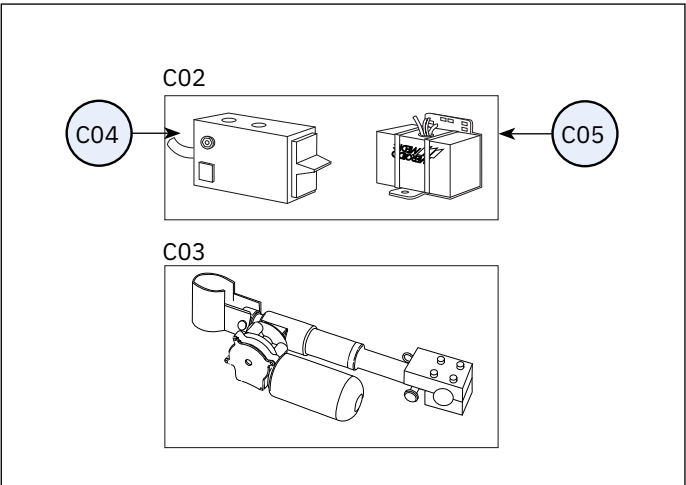


Pos	Art.nr	Benämning
Pos	Art.no	Name
A01	802998	Reläkortssats upp/ner+ladd kpl inkl manöverbox 9000 PLUS Relaycardkit up/down,charg.cpl.incl.operatorbox 9000 PLUS
A02	803034	Manöverbox PLUS f upp/ner+ladd kpl m kablage f reläkort Maneuverbox PLUS for up/down+charger with cabling f realycard
A03	802546	Reläkort strömbegränsning Upp-Ner REAL 9000 Relaycard current limiting up/down REAL 9000
A04	802692	Manöverknapp med tunga f Reläkort (Röd knapp) Red Button
B01	1 SAR40	Eldon+Reläsats f sitsvinkel inkl manöverbox m tunga El. kit + relaycard f seat angle incl. man.box w. ext. button
	2 SAR45	Eldon+Reläsats f sitsvinkel inkl manöverbox u tunga El. kit + relaycard f seat angle incl. man.box w/o ext. button
	3 803291	Eldonssats f elvinkel f manuell stol 9000 PLUS Electric kit + relaycard f electric angling for manual chair
	4 803667	Eldon+Relä f sitsvinkel -15/+15 f reläkort Real 9000 PLUS Electric kit + relaycard f seat -15/+15 f relaycard 9000 PLUS
B02	803000	Reläkortssats sitsvinkel kpl inkl manöverbox 9000 PLUS Relaycardkit seat angle compl. incl. maneuverbox 9000 PLUS
B03	1 802730	Eldonssats f sitsvinkel Electric kit for seat angle
	2 803666	Eldonssats f sitsvinkel -15/+15 f reläkort Real 9000 PLUS Electric kit f seat -15/+15 f relaycard 9000 PLUS
B04	803035	Manöverbox PLUS f rygg/sits vinkl kpl m kablage f reläkort Maneuverbox PLUS f back/seat angle cpl. with cabling f relaycard
B05	802578	Reläkort strömbegränsning Sits/Ryggvinkling 16 amp Relaycard current limiting seat/back angle 16 amps
C01	1 803276	Eldon+Reläsats f broms inkl manöverbox Electric kit + relaycard for brake including maneuverbox
	2 803077	Eldonskit f elbroms f manuell stol 9000 PLUS inkl batteri Electric kit for brake, for mauual chair incl battery
	3 803522	Eldonskit f momentan broms f Plus inkl reläkort och manbox Electric kit for momentary brake, for mauual chair
C02	803001	Reläkortssats broms kpl inkl manöverbox 9000 PLUS Relaycardkit brake completeincl.operat.box 9000 PLUS
C03	803037	Eldonssats f elbroms f PLUS Electric kit for brake, for PLUS
C04	803036	Manöverbox PLUS f upp/ner & broms kpl m kablage f reläkort Maneuverbox PLUS for up/downbrake cpl.w. cabl. f relaycard
C05	802600	Reläkort strömbegränsning Broms 8 amp Relaycard current limiting spec.brake 8 amp(dement)


Stycklista - EL manöverbox

Part list - Electric remote


D01 Elektronik för ryggvinkling
Electronics for backrest angle

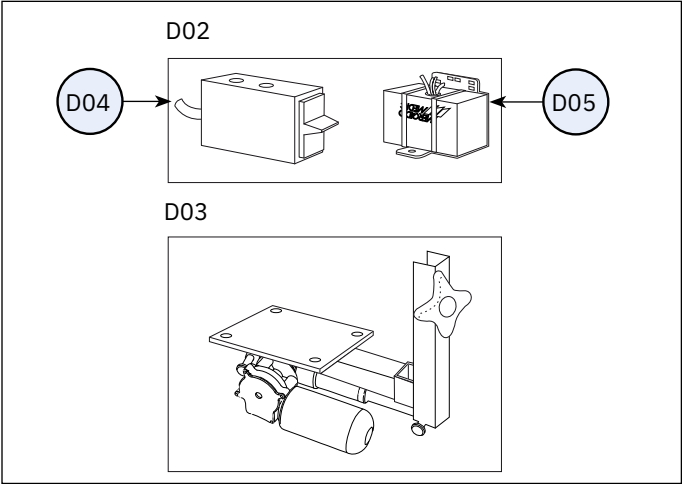

E Ryggstolpe för Elrygg
Back pole for electric backrest

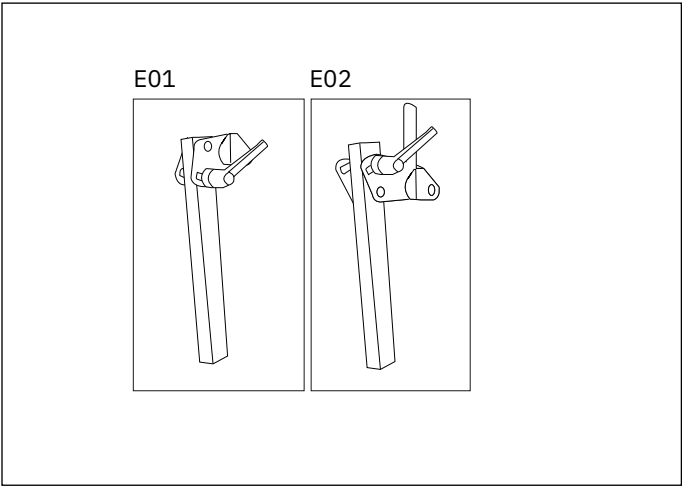

F Batteri och laddare
Battery and charger

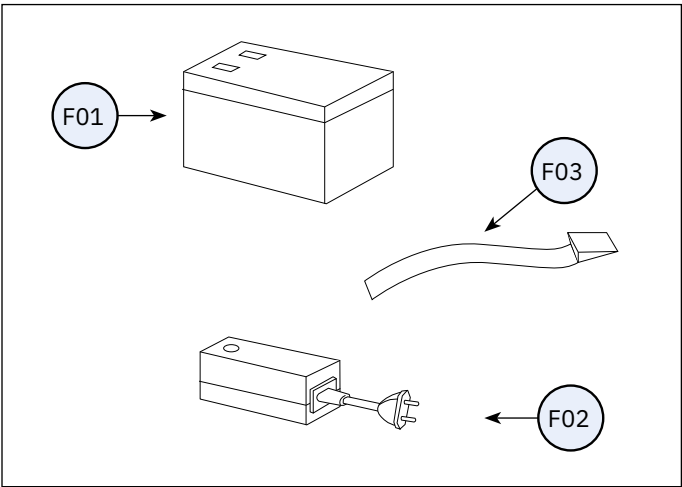

Pos	Art.nr	Benämning
Pos	Art.no	Name
D01	803277	Eldon+Reläsats f ryggvinkel inkl manöverbox <i>Electric kit + relaycard for backrest angling incl. maneuverbox</i>
D02	802999	Reläkortssats ryggvinkel kpl inkl manöverbox 9000 PLUS <i>Relaycardkit back angle compl. incl. operatorbox 9000 PLUS</i>
D03	802731	Eldonssats f ryggvinkel f reläkort Real 9000 <i>Electric kit for backrest angle for relaycard REAL 900</i>
D04	803035	Manöverbox PLUS f rygg/sits vinkl kpl m kablage f reläkort <i>Maneuverbox PLUS f back/seat angle cpl.with cabling f relaycard</i>
D05	802578	Reläkort strömbegränsning Sitstilt/Ryggvinkling 16 amp <i>Relaycard current limiting seat/back angle 16 amps</i>

E01	801265	Ryggstolpe Standard. ErgoMedic Låg rygg <i>Back pole Std Cla/ ErgoMedic Low back</i>
E02	800841	Ryggstolpe Standard ErgoMedic Hög rygg <i>Back pole Standard ErgoMedic High back</i>


F01	1	801134	Batteri REAL Elstol Vuxen 12V 7.2Ah <i>Battery 12V 7.2Ah</i>
	2	801135	Batteri REAL Elstol 12 V 3.4 Ah f Br 33-39 <i>Battery 12V 3.4Ah</i>
F02	1	802289	Batteriladdare REAL 9000 12V <i>Battery charger 12V REAL 9000 12V</i>
	2	802935	Batteriladdare REAL 9000 12V för England <i>Battery charger 12V for UK</i>
F03		801258	Fästband Batteri längd 700 mm bredd 18mm för Elstol <i>Cord for battery length 700 mm width 18 mm</i>

Stycklista - EL laddbox

Part list - Chargerbox


A Elektronik för upp & ner för laddbox

Electronics for up & down with chargerbox

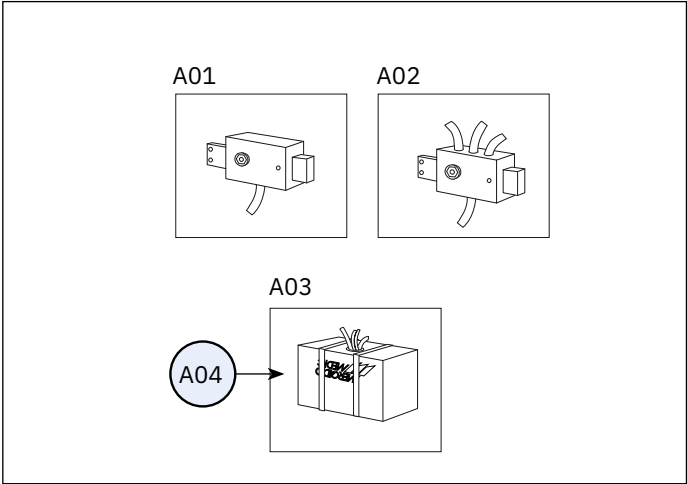

B Manöver alternativ

Maneuver alternative

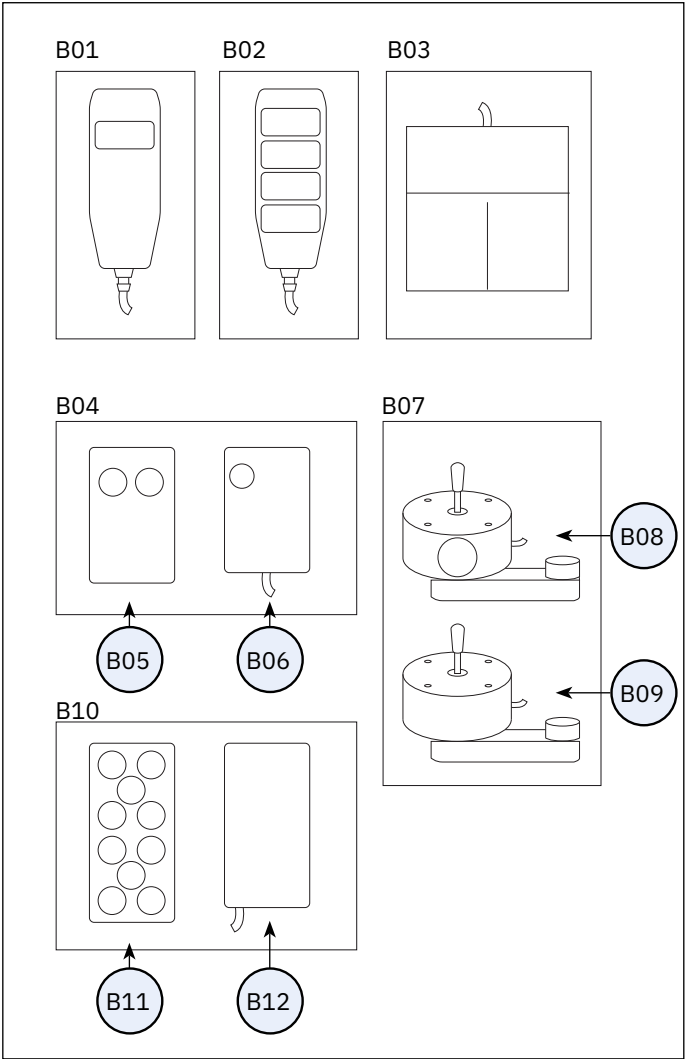


Pos	Art.nr	Benämning
Pos	Art.no	Name
A01	803029	Laddbox Hand Fjärr Joystick upp/ner Chargerbox handcontrol 1-function up/down
A02	803030	Laddbox Hand Fjärr Joystick Multi Chargerbox handcontrol Multi
A03	802748	Reläkortssats upp/ner+ladd 9000 kpl exkl laddbox Relaycardkit up/down + charger 9000 compl. excl. chargerbox
A04	802546	Reläkort strömbegränsning upp/ner REAL 9000 Relaycard current limiting up/down REAL 9000
B01	802739	Handkontroll 1-funktion u/n m sladd o kontakt för reläkort Handcontrol 1-function up/downcord and contact for relaycard
B02	802740	Handkontroll 4-funktion multi m sladd o kontakt för reläkort Handcontrol 4-function multicord and contact for relaycard
B03	802688	Fotkontakt elreglage h/s 9000 f REAL 9000 El för reläkort Foot pedal for electric raising/lowering
B04	802686	Sladdlös höjreglering för REAL 9000 El för reläkort Remote control Kit Up/Down
B05	801806	Fjärrkontroll Manöverdosa f Upp/Ner IR 9000 El Remote control Up/Down
B06	802737	Fjärrkontroll Mottagare f Upp/Ner IR 9000 El för reläkort Remote control Receiver Up/Down
B07	802743	Joystick 3-funktioner + broms m kontakt för reläkort Joystick 3 function + brake
B08	802742	Joystick 2-funktioner + broms m kontakt för reläkort Joystick 2 function + brake
B09	802741	Joystick 2-funktioner ej broms m kontakt för reläkort Joystick 2 function no brake
B10	802687	Sladdlös multireglering för REAL 9000 El för reläkort Remote control Kit Multi
B11	801808	Fjärrkontroll Manöverdosa för Multi IR 9000 El Remote control Transmitt Multi
B12	802738	Fjärrkontroll Mottagare för Multi IR 9000 El för reläkort Remote control Receiver Multi


Stycklista - EL laddbox

Part list - Chargerbox


C01 Elektronik för ryggvinkling för laddbox
Electronics for backrest angle with chargerbox

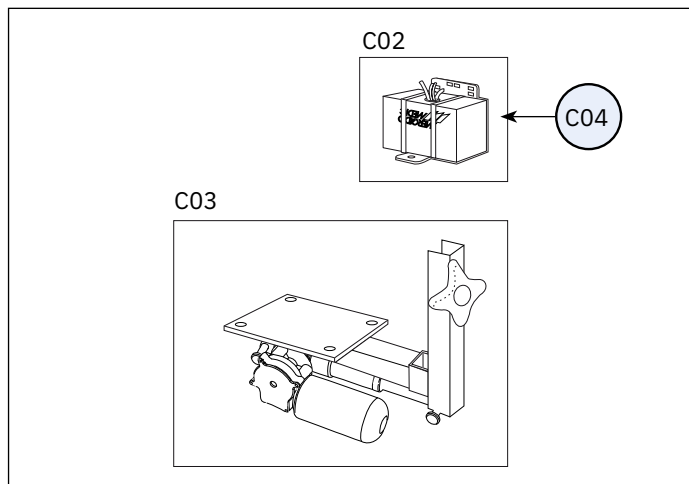

D01 Elektronik för sitsvinkling för laddbox
Electronics for seat angle adjustment with chargerbox

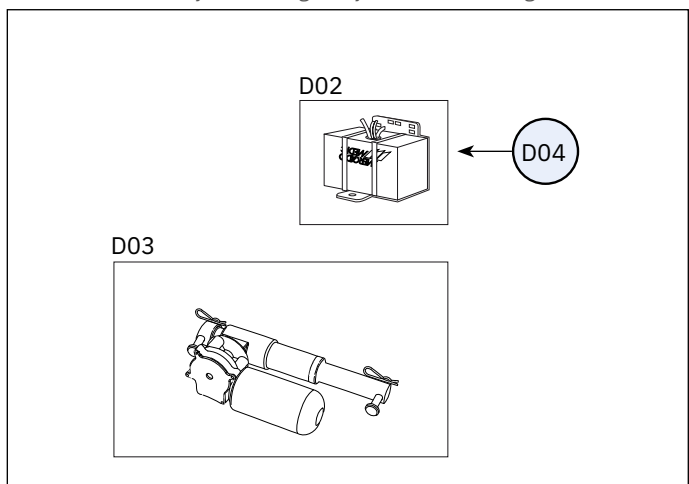

E01 Elektronik för broms för laddbox
Electronics for brake with chargerbox

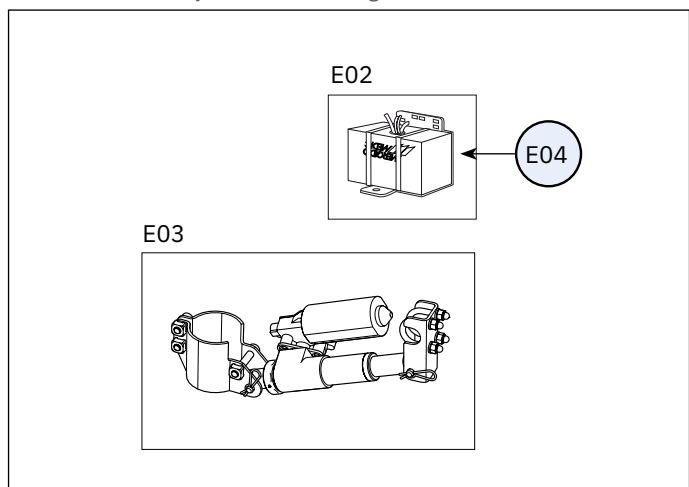

Pos Pos	Art.nr Art.no	Benämning Name
C01	803274	Eldon+Reläsats för ryggvinkel exkl laddbox Electric kit + relaycard for backrest angling excl. chargerbox
C02	802750	Reläkortssats ryggvinkel komplett exkl laddbox Relaycardkit back angle compl. excluding chargerbox
C03	802731	Eldonssats för ryggvinkel för reläkort Real 9000 Electric kit for backrest angle
C04	802578	Reläkort strömbegränsning Sitstilt/Ryggvinkling 16 amp Relaycard current limiting seat/back angle 16 amps
D01	803272	Eldon+Reläsats f sitstilt exkl laddbox Electric kit + relaycard for electric seat angling excl. chargerbox
D02	802749	Reläkortssats sitstilt kpl exkl laddbox Relaycardkit seat angle compl. excluding chargerbox
D03	802730	Eldonssats för sitstilt Electric kit for seat angle adjustment
D04	802578	Reläkort strömbegränsning Sitstilt/Ryggvinkling 16 amp Relaycard current limiting seat/back angle 16 amps
E01	803273	Eldon+Reläsats f broms exkl laddbox Electric kit + relaycard for electric brake excluding chargerbox
E02	802751	Reläkortssats broms kpl exkl laddbox Relaycardkit brake complete excluding chargerbox
E03	803037	Eldonssats för elbroms för PLUS Electric kit for seat electric brake for PLUS
E04	802600	Reläkort strömbegränsning Broms 8 amp Relaycard current limiting brake 8 ampere



MERCADO SVERIGE

Mercado Medic AB
Tryffelslingan 14
181 57 Lidingö

Tel +46 (0) 8 555 143 00
Fax +46 (0) 8 555 143 99

Email info@mercado.se
Internet www.mercado.se



MERCADO NETHERLANDS

Mercado Medic
Nederland BV
Nobelweg 22
3899 BN Zeewolde

Tel +31 (0) 36 521 99 95
Fax +31 (0) 36 521 99 90

Email info@mercado-medical.nl
Internet www.mercado-medical.nl



MERCADO UK

Mercado Medic UK Ltd
PO Box 4818
Warwick, CV34 9GB

Ph +44-(0) 844 561 6874
Fax +44-(0) 844 561 6875

Email info@mercado-medical.co.uk
Internet www.mercado-medical.co.uk



MERCADO NORGE

Sunrise Medical AS
Delitoppen 3
1540 Vestby

Telefon +(47) 66 96 38 00
Telefaks +(47) 66 96 38 80

Epost: post@sunrisemedical.no
Internett: www.sunrisemedical.no