



 **REAL® 9000 PLUS**



**BRUKS- OCH SKÖTSELANVISNING
REAL 9000 PLUS/EL/VUXEN/BARN/MINI/COXIT**


Dok. 20-07313-03
Artikelnr 803410
Ändrad 2020-12-04
Giltig från 2007-06-01

REAL 9000 PLUS är en medicinteknisk produkt, Klass I. Den är CE-märkt i enlighet med Läkemedelsverkets författningssamling för medicintekniska produkter LVFS 2003:11 och är testad och godkänd enligt EN 1335, IEC 60601 samt EN 12182. Stolens samtliga textilier är testade och godkända enligt EN 1021-1 och EN 1021-2. Mercado Medic AB är certifierade mot ISO 9001, ISO 14001 samt ISO 13485 och följer gällande arbets- och miljölagstiftning.


Om du har frågor gällande din produkt eller om något oförutsett inträffat, kontakta i första hand din förskrivare, annars är ni välkomna att kontakta oss på Mercado Medic AB.

PDF-versioner av våra bruks- och skötselanvisningar med förstoringsmöjligheter går att hitta på vår hemsida, www.mercado.se. Där finns även information om tillbehör som går att montera på Mercado Medics stolar samt eventuella säkerhetsmeddelanden till marknaden, förskrivningsstöd eller återkallelser av produkter och tillbehör.


Vi förbehåller oss rätten för ändringar på denna manual och dess innehåll.

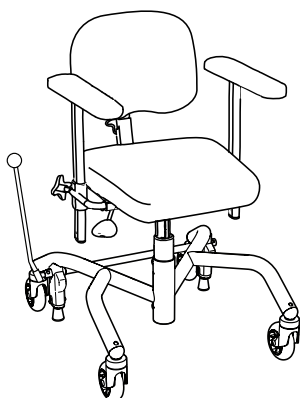


☐ REAL PLUS

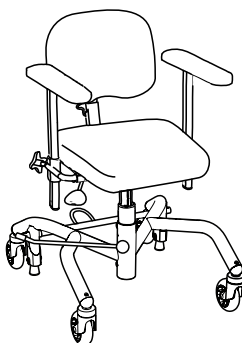


☐ REAL PLUS BARN/MINI

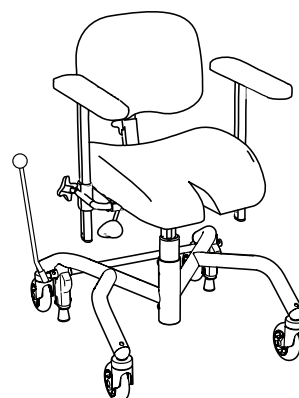


☐ REAL PLUS COXIT

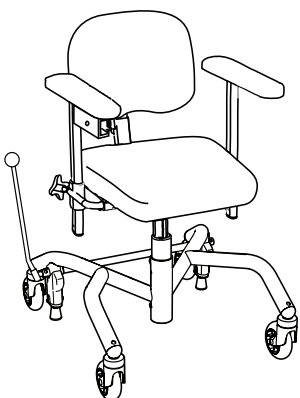

☐ REAL PLUS EL

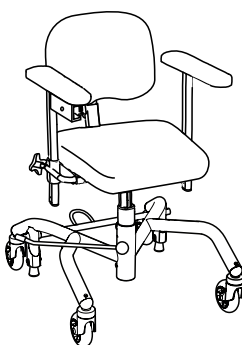

☐ REAL PLUS BARN/MINI EL

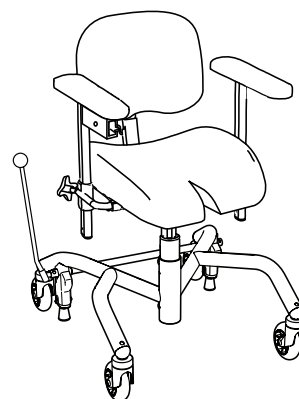

☐ REAL PLUS COXIT EL

Tillräcklig kompetens för att säkert kunna använda denna produkt uppnås genom att nogra läsa igenom denna bruks- och skötselanvisning innan stolen tas i bruk.



INNEHÅLL

VIKTIG INFORMATION OCH KLASS	SID 4
FÖRVÄNTAD LIVSLÄNGD	SID 4
DESTRUKTIONSANVISNINGAR.....	SID 5
BEKANTA DIG MED DIN REAL 9000 PLUS.....	SID 5
INDIVIDUELL ANPASSNING	SID 5
BRUKARMANUAL	SID 6
RENGÖRING, SKÖTSEL OCH LADDNING	SID 8
REKONDITIONERING OCH SERVICE	SID 9

VIKTIG INFORMATION OCH KLASS

REAL-stolen har utbytbara komponenter, tillbehör och funktioner med inställningsmöjligheter för individuell anpassning. Stolen skall endast brukas av den person och för det ändamål för vilken den är avsedd. Stolen är avsedd för inomhusbruk och skall ej utsättas för vatten, andra vätskor eller kemikalier. Ej heller hög värme eller långvarig och intensiv solbelysning eller annan strålning. Stolen får ej utrustas med andra tillbehör eller komponenter än vad som godkänts av Mercado Medic AB. För bibehållen CE-märkning får inga anpassningar eller förändringar utföras utan Mercado Medic AB's godkännande. Reparationer och andra tekniska åtgärder får endast utföras av personal auktoriserad av Mercado Medic AB. Läs nog igenom denna bruksanvisning innan stolen tas i bruk.

- REAL PLUS EL tillhör skyddsklass II, internt batteri.
- REAL PLUS EL tillhör skyddstyp B.
- REAL PLUS EL är EMC-testad och provad enligt EN 60601-1-1 och EN 60601-1-2 och skall därför hanteras enligt vår bruks- och skötselanvisning.
- EMC-bilaga finns att ladda hem på mercado.se/dokument
- Max brukarvikt: REAL PLUS 140 kg. REAL PLUS EL 150 kg.
- Stolen skall transporteras i avsedd kartong på pall. Lagras inomhus med minst +10°C.
- Endast elektrisk utrustning från Mercado Medic AB får användas på REAL PLUS EL.
- OBS! De elektriska funktionerna på REAL PLUS EL-stolarna får användas max 10% av tiden (max 6 min/h). Om denna gräns överskrids kan det uppstå skador på stolen.
- Om REAL PLUS EL är utrustad med benstöd skall brukarens fötter hållas på fotplattan vid bruk av elfunktioner.
- Varningssymboler som kan förekomma på stolen: Klämrisk(1), Het Yta(2)



①



②

FÖRVÄNTAD LIVSLÄNGD

Produktens förväntade livslängd är 10 år när den används i överensstämmelse med anvisningarna i denna bruksanvisning. Produktens tillverkningsdatum hittas tillsammans med serienummer på en av de silverfärgade etiketterna på Produktens underrede, märkt med Lev/Del och står på formatet ÅÅVV (år och veckonummer).

Som användare av Produkten ska du ta kontakt med din förskrivare, hjälpmedelscentral eller distributör om Produkten uppvisar försämrade eller ändrade prestanda.

Efter förväntad livslängd är det viktigt att en helhetsbedömning av Produkten görs innan fortsatt användande. Efter förväntad livslängd kan inte Mercado Medic AB garantera produktens lämplighet och säkerhet, då Mercado Medic AB inte har någon kontroll över hur produkten använts och slitits. Helhetsbedömningen av Produkten ska utföras av vårdgivande organisation om produkten är förskriven, och bör ta hänsyn till åtminstone hur Produkten använts, vilket skick Produkten och ingående komponenter är i, huruvida Produkten rekonditionerats och genomgått service, när detta skett, vad som åtgärdats vid dessa tillfällen och anledningen till åtgärderna.

På de marknader utanför Sverige och Norge där Produkten i förekommande fall är såld av distributör direkt till brukaren, och därför saknar ansvarig förskrivare, ska periodiskt underhåll göras enligt instruktioner i avsnitt Rekonditionering och Service utöver helhetsbedömningen ovan.

Efter förväntad livslängd kan Mercado Medic AB inte garantera att reservdelar kan tillhandahållas. CE-märkning påverkas inte av förväntad livslängd.

DESTRUKTIONSANVISNINGAR

Brännbart:

- Sits
- Rygg
- Armstöd
- Nackstöd
- Övrig stoppdetaljer sålda utav Mercado Medic AB

Elektronikskrot:

- Motorer
- Sladdar
- Styrssystem

Metall:

- Stativ
- Ellyftomater
- Gaskolvar
- Gasfjädrar
- Sittkryss
- Ryggfällning
- Breddbågar och armstödsmekanism
- Övriga metalleder av produkter sålda utav Mercado Medic AB

OBS! Batteri sorteras separat.

BEKANTA DIG MED DIN REAL 9000 PLUS

KONTROLLPUNKTER FÖRE ANVÄNDNING

1. Justera upp armstöden i lämplig höjd och lås ratt avsedd för höjdregering.
2. Montera ryggstolpen i avsett fäste och lås ratt avsedd för höjjustering av ryggstöd.
3. Montera bromsspak i avsett fäste (höger eller vänster sida). Gäller ej elbroms.
4. Samtliga rattar och vred skall vara åtdragna innan man sätter sig i stolen.
5. Stolen skall alltid vara bromsad när man sätter sig och reser sig.
6. Ladda stolen enligt bifogad instruktion före användning första gången (gäller EL-stol).

RIKTLINJER FÖR INDIVIDUELLA ANPASSNINGAR AV MERCADO MEDIC ABs PRODUKTER

Anpassningar får göras endast av personal som genomgått Mercado Medic ABs utbildning för service och rekonditionering. Artiklar som finns på lista över gällande kombinationsavtal på www.mercado.se/mercado-dokument får monteras med av Mercado Medic AB bibehållen CE-märkning. Önskas artikel som ej finns på lista över gällande kombinationsavtal monteras skall hos kund auktoriserad personal kontakta Mercado Medic AB för skriftligt godkännande.

Artikel som skall utvärderas måste fysiskt skickas till Mercado Medic AB från antingen kund eller leverantör av artikel i fråga. Mercado Medic AB kontaktar sedan leverantör av artikel ifråga om eventuellt kombinationsavtal är aktuellt, genomför Mercado Medic AB en riskanalys på önskad artikel. När riskanalys är utförd erhåller kund ett skriftligt utlåtande.

Stolar som genomgått förändringar enligt nedan skall verifieras av Mercado Medic AB för att Mercado Medic AB skall bibehålla produktansvaret.

- Stoppade detaljer såsom sitsar, ryggstöd, armstöd, sidostöd, bälstöd och nackstöd får anpassas såvida man ej överskrider på produkten befintliga yttre justeringsmått.
- Tyngdpunkt över lyftdon skall bibehållas/centreras för bästa funktion.
- Stoppade detaljer skall klara gällande antändlighetskrav och andra miljökrav.
- Ytor som belastas med betydande vertikala krafter får ej hamna utanför den yta (bas) som bildas av hjulcentrum-punkterna.

Om dessa riktlinjer uppfylls behåller Mercado Medic AB produktansvaret för sin produkt.

Produkter som specialanpassas av vården utanför Mercado Medic ABs direktiv där vården också tar över produktansvaret kan återställs till originalskick. Detta måste utföras av en auktoriserad tekniker godkänd av Mercado Medic AB. Mercado Medic AB återtar då produktansvaret enligt CE-märkning 93/42 EEG; Medicintekniska Produktdirektivet MDD.

Vid frågor angående anpassningar/specialanpassningar kontakta Ronny Fogelqvist:

Tel **0708 27 96 14**

E-post ronny.fogelqvist@mercado.se

BROMS


OBS! Stolen skall alltid vara bromsad när man sätter sig och reser sig. Bromsen skall kontrolleras regelbundet. Vid slitage bytes bromsfot av gummi. Bromsfunktionen kan vara nedsatt på ojämnt underlag.

DET FINNS TRE TYPER AV BROMS:


Bromspak, fotbroms och elbroms.

REGLAGE


1. Broms, PLUS-stativ 48 för spak framåt.
2. Broms, PLUS-stativ 43 för spak bakåt, pedal nedåt.
3. EL- broms, tryck på knapp.
4. EL- broms, tryck på knapp.
5. Handbroms på transportstativ, bromsa max och tryck ned den röda kilen. Låsa upp – pressa handtaget uppåt tills kilen lossnar.
6. Bromsspaksfästet – för att bromsa stolen även då armstödet är utjusterat i bredd; lossa skruven på bromsspaksfästet med en 6 mm insexnyckel, drag ut fästet, fäst skruven i nästa hål och drag åt skruven hårt med insexnyckeln.

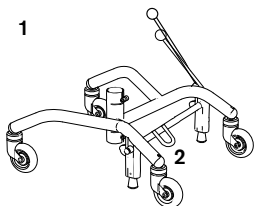


Handbroms och fotbroms

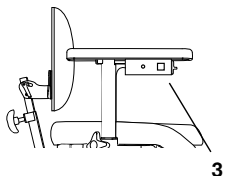


Elbroms (tillval)

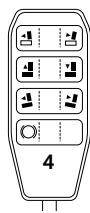

Elbroms reglage
i lös dosa (tillval)

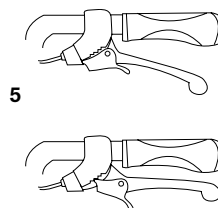

Handbroms

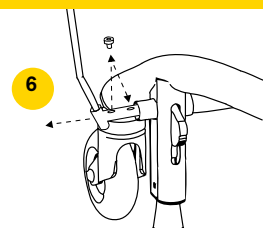

Bromsspaksfäste


SITTHÖJD/LYFTOMATER

DET FINNS TVÅ TYPER AV LYFTOMATER:


Gasfjäder och EL. Det finns standard och låg sitthöjd. Reglage för gasfjäder kan placeras under sits eller armstöd. EL-reglage är monterat som standard under armstöd. OBS! Lätta personer kan behöva hjälp med att höja och sänka den gasfjäderreglerade sittenheten.

REGLAGE


1. Sitthöjd. Gasfjäder – för reglage uppåt.
 2. Sitthöjd. EL – för reglage uppåt/nedåt.
 3. Sitthöjd. EL – reglage i lös dosa.
- Vänster knapp = upp.
Höger knapp = ned.

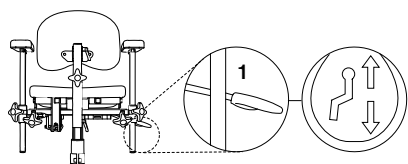


Gasfjäderreglage under sits

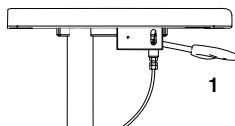

Gasfjäderreglage under
armstöd (Tillval)

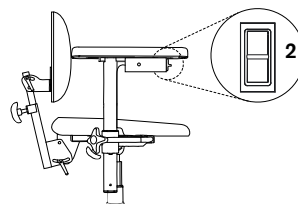

EL-reglerad

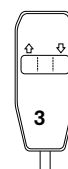

Elreglage i lös dosa/joystick/
fjärrkontroll finns som tillval.
På bilden visas lös dosa.


SITSTILT (TILLVAL)

DET FINNS TRE TYPER AV SITSTILT:


Vev, gasfjäder och EL. Reglage för gasfjäder kan placeras vid sitsens vänstra bakkant eller under armstöd. EL-reglage är monterat som standard under armstöd. Standard på sitstiltens intervall är +15°/-8°.

REGLAGE


1. Sitstilt. Vevreglerad – vrid reglage.
 2. Sitstilt. Gasfjäder – för reglage bakåt.
 3. Sitstilt. Gasfjäder – för reglage uppåt.
 4. Sitstilt. EL – för reglage uppåt/nedåt.
 5. Sitstilt. EL – reglage i lös dosa.
- Vänster knapp = framåt
Höger knapp = bakåt.

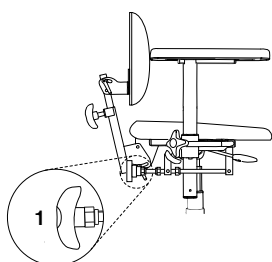


Vevreglerad

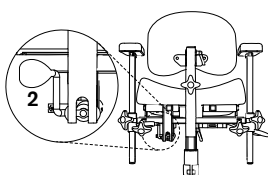


Gasfjäderreglage under sits

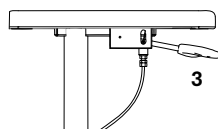

Gasfjäderreglage
under armstöd

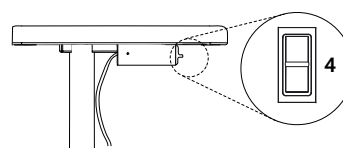


EL-reglerad

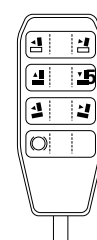

EL-reglerad
i lös dosa

OMVÄND SITSTILT ELLER ALL SITSTILT BAKÅT (TILLVAL)

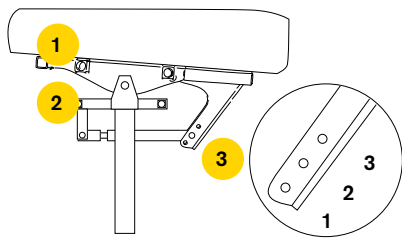

REGLAGE

1. Armstöd placerade här följer med sitsens vinkling.
2. Armstöd placerade här följer ej sitsens vinkling.
3. Det finns 3 lägen. **Vid val av läge 3 måste stolen utrustas med stativförlängare.**
 1. Fram 15°, bak 8° – standard sitstilt
 2. Fram 8°, bak 15° – omvänt sitttillt
 3. Fram 0°, bak 23° – all sitstilt bakåt

RYGGMEKANISM


DET FINNS FYRA TYPER AV RYGGMEKANISMER:

Standard, Medic, Comfort och EL. Samtliga finns i lågt respektive högt utförande (illustrerade stolar har alla låg rygg). Alla ryggmekanismer har separata reglage för höjd, djup och vinkel. Medicmodellen har utökad djupledsinställning.

REGLAGE

1. Höjd.
2. Vinkel på ryggmekanism.
3. Vinkel på ryggplatta.
4. Djup.
5. Ryggvinkel. EL-reglage i lös dosa.
Vänster knapp = framåt
Höger knapp = bakåt.


OBS! Säkerställ att Medic ryggfällning justeras in i fästet så att fjädersnäppet låser och ryggfällningen ej kan dras ur.

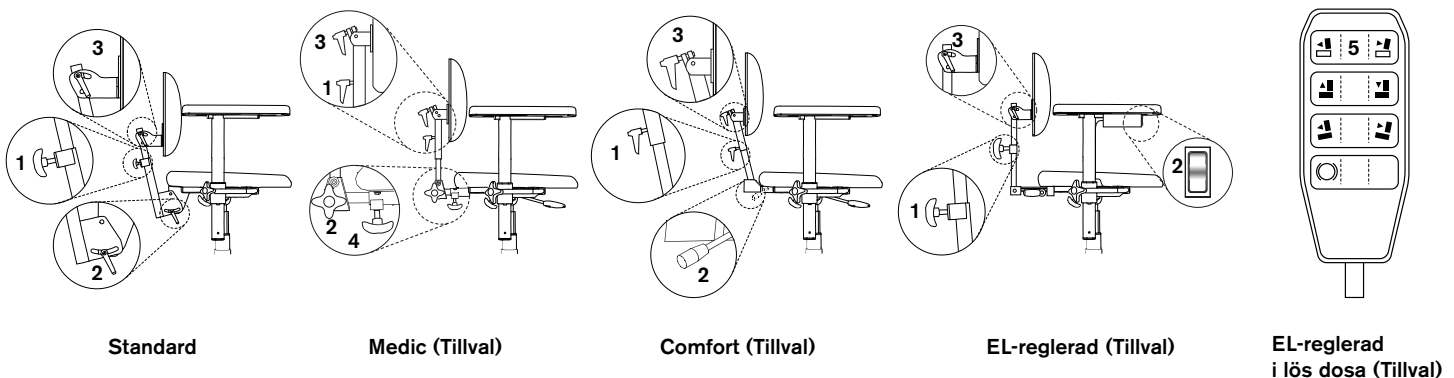

ARMSTÖD

REGLAGE

1. Höjdjustering.
2. Breddjustering.
3. Fällning.

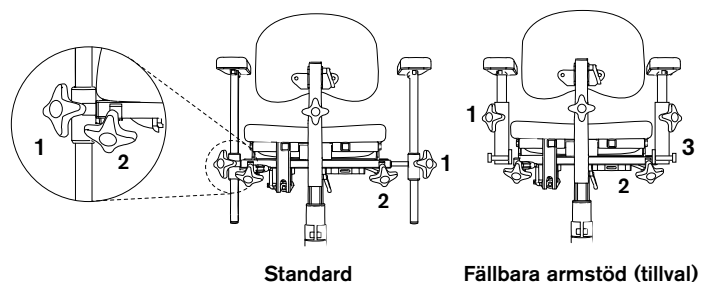


ROTATIONSFRIGÖRARE (TILLVAL)

OBS! Rotationen skall vara i låst läge när man sätter sig och reser sig. Kontrollera att spärren har "klickat" i.

REGLAGE

1. Vrides medurs för att frikoppla, moturs för att låsa.

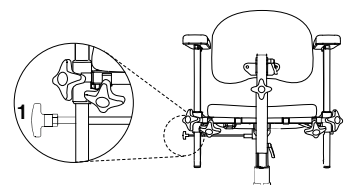


INSTÄLLNING AV COXITKLAFFAR

REAL PLUS COXIT/EL

Det finns två varianter på hur coxitklaffarna justeras. På stol utan sitsvinkling sitter reglagen under sitsens framkant. På stol med sitsvinkling sitter reglagen under sitsens bakkant.

REGLAGE

1. Lossa, ställ in önskad vinkel och drag åt.
2. Vrid reglaget för att sänka/höja klaffen.

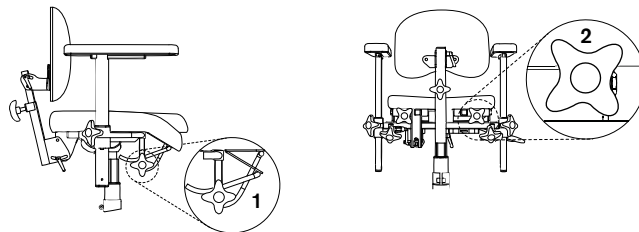

RENGÖRING, SKÖTSEL OCH LADDNING

Stolen bör torkas av och hållas ren från damm och smuts. Vi godkänner rengöringsmedel från 7 upp till max 12 på pH-skalan (koncentrerat).

Plyschklädsel tvättas med skumtvätt:

1. Ta bort lös smuts, smulor och liknande.
2. Applicera ett tunt skikt med skum, gnid skummet jämnt med en fuktig trasa.
3. Eftertorka med en ren och lätt fuktad trasa.
4. Dammsug väl när allt torkat.

Konstläder tvättas med såpvatten alternativt avtorkas med spritlösning till exempel desinfektionsmedel.

Sits, ryggstöd och övriga stoppningsdetaljer är av funktionella skäl ej tillverkade i slutet material. Vid rekonditionering bör stoppningsdetaljer av hygieniska skäl bytas ut.

Ellyftomaten skall regelbundet kontrolleras med avseende på damm, smuts och stabilitet: höj upp sittplattan till högsta läge. Gör rent med trasa. Vatten eller något lösningsmedel får ej användas. Smörj sedan in cylindern med ett tunt lager teflon- eller siliconbaserat smörjfett.

Vi rekommenderar att batteriladdare REAL 9000 Typ 2240-12V med art.nr 802289 används vid laddning av stolen. Önskas annan batteriladdare var vänlig kontakta Mercado Medic AB för skriftligt godkännande. Laddning av batteriet bör ske regelbundet, om möjligt en gång per dygn. Det är viktigt för batteriets livslängd att det aldrig blir helt urladdat.

LADDNING (GÄLLER EL-STOL)



Anslut laddningsproppen på laddaren till laddjacket (1) på boxen där vippströmbrytaren för höjning och sänkning av stolen är placerad. Anslut därefter laddarens kontakt till ett vägguttag. Lysdioden på laddaren indikerar att laddning sker. När lysdioden ändrar färg ifrån orange till grönt är batteriet färdigladdat. Stolen går att höja och sänka när laddning pågår. Detta gäller EL-stolar levererade från v. 11 2013 eller tidigare levererade uppdaterade stolar.

OBS!

Laddning av batteriet är särskilt viktigt på de stolar som har elbroms, elvinkling och elrygg då funktionen kräver hög batterikapacitet för att inte förlora funktionen. Säkerställ funktionerna genom att ladda batteriet en gång per dygn. Vid byte av batteri (typbeteckning: HP7-12 12V 7.2Ah), var noga med att rödmärkt batterikabel fästes på pluspolen på batteriet och minuskabel på minuspolen. Om stolens elektriska funktion upphör att fungera är det sannolikt en säkring som gått. Kontrollera säkringarna. De är placerade under sitsen på sladden mellan batteri och ställdon. Byt trasig säkring mot ny 25 A säkring.

TÄNK PÅ FÖLJANDE NÄR DU HANDSKAS MED BATTERIER:

- Kortslut aldrig batteriet.
- Utsätt inte batteriet för kraftiga stötar eller för öppen eld.
- Vid kontakt med batterisyra, skölj med vatten i ca 30 min. och kontakta läkare.
- Uttjanta batterier skall lämnas på miljöstationer.

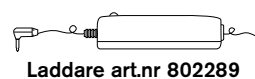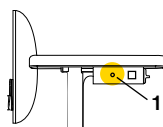

Laddare art.nr 802289

! Viktig information vid rekonditionering och service av REAL 9000 PLUS (nedan kallad Produkten):

- Produkten behöver inget periodiskt underhåll i de fall den har en ansvarig förskrivare inom vården. På de marknader utanför Sverige och Norge där Produkten i förekommande fall är såld av distributör direkt till brukaren, och därför saknar ansvarig förskrivare, ska periodiskt underhåll göras vartannat år under Produktens hela livscykel enligt punkterna 1-10 i detta avsnitt.
- I samband med service och rekonditionering ska en noggrann okulär besiktning göras på Produktens huvudkomponenter, för att säkerställa brukarens säkerhet. Dessa innefattar stativ, lyft, sittkryss, ryggfällning samt breddjusteringsbågar till armstöd. Kontrollen ska innefatta svetsar, låsbara funktioner och inställningar.
- Det är förbjudet för brukaren att sitta i Produkten under rekonditionering, service eller underhållsarbete.
- Använd ej högtryckstvätt vid rengöring av Produkten.
- Vid kontroll av stativ ska svets mellan stativets framben och bakben kontrolleras. Alla tendenser till sprickor i material eller färg i detta område bör ses som anledning att byta ut stativet, alternativt Produkten.
- Om Produkten har dålig bromsverkan bör stativets balans kontrolleras utöver skicket på bromsfötterna. Om Produkten inte står på alla fyra hjul i obromsat läge ska Produkten tas ur bruk omedelbart. Kontrollera obalans på flera platser samt riktningar för att utesluta att obalansen inte beror på golvet.

REKONDITIONERINGSANVISNING KONTROLLPUNKTER

1. Elektronikenhet

- ☐ 1.1. Elektronik / funktion / rengöring

Kontrollera elektroniken och se vilka elfunktioner som är inkopplade. Testa elfunktioner, om inte stolen fungerar. Kontrollera skador på elektronikkort, reglage och kablage.

- ☐ 1.2. manöverbox / funktion / rengöring

Kontrollera manöverreglans funktioner, kontrollera att höljet är helt och att alla knappar fungerar. Torka av manöverreglage med en lätt fuktad trasa med desinfektionsmedel, detta för att inte föra vidare ev. smitta. Använd ej lösningsmedel, blekmedel, polermedel, syntetiska tvättmedel, polervax eller sprayer på stolen.

- ☐ 1.3. Kontakter; infästning

Kontrollera att kablar och kontakter är hela och sitter ordentligt fast. Se till att ingen klämrisk föreligger för kablar och kontakter.

- ☐ 1.4. Batterier / batteriladdare / funktion

Kontrollera att laddaren fungerar och inte har några skador på hölje eller sladdar.

Mät upp batteriet och kontrollera att det inte är för låga värden, det tyder på att batteriet inte varit laddat eller att någon cell i batteriet gått sönder.

- ☐ 1.5. Elsitstilt / funktion

Kontrollera att eldonet inte har några synliga skador. Kontrollera funktion i eldonets rörliga delar. Se

till att alla låsskruvar är åtdragna så inget glapp uppstår i ändläge.

- ☐ 1.6. Elrygg / funktion

Kontrollera att eldonet inte har några synliga skador. Kontrollera funktion i eldonets rörliga delar. Se till att alla låsskruvar är åtdragna så inget glapp uppstår i ändläge.

- ☐ 1.7. Elbroms / funktion

Kontrollera att eldonet inte har några synliga skador. Kontrollera funktion i eldonets rörliga delar. Se till att alla låsskruvar är åtdragna så inget glapp uppstår i ändläge.

Kontrollera alla förband och att klämfäste på bromsaxel och stativrör sitter ordentligt.

2. Ellyftomat

- ☐ 2.1. Missljud / slirkoppling

Lyssna efter missljud i lager i växelhuset, byt ellyftomat om något lager är dåligt. Ellyftomaten kan skickas till Mercado Medic AB på reparation/rekonditionering.

Belasta stolen och kontrollera att ellyftomaten inte slirar i bottenläge. Annars justera så slirkopplingen har rätt moment.

- ☐ 2.2. Rotationslåsning / smörjning

Kontrollera att ellyftomaten inte glappar i rotationsriktning, Byt ellyftomat om så är fallet. Ellyftomaten kan skickas till Mercado Medic AB på reparation/rekonditionering.

- ☐ 2.3. Infästning / efterdragning

Kontrollera att infästning i sittkryss och stativ är ordentligt åtdragna.

- ☐ 2.4. Kabeldragning / slitage

Se efter slitage och klämskador på kablar.

3. Underrede

- ☐ 3.1. Svetsar

Kontrollera noggrant alla svetsar efter tecken på sprickor, korrosion, rörelse mm.

- ☐ 3.2. Skruvförband

Kontrollera och dra åt alla skruvförband, Byt ut skruvar som har skadade nyckelgrepp eller gängor.

4. Bromsar

- ☐ 4.1. Funktion / slitage

Byt ut bromsfötter och kontrollera att bromsen fungerar tillfredställande.

- ☐ 4.2. Plastpluggar / styrbussningar

Se så att styrbussningar och plastpluggar sitter ordentligt på plats, byt ut slitna eller skadade delar.

5. Länkhjul

- ☐ 5.1. Funktion / rull / svängning

Rensa länkhjulen från hår och damm och kontrollera länkhjul och länkbjglar efter slitage och glapp vilket kan tyda på dåliga lager. Kontrollera att länkhjulen snurrar och byglarna roterar som de ska. Byt länkhjul vid behov.

- ☐ 5.2. Infästning / efterdragning
Kontrollera att länkhjulens skruvar är hela och är dragna.

6. Sittkryss

- ☐ 6.1. Mekanik / svetsar

Kontrollera noggrant alla svetsade delar (Speciellt vid upphängning av tildon då dessa delar får mest belastning)

- ☐ 6.2. Skruvförband / efterdragning

Kontrollera och dra åt alla skruvförband, Byt ut skruvar som har skadade nyckelgrepp eller gängor.

- ☐ 6.3. Plastpluggar / styrbussningar

Se så att styrbussningar och plastpluggar sitter ordentligt på plats, byt ut slitna eller skadade delar.

- ☐ 6.4. Sittplatta / byte / rengöring
Byt ut sittplatta till en ny och tvätta eller byt ut eventuella överdrag

- ☐ 6.5. Manövrering / smörjning
Kontrollera att sittkryssets rattar och vred fungerar och låser som de ska.

- ☐ 6.6. Gasfjädertilt / funktion
Om stolen är utrustad med gastiltsreglage kontrollera att den låser ordentligt och inte sakta förändras i tilt vid belastning. Kontrollera och byt ut skadade vajrar och vajerhöljen.

- ☐ 6.7. Vevtiltsreglage / slitage
Om stolen är utrustad med Vevtiltsreglage, kontrollera att den inte glappar och att alla skruvar är dragna.

- ☐ 6.8. Coxitmekanik / manövrering
Kontrollera att rattarna till klaffarna går lätt och är ordentligt låsta med kontramuttern.

7. Ryggmekanism

- ☐ 7.1. Funktion / slitage

Kontrollera och byt ut eventuella slitna delar, se efter att funktion i rörliga delar går bra.

- ☐ 7.2. Infästning / efterdragning
Kontrollera att alla skruvar, rattar och vred låser ordentligt, se till att fjädersnäppen fungerar felfritt.

- ☐ 7.3. Plastpluggar / styrbussningar

Se så att styrbussningar och plastpluggar sitter ordentligt på plats, byt ut slitna eller skadade delar.

- ☐ 7.4. Ryggplatta / byte / rengöring

Byt ut Ryggplatta till en ny och tvätta eller byt ut eventuella överdrag

- ☐ 7.5. Gasfjäderreglage / funktion
Kontrollera gastryck och stabilitet i gasfjädern, att den låser ordentligt och att ryggen inte sakta förändras i vinkel vid belastning. Kontrollera och byt ut skadade vajrar och vajerhöljen.

8. Armstöd

- ☐ 8.1. Funktion / slitage

Kontrollera och byt ut eventuella slitna delar, se efter att låsning och funktion i rörliga delar går bra.

- ☐ 8.2. Plastpluggar / styrbussningar

Se så att styrbussningar och plastpluggar sitter ordentligt på plats, byt ut slitna eller skadade delar.

- ☐ 8.3. Armstödsplattor / byte / rengöring

Byt ut armstödsplattor till nya.

- ☐ 8.4. Armstödsmekanik / funktion

Kontrollera alla svetsar och att inga skador finns på rörsystemet som kan försämra eller försvaga konstruktionen.

9. Tillbehör

- ☐ 9.1. Återställning

Demontera de tillbehör som inte normalt ska sitta på stolen och kontrollera dom enligt nedan innan de eventuellt återsätts i lager.

- ☐ 9.2. Mekanik

Kontrollera alla svetsar och att inga skador finns på mekaniken som kan försämra eller försvaga konstruktionen.

- ☐ 9.3. Funktion / slitage

Kontrollera och byt ut eventuella slitna delar, se efter att låsning och funktion i rörliga delar går bra.

- ☐ 9.4. Stoppdetaljer

Kassera stoppdetaljer för att motverka smittspridning, kassera eller tvätta överdrag enligt tvättrådsmärkning.

10. Slutkontroll

- ☐ 10.1. Provkörning

Provkör stolens funktioner och kontrollera att alla funktioner, elfunktioner och bromsar fungerar som de ska. Om stolen ska lagerhållas så ska stolen sättas i viloläge med den avsedda 9V adaptorn för att spara på batterier.

KONTAKTA MERCADO

Huvudkontoret

Besöksadress

Tryffelslingan 14, 181 57 Lidingö

Postadress

Box 1074, 181 22 Lidingö

Växeln är öppen: Mån-Fre 08.00-16.30

Tel: 08-555 143 00

Fax: 08-555 143 99

E-post: info@mercado.se

Service och teknisk support

Telefontid mån-fre

08.00-12.00 samt 13.00-16.00.

Tel: 08-555 143 08

Fax: 08-555 143 99

Mobil: 070-550 63 98, 070-894 63 68

E-post: service@mercado.se

[Plats för produktetikett med serienummer.]



Mercado Medic AB
Tryffelslingan 14
181 57 Lidingö

Telefon & Fax
Tel 08 555 143 00
Fax 08 555 143 99

Email & Internet
Email info@mercado.se
Internet www.mercado.se