



REAL[®] 9500/9600 EL



MONTERINGSANVISNING, BRUKS & SKÖTSELANVISNING


Dok. 20-07315-02
Artikelnr 801978
Ändrad 2020-12-04
Giltig från 2018-01-01

REAL 9500/9600 EL är en medicinteknisk produkt, Klass I. Den är CE-märkt i enlighet med Läkemedelsverkets författningssamling för medicintekniska produkter LVFS 2003:11 och är testad och godkänd enligt EN 1335 samt IEC 60601-1-2. Stolens samtliga textilier är testade och godkända enligt EN 1021-1 och EN 1021-2. Mercado Medic AB är certifierade mot ISO 9001, ISO 14001 samt ISO 13485 och följer gällande arbets- och miljölagstiftning.

Om du har frågor gällande din produkt eller om något oförutsett inträffat, kontakta i första hand din förskrivare, annars är ni välkomna att kontakta oss på Mercado Medic AB.

PDF-versioner av våra bruks- och skötselanvisningar med förstoringsmöjligheter går att hitta på vår hemsida, www.mercado.se. Där finns även information om tillbehör som går att montera på Mercado Medics stolar samt eventuella säkerhetsmeddelanden till marknaden, förskrivningsstöd eller återkallelser av produkter och tillbehör.

Vi förbehåller oss rätten för ändringar på denna manual och dess innehåll.

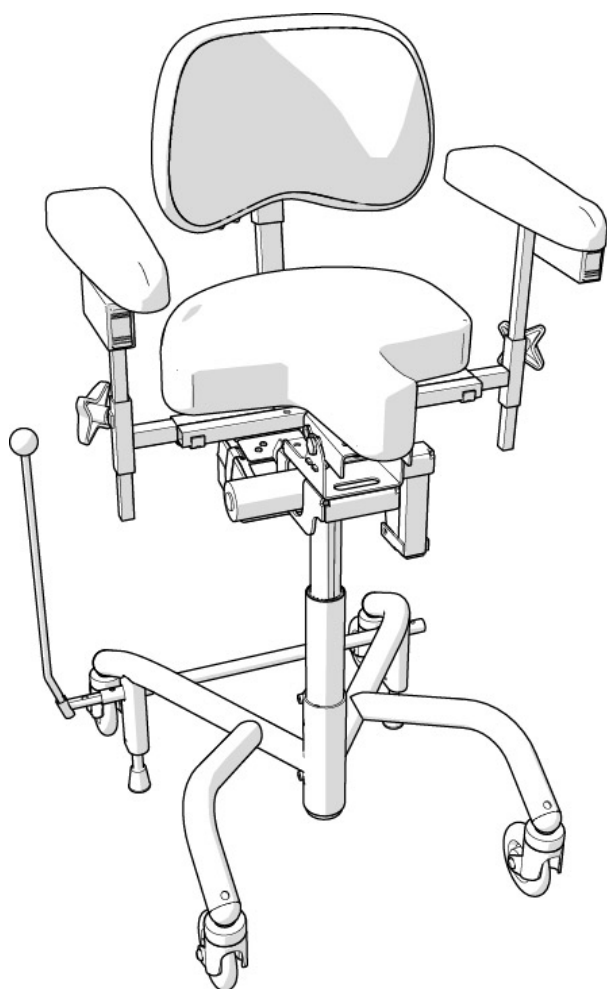

DIN REAL[®] 9500/9600 EL

- ☐ Manuell (9500)
- ☐ El (9600)
- ☐ PLUS
- ☐ H-stativ

Tillräcklig kompetens för att säkert kunna använda denna produkt uppnås genom att nogra läsa igenom denna bruks- och skötselanvisning innan stolen tas i bruk.



INNEHÅLLSFÖRTECKNING

BEKANTA DIG MED DIN REAL 9500/9600 EL	SID 3
VIKTIG INFORMATION & KLASS	SID 3
FÖRVÄNTAD LIVSLÄNGD	SID 4
BRUKARMANUAL	SID 5
INDIVIDUELL ANPASSNING.....	SID 8
RENGÖRING & SKÖTSEL.....	SID 8
REKONDITIONERING OCH SERVICE	SID 9

NÖDVÄNDIG INFORMATION FÖRE ANVÄNDNING

1. Justera upp armstöden i lämplig höjd och lås ratt avsedd för höjddreglering.
2. Montera ryggstolpen i avsett fäste och lås ratt avsedd för höjjustering av ryggstöd.
3. Montera bromsspak i avsett fäste (höger eller vänster sida). Gäller ej Elbroms.
4. Samtliga rattar och vred skall vara åtdragna innan man sätter sig i stolen.
5. Stolen skall alltid vara bromsad när man sätter sig och reser sig. Bromsen skall kontrolleras regelbundet.
6. Gäller elstol: Ladda stolen enligt instruktion i denna bruksanvisning. **OBS! Laddning bör ske dagligen.**
7. Stolen får ej användas med avmonterad rygg och/eller avmonterade armstöd.

VIKTIG INFORMATION & KLASS

REAL-stolen har utbytbara komponenter, tillbehör och funktioner med inställningsmöjligheter för individuell anpassning. Stolen skall endast brukas av den person och för det ändamål för vilken den är avsedd. Stolen är avsedd för inomhusbruk och får ej användas utomhus. Stolen skall ej utsättas för stark kyla, hög värme, långvarig solbelysning eller annan strålning. Stolen skall ej heller utsättas för vatten, andra vätskor eller kemikalier. Varning! Metallytor kan bli mycket varma om de har utsatts för solsken. Stolen får ej utrustas med andra tillbehör eller komponenter än vad som godkänts av Mercado Medic AB. För bibehållen CE-märkning får inga anpassningar eller förändringar utföras utan Mercado Medic AB's godkännande <http://mercado.se/mercado-dokument/>. Reparationer och andra tekniska åtgärder får endast utföras av personal auktoriserad av Mercado Medic AB. Läs noga igenom denna bruksanvisning innan stolen tas i bruk.

- REAL 9500/9600 EL tillhör skyddsklass II, Internt batteri.
- REAL 9500/9600 EL tillhör skyddstyp B.
- REAL 9500/9600 EL är EMC testad och provad enligt EN 60601-1-1 & EN 60601-1-2 och skall därför hanteras enligt vår bruks- och skötselanvisning.
- EMC bilaga finns att ladda hem på <http://mercado.se/mercado-dokument/>
- REAL 9500/9600 EL uppfyller IP 21. IP2x innebär beröringsskydd för fingrar mm, ingen kommer åt något farligt med fingrar eller liknande. IPx1 innebär vertikalt droppskydd, lätt dusch uppfifrån.
- REAL 9500/9600 EL har en ellyftomat som lyfter patienten så pass högt att det i värsta fall medför en risk. Klarar patienten ej att ta sig ur stolen från dess högsta läge får sitthöjden aldrig vara högre än att fötterna är i marken. Undantag tillåts om patienten kan få hjälp via hemtjänstlarm eller telefon.
- Endast elektrisk utrustning från Mercado Medic AB får användas på REAL 9500/9600 EL .
- Stolen måste framföras med aktsamhet. Innan förflyttning får ske måste omgivningen beaktas. Finns husdjur eller barn på golvet kan de lätt bli påkörda. Stolen skall endast användas för att sitta i och inte ses som en leksak för barn eller vuxna.
- Mercado Medics armstöd, sitsar, ryggstöd mm är framtagna och producerade så att de skall vara fria från toxiska och allergi framkallande ämnen.
- REAL 9500/9600 EL är godkänd att transportera/Förvara i - 25°C - +60°C och upp till 90% icke kondenserande relativ luftfuktighet.
- Max brukarvikt vuxen: REAL 9500 140 kg. REAL 9600 EL 150 kg.
- REAL 9500/9600 EL är godkänd att stå bromsad i upp till 5° lutning i alla riktningar. Står stolen bromsad i kraftigare lutningar kan stolen börja glida.
- Stolen skall transporteras i avsedd kartong på pall. Transporteras stolen i bil så måste stolen spännas fast med spännband både i stativ och sits, samt vara i lägsta möjliga sitthöjd.
- Stolen är testad och godkänd att använda mellan +5 till +40 °C samt 15-90 % icke kondenserande luftfuktighet. Om stolen förvarats i en miljö utanför dessa gränser måste stolen aklimatiseras innan användning för att säkerställa att stolen kan användas säkert.
- Reparationer och andra tekniska åtgärder får endast utföras av personal auktoriserad av Mercado Medic AB.
- REAL 9500/9600 EL levereras som standard med sits, rygg och armstöd samt reglage för stolar med elfunktioner.
- REAL 9500/9600 EL skall ej förflyttas när sitthöjden är i upphöjt läge.
- Garantiid två (2) år om inget annat avtalats. Vid garantiärenden, kontakta Mercado Medic AB
- Förväntad livslängd tio (10) år.
- REAL 9500/9600 EL kan kompletteras med en rad olika tillbehör. Alla tillbehör måste monteras så att det inte finns möjlighet för små delar, säkringar mm, att lossna. Alla sladdar måste säkras med buntband för att minimera stryplingsriskerna.

FÖRVÄNTAD LIVSLÄNGD

Produktens förväntade livslängd är 10 år när den används i överensstämmelse med anvisningarna i denna bruksanvisning. Produktens tillverkningsdatum hittas tillsammans med serienummer på en av de silverfärgade etiketterna på Produktens underrede, märkt med Lev/Del och står på formatet ÅÅVV (år och veckonummer).

Som användare av Produkten ska du ta kontakt med din förskrivare, hjälpmedelscentral eller distributör om Produkten uppvisar försämrade eller ändrade prestanda.

Efter förväntad livslängd är det viktigt att en helhetsbedömning av Produkten görs innan fortsatt användande. Efter förväntad livslängd kan inte Mercado Medic AB garantera produktens lämplighet och säkerhet, då Mercado Medic AB inte har någon kontroll över hur produkten använts och slitits. Helhetsbedömningen av Produkten ska utföras av vårdgivande organisation om produkten är förskriven, och bör ta hänsyn till åtminstone hur Produkten använts, vilket skick Produkten och ingående komponenter är i, huruvida Produkten rekonditionerats och genomgått service, när detta skett, vad som åtgärdats vid dessa tillfällen och anledningen till åtgärderna.

På de marknader utanför Sverige och Norge där Produkten i förekommande fall är såld av distributör direkt till brukaren, och därför saknar ansvarig förskrivare, ska periodiskt underhåll göras enligt instruktioner i avsnitt Rekonditionering och Service utöver helhetsbedömningen ovan.


Efter förväntad livslängd kan Mercado Medic AB inte garantera att reservdelar kan tillhandahållas. CE-märkning påverkas inte av förväntad livslängd.

RYGGMEKANISM


Medic ryggmekanism finns i lågt respektive högt utförande (illustrerade stolar har låg rygg). ryggmekanismen har separata reglage för höjd (1), vinkel (2), djupled(3) och vinkeln på själva ryggen justeras med vredet (4). Lossa vredet, ställ in önskad läge på respektive justering och lås därefter vredet.

OBS! Säkerställ att Medic ryggfällning justeras in i fästet så att fjädersnäppet låser och ryggfällningen inte kan dras ur.

Comfort Ryggmekanism finns i lågt respektive högt utförande (illustrerade stolar har låg rygg). Ryggmekanismen har separata reglage för höjd (1), vinkel av ryggplattan (2). Lossa vredet, ställ in önskat läge på respektive justering (1) och(2) och lås därefter vredet. vinkel av ryggfällning regleras med spaken (3).

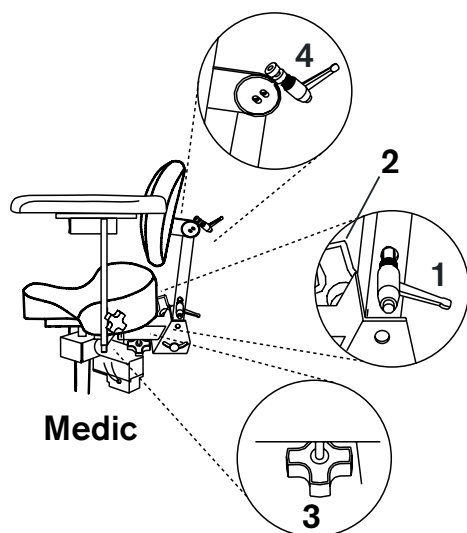

Medic

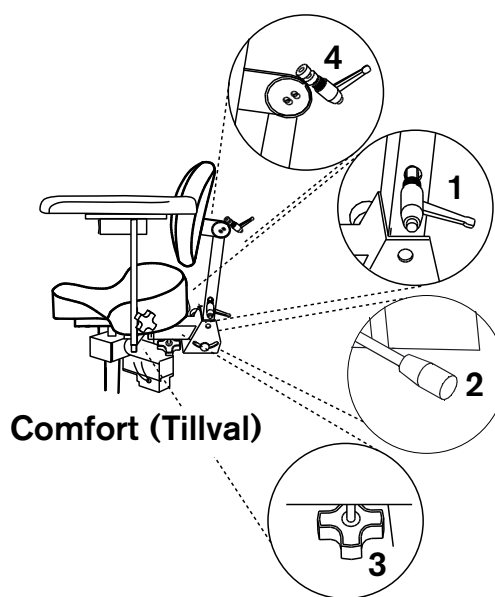


Comfort (Tillval)

ARMSTÖD



Armstöden kan justeras i höjdläge och i sidläge på respektive armstödsbåge. Lossa vredet för justering av höjd (1) eller bredd (2), ställ in önskad bredd/höjd och lås därefter vredet.

OBS! Säkerställ att armstödet justeras in i fästet så att fjädersnäppet låser och armstödet inte kan dras ur.

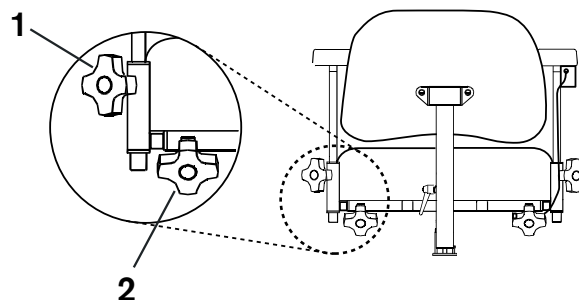

SITTHÖJD/LYFTOMATER

Höjden på REAL 9500 manuell regleras med spaken (1) under armstödet ena sida (standard höger). Lyft spaken för att ändra höjdställningen. På REAL 9600 EL justeras sitthöjden med vippströmbrytaren (2). För att höja sitsen tryck på strömbrytarens övre del, för att sänka: tryck på strömbrytarens nedre del. Reglage med tunga, dra vippan uppåt för höjning och nedåt för sänkning av sitthöjden.

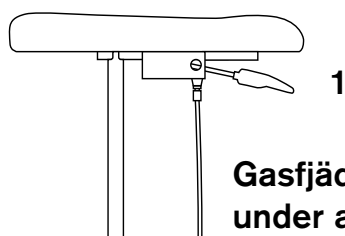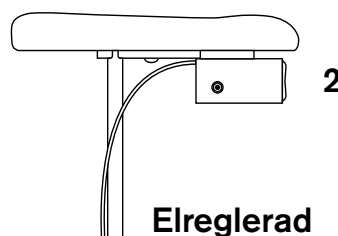Gasfjäderreglage
under armstöd


Elreglerad

BROMS


Handbromsen regleras med spak (1). För att låsa: för spaken bakåt. Bromsspaken går att flytta till valfri sida av stolen. Stolar utrustade med H -stativ kan även bromsas med foten (2).

OBS! Stolen skall alltid vara bromsad när man sätter sig och reser sig. Bromsen skall kontrolleras regelbundet. Vid slitage bytes bromsfot av gummi. Bromsfunktionen kan vara nedsatt på ojämnt underlag.


Elbroms om utrustad regleras med röd knapp (3). Den har en hållkrets och behöver bara en kort tryckning för att fullfölja bromsfunktionen. För att bromsa upp stolen tryck knapp (3) igen.

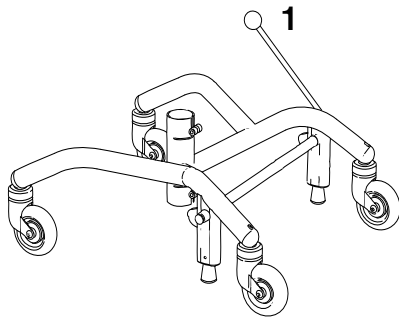

Bakåtbromsat PLUS-stativ

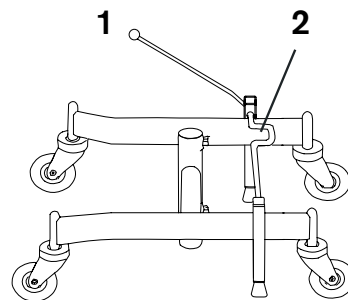

H-stativ

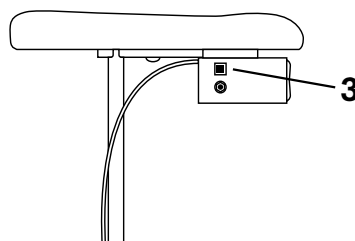


Elbroms (tillval)


SITSTILT

Gasfjädertilten är reglerad med gasfjäder. Den manövreras med spaken (1) under armstödet ena sida (standard vänster). Armstöden följer med i tiltningen för att uppnå bästa support i alla tiltlägen.

Eltilt om utrustad manövreras med reglage (2) under armstödet ena sida (standard vänster). Armstöden följer med i tiltningen för att uppnå bästa support i alla tiltlägen.

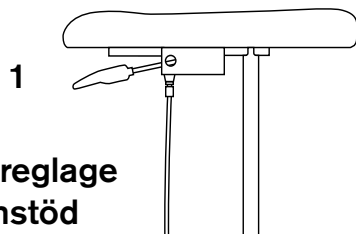

**Gasfjäderreglage
under armstöd**

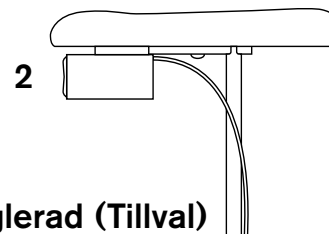

Elreglerad (Tillval)

LADDNING


Vi rekommenderar att batteriladdare REAL 9000 Typ 2240-12V med art.nr 802289 används vid laddning av stolen. Önskas annan batteriladdare var vänlig kontakta Mercado Medic AB för skriftligt godkännande. Laddning av batteriet bör ske regelbundet, om möjligt en gång per dygn. Det är viktigt för batteriets livslängd att det aldrig blir helt urladdat.

Anslut laddningsproppen på laddaren till laddjacket (1) på boxen där vippströmbrytaren för höjning och sänkning av stolen är placerad. Anslut därefter laddarens kontakt till ett vägguttag. Lysdioden på laddaren indikerar att laddning sker. När lysdioden ändrar färg ifrån orange till grönt är batteriet färdig-laddat. Stolen går att höja och sänka när laddning pågår. Detta gäller EL-stolar levererade från v. 11 2013 eller tidigare levererade uppdaterade stolar.


OBS! Laddning av batteriet är särskilt viktigt på de stolar som har elbroms, elvinkling och elrygg då funktionen kräver hög batterikapacitet för att inte förlora funktionen. Säkerställ funktionerna genom att ladda batteriet en gång per dygn. Vid byte av batteri (typbeteckning: HP7-12 12V 7.2Ah), var noga med att rödmärkt batterikabel fästes på pluspolen på batteriet och minuskabel på minuspolen. Om stolens elektriska funktion upphör att fungera är det sannolikt en säkring som gått. Kontrollera säkringarna. De är placerade under sitsen på sladden mellan batteri och ställdon. Byt trasig säkring mot ny 25 A säkring.

Tänk på följande när du handskas med batterier:

- Kortslut aldrig batteriet.
- Utsätt inte batteriet för kraftiga stötar eller för öppen eld.
- Vid kontakt med batterisyra, skölj med vatten i ca 30 min. och kontakta läkare.
- Uttjänta batterier skall lämnas på miljöstationer.

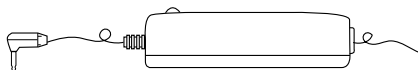

Laddare art.nr 802289

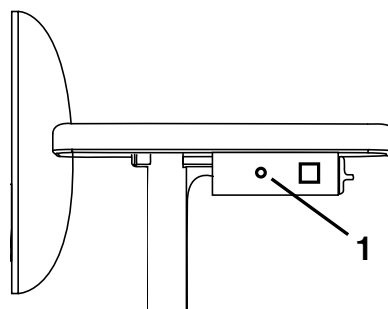

Anpassningar får göras endast av personal som genomgått Mercado Medic ABs utbildning för service och rekonditionering. Artiklar som finns på lista över gällande kombinationsavtal på www.mercado.se/mercado-dokument får monteras med av Mercado Medic AB bibehållen CE-märkning. Önskas artikel som ej finns på lista över gällande kombinationsavtal monteras skall hos kund auktoriserad personal kontakta Mercado Medic AB för skriftligt godkännande.

Artikel som skall utvärderas måste fysiskt skickas till Mercado Medic AB från antingen kund eller leverantör av artikel i fråga. Mercado Medic AB kontaktar sedan leverantör av artikel ifråga om eventuellt kombinationsavtal är aktuellt, genomför Mercado Medic AB en riskanalys på önskad artikel. När riskanalys är utförd erhåller kund ett skriftligt utlåtande.

Stolar som genomgått förändringar enligt nedan skall verifieras av Mercado Medic AB för att Mercado Medic AB skall bibehålla produktansvaret.

- Stoppade detaljer såsom sitsar, ryggstöd, armstöd, sidostöd, bålstöd och nackstöd får anpassas såvida man ej överskrider på produkten befintliga yttre justeringsmått.
- Tyngdpunkt över lyftdon skall bibehållas/centreras för bästa funktion.
- Stoppade detaljer skall klara gällande antändlighetskrav och andra miljökrav.
- Ytor som belastas med betydande vertikala krafter får ej hamna utanför den yta (bas) som bildas av hjulcentrum-punkterna.

Om dessa riktlinjer uppfylls behåller Mercado Medic AB produktansvaret för sin produkt.

Produkter som specialanpassas av vården utanför Mercado Medic ABs direktiv där vården också tar över produktansvaret kan återställs till originalskick. Detta måste utföras av en auktoriserad tekniker godkänd av Mercado Medic AB. Mercado Medic AB återtar då produktansvaret enligt CE-märkning 93/42 EEG; Medicintekniska Produktdirektivet MDD.

Vid frågor angående anpassningar/specialanpassningar kontakta Ronny Fogelqvist:

Tel [0708 27 96 14](tel:0708279614)

E-post ronny.fogelqvist@mercado.se

RENGÖRING & SKÖTSEL

- Stolen bör torkas av och hållas ren från damm och smuts.
- Stolen skall tvättas av med ett desinfektionsmedel med PH 7-12 (koncentrerat), med undantag av stoppning.
- Plyschklädsel tvättas med skumtvätt;
 1. Ta bort lös smuts, smulor och liknande.
 2. Applicera ett tunt skikt med skum, gnid skummet jämnt med en fuktig trasa.
 3. Eftertorka med en ren och lätt fuktad trasa.
 4. Dammsug väl när allt torkat.
- Konstläder tvättas med såpvatten alternativt avtorkas med spritlösning tex desinfektionsmedel.
- Skinnklädsel kräver lite extra underhåll;
 - Spill torkas av direkt med en fuktig trasa, använd aldrig starka medel.
 - Undvik kontakt med klädseln med kroppsvårdsprodukter som smink, hårgele mm.
 - Låt inga husdjur vara på skinnmöbler, deras klor kan repa skinnet.
 - Undvik direkt och långvarigt solljus, det kan i längden bleka skinnet.
- Sits, ryggstöd och övriga stoppningsdetaljer är av funktionella skäl ej tillverkade i slutet material. Vid rekonditionering bör stoppningsdetaljer av hygieniska skäl bytas ut.
- Ellyftmaten bör regelbundet kontrolleras med avseende på damm, smuts och stabilitet: Höj upp sittplattan till högsta läge. Gör rent med trasa. Vatten eller något lösningsmedel får ej användas. Smörj sedan in cylindern med ett tunt lager teflon- eller siliconbaserat smörjfett.
- Brukaren/brukarens assistent får damma av, torka rent samt rengöra sina stoppdetaljer, enligt ovanstående instruktioner, på sin egen stol efter bästa förmåga och behov. Om detta inte utförs tillfredsställande krävs rekonditionering för att säkerställa hygienisk säkerhet.

! Viktig information vid rekonditionering och service av REAL 9500/9600 EL (nedan kallad Produkten):

- Produkten behöver inget periodiskt underhåll i de fall den har en ansvarig förskrivare inom vården. På de marknader utanför Sverige och Norge där Produkten i förekommande fall är såld av distributör direkt till brukaren, och därför saknar ansvarig förskrivare, ska periodiskt underhåll göras vartannat år under Produktens hela livscykel enligt punkterna 1-10 i detta avsnitt.
- I samband med service och rekonditionering ska en noggrann okulär besiktning göras på Produktens huvudkomponenter, för att säkerställa brukarens säkerhet. Dessa innefattar stativ, lyft, sittkryss, ryggfällning samt breddjusteringsbågar till armstöd. Kontrollen ska innefatta svetsar, låsbara funktioner och inställningar.
- Det är förbjudet för brukaren att sitta i Produkten under rekonditionering, service eller underhållsarbete.
- Använd ej högtryckstvätt vid rengöring av Produkten.
- Vid kontroll av PLUS-stativ ska svets mellan stativets framben och bakben kontrolleras. Alla tendenser till sprickor i material eller färg i detta område bör ses som anledning att byta ut stativet, alternativt Produkten.
- Om Produkten har dålig bromsverkan bör stativets balans kontrolleras utöver skicket på bromsfötterna. Om Produkten inte står på alla fyra hjul i obromsat läge ska Produkten tas ur bruk omedelbart. Kontrollera obalans på flera platser samt riktningar för att utesluta att obalansen inte beror på golvet.

REKONDITIONERINGSANVISNING KONTROLLPUNKTER

1. Elektronikenhet

☐ 1.1. Elektronik / funktion / rengöring

Kontrollera elektroniken och se vilka elfunktioner som är inkopplade. Testa elfunktioner, om inte stolen fungerar prova med att sätta i laddaren minst 10 sekunder. Kontrollera skador på elektronikboxen.

☐ 1.2. manöverbox / funktion / rengöring

Kontrollera manöverreglans funktioner, kontrollera att höljet är helt och att alla knappar fungerar. Torka av manöverreglage med en lätt fuktad trasa med desinfektionsmedel, detta för att inte föra vidare ev. smitta. Använd ej lösningsmedel, blekmedel, polermedel, syntetiska tvättmedel, polervax eller sprayer på stolen.

☐ 1.3. Kontakter; infästning

Kontrollera att kablar och kontakter är hela och sitter ordentligt fast. Se till att ingen klämrisk föreligger för kablar och kontakter.

☐ 1.4. Batterier / batteriladdare / funktion

Kontrollera att laddaren fungerar och inte har några skador på hölje eller sladdar.

Mät upp batterierna och kontrollera att det inte är för stor skillnad mellan batteriernas laddning, det tyder på att någon cell i batteriet gått sönder.

☐ 1.5. Elsittstilt / funktion

Kontrollera att eldonet inte har några synliga skador. Kontrollera funktion i eldonets rörliga delar. Se till att alla låsskruvar är åtdragna så inget glapp uppstår i ändläge.

☐ 1.6. Elrygg / funktion

Kontrollera att eldonet inte har några synliga skador. Kontrollera funktion i eldonets rörliga delar. Se till att alla låsskruvar är åtdragna så inget glapp uppstår i ändläge.

☐ 1.7. Elbroms / funktion

Kontrollera att eldonet inte har några synliga skador. Kontrollera funktion i eldonets rörliga delar. Se till att alla låsskruvar är åtdragna så inget glapp uppstår i ändläge.

Kontrollera alla förband och att klämfäste på bromsaxel och stativrör sitter ordentligt.

2. Ellyftomat

☐ 2.1. Missljud / slirkoppling

Lyssna efter missljud i ellyftomaten, byt ellyftomat om något lager är dåligt. Ellyftomaten kan skickas till Mercado Medic AB på reparation/rekonditionering.

Belasta stolen och kontrollera att ellyftomaten inte slirar i bottenläge. Annars justera så slirkopplingen har rätt moment.

☐ 2.2. Rotationslåsning / smörjning

Kontrollera att ellyftomaten

inte glappar i rotationsriktning, Byt ellyftomat om så är fallet. Ellyftomaten kan skickas till Mercado Medic AB på reparation/rekonditionering.

☐ 2.3. Infästning / efterdragning

Kontrollera att infästning i sittkryss och stativ är ordentligt åtdragna.

☐ 2.4. Kabeldragning / slitage

Se efter slitage och klämskador på kablar.

3. Underrede

☐ 3.1. Svetsar

Kontrollera noggrant alla svetsar efter tecken på sprickor, korrosion, rörelse mm.

☐ 3.2. Skruvförband

Kontrollera och dra åt alla skruvförband, Byt ut skruvar som har skadade nyckelgrepp eller gängor.

4. Bromsar

☐ 4.1. Funktion / slitage

Byt ut bromsfötter och kontrollera att bromsen fungerar tillfredställande.

☐ 4.2. Plastpluggar / styrbussningar

Se så att styrbussningar och plastpluggar sitter ordentligt på plats, byt ut slitna eller skadade delar.

5. Länkhjul

☐ 5.1. Funktion / rull / svängning
Rensa länkhjulen från hår och damm och kontrollera länkhjul och länkbyglar efter slitage och glapp vilket kan tyda på dåliga lager. Kontrollera att länkhjulen snurrar och byglarna roterar som de ska. Byt länkhjul vid behov.

☐ 5.2. Infästning / efterdragning
Kontrollera att länkhjulets skruvar är hela och är dragna.

6. Sittkryss

☐ 6.1. Mekanik / svetsar
Kontrollera noggrant alla svetsade delar (Speciellt vid upphängning av tilt don då dessa delar får mest belastning)

☐ 6.2. Skruvförband / efterdragning
Kontrollera och dra åt alla skruvförband, Byt ut skruvar som har skadade nyckelgrepp eller gängor.

☐ 6.3. Plastpluggar / styrbussningar
Se så att styrbussningar och plastpluggar sitter ordentligt på plats, byt ut slitna eller skadade delar.

☐ 6.4. Sittplatta / byte / rengöring
Byt ut sittplatta till en ny och tvätta eller byt ut eventuella överdrag

☐ 6.5. Manövrering / smörjning
Kontrollera att sittkryssets rattar och vred fungerar och låser som de ska.

☐ 6.6. Gasfjädertilt / funktion
Om stolen är utrustad med gastiltsreglage kontrollera att den låser ordentligt och inte sakta förändras i tilt vid belastning. Kontrollera och byt ut skadade vajrar och vajerhöljen.

☐ 6.7. Vevtiltsreglage / slitage
Om stolen är utrustad med Vevtiltsreglage, kontrollera att den inte glappar och att alla skruvar är dragna.

☐ 6.8. Coxitmekanik / manövrering
Kontrollera att rattarna till klaffarna går lätt och är ordentligt låsta med kontramuttern.

7. Ryggmekanism

☐ 7.1. Funktion / slitage
Kontrollera och byt ut eventuella slitna delar, se efter att funktion i rörliga delar går bra.

☐ 7.2. Infästning / efterdragning
Kontrollera att alla skruvar, rattar och vred låser ordentligt, se till att fjädersnäppen fungerar felfritt.

☐ 7.3. Plastpluggar / styrbussningar
Se så att styrbussningar och plastpluggar sitter ordentligt på plats, byt ut slitna eller skadade delar.

☐ 7.4. Ryggplatta / byte / rengöring
Byt ut Ryggplatta till en ny och tvätta eller byt ut eventuella överdrag

☐ 7.5. Gasfjäderreglage / funktion
Kontrollera gastryck och stabilitet i gasfjädern, att den låser ordentligt och att ryggen inte sakta förändras i vinkel vid belastning. Kontrollera och byt ut skadade vajrar och vajerhöljen.

8. Armstöd

☐ 8.1. Funktion / slitage
Kontrollera och byt ut eventuella slitna delar, se efter att låsning och funktion i rörliga delar går bra.

☐ 8.2. Plastpluggar / styrbussningar

Se så att styrbussningar och plastpluggar sitter ordentligt på plats, byt ut slitna eller skadade delar.

☐ 8.3. Armstödsplattor / byte / rengöring
Byt ut armstödsplattor till nya.

☐ 8.4. Armstödsmekanik / funktion
Kontrollera alla svetsar och att inga skador finns på rörsystemet som kan försämra eller försvaga konstruktionen.

9. Tillbehör

☐ 9.1. Återställning
Demontera de tillbehör som inte normalt ska sitta på stolen och kontrollera dom enligt nedan innan de eventuellt återsätts i lager.

☐ 9.2. Mekanik
Kontrollera alla svetsar och att inga skador finns på mekaniken som kan försämra eller försvaga konstruktionen.

☐ 9.3. Funktion / slitage
Kontrollera och byt ut eventuella slitna delar, se efter att låsning och funktion i rörliga delar går bra.

☐ 9.4. Stoppdetaljer
Kassera stoppdetaljer för att motverka smittspridning, kassera eller tvätta överdrag enligt tvättrådsmärkning.

10. Slutkontroll

☐ 10.1. Provkörning
Provkör stolens funktioner och kontrollera att alla funktioner, elfunktioner och bromsar fungerar som de ska. Om stolen ska lagerhållas så ska stolen sättas i viloläge med den avsedda 9V adaptorn för att spara på batterier.

KONTAKTA MERCADO

Huvudkontoret

Besöksadress
Tryffelslingan 14, 181 57 Lidingö

Postadress
Box 1074, 181 22 Lidingö

Växeln är öppen: Mån-Fre 08.00-16.30
Tel: 08-555 143 00
Fax: 08-555 143 99
E-post: info@mercado.se

Service och teknisk support

Box 1074
181 22 Lidingö

Service har telefontid mån-fre
08.00-12.00 samt 13.00-16.00.

Tel: 08-555 143 08
Fax: 08-555 143 99
Mobil: 070-550 63 98, 070-894 63 68
E-post: service@mercado.se

[Plats för produktetikett med serienummer.]



Mercado Medic AB
Tryffelslingan 14
181 57 Lidingö

Telefon & Fax
Tel 08 555 143 00
Fax 08 555 143 99

Email & Internet
Email info@mercado.se
Internet www.mercado.se