


WIZARD GUIDE


Wizard 6

dynamic 

Denna guide beskriver momenten *inställningar* och *tillvägagångssätt* för Wizard-programmeringen. I följande exempel kommer det att visas hur programmet laddas ned från elrullstolen, hur det sparas på datorn samt hur en sitsfunktion läggs till.

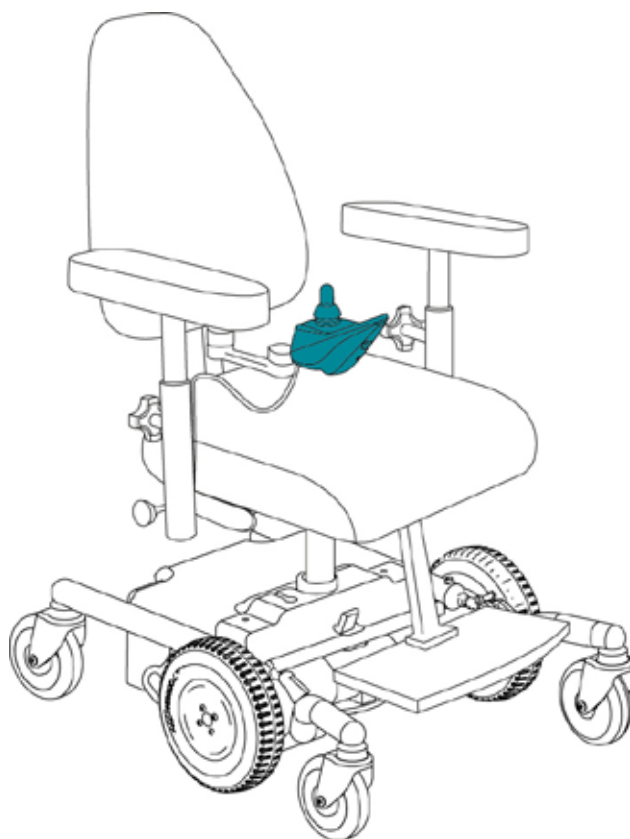


DETTA BEHÖVER DU

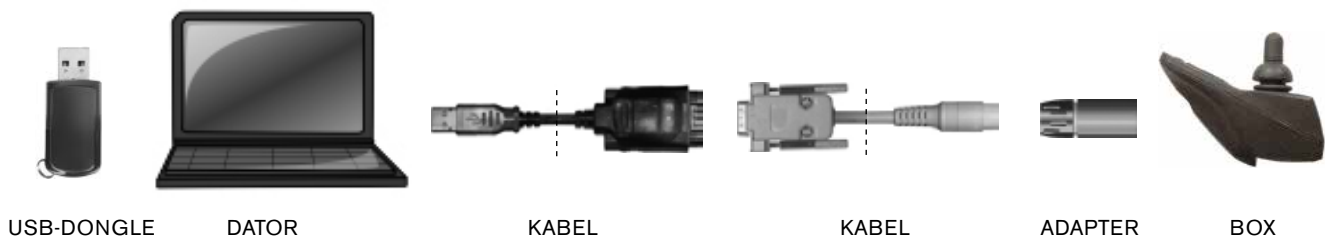

Se till att programmet Wizard 6 är installerat i datorn. Sätt in USB-dongeln så att Wizard 6 hittar en licensnyckel. Koppla nu in DWIZ CABLE KIT i datorn.

OBS! det är viktigt att det sätts in i samma USB-utgång som tidigare för att Wizard ska fungera.

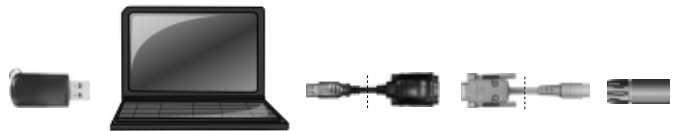


STEG 1

Lokalisera ikonen för Wizard 6 på skrivbordet och dubbelklicka på den.



STEG 2

Kör Wizard 6 (klicka på "I accept"), **A.** Längst ned i högra hörnet står "Scanning for master module", **B.**

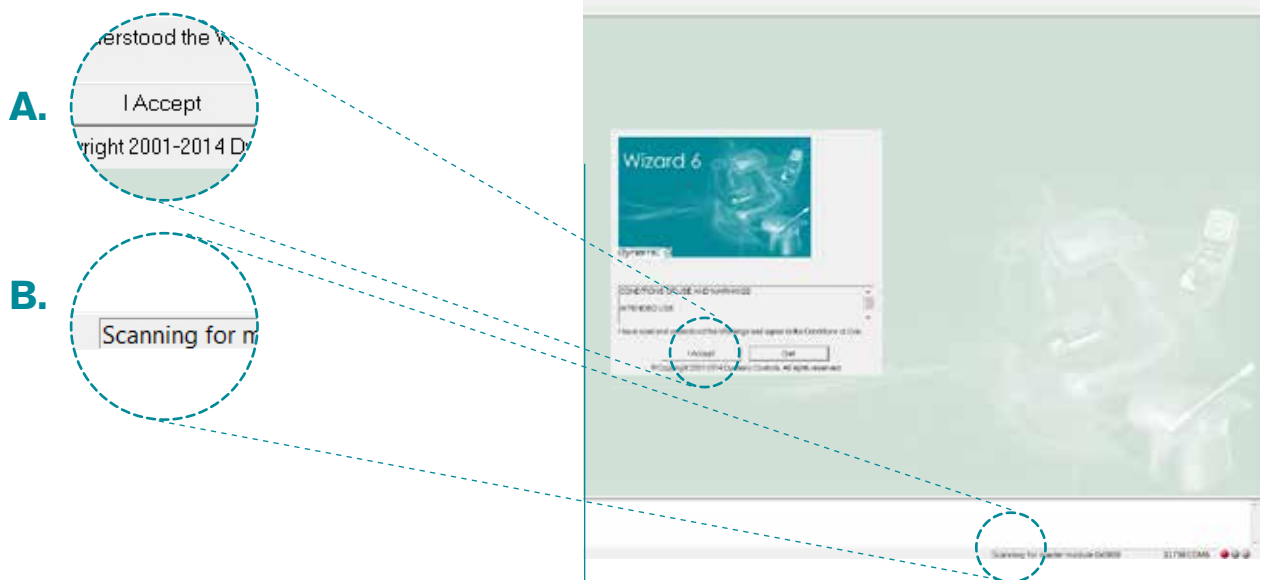


Koppla därefter in elrullstolens laddkontakt med hjälp av DWIZ-adaptorn. Kontrollera att elrullstolen är på. Mer information finns i "Dynamics User Manual Wizard Programming".



Är allt korrekt inkopplat och satt med rätt inställningar ska meddelandet "Controller connected" visas i fönstret i vänster nederkant, **C**.


Det är viktigt att det står "Wizard OEM (Advanced)", **D**, annars kommer man inte åt att ändra på vissa parametrar.

Grundligare information finns i "Dynamics User Manual Wizard Programming".

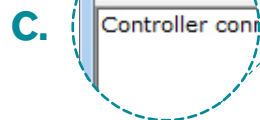

STEG 3



För att läsa in programmet från elrullstolen till datorn tryck på "Read the program from the connected controller" (den gröna knappen), **E**.

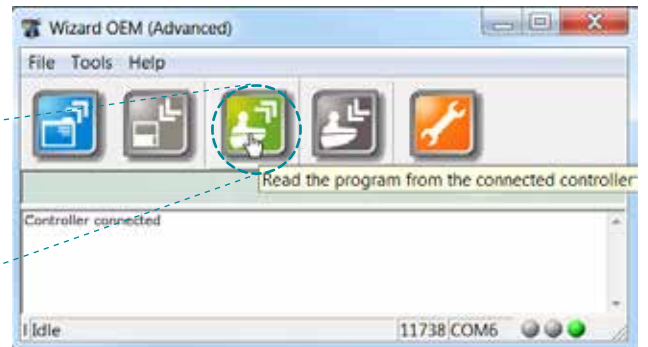

STEG 4


Nu visas informationen från stolen i Wizard-programmet på datorn.

För att spara en backup-fil av informationen till datorn, tryck på "File" i menylistan och gå ned till "Save as...", **F**.

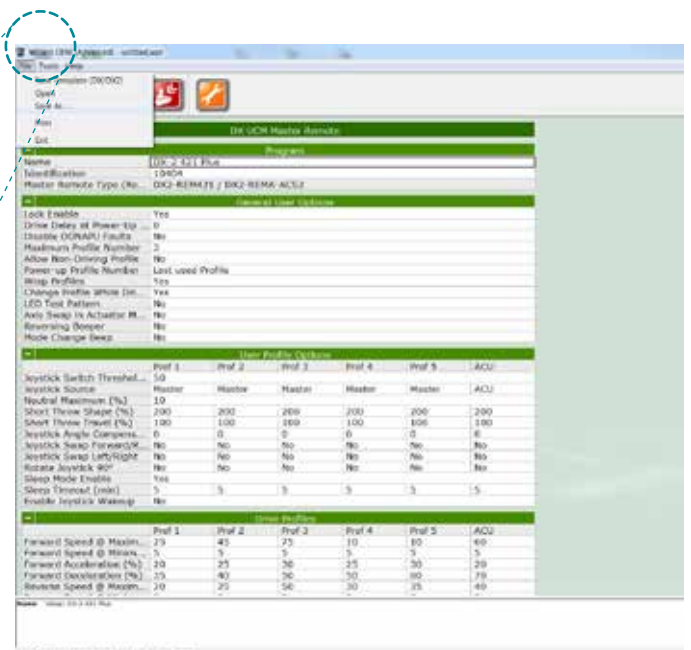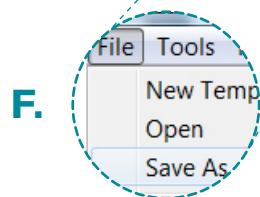

STEG 5

Skriv in ditt namn på programmet. Förslagsvis tas ordet "Backup" med i namnet, inklusive serienumret på stolen samt dagens datum, **G**. Tryck därefter på "Spara"-knappen, **H**.

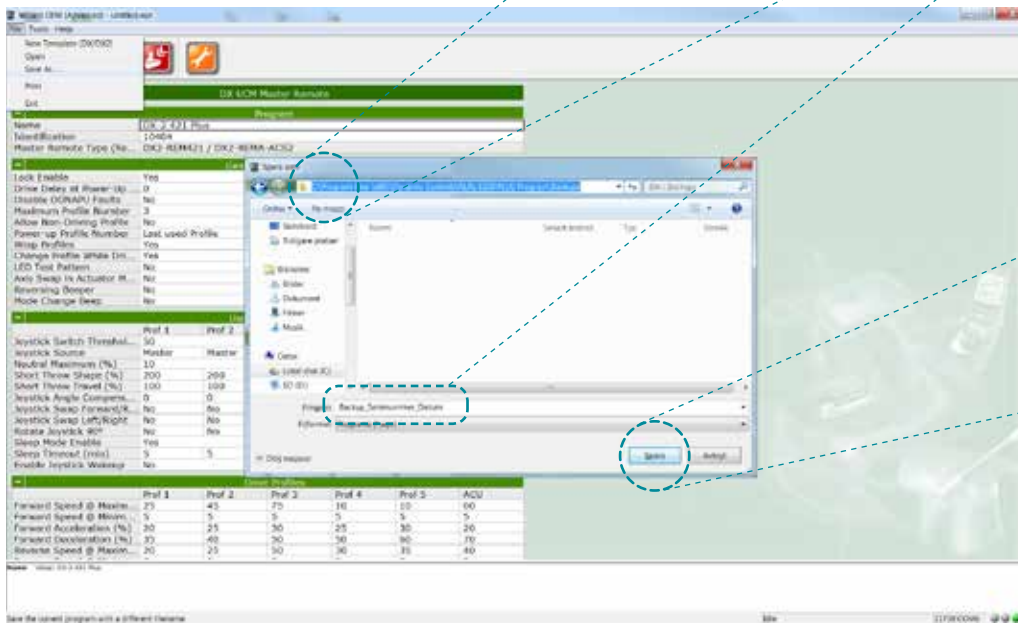


STEG 6

Längst upp i fönstret ska det nu stå "Backup_Serienummer_Datum" istället för "untitled.wpr". Filen är därmed sparad i datorn, **I**.

I.




Wizard OEM (Advanced) - Backup_Serienummer_Datum.wpr
File Tools Help

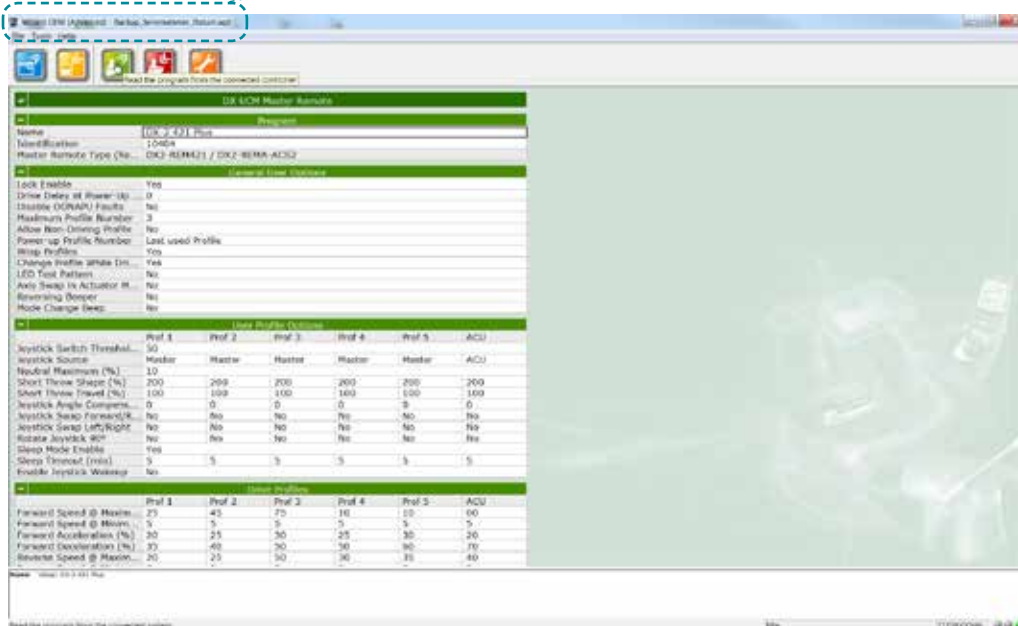

STEG 9



För att sätta sitstilen på sitsfunktionens knapp **2** på manöverbox REM421; fyll i en 2:a under kolumnen "Profile B" på raden "Input Function Number", **M**. I det här exemplet är eldonet kopplat in i **uttag 2** i ACT4-boxen och sedan,

under kolumn "Profile B", på rad "Output Channel 2 Select", sätts värdet till "Reverse", **N**. Värderna måste också matas in för den valda elfunktionen. Dessa värden hittar du i monteringsanvisningen för respektive elfunktion.

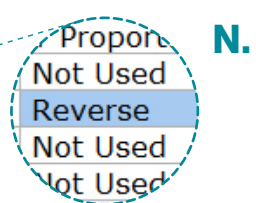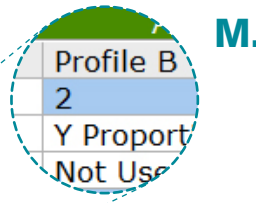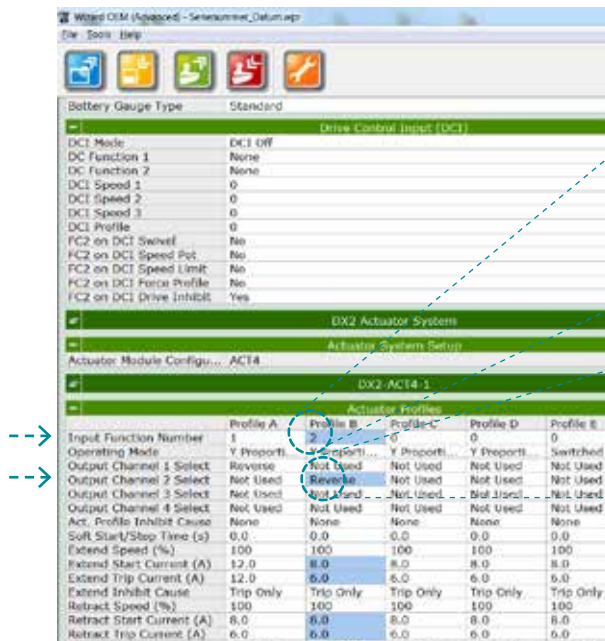

STEG 10


Nu när alla värden är ändrade så är det dags att läsa över filen till elrullstolen. Klicka på "Write currently displayed program to the controller" – den röda knappen, **O**.

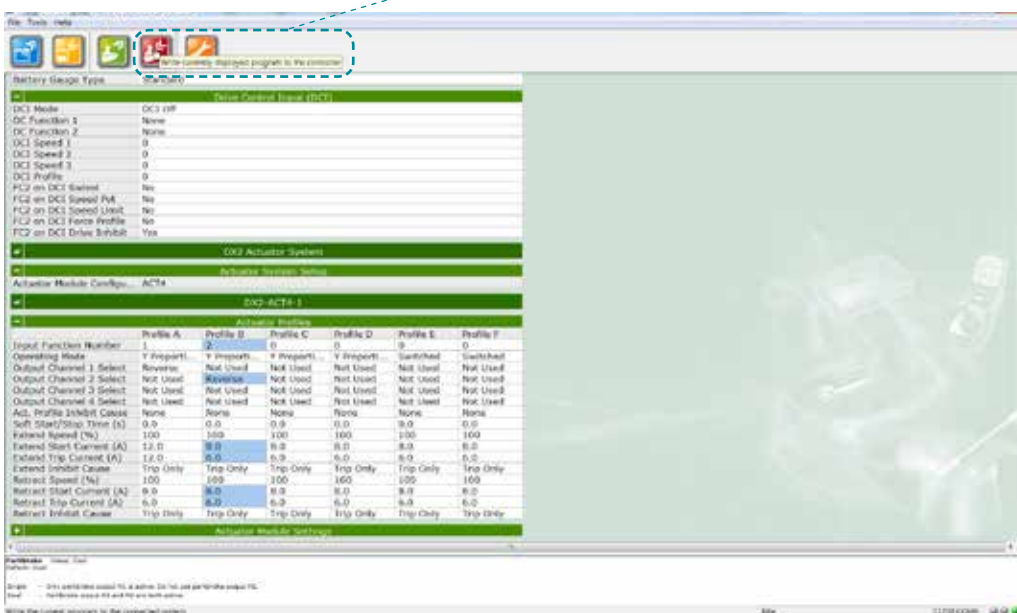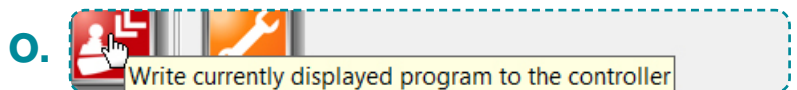

STEG 11

Då ska ett litet fönster "Writing to controller" komma upp, P. Vänta tills processen är klar. Stäng därefter av manöverboxen på elrullstolen **i minst 10 sekunder** och slå sedan på/av en gång till. Slå åter på manöverboxen och kontrollera att alla ändringar slagit igenom samt att elrullstolen blivit korrekt programmerad.

P.

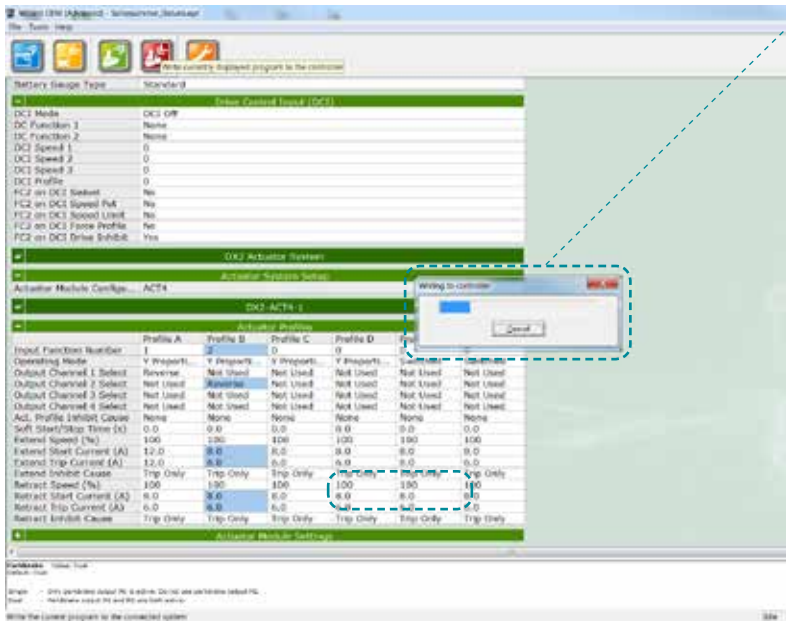


STEG 12

Är du nöjd med programmeringen är det dags att spara filen till framtida bruk, Q.

Lycka till!

Q.

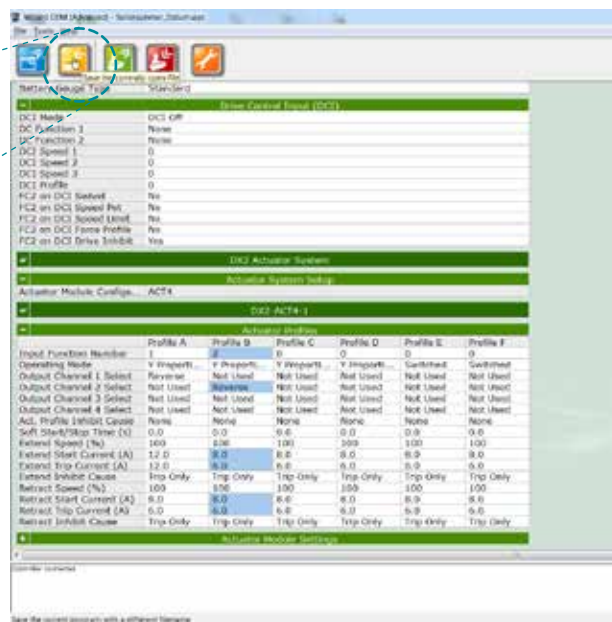



Mercado Medic AB
Tryffelslingan 14
181 57 Lidingö

Telefon & Fax
Tel 08 555 143 00
Fax 08 555 143 99

Email & Internet
Email info@mercado.se
Internet www.mercado.se