





REAL[®] 2000 – SPRÄNGSKISS

REAL 2000 – EXPLODED DIAGRAM

Artikelnr/Article no 800754
Ändrad/Changed 191114
Giltig från/Valid from 950101



VERSION 006

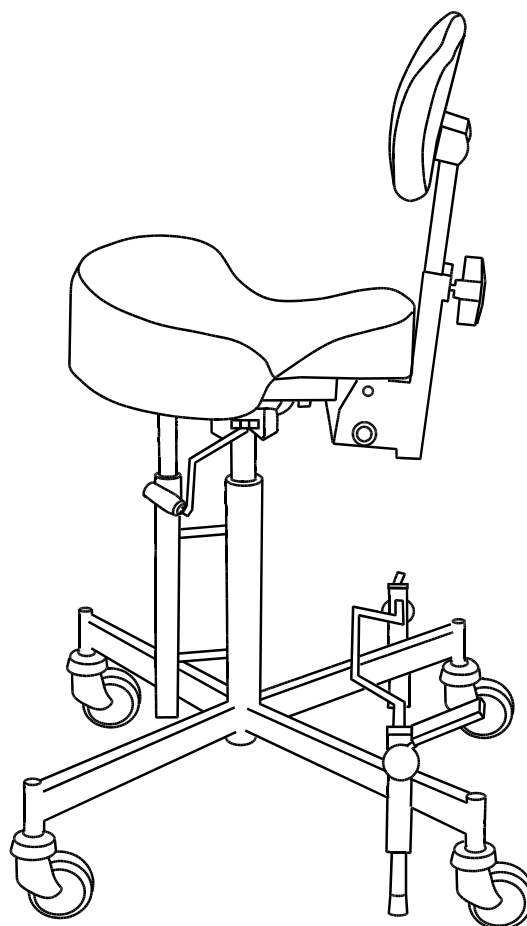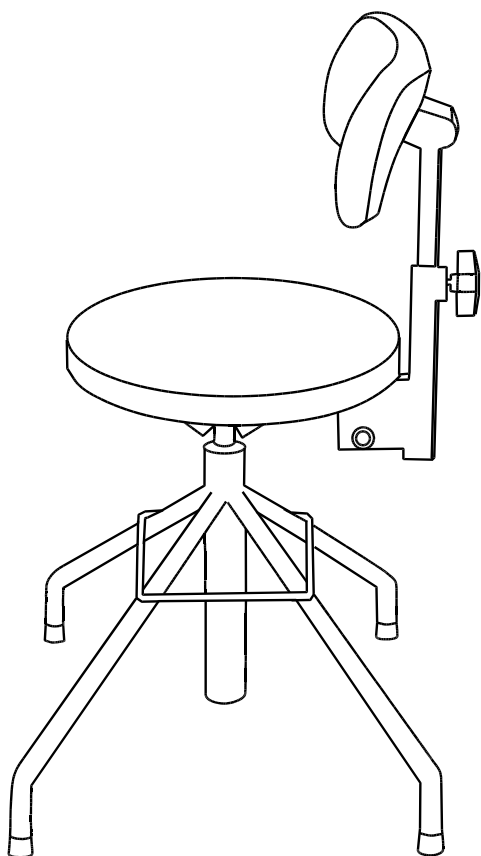

Mercado Medic AB
Tryffelslingan 14
181 57 Lidingö

Telefon & Fax
Tel 08 555 143 00
Fax 08 555 143 99

Email & Internet
Email info@mercado.se
Internet www.mercado.se

Innehållsförteckning

Table of content

Detalj <i>Detail</i>	Sida <i>Page</i>
KLÄDSLAR OCH FÄRGKODER /UPHOLSTERY OCH COLOUR CODES	3
SITTPLATTA /SEAT	4
SITTKRYSS /SEAT FRAME	7
LYFTOMATER /LIFTOMATS	9
RYGG /BACKREST	10
MAGPLATTA /STOMACH SUPPORT	11
RYGGMEKANISM /BACKREST AND STOMACH SUPPORT MECHANISM	12
ARMSTÖDSMEKANISMER/ARMREST MECHANISMS	13
ARMSTÖD/ARMRESTS	13
STATIV OCH BROMSAR/BASE AND BRAKES	14
HJUL/CASTORS	16

FÖRKLARING AV SYMBOLER

EXPLANATION OF THE SYMBOLS



Artikel för STÅSTÖDSSTOLAR / REAL 2001, REAL 2010, REAL 2011, REAL 2014, REAL 2015
Article for the STANDSUPPORTING CHAIR REAL 2001




Artikel för MAGSTÖDSSTOLAR / REAL 2621, REAL 2624, REAL 2625
Article for STOMACH SUPPORTING CHAIRS / REAL 2621, REAL 2624, REAL 2625



Artikel för alla REAL 2000
Article for all REAL 2000

Klädselar och färgkoder

Upholstery and colour codes

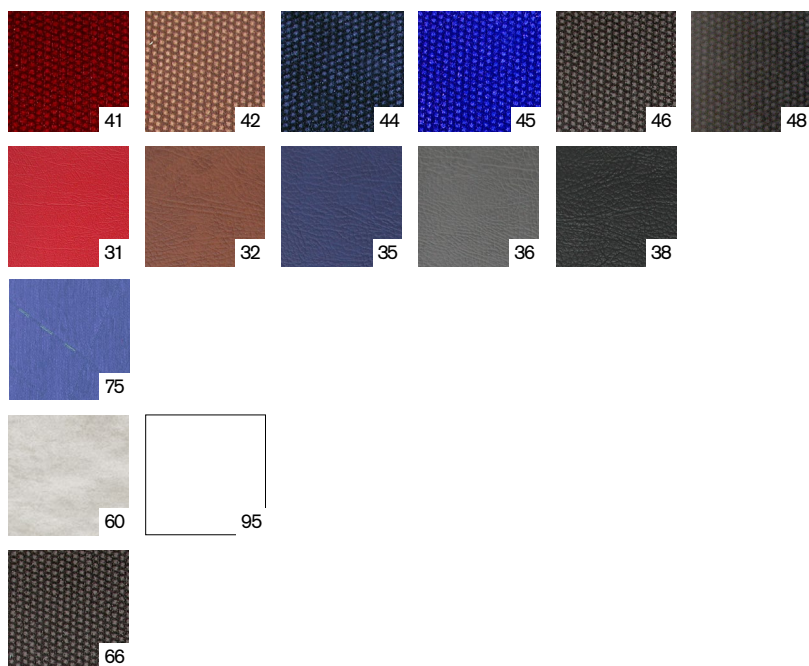

SIFFERKOD KLÄDSLAR (SIFFRA 7 OCH 8) DIGITCODE UPHOLSTERY (DIGIT 7 AND 8)

Plysch/*Plush*

41 Vinröd/ <i>Bordeaux</i>	42 Brun/ <i>Brown</i>
44 Marin/ <i>Navy Blue</i>	45 Realblå/ <i>Royal blue</i>
46 Grå/ <i>Grey</i>	48 Svart/ <i>Black</i>

Konstläder/*Skai*

31 Röd/ <i>Red</i>	32 Brun/ <i>Brown</i>
35 Blå/ <i>Blue</i>	36 Grå/ <i>Grey</i>
38 Svart/ <i>Black</i>	

Väv mönstrad Vuxen/*Patterned fabric, Adult*

75 Blå/*75 Blue*

Alternativ klädsel/*Alternative covering*

60 Hygienväv/ <i>Hygiene fabric</i>
95 Utan klädsel/ <i>Without clothing</i>

Överdragsklädsel/*Covering*

66 Inkontinensöverdrag grå plastad frotté/ <i>Incontinence cover, grey plastic-coated terry</i>
--

FÖRKLARING TILL STOPPDETALJERS ARTIKELNUMMER Art.nr: ST101546. = "Sits ErgoMedic, plysch grå 44x48 cm"

EXPLANATION OF THE ARTICLE NUMBERS STRUCTURE Article No: ST101546. = "ErgoMedic seat, plush grey 44x48 cm"

Siffror 1-2 = Typ av stoppningsartikel (ST=sits, BR=ryggplatta etc.)
Digit 1-2 = Type of upholstered article (1=seat, 2=back panel etc.)
Siffror 3-4 = Sittsystem (ErgoMedic, ErgoMedic PLUS etc.)
Digits 3-4 = Seat system (ErgoMedic, ErgoMedic PLUS etc.)
Siffror 5-6 = Storlek
Digit 5-6 = Size
Siffror 7 = Material (plysch, konstläder etc.)
Digit 7 = Material (plush, skai etc.)
Siffror 8 = Färg
Digit 8 = Colour

PREFIX FÖR UPPBYGGNADEN AV ARTIKELNUMMER


PREFIX FOR THE STRUCTURE OF THE ARTICLE NUMBER

AD	<i>Adapter</i>	Adapter	LD	<i>Leg divider</i>	Grenkil
AR	<i>Armrest</i>	Armstöd	LDC	<i>Leg divider cover</i>	Grenkil överdrag
ARM	<i>Armrest mechanism</i>	Armstödsmekanism	LS	<i>Leg support</i>	Benstöd
AS	<i>Amputation support</i>	Amputationsstöd	NS	<i>Neck support</i>	Nackstöd
ASC	<i>Amputation support cover</i>	Amputationsstöds överdrag	NSC	<i>Neck support cover</i>	Nackstöd överdrag
BD	<i>Brake device</i>	Handbroms	PB	<i>Push bar</i>	Körbygel
BE	<i>Base</i>	Stativ	RC	<i>Rheumatic cross</i>	Reumatikerkryss
BEA	<i>Break accessory</i>	Bromstillbehör	SA	<i>Seat angle mechanism</i>	Sitsvinkel
BEX	<i>Base extender</i>	Stativförlängare	SAR	<i>Seat angle regulation</i>	Sitsvinklins reglage
BR	<i>Back rest</i>	Rygg	SAP	<i>Seat angle placement</i>	Sitsvinklins placering
BRC	<i>Back rest cover</i>	Rygg överdrag	SH	<i>Seat height</i>	Sitthöjd
BRM	<i>Back rest mechanism</i>	Ryggmekanism	SS	<i>Side support</i>	Sidostöd
CS	<i>Calf support</i>	Vadstöd	SSC	<i>Side support cover</i>	Sidostöds överdrag
CSC	<i>Calf support cover</i>	Vadstöds överdrag	ST	<i>Seat</i>	Sits
FR	<i>Foot ring</i>	Fotring	STC	<i>Seat cover</i>	Sits överdrag
HB	<i>Hip belt</i>	Höftbälte	TA	<i>Table</i>	Bord
KS	<i>Knee support</i>	Knästopp	TS	<i>Trunk support</i>	Bålstöd
KSC	<i>Knee support cover</i>	Knästopps överdrag	TSC	<i>Trunk support cover</i>	Bålstöd överdrag
LB	<i>Large ball</i>	Stor kula	WE	<i>Wheel</i>	Hjul

Stycklista - Sittplatta

Part list - Seat


A01 Sits Rund
 Seat Round

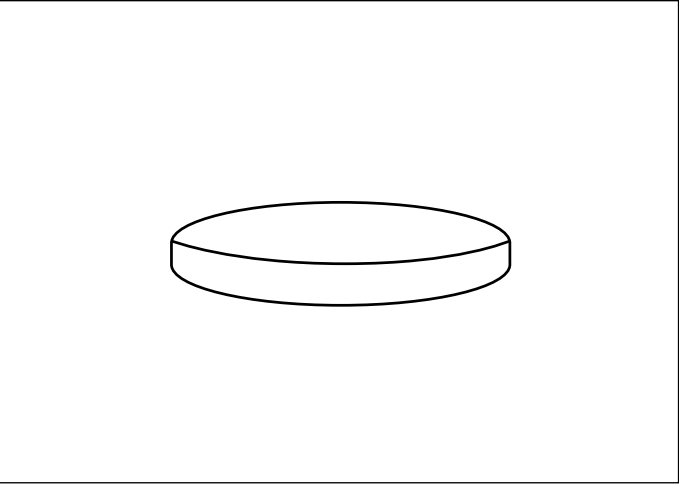

Pos	Art.nr	Benämning
Pos	Art.no	Name
A01 1	ST305146 190460	Sits Rund diameter 35cm Seat round diameter 35cm
2	ST303846 190461	Sits Rund diameter 40cm Seat round diameter 40cm
3	ST305246	Sits Rund Comfort diameter 35cm Seat round Comfort diameter 35cm

REAL 2001

B01 Sits Rund Toppig
 Peaked Round seat

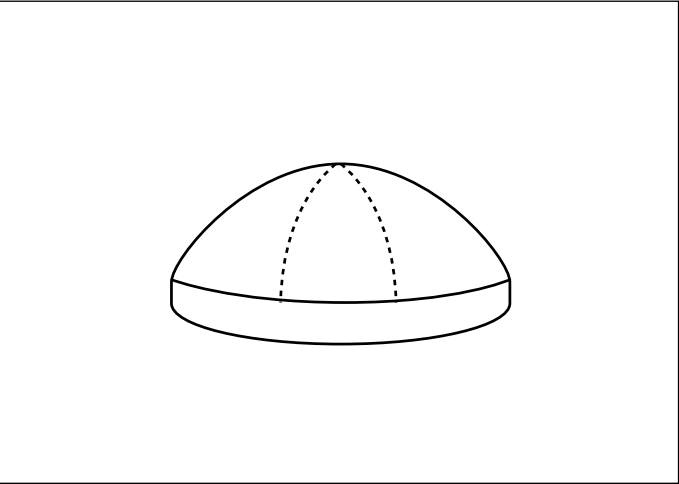

B01	ST315146 190462	Sits Rund Toppig diameter 35cm Peaked Round seat diameter 35cm
-----	--------------------	---


REAL 2621

REAL 2624

REAL 2625

C01	801253	Insexskruvar M6x40 f montering av sittplatta Screws M6x40 for seat assembly
	800462	BRB 6.4x12x1.5 FZB (M6) f montering av sittplatta Screws BRB 6.4x12x1.5 FZB (M6) for seat assembly


D01 Skruvar för montering av sittplatta
 Screws for seat assembly

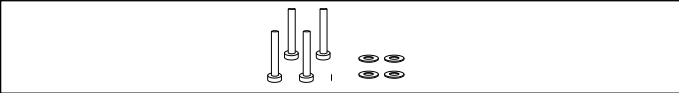

Stycklista - Sittplatta

Part list - Seat

D01 Sits Sadel Classic
Sadle Seat Classic

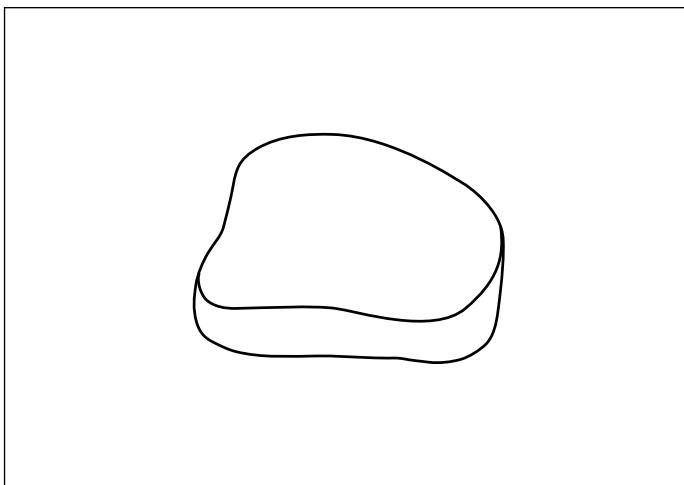

Pos	Art.nr	Benämning
Pos	Art.no	Name

D01	1	ST324746 Sits Sadel Classic 36x36 191460 Saddle Seat Classic 36x36
	2	ST322346 Sits Sadel Classic 41x41 191461 Saddle Seat Classic 41x41

REAL 2010

REAL 2011

REAL 2014


REAL 2015

REAL 2621

REAL 2624

REAL 2625

E01 Sits Sadel Medic
Sadle Seat Medic

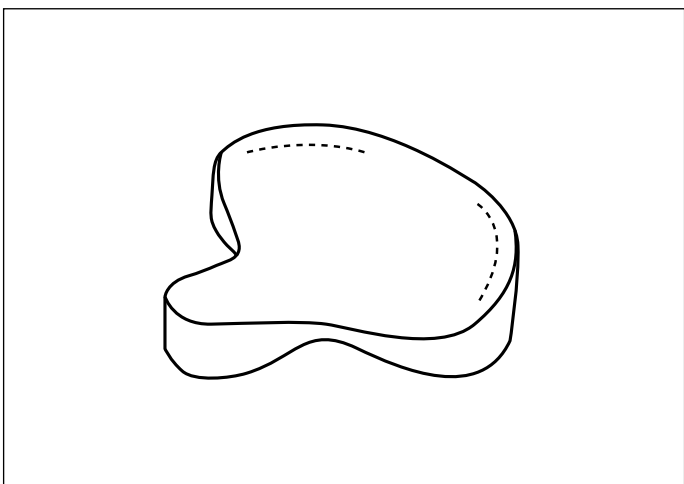

E01	ST333646 Sits Sadel Medic 40x36 192460 Saddle Seat Medic 40x36
-----	---

REAL 2010

REAL 2011

REAL 2014


REAL 2015

REAL 2621

REAL 2624

REAL 2625

F01 Sits Sadel ErgoMedic
Sadle SeatErgoMedic

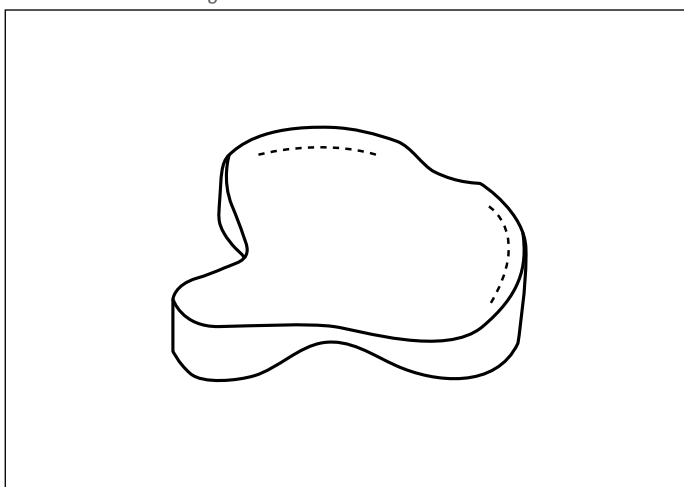

F01	ST343646 Sits Sadel ErgoMedic 40x36 193460 Saddle Seat ErgoMedic 40x36
	ST353646 Sits Sadel ErgoMedic Slowrecovery 40x36 193465 Saddle Seat ErgoMedic Slowrecovery 40x36
	ST382346 Sits Sadel ErgoMedic Slowrecovery 41x41 Saddle Seat ErgoMedic Slowrecovery 41x41
	ST384746 Sits Sadel ErgoMedic Slowrecovery 36x36 Saddle Seat ErgoMedic Slowrecovery 36x36
	ST393646 Sits Sadel ErgoMedic Slowrecovery 40x36 Saddle Seat ErgoMedic Slowrecovery 40x36

REAL 2010

REAL 2011

REAL 2621


REAL 2014

REAL 2624

REAL 2015

REAL 2625

G01 Skruvar för montering av sittplatta
Screws for seat assembly

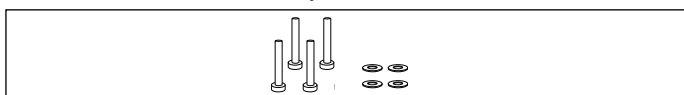


G01	801253 Insexskruvar M6x40 f montering av sittplatta Screws M6x40 for seat assembly
	800462 BRB 6.4x12x1.5 FZB (M6) f montering av sittplatta Screws BRB 6.4x12x1.5 FZB (M6) for seat assembly

Stycklista - Sittplatta

Part list - Seat


A01 Sits Sadel Urtag svanskota
Sadle Seat

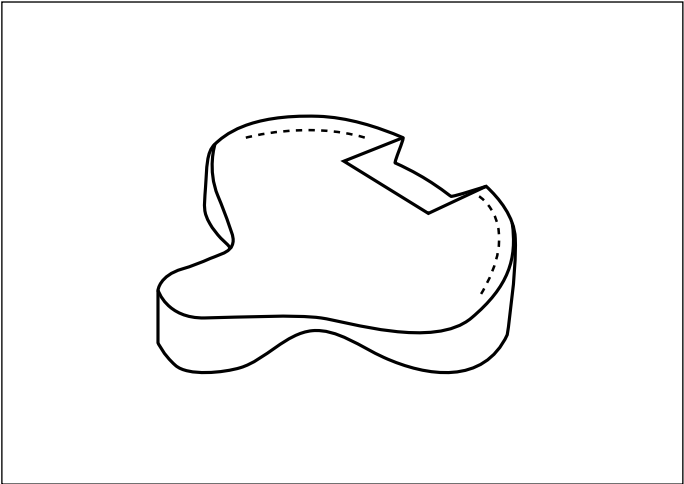

Pos	Art.nr	Benämning
Pos	Art.no	Name
A01	ST363646 194460	Sits Sadel Urtag svanskota 40x36 Sadle Seat

- REAL 2010
- REAL 2011
- REAL 2014
- REAL 2015
- REAL 2621
- REAL 2624
- REAL 2625


B01 Sits Sadel Utsågad bak
Sadle Seat

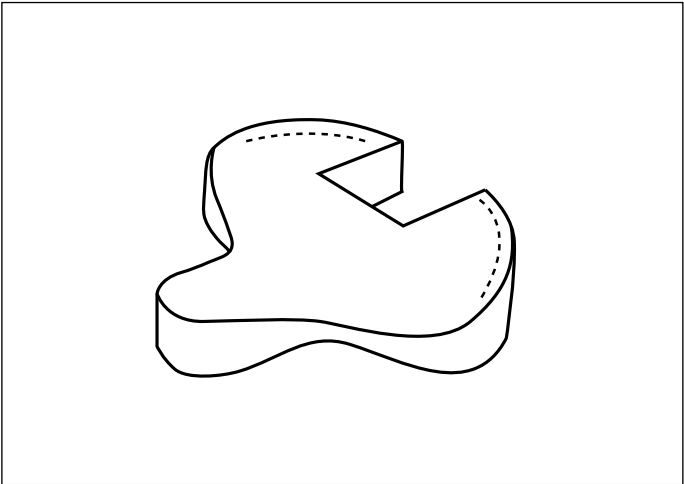

B01	ST373646 195460	Sits Sadel Utsågad bak 40x36 Sadle Seat
-----	------------------------------------	--

- REAL 2010
- REAL 2011
- REAL 2014
- REAL 2015
- REAL 2621
- REAL 2624
- REAL 2625

D01 Skruvar för montering av sittplatta
Screws for seat assembly

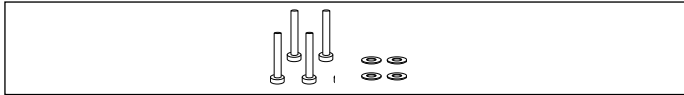


C01	801253	Insexskruvar M6x40 f montering av sittplatta Screws M6x40 for seat assembly
	800462	BRB 6.4x12x1.5 FZB (M6) f montering av sittplatta Screws BRB 6.4x12x1.5 FZB (M6) for seat assembly

Stycklista - Sittkryss

Part list - Seat frame

D01 Sittkryss vinkelställbart fix bak
Seat frame with angle adjustment fixed back

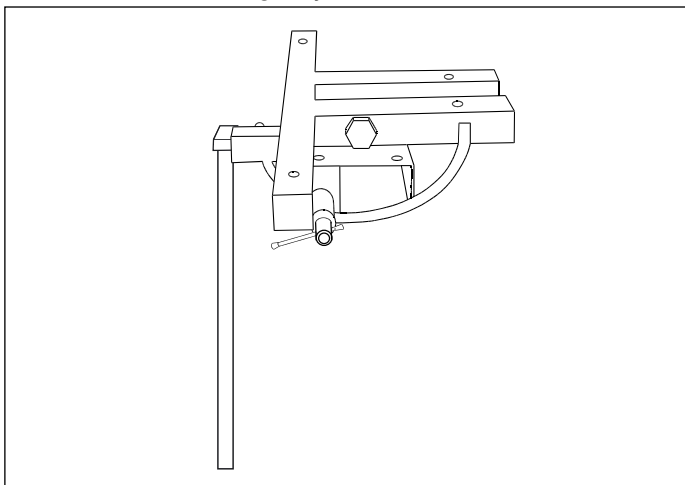


Pos	Art.nr	Benämning
Pos	Art.no	Name

D01 801818 Sittkryss 2014, 2624 vs fix bak
Seat frame 2014, 2624 fixed back

REAL 2014

REAL 2624


E01 Sittkryss vinkelställbart fix fram
Seat frame with angle adjustment fixed front

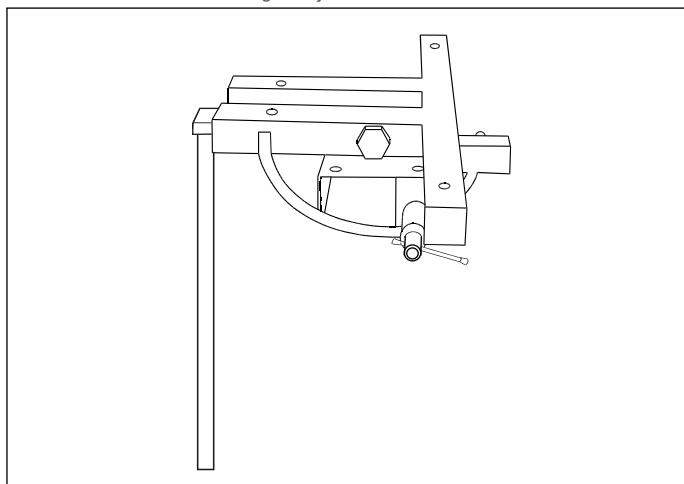

E01 803104 Sittkryss 2015 vs fix fram förberedd f armstöd
Seat frame 2015 fixed front prepared f armrest

REAL 2015

F01 Sittkryss vinkelställbart
Seat frame with angle adjustment

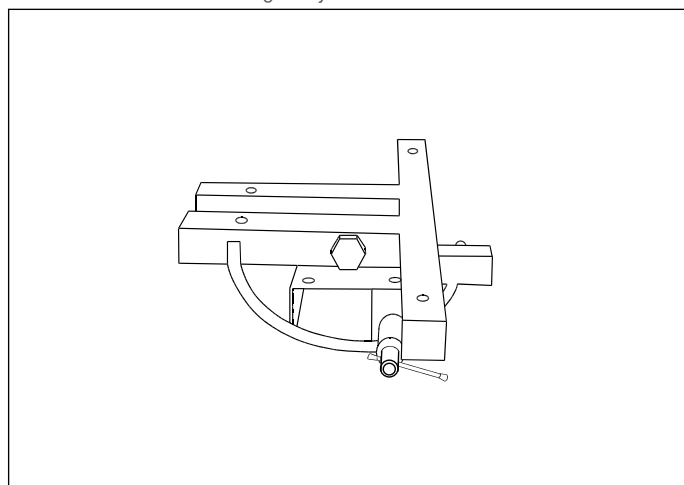

F01 803100 Sittkryss 2011,2621,2625 vs förberedd f armstöd
Seat frame 2011,2621,2625 prepared f armrest

REAL 2011

REAL 2621

REAL 2625

G01 Skruvar för montering av Lyftomat
Screws for liftomat assembly




G01 802033 M6S M8X90 8.8 FZB f montering av lyftomat
M6S M8X90 8.8 FZB for liftomat assembly
800445 Låsmutter M8 FZB f montering av lyftomat
Nut M8 FZB for liftomat assembly

Stycklista - Sittkryss

Part list - Seat frame


A01 Sittkryss vinkelfast
 Seat frame without angle adjustment

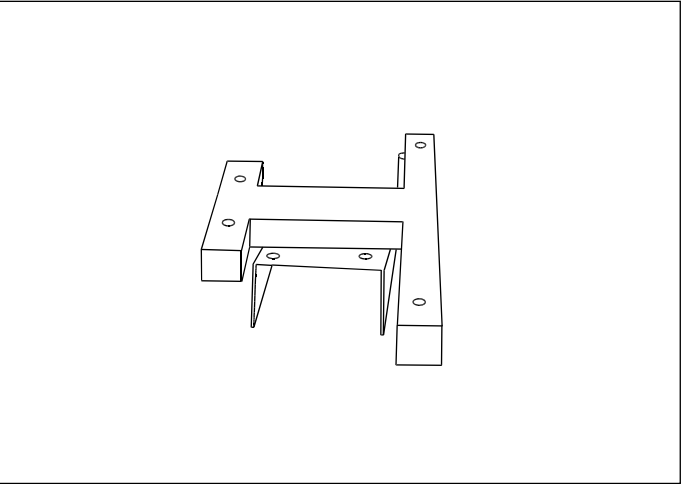

Pos	Art.nr	Benämning
Pos	Art.no	Name
A01	803099	Sittkryss 2001, 2010 vf förberedd f armstöd <i>Seat frame 2001, 2010 without angle adj prep f armrest</i>

- REAL 2001
- REAL 2010


B01 Kit för rotation
 Tallriksrotation

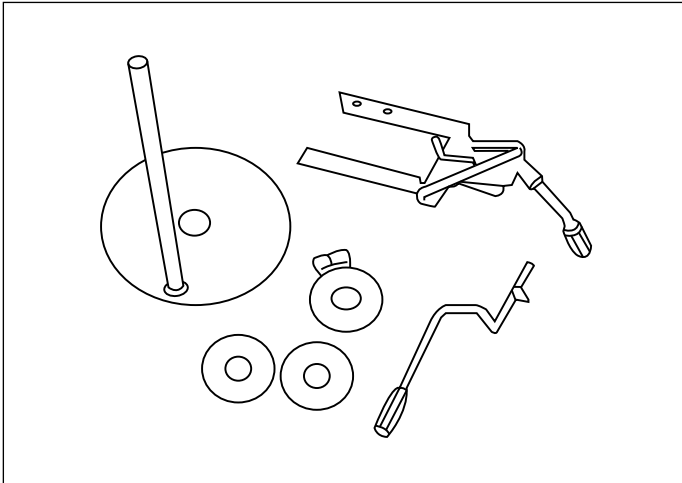

B01	803197	Tallriksrotation för Real 2000
-----	--------	--------------------------------

- REAL 2001
- REAL 2010

D01 Skruvar för montering avlyftomat
 Screws for liftomat assembly

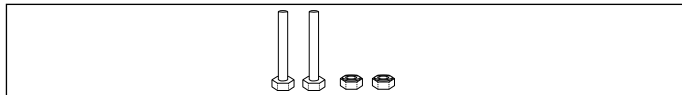


D01	802033	M6S M8X90 8.8 FZB f montering av lyftomat <i>M6S M8X90 8.8 FZB for liftomat assembly</i>
	800445	Låsmutter M8 FZB f montering av lyftomat <i>Nut M8 FZB for liftomat assembly</i>

Stycklista - Fixlyftomat

Part list - Liftomat


E Lyftomat 200 mm 350N
Liftomat 200 mm 350N

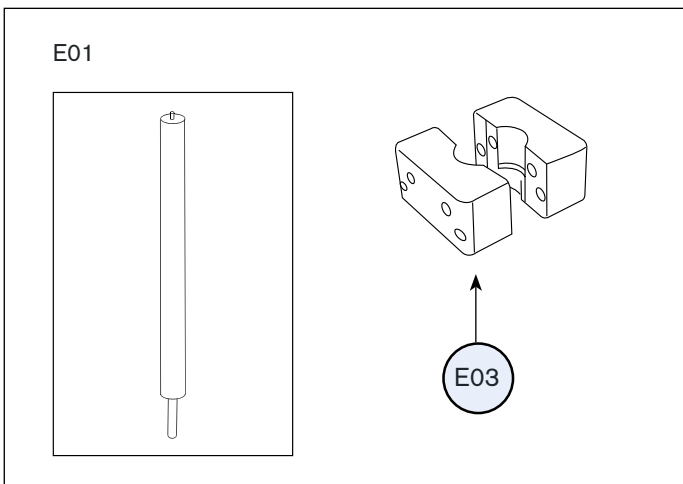

Pos	Art.nr	Benämning
Pos	Art.no	Name


E01	1	801024 Lyftomat 200 mm 350N 55-90kg Cylindriskt fäste Liftomat 200 mm 350N 55-90kg Cylindrical attachm.
	2	801028 Lyftomat 200 mm 200N <55kg Cylindriskt fäste Liftomat 200 mm 200N <55kg Cylindrical attachm.
E03		801053 Aluminiumklämma lyftomat Aluminium clam for liftomat

F Spakar för lyftomat
Levers for liftomat assembly

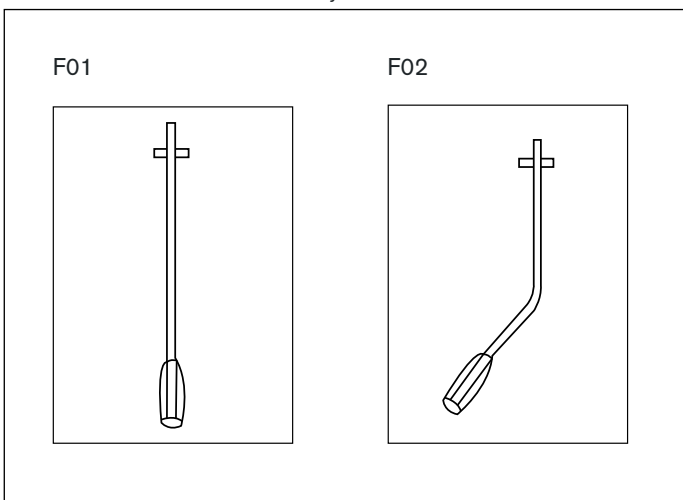

F01		803098 Lyftomathandtag Vf sits 171 mm Seat height handle for fixed seat angle 171 mm
F02		803101 Lyftomathandtag Vs sits bockad för REAL2000 Seat height handle for seat angle adj REAL2000
		803229 Sitthöjdsreglage m paddel u sits f Vs REAL2000 Seat height control under seat REAL2000

H01 Skruvar för montering av lyftomat
Screws for liftomat assembly

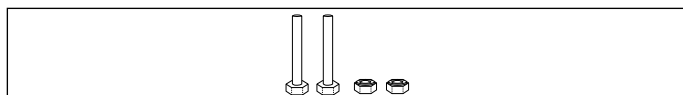


H01		802033 M6S M8X90 8.8 FZB f montering av lyftomat M6S M8X90 8.8 FZB for liftomat assembly
		800445 Låsmutter M8 FZB f montering av lyftomat Nut M8 FZB for liftomat assembly

Stycklista - Ryggplatta

Part list - Backrest


A01 Magplatta/Rygg Classic
Stomach support/Backrest Classic

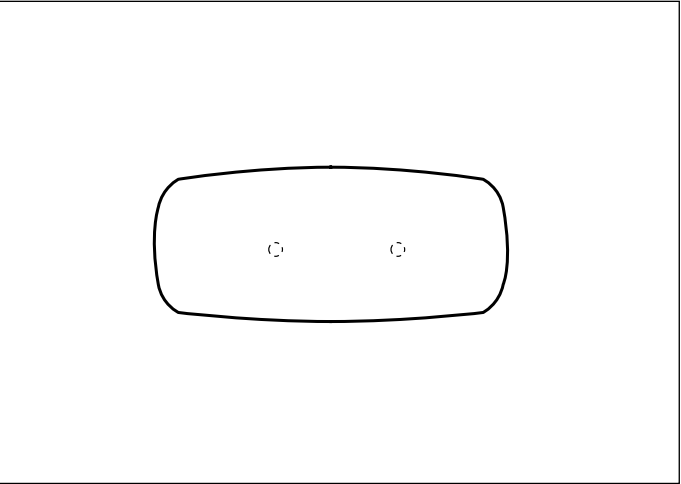

Pos	Art.nr	Benämning
Pos	Art.no	Name
A01	BR109046 230461	Magplatta/Rygg Classic 33x16 Plysch Grå Stomach support/Backrest Classic 33x16 Plush Grey

- REAL 2001
- REAL 2010
- REAL 2011
- REAL 2014
- REAL 2015


B01 Rygg ErgoMedic
Backrest ErgoMedic

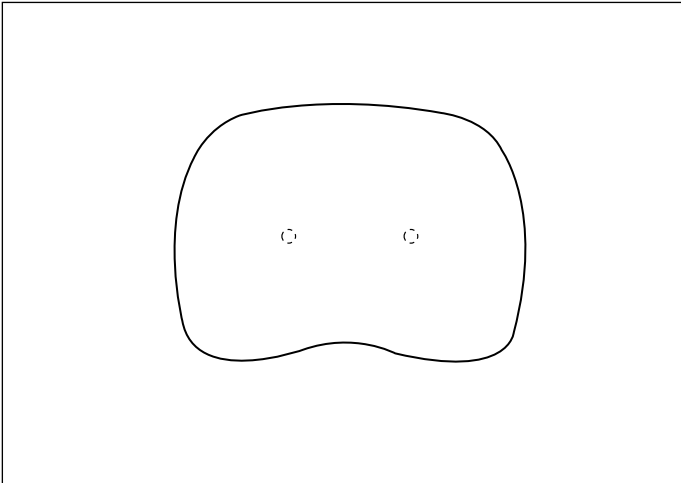

B01	BR106046 210462	Rygg ErgoMedic 33x26 Plysch Grå Backrest ErgoMedic 33x26 Plush Grey
	BR116046 215462	Rygg ErgoMedic 33x26 Slowrecovery Plysch Grå Backrest ErgoMedic 33x26 Slowrecovery Plush Grey

- REAL 2001
- REAL 2010
- REAL 2011
- REAL 2014
- REAL 2015


C01 Rygg ErgoMedic Plus
Backrest ErgoMedic Plus

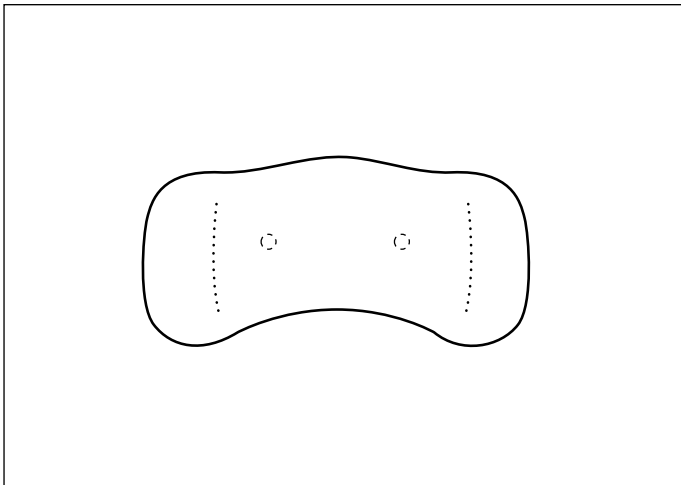

C01	BR207546 251460	Rygg ErgoMedic Plus 40x20 Plysch Grå Backrest ErgoMedic Plus 40x20 Plush Grey
	BR227546 256460	Rygg ErgoMedic Plus 40x20 Slowrecovery Plysch Grå Backrest ErgoMedic Plus 40x20 Slowrec Plush Grey
	BR208046 251462	Rygg ErgoMedic Plus 35x20 Plysch Grå Backrest ErgoMedic Plus 35x20 Plush Grey
	BR228046 256462	Rygg ErgoMedic Plus 35x20 Slowrecovery Plysch Grå Backrest ErgoMedic Plus 35x20 Slowrec Plush Grey

- REAL 2001
- REAL 2010
- REAL 2011
- REAL 2014
- REAL 2015

D01 Skruvar för montering av ryggstöd
Screws for backrest assembly

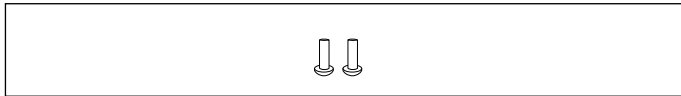


D01	802038	Svartkromaterad Möbelskruv M6x20 f montering av rygg Black furniture screw M6x20 for backrest assembly
-----	------------------------	---


Stycklista - Magplatta

Part list - Stomach support


E01 Magplatta/Rygg Classic
Stomach support/Backrest Classic

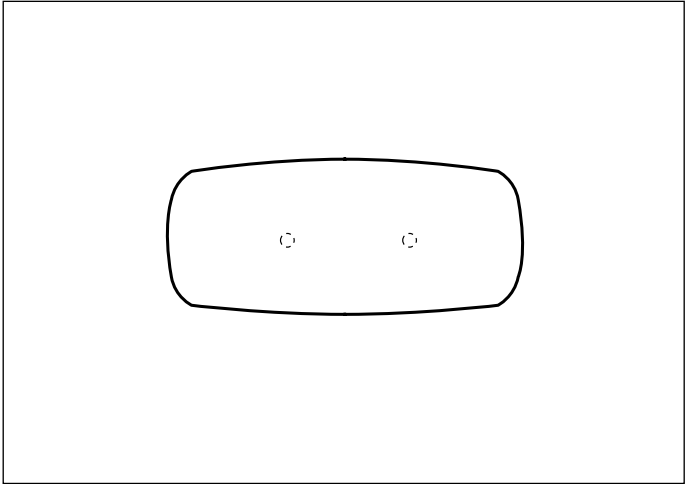


F01 Magplatta dubbel Nos
Stomach support double Tip

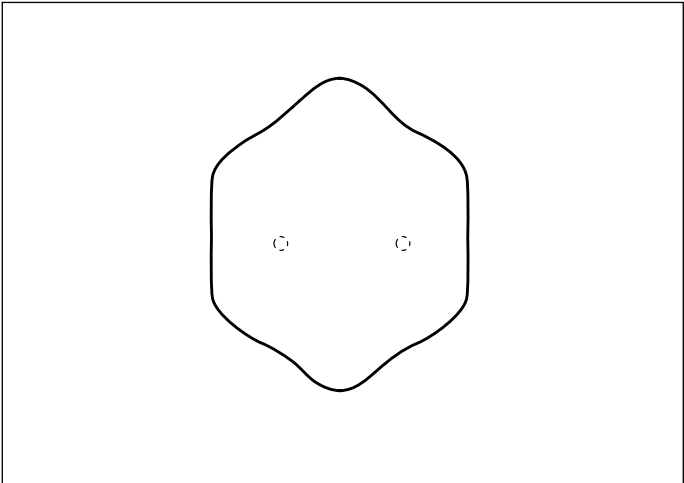

G01 Magplatta Medic
Stomach support Medic

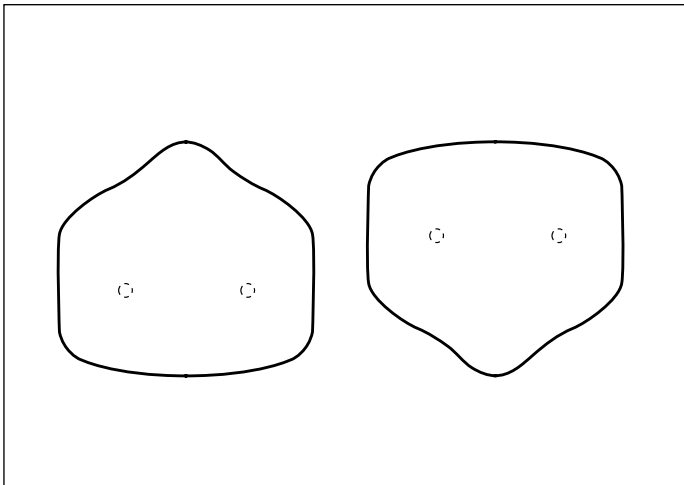

H01 Skruvar för montering av magplatta
Screws for stomach support assembly

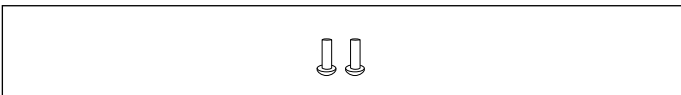

Pos	Art.nr	Benämning
Pos	Art.no	Name

E01	BR109046 230461	Magplatta/Rygg Classic 33x16 Plysch Grå Stomach support/Backrest Classic 33x16 Plush Grey
-----	------------------------------------	--

REAL 2621
REAL 2624
REAL 2625

F01	BR416746 231461	Magplatta dubbel Nos 27x27 Plysch Grå Stomach support double Tip 27x27 Plush Grey
-----	------------------------------------	--

REAL 2621
REAL 2624
REAL 2625

G01	BR406946 231460	Magplatta Medic 27x23 Plysch Grå Stomach support Medic 27x23 Plush Grey
-----	------------------------------------	--


REAL 2621
REAL 2624
REAL 2625

H01	802038	Svartkromaterad Möbelskruv M6x20 f montering av magstöd Black furniture screw M6x20 for stomach support assembly
-----	------------------------	---

Stycklista - Ryggfällning/Magfällning

Part list - Backrest mechanism/Stomach support mechanism

A Ryggmekanism Standard Backrest adjustment

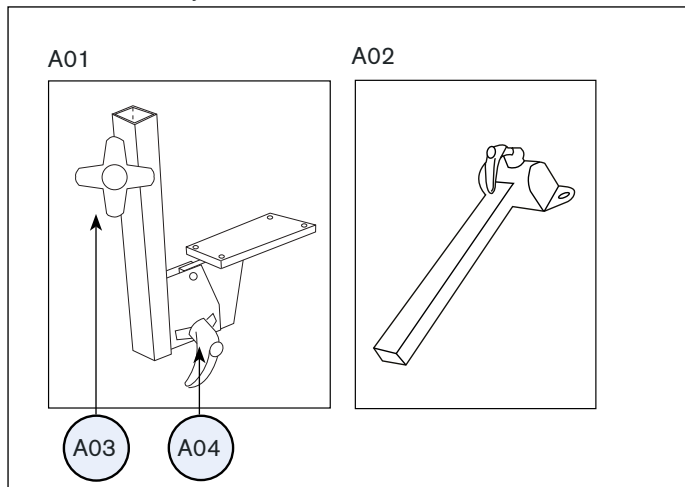

Pos Pos	Art.nr Art.no	Benämning Name
A01	800842	Ryggfällning Std Cla/ErgoMedic Backrest mechanism Std Cla/ErgoMedic
A02	800839	Ryggstolpe Std Cla. Låg rygg (runt klämförband) Back pole Std Cla. Low back (round clamp)
A03	803004	Stjärnratt Plus M8x20 (braga gummerad) Gummed knob M8x20 PLUS
A04	803006	Låsspak Plus M8 (inv gänga) (braga gummerad) Gummed handle M8 PLUS

REAL 2001

REAL 2010

REAL 2011

REAL 2014


REAL 2015

B01 Skruvar för montering av ryggfällning Screws for backtilt assembly



B01	801256	Insexskruv M6x20 FZB f montering av ryggfällning Screw M6x20 FZB for backtilt assembly
	800462	BRB 6.4x12x1.5 FZB (M6) f montering av ryggfällning BRB 6.4x12x1.5 FZB (M6) for backtilt assembly

C Magstödsmechanism Stomach support mechanism

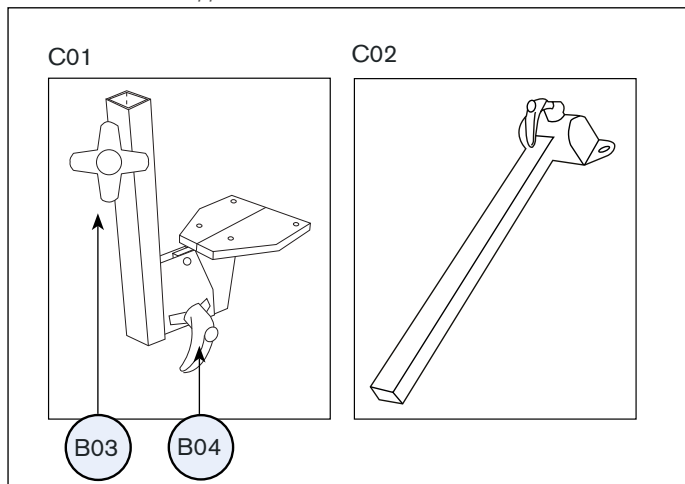


C01	803038	Magfällning magstödsstol 2621,2624,2625 Stomach support mechanism 2621, 2624, 2625
C02	801721	Magstolpe f magstödsstolar Stomach pole f stomach supporting chairs
C03	803004	Stjärnratt Plus M8x20 (braga gummerad) Gummed knob M8x20 PLUS
C04	803006	Låsspak Plus M8 (inv gänga) (braga gummerad) Gummed handle M8 PLUS

REAL 2621

REAL 2624

REAL 2625

D01 Skruvar för montering av magfällning Screws for stomach support tilt assembly

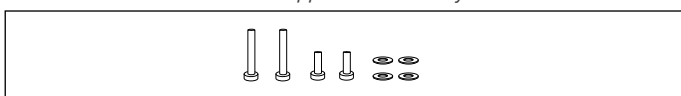


D01	801256	Insexskruv M6x20 FZB f montering av ryggfällning Screw M6x20 FZB for backtilt assembly
	801253	Insexskruv M6x40 FZB f montering av ryggfällning Screw M6x40 FZB for backtilt assembly
	800462	BRB 6.4x12x1.5 FZB (M6) f montering av ryggfällning BRB 6.4x12x1.5 FZB (M6) for backtilt assembly

Stycklista - Armstödsmekanism & Armstöd


Part list - Armrest mechanisms & Armrest

D Armstödsmekanism Terminal Armrest mechanism Terminal

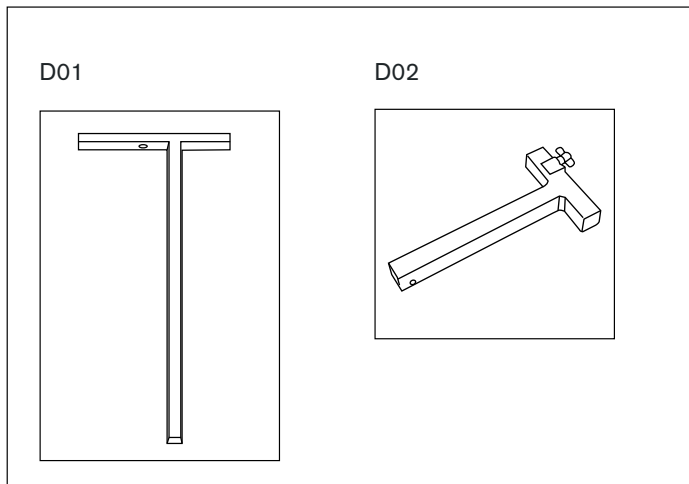


Pos	Art.nr	Benämning
Pos	Art.no	Name
D01	801710	Armstöd Terminal 323mm 9000 Armrest Terminal 323mm 9000
D02 1	801984	Armstöd Breddjust 9500/9600 Hö samt 2000 U-bar for width adjustment Right 9500/9600 & 2000
2	801985	Armstöd Breddjust 9500/9600 Vå samt 2000 U-bar for width adjustment Left 9500/9600 & 2000
D03	803004	Stjärnratt Plus M8x20 (braga gummerad) Gummed knob M8x20 PLUS

E01 Armstödsplatta ErgoMedic Armrest ErgoMedic

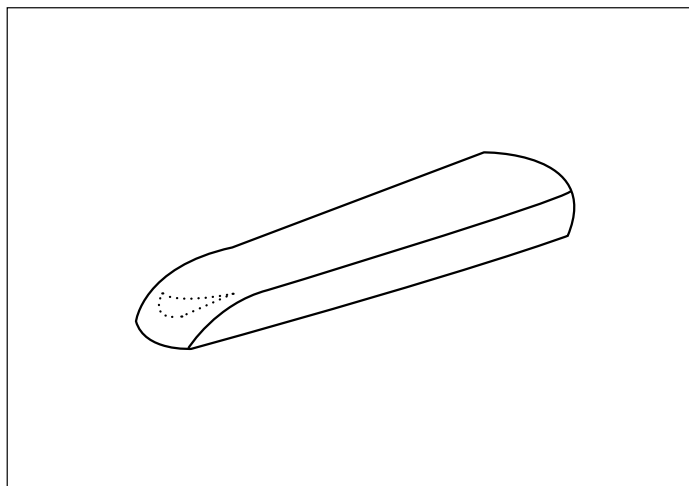

E01 1	AR103038	Armstöd platta ErgoMedic 35 cm Konstläder Svart Armrest Classic 35 cm Skai Black
2	AR102038	Armstöd platta ErgoMedic 30 cm Konstläder Svart Armrest Classic 30 cm Skai Black
3	AR101038	Armstöd platta ErgoMedic 25 cm Konstläder Svart Armrest Classic 25 cm Skai Black
4	AR104038	Armstöd platta ErgoMedic 40 cm Konstläder Svart Armrest Classic 40 cm Skai Black

F01 Skruv för montering av armstöd Screw for armrest assembly

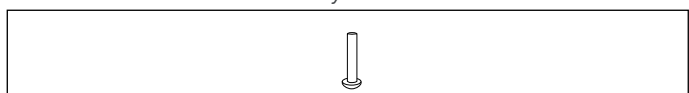


F01	802039	Svartkromaterad Möbelskruv M6x25 f montering armstöd Black furniture screw M6x25 for armrest assembly
-----	------------------------	--

Stycklista - Stativ REAL 2000

Part list - Base REAL 2000

A Stativ REAL 2000
Base REAL 2000

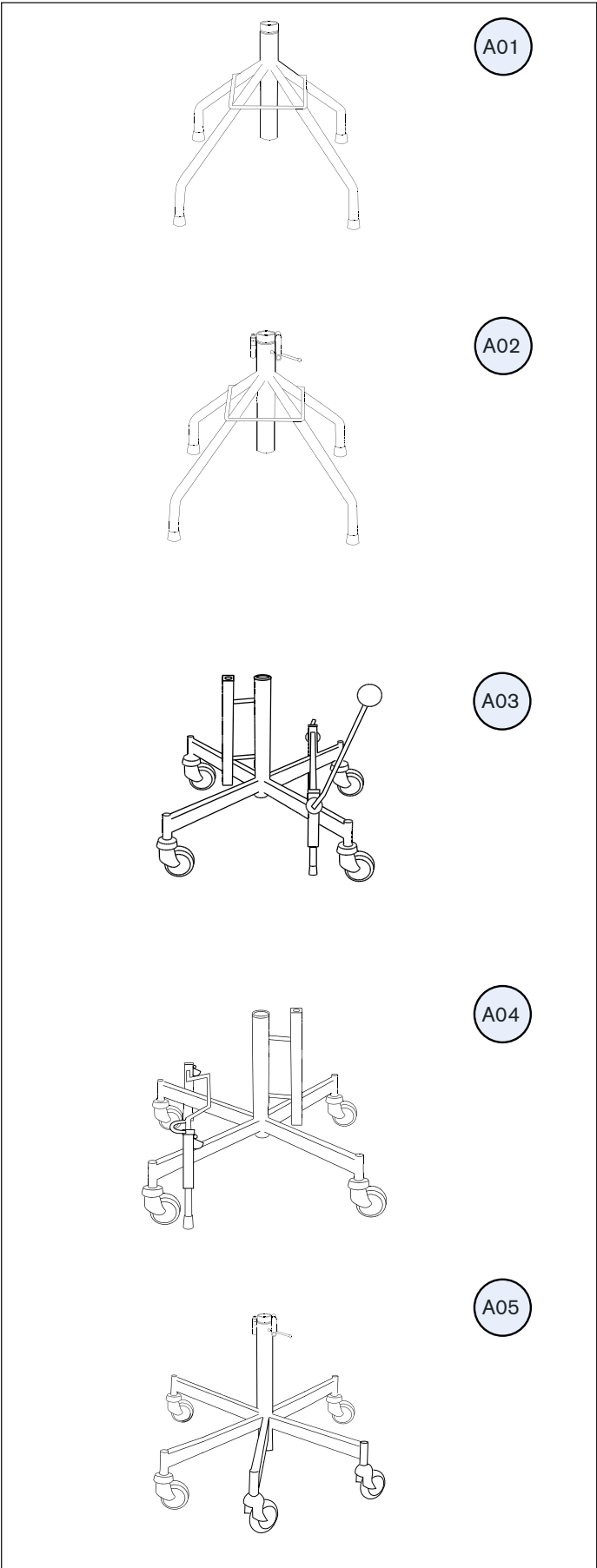


Pos	Art.nr	Benämning
Pos	Art.no	Name
A01	1 803041	Stativ 2001,2010 60-80 cm u rot.lås Base 2001,2010 60-80 cm wu rot.lock
	2 803042	Stativ 2001,2010 70-90 cm u rot.lås Base 2001,2010 70-90 cm wu rot.lock
		REAL 2001 REAL 2010
A02	1 803043	Stativ 2011,2621 60-80 cm m rot.lås Base 2011,2621 60-80 cm w rot.lock
	2 803044	Stativ 2011,2621 70-90 cm m rot.lås Base 2011,2621 70-90 cm w rot.lock
		REAL 2011 REAL 2621
A03	1 801896	Stativ 2015 60-80 75 XL hjul Handbroms Base 2015 60-80 75 XL wheel handbrake
	2 802050	Stativ 2015 70-90 75 XL hjul Handbroms Base 2015 70-90 75 XL wheel handbrake
		REAL 2015
A04	1 801938	Stativ 2014/2624 60-80 75mm hjul Fotbroms Base 2014/2624 60-80 75mm wheel Footbrake
	2 802051	Stativ 2014/2624 70-90 75 XL hjul Fotbroms Base 2014/2624 70-90 75 XL wheel Footbrake
		REAL 2014 REAL 2624
A05	803084	Stativ 2625 50-70 5 ben 75mm hjul ej brom rot.lås Base 2625 50-70 5 legs 75mm wheels no brake rot.lock
		REAL 2625

Stycklista - Stativ och bromsar

Part list - Base and brakes

B Fotbroms Foot brake

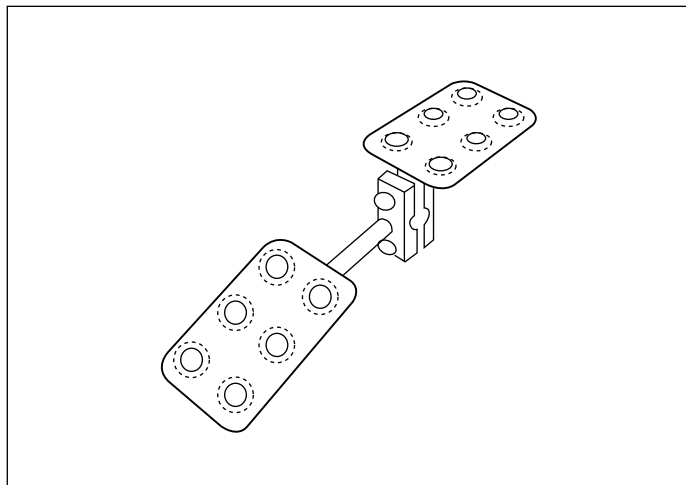


Pos	Art.nr	Benämning
Pos	Art.no	Name

B01	1	800784	Fotbroms pedal svartlackad Footbrake pedal black varnish
-----	---	--------	---

REAL 2014

REAL 2624

C Handbroms Hand brake

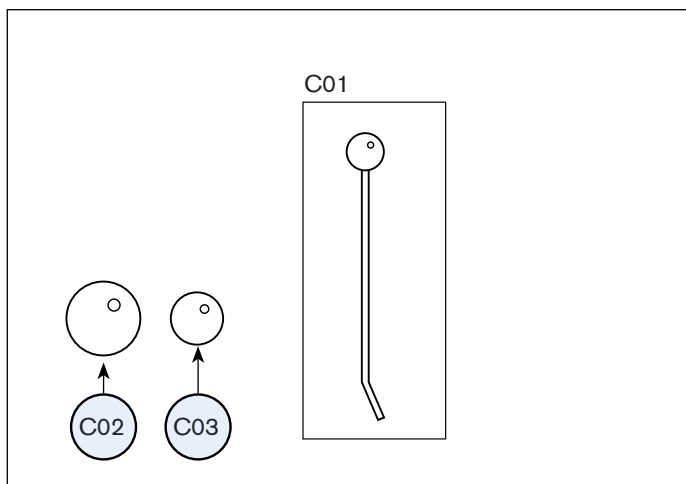

C01	1	BD2030	Handbromsspak 45 Vinklad Brake lever 45 cm
	2	BD2040	Handbromsspak 55 Vinklad Brake lever 55 cm
C02	1	LB1010	Kula handbromsspak diam 50mm Large ball grip 50 mm for brake lever
	2	LB1030	Kula handbromsspak Diam 50mm Färg Röd Large ball grip 50 mm for brake lever Colour Red
C03	1	LB1000	Kula Handbromsspak Diam 35mm Large ball grip 35 mm for brake lever
	2	LB1020	Kula handbromsspak Diam 35mm Färg Röd Large ball grip 35 mm for brake lever Colour Red


REAL 2014

REAL 2015

Stycklista - Hjul

Part list - Castors


A01 75 mm Hjul
75 mm Castor

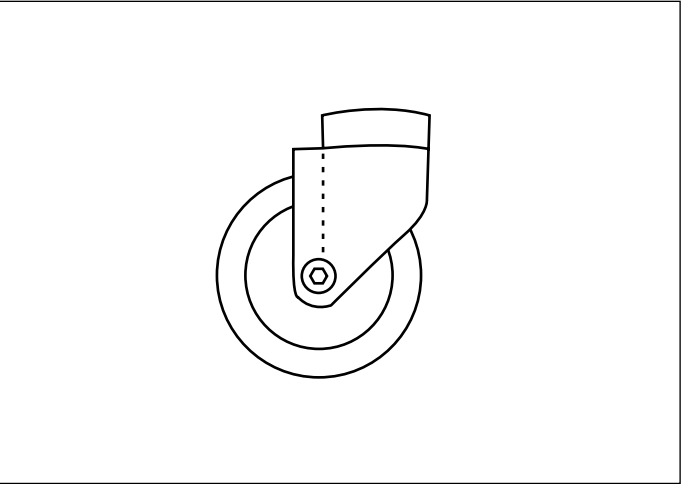

Pos	Art.nr	Benämning
Pos	Art.no	Name
A01	800900	Länkhjul 75mm XL Castor 75 mm XL

REAL 2014
REAL 2015
REAL 2024


B01 50 mm Hjul
50 mm Castor

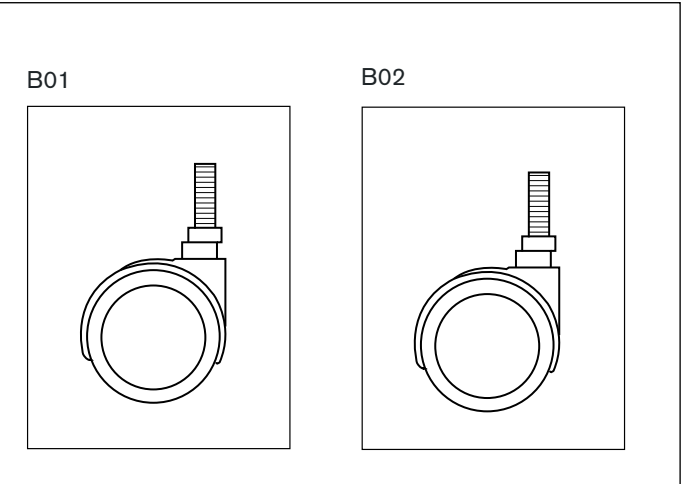

B01	800906	Länkhjul Grå 50mm Castor Grey 50 mm
B02	801640	Tvillinghjul 50mm PU bana bel.broms svart kåpa 3/8 TwinCastor 50mm PU path black casing 3/8

REAL 2001
REAL 2011
REAL 2024

C01 50 mm låsbara Hjul
60 mm lockable Castor

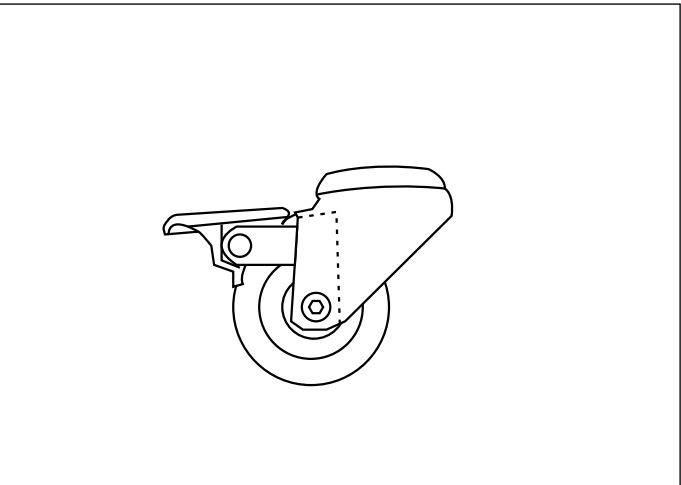


C01	800912	Länkhjul Grå 50mm Låsbara (med låsklack) Castor Grey 50 mm Lockable (with lock head)
-----	--------	---

REAL 2001
REAL 2011
REAL 2021

Stycklista - Hjul

Part list - Castors

D01 Glidknoppar

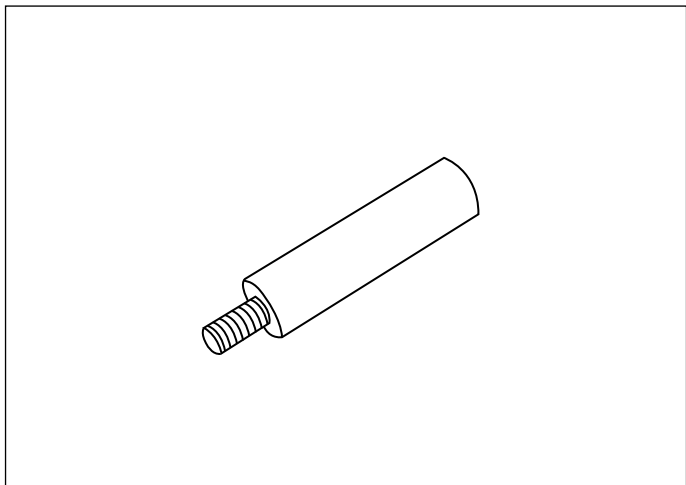

Pos	Art.nr	Benämning
Pos	Art.no	Name


D01	801614	Glidknoppar 22 mm f Ståstol Slide knobs 22 mm Stand supporting chair
-----	--------	---

REAL 2014

REAL 2015

REAL 2024

E01 Hjulformad fot

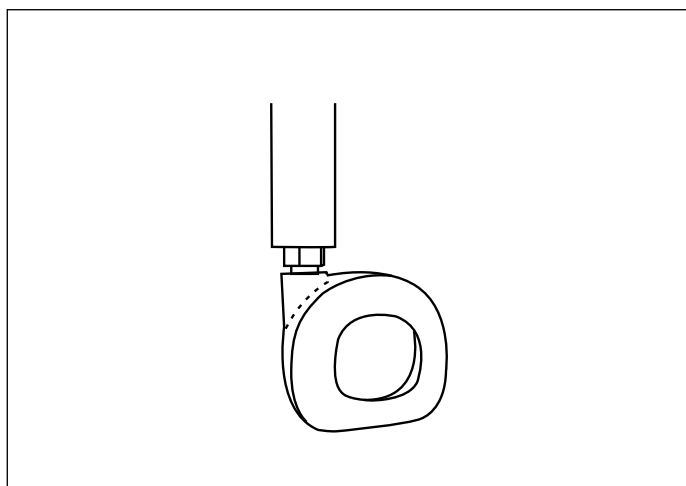

E01	801375	Glidfot i nylon m 3/8 tapp Wheelshaped foot in nylon 3/8 peg
-----	--------	---

REAL 2001

REAL 2011

REAL 2024



MERCADO SVERIGE

Mercado Medic AB

Tryffelslingan 14
181 57 Lidingö

Telefon & Fax

Tel 08 555 143 00
Fax 08 555 143 99

Email & Internet

Email info@mercado.se
Internet www.mercado.se



MERCADO NETHERLANDS

Mercado Medic Nederland BV

Nobelweg 22
3899 BN Zeewolde

Phone & Fax

Tel +31 (0) 36 521 99 95
Fax +31 (0) 36 521 99 90

Email & Internet

Email info@mercado-medic.nl
Internet www.mercado-medic.nl



MERCADO UK

Mercado Medic UK Ltd

PO Box 4818
Warwick, CV34 9GB

Phone & Fax

Ph +44-(0)844 561 6874
Fax +44-(0)844 561 6875

Email & Internet

Email info@mercado-medic.co.uk
Internet www.mercado-medic.co.uk



MERCADO NORGE

Handicare

Postboks 5043
1503 Moss

Telefon & Telefaks

Telefon: 69 24 44 00
Telefaks: 69 24 45 00

Epost & internett

Epost: post@handicare.no
Internett: www.handicare.no