


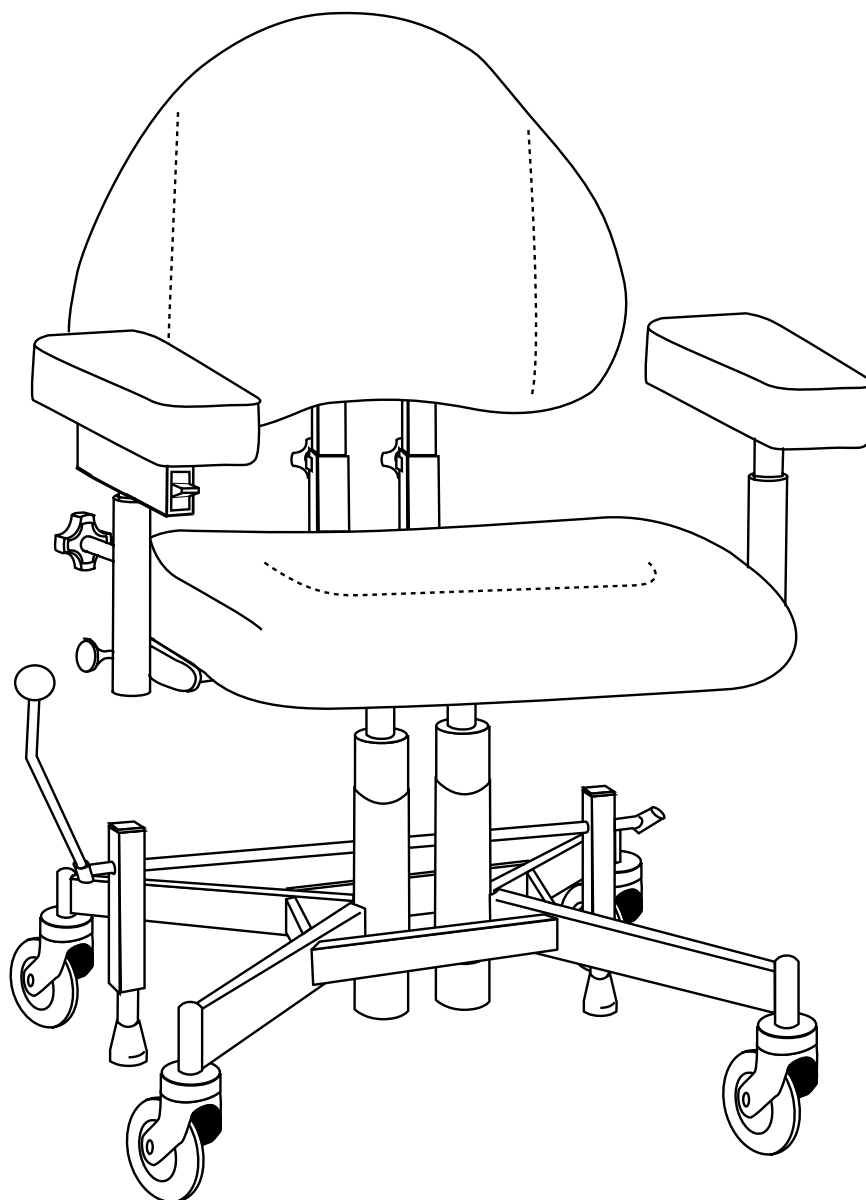

REAL® 9200 – SPRÄNGSKISS
REAL® 9200 – EXPLODED DIAGRAM

Artikelnr/Article no 801440
Ändrad/Changed 191114
Giltig från/Valid from 090501

P VERSION 005



Mercado Medic AB
Tryffelslingan 14
181 57 Lidingö

Telefon & Fax
Tel 08 555 143 00
Fax 08 555 143 99

Email & Internet
Email service@mercado.se
Internet www.mercado.se


Innehållsförteckning

Table of content

Detalj <i>Detail</i>	Sida <i>Page</i>
KLÄDSLAR OCH FÄRGKODER/UPHOLSTERY AND COLOUR CODES	5
SITTPLATTA/SEAT	6
SITTKRYSS/SEAT FRAME	8
LYFTOMATER/HEIGHT ADJUSTMENT	9
REGLAGE/CONTROLS	10
RYGGPLATTA/BACKREST	11
RYGGMEKANISM/BACKREST MECHANISM	12
ARMSTÖD/ARMRESTS	13
ARMSTÖDSMEKANISMER/ARMREST MECHANISMS	14
STATIV/BASE	15
HJUL/CASTORS	16
BROMSAR/BRAKES	18
ELEKTRONIK/ELECTRONICS	19

Klädselar och färgkoder

Upholstery and colour codes

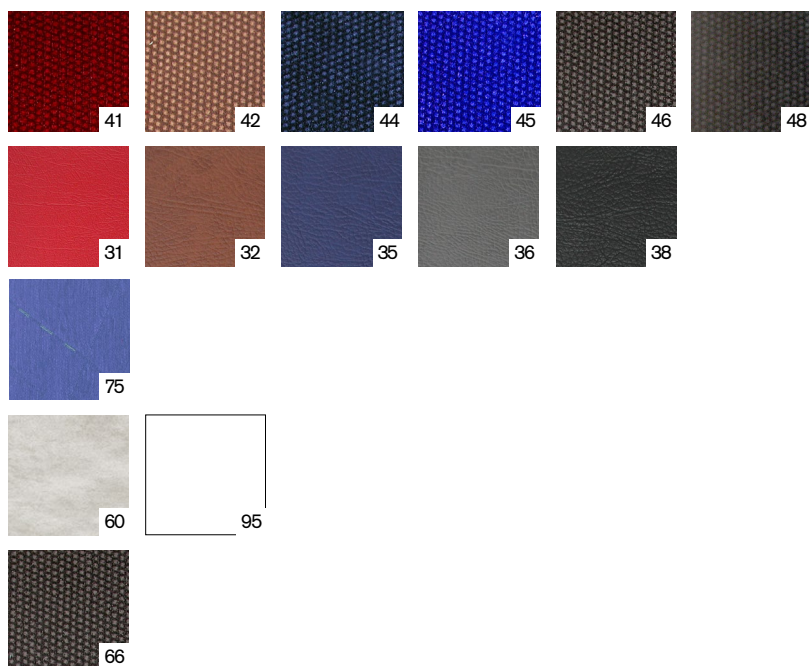

SIFFERKOD KLÄDSLAR (SIFFRA 7 OCH 8) DIGITCODE UPHOLSTERY (DIGIT 7 AND 8)

Plysch/*Plush*

41 Vinröd/ <i>Bordeaux</i>	42 Brun/ <i>Brown</i>
44 Marin/ <i>Navy Blue</i>	45 Realblå/ <i>Royal blue</i>
46 Grå/ <i>Grey</i>	48 Svart/ <i>Black</i>

Konstläder/*Skai*

31 Röd/ <i>Red</i>	32 Brun/ <i>Brown</i>
35 Blå/ <i>Blue</i>	36 Grå/ <i>Grey</i>
38 Svart/ <i>Black</i>	

Väv mönstrad Vuxen/*Patterned fabric, Adult* 75 Blå/*75 Blue*

Alternativ klädsel/*Alternative covering*

60 Hygienväv/ <i>Hygiene fabric</i>
95 Utan klädsel/ <i>Without clothing</i>

Överdragsklädsel/*Covering*

66 Inkontinensöverdrag grå plastad frotté/ <i>Incontinence cover, grey plastic-coated terry</i>
--

FÖRKLARING TILL STOPPDETALJERS ARTIKELNUMMER Art.nr: ST101546. = "Sits ErgoMedic, plysch grå 44x48 cm"

EXPLANATION OF THE ARTICLE NUMBERS STRUCTURE Article No: ST101546. = "ErgoMedic seat, plush grey 44x48 cm"

Siffror 1-2 = Typ av stoppningsartikel (ST=sits, BR=ryggplatta etc.)

Digit 1-2 = Type of upholstered article (1=seat, 2=back panel etc.)

Siffror 3-4 = Sittsystem (ErgoMedic, ErgoMedic PLUS etc.)

Digits 3-4 = Seat system (ErgoMedic, ErgoMedic PLUS etc.)

Siffror 5-6 = Storlek

Digit 5-6 = Size

Siffror 7 = Material (plysch, konstläder etc.)

Digit 7 = Material (plush, skai etc.)

Siffror 8 = Färg

Digit 8 = Colour

PREFIX FÖR UPPBYGGNADEN AV ARTIKELNUMMER


PREFIX FOR THE STRUCTURE OF THE ARTICLE NUMBER

AD	<i>Adapter</i>	Adapter	LD	<i>Leg divider</i>	Grenkil
AR	<i>Armrest</i>	Armstöd	LDC	<i>Leg divider cover</i>	Grenkil överdrag
ARM	<i>Armrest mechanism</i>	Armstödsmekanism	LS	<i>Leg support</i>	Benstöd
AS	<i>Amputation support</i>	Amputationsstöd	NS	<i>Neck support</i>	Nackstöd
ASC	<i>Amputation support cover</i>	Amputationsstöds överdrag	NSC	<i>Neck support cover</i>	Nackstöd överdrag
BD	<i>Brake device</i>	Handbroms	PB	<i>Push bar</i>	Körbygel
BE	<i>Base</i>	Stativ	RC	<i>Rheumatic cross</i>	Reumatikerkryss
BEA	<i>Break accessory</i>	Bromstillbehör	SA	<i>Seat angle mechanism</i>	Sitsvinkel
BEX	<i>Base extender</i>	Stativförlängare	SAR	<i>Seat angle regulation</i>	Sitsvinklins reglage
BR	<i>Back rest</i>	Rygg	SAP	<i>Seat angle placement</i>	Sitsvinklins placering
BRC	<i>Back rest cover</i>	Rygg överdrag	SH	<i>Seat height</i>	Sitthöjd
BRM	<i>Back rest mechanism</i>	Ryggmekanism	SS	<i>Side support</i>	Sidostöd
CS	<i>Calf support</i>	Vadstöd	SSC	<i>Side support cover</i>	Sidostöds överdrag
CSC	<i>Calf support cover</i>	Vadstöds överdrag	ST	<i>Seat</i>	Sits
FR	<i>Foot ring</i>	Fotring	STC	<i>Seat cover</i>	Sits överdrag
HB	<i>Hip belt</i>	Höftbälte	TA	<i>Table</i>	Bord
KS	<i>Knee support</i>	Knästopp	TS	<i>Trunk support</i>	Bålstöd
KSC	<i>Knee support cover</i>	Knästopps överdrag	TSC	<i>Trunk support cover</i>	Bålstöd överdrag
LB	<i>Large ball</i>	Stor kula	WE	<i>Wheel</i>	Hjul


Stycklista - Sittplatta

Part list - Seat

A01 Sits ErgoMedic
 Seat ErgoMedic

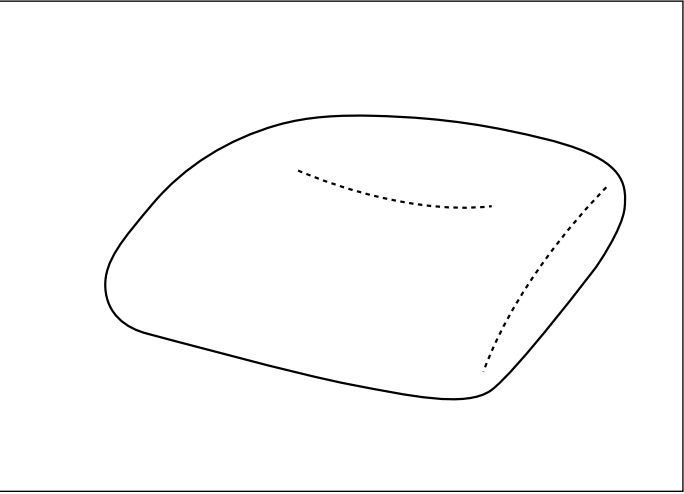

Pos	Art.nr	Benämning
Pos	Art.no	Name
A01 1	ST406046	Sits Twin 72x50 Plysch Grå Seat Twin 72x50 Plush Grey
2	ST406146	Sits Twin 72x45 Plysch Grå Seat Twin 72x45 Plush Grey
3	ST406246	Sits Twin 72x40 Plysch Grå Seat Twin 72x40 Plush Grey
4	ST406346	Sits Twin 62x50 Plysch Grå Seat Twin 62x50 Plush Grey
5	ST406446	Sits Twin 62x45 Plysch Grå Seat Twin 62x45 Plush Grey
6	ST406546	Sits Twin 62x40 Plysch Grå Seat Twin 62x40 Plush Grey
7	ST406646	Sits Twin 52x50 Plysch Grå Seat Twin 52x50 Plush Grey
8	ST406746	Sits Twin 52x45 Plysch Grå Seat Twin 52x45 Plush Grey
9	ST406846	Sits Twin 52x40 Plysch Grå Seat Twin 52x40 Plush Grey

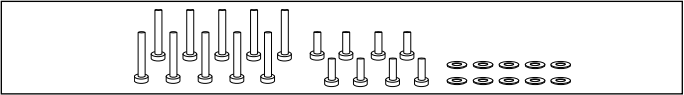


D01	803269	Skrivsats f montering av sittplatta Screw kit for seat assembly
-----	--------	--

Stycklista - Sittplatta


Part list - Seat

B01 Sittplatta endast träplatta
Seat woodenplate whitout fabric

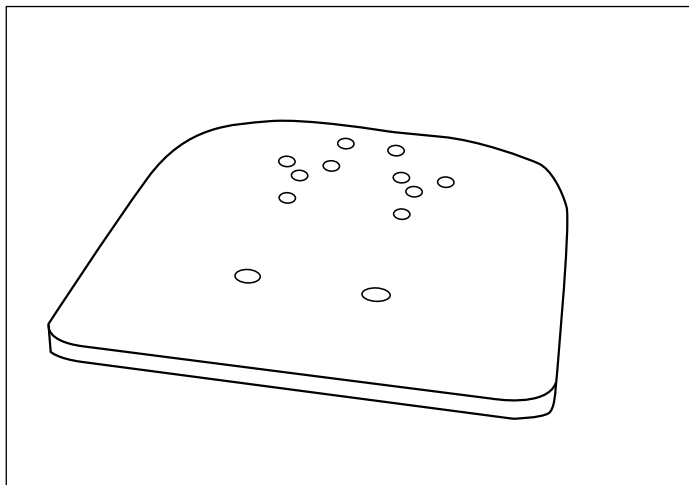


Pos	Art.nr	Benämning
Pos	Art.no	Name
B01 1	ST406090	Sits Twin 72x50 Träplatta u stoppning Seat Twin 72x50 Woodenplate Without fabric
2	ST406190	Sits Twin 72x45 Träplatta u stoppning Seat Twin 72x45 Woodenplate Without fabric
3	ST406290	Sits Twin 72x40 Träplatta u stoppning Seat Twin 72x40 Woodenplate Without fabric
4	ST406390	Sits Twin 62x50 Träplatta u stoppning Seat Twin 62x50 Woodenplate Without fabric
5	ST406490	Sits Twin 62x45 Träplatta u stoppning Seat Twin 62x45 Woodenplate Without fabric
6	ST406590	Sits Twin 62x40 Träplatta u stoppning Seat Twin 62x40 Woodenplate Without fabric
7	ST406690	Sits Twin 52x50 Träplatta u stoppning Seat Twin 52x50 Woodenplate Without fabric
8	ST406790	Sits Twin 52x45 Träplatta u stoppning Seat Twin 52x45 Woodenplate Without fabric
9	ST406890	Sits Twin 52x40 Träplatta u stoppning Seat Twin 52x40 Woodenplate Without fabric

C01 Sittplatta Träplatta med antiglid
Seat woodenplate with antiglide

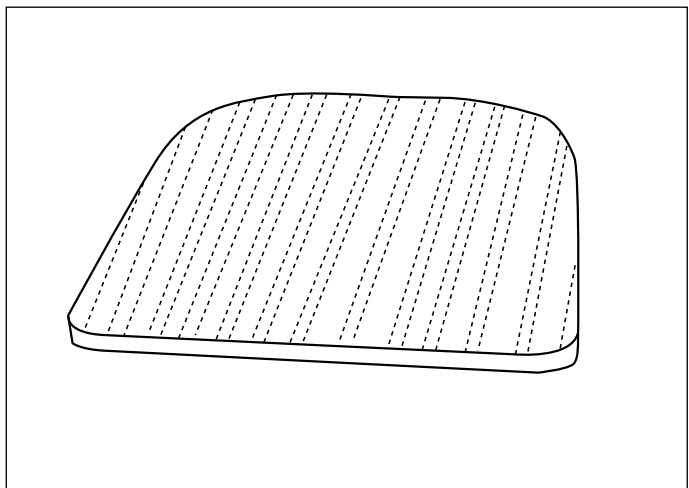

C01 1	ST406061	Sits Träplatta Twin 72x50 Antiglid Seat Twin 72x50 Antiglide
2	ST406161	Sits Träplatta Twin 72x45 Antiglid Seat Twin 72x45 Antiglide
3	ST406261	Sits Träplatta Twin 72x40 Antiglid Seat Twin 72x40 Antiglide
4	ST406361	Sits Träplatta Twin 62x50 Antiglid Seat Twin 62x50 Antiglide
5	ST406461	Sits Träplatta Twin 62x45 Antiglid Seat Twin 62x45 Antiglide
6	ST406561	Sits Träplatta Twin 62x40 Antiglid Seat Twin 62x40 Antiglide
7	ST406661	Sits Träplatta Twin 52x50 Antiglid Seat Twin 52x50 Antiglide
8	ST406761	Sits Träplatta Twin 52x45 Antiglid Seat Twin 52x45 Antiglide
9	ST406861	Sits Träplatta Twin 52x40 Antiglid Seat Twin 52x40 Antiglide

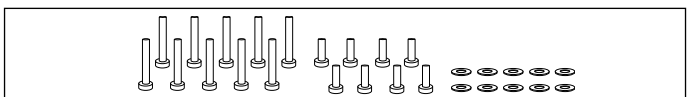


D01	803269	Skrusats f montering av sittplatta Screw kit for seat assembly
-----	------------------------	---

Stycklista - Sittkryss


Part list - Seatframe

A01 Sittkryss Twin
 Seatframe Twin

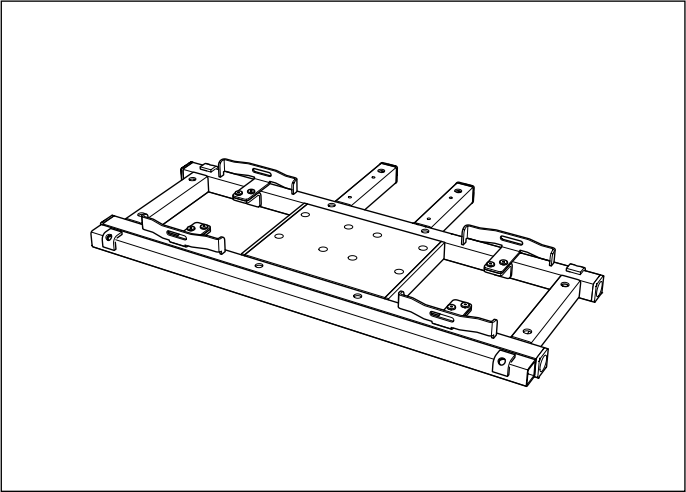

Pos	Art.nr	Benämning
Pos	Art.no	Name
A01 1	801873	Sittkryss 9200 Twin Br52-61cm <i>Seatframe 9200 Twin 52-61cm</i>
2	801434	Sittkryss 9200 Twin Br62-71cm <i>Seatframe 9200 Twin 62-71cm</i>
3	801874	Sittkryss 9200 Twin Br72-81cm <i>Seatframe 9200 Twin 72-81cm</i>

A02 Shimsplåt 162x73x2 f REAL 9200 TWIN
 Shims plate 162x73x2 f REAL 9200 TWIN

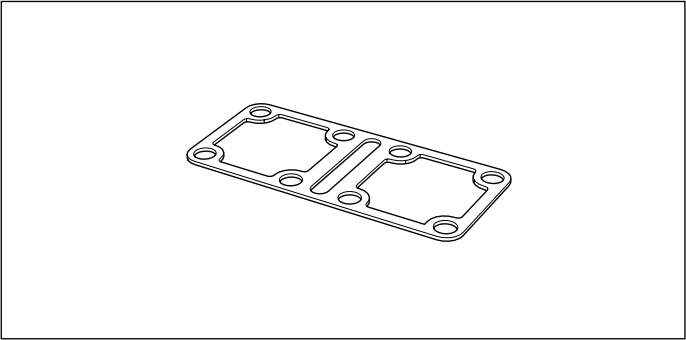


A02 1	805065	Shimsplåt 162x73x2 f REAL 9200 TWIN <i>Shims plate 162x73x2 f REAL 9200 TWIN</i>
-------	--------	---

Stycklista - Lyftomater


Part list - Electric & Gas lift height adjustment

A01 Ellyftomat
Electric height adjustment

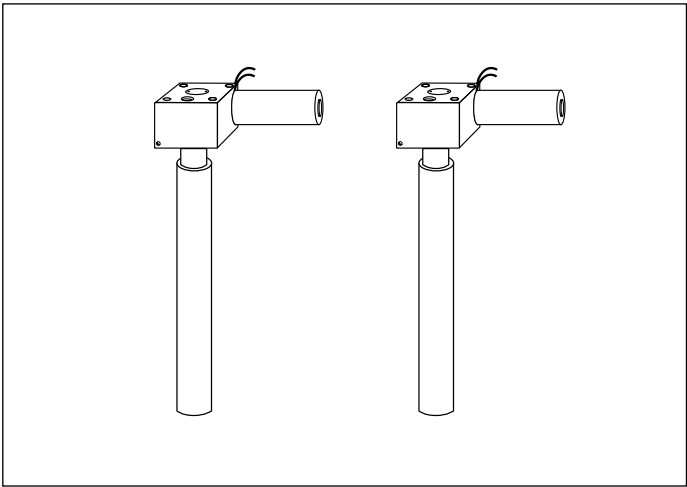

Pos	Art.nr	Benämning
Pos	Art.no	Name
A01 1	802432	Ellyftomater 28cm Twin (Par) Electric height adjustment 28 cm Twin (Pair)
2	802433	Ellyftomater 20cm Twin (Par) Electric height adjustment 20 cm Twin (Pair)


B01 Fixlyftomat
Gas lift

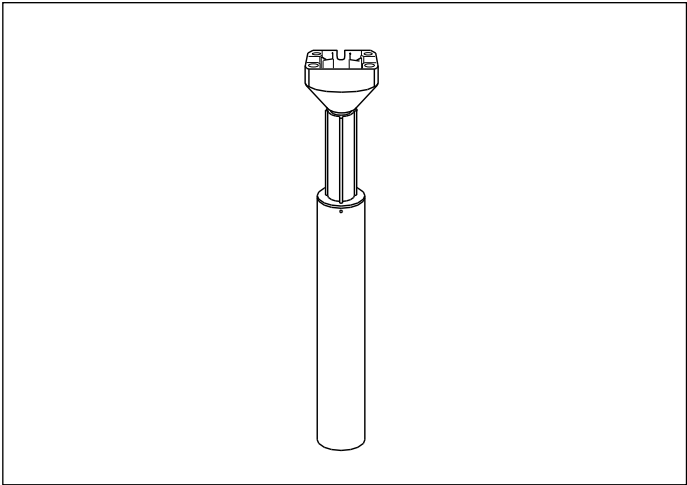

B01 1	803981	Fixlyftomat 140 mm 55-90kg Med alufäste Grovt ytterrör Fixed gas lift 140mm 55-90kg Thick outer tube.
2	803983	Fixlyftomat 140 mm 90-140kg Med alufäste Grovt ytterrör Fixed gas lift 140mm 90-140kg Thick outer tube.
3	803987	Fixlyftomat 200 mm 55-90kg Med alufäste Grovt ytterrör Fixed gas lift 200mm 55-90kg Thick outer tube.
4	803989	Fixlyftomat 200 mm 90-140kg Med alufäste Grovt ytterrör Fixed gas lift 200mm 90-140kg Thick outer tube.

Fixlyftomat säljs styckvis
Fixlyftomat is sold a piece

C01 Skruv sats för lyftomat
Screw kit for liftomat assembly

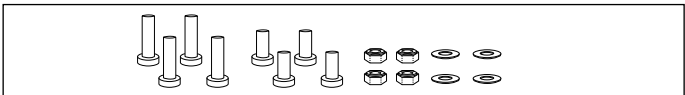


C01	803268	Skrusats f montering av manuell eller elektrisk lyftomat Screw kit for liftomat assembly or electric liftomat
-----	--------	--

Stycklista - Reglage för sitthöjd

Part list - Controls for seat height

A01 Reglage för sitthöjd f manuell Twin
 Controls for seat height for manual Twin


Pos	Art.nr	Benämning
Pos	Art.no	Name
A01	803116	Sitthöjdsreglage under armstöd f vf i PLUS-utförande Seat height control under armr for fixed seat angle,Plus

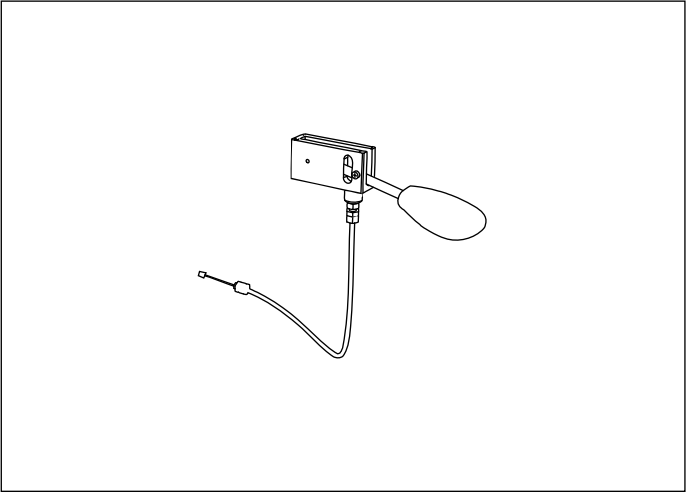


Stycklista - Ryggplatta

Part list - Backrest


A01 Ryggar Twin
Backrest Twin

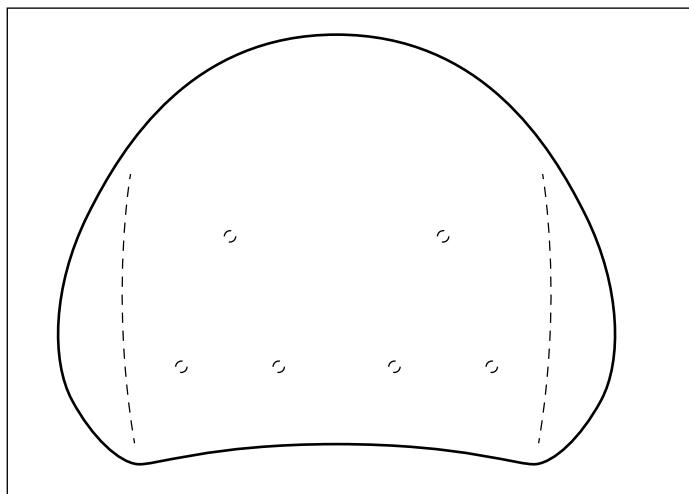

B01 Ryggar Twin utan stoppning
Backrest Twin Wooden plate without fabric

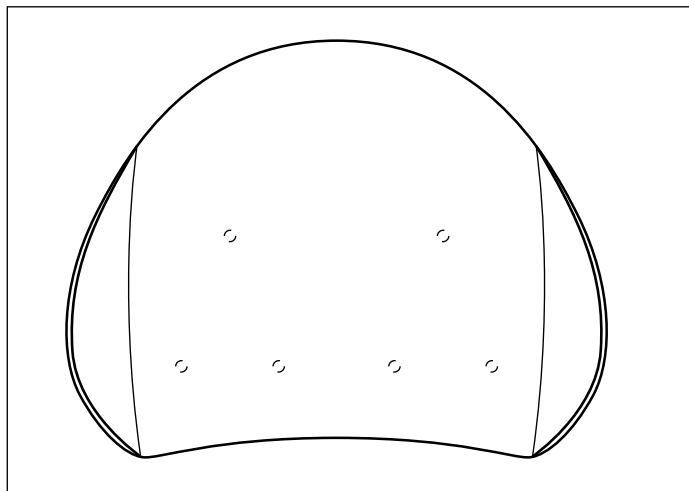

C01 Skruv sats för montering av rygg och ryggfällning
Screw kit for backrest assembly

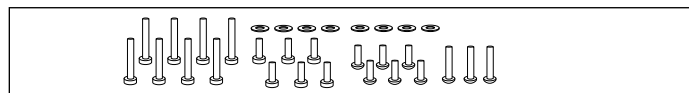

Pos Art.nr Benämning
Pos Art.no Name

- | | | | |
|-----|---|--------------------------|--|
| A01 | 1 | BR500646 | Rygg Twin 66x43 Plysch Grå
Backrest Twin 66x43 Plush Grey |
| | 2 | BR500846 | Rygg Twin 56x43 Plysch Grå
Backrest Twin 56x43 Plush Grey |
| | 3 | BR501046 | Rygg Twin 46x43 Plysch Grå
Backrest Twin 46x43 Plush Grey |


- | | | | |
|-----|---|--------------------------|---|
| B01 | 1 | BR500690 | Rygg Twin 66x43 Träplatta utan stoppning
Backrest Twin 66x43 Wooden plate Without fabric |
| | 2 | BR500890 | Rygg Twin 56x43 Träplatta utan stoppning
Backrest Twin 56x43 Wooden plate Without fabric |
| | 3 | BR501090 | Rygg Twin 46x43 Träplatta utan stoppning
Backrest Twin 46x43 Wooden plate Without fabric |

- | | | |
|-----|------------------------|---|
| C01 | 803270 | Skruvsats f montering av rygg och ryggfällning
Screw kit for backrest assembly |
|-----|------------------------|---|

Stycklista - Ryggmekanism


Part list - Backrest mechanism

A01 Ryggmekanism Medic
Backrest mechanism Medic

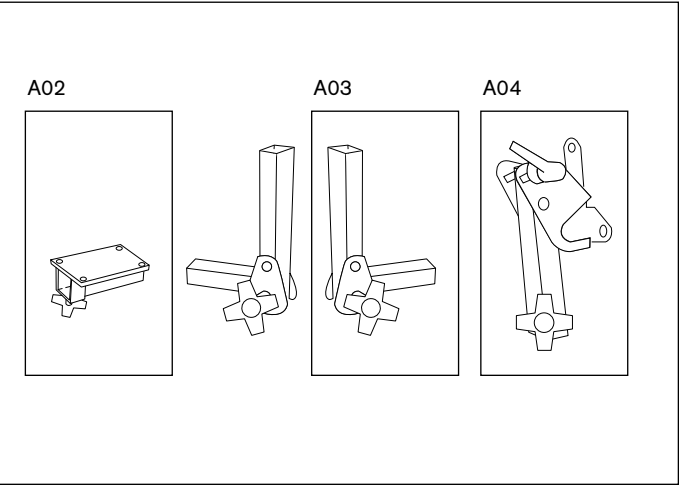

Pos	Art.nr	Benämning
Pos	Art.no	Name
A01 1	BRM5800	Medic ryggmek TWIN Dj155/H240mm Regl H+V bak, Par Medic backrestmech Twin De155/R240 mm Regl R+L back
2	BRM5900	Medic ryggmek TWIN Dj155/H340mm Regl H+V bak, Par Medic backrestmech Twin De155/R340 mm Regl R+L back
A02	800837	Ryggfällning fäste Medic Backrestmechanism Medic hold Classic/ErgoM
A03 1	801082	Ryggfällning Medic 155mm L Backrestmech. Medic 155 mm L 240 mm
2	801084	Ryggfällning Medic 155mm XL Backrestmech. Medic 155 mm XL 340 mm
A04	801737	Ryggstolpe Medic/Comfort ErgoM Back pole Medic/Comfort Ergo M High back

B01 Skruv sats för montering av rygg och ryggfällning
Screw kit for backrest assembly

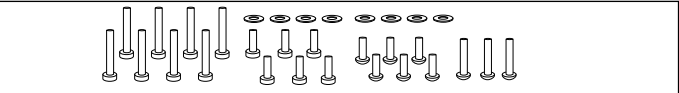


B01	803270	Skrusats f montering av rygg och ryggfällning Screw kit for backrest assembly
-----	--------	--


Stycklista – Armstöd

Part list – Armrests


A01 ErgoMedic för samtliga armstödsmekanismer
ErgoMedic for all armrest mechanisms

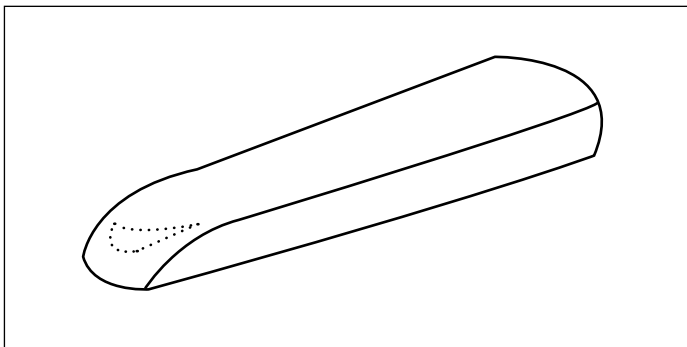


B01 Extra Soft för samtliga armstödsmekanismer
Extra Soft for all armrest mechanisms

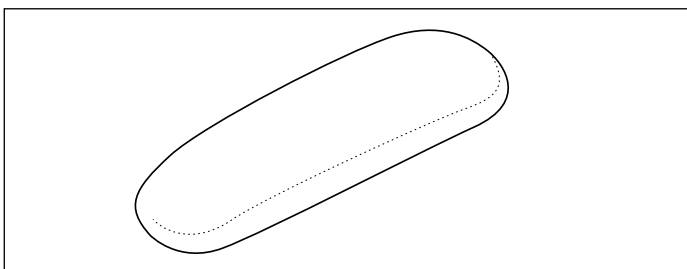


C Mobil för samtliga armstödsmekanismer
Mobil for all armrest mechanisms

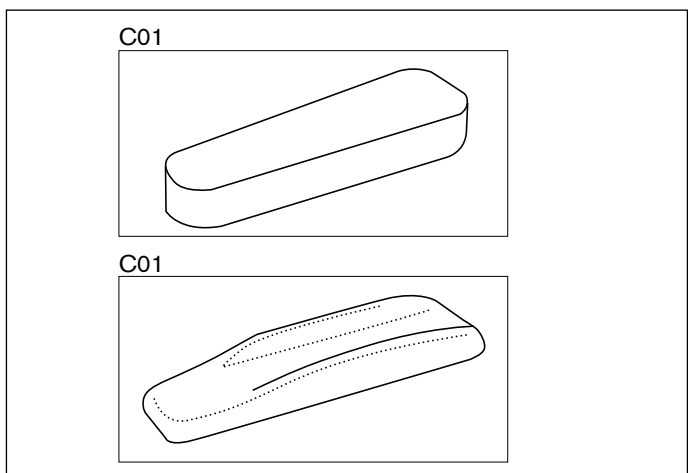

D ErgoMedic PLUS för samtliga armstödsmekanismer
ErgoMedic PLUS for all armrest mechanisms

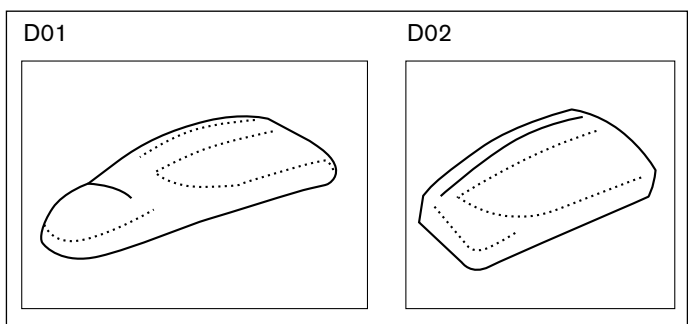

E01 Skruvsats för montering av armstöd
Screw kit for armrest assembly

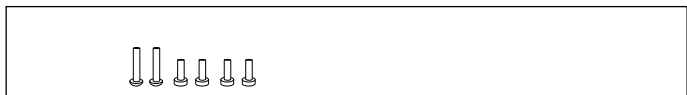

Pos Art.nr Benämning
Pos Art.no Name

A01	1	AR103038	Armstöd platta ErgoMedic 35 cm Konstläder Svart 240380 <i>Armrest Classic 35 cm Skai Black</i>
	2	AR102038	Armstöd platta ErgoMedic 30 cm Konstläder Svart 240381 <i>Armrest Classic 30 cm Skai Black</i>
	3	AR101038	Armstöd platta ErgoMedic 25 cm Konstläder Svart 240382 <i>Armrest Classic 25 cm Skai Black</i>
	4	AR104038	Armstöd platta ErgoMedic 40 cm Konstläder Svart 240383 <i>Armrest Classic 40 cm Skai Black</i>
	5	AR112038	Armstöd platta Mini 30 cm Konstläder Svart 242381 <i>Armrest Mini 30 cm Skai Black</i>
	6	AR111038	Armstöd platta Mini 25 cm Konstläder Svart 242382 <i>Armrest Mini 25 cm Skai Black</i>

B01	1	AR513038	Armstöd platta extra soft 35 cm Konstläder Svart <i>Armrest Extra soft 35 cm Skai Black</i>
	2	AR512038	Armstöd platta extra soft 30 cm Konstläder Svart <i>Armrest Extra soft 30 cm Skai Black</i>
	3	AR511038	Armstöd platta extra soft 25 cm Konstläder Svart <i>Armrest Extra soft 25 cm Skai Black</i>

C01	1	AR303038	Armstöd platta Mobil 35 cm Konstläder Svart 245380 <i>Armrest Mobile 35 cm Skai Black</i>
	2	AR302038	Armstöd platta Mobil 30 cm Konstläder Svart 245381 <i>Armrest Mobile 30 cm Skai Black</i>
	3	AR301038	Armstöd platta Mobil 25 cm Konstläder Svart 245382 <i>Armrest Mobile 25 cm Skai Black</i>
	4	AR304038	Armstöd platta Mobil 40 cm Konstläder Svart 245383 <i>Armrest Mobile 40 cm Skai Black</i>

C02		AR406038	Armstöd platta Hemiplegi 45x12 cm Konstläder Svart 244382 <i>Armrest Hemiplegi 45x12 cm Skai Black</i>
-----	--	--------------------------	--

D01	1	AR205138	Armstöd platta ErgoM PLUS Hö 42 cm Konstläder Svart 243380 <i>Armrest ErgoMedic PLUS Right 42 cm Skai Black</i>
	2	AR205238	Armstöd platta ErgoM PLUS Vå 42 cm Konstläder Svart 243385 <i>Armrest ErgoMedic PLUS Left 42 cm Skai Black</i>


D02	1	AR202138	Armstöd platta ErgoM PLUS Hö 30 cm Konstläder Svart 243381 <i>Armrest ErgoMedic PLUS Right 30 cm Skai Black</i>
	2	AR202238	Armstöd platta ErgoM PLUS Vå 30 cm Konstläder Svart 243386 <i>Armrest ErgoMedic PLUS Left 30 cm Skai Black</i>

D01		803271	Skruvsats f montering armstöd <i>Screw kit for armrest assembly</i>
-----	--	------------------------	--


Stycklista – Armstödsmekanismer

Part list – Armrest mechanisms

A Armstödsmekanism PLUS
 Armrest mechanism PLUS

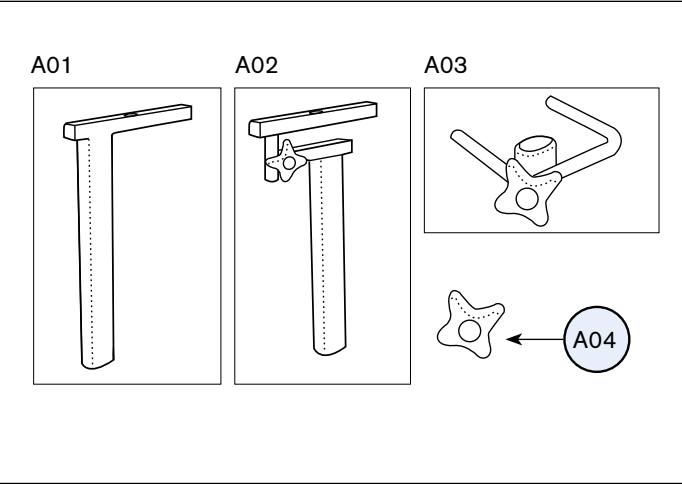

B01 Armstödsmekanism fällbar
 Foldable armrest mechsanim

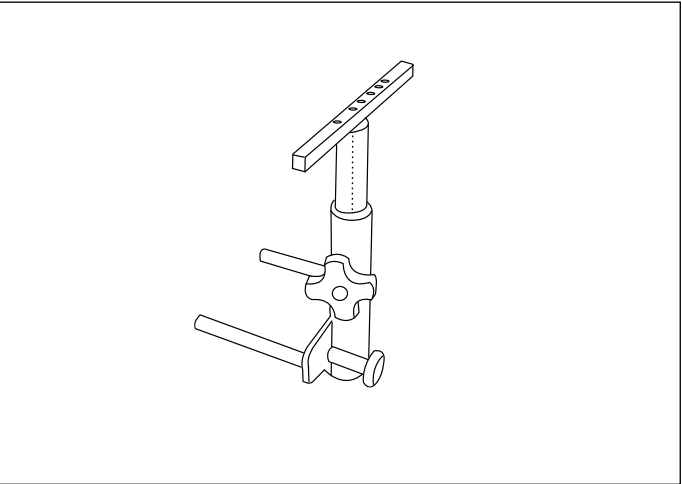


Pos	Art.nr	Benämning
Pos	Art.no	Name
A01	1 600304	Armstöd PLUS Höger Höjd 32 Armrest PLUS right, Height 32
	2 600305	Armstöd PLUS Vänster Höjd 32 Armrest PLUS left, Height 32
	3 600306	Armstöd PLUS Höger Höjd 38 Armrest PLUS right, Height 38
	4 600307	Armstöd PLUS Vänster Höjd 38 Armrest PLUS left, Height 38
A02	1 802992	Armstöd Hemiplegi Höjd 32 PLUS armstöd Höger Hemiplegic armrest Height 32 PLUS armrest right
	2 802993	Armstöd Hemiplegi Höjd 32 PLUS armstöd Vänster Hemiplegic armrest Height 32 PLUS armrest left
A03	1 802698	Armstöd Breddbåge PLUS Höger 9000/6100 U-bar for width adjustment PLUS Right
	2 802699	Armstöd Breddbåge PLUS Vänster 9000/6100 U-bar for width adjustment PLUS Left
A04	803004	Stjärnratt Plus M8x20 (Braga gummerad) Gummed knob M8x20 PLUS
B01	1 ARM3011	Armstöd mekanism 6100 kpl. Höger B >40 (Vuxen) 600126 Armrest mecanism 6100 right Compl. >40
	2 ARM3012	Armstöd mekanism 6100 kpl. Vänster B >40 (Vuxen) 600125 Armrest mecanism 6100 left Compl. >40
	3 ARM3111	Armstöd mekanism 6100 kpl. Vs Höger Br>40 (Vuxen) 600170 Armrest mecanism 6100 right Compl. angle adjustable >40
	4 ARM3112	Armstöd mekanism 6100 kpl. Vs Vänster Br>40 (Vuxen) 600169 Armrest mecanism 6100 left Compl. angle adjustable >40

Stycklista - Stativ Twin

Part list - Base Twin

A01 Stativ Twin
Base Twin

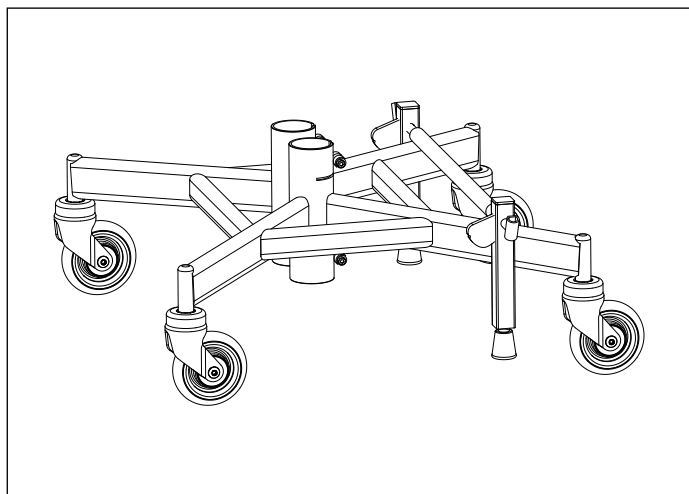


Pos	Art.nr	Benämning
Pos	Art.no	Name
A01 1	801876	Stativ 9200 Twin 100 XL <i>Base 9200 Twin 100 XL</i>
2	801877	Stativ 9200 Twin 100 SL <i>Base 9200 Twin 100 SL</i>
3	802093	Stativ 9200 Twin 100 ESD <i>Base 9200 Twin 100 ESD</i>
4	801956	Stativ 9200 Twin 100 XL m Stativförlängare fram <i>Base 9200 Twin 100 XL Base extension forward</i>
5	801957	Stativ 9200 Twin 100 SL m Stativförlängare fram <i>Base 9200 Twin 100 SL Base extension forward</i>
6	802095	Stativ 9200 Twin 100 ESD m Stativförlängare fram <i>Base 9200 Twin 100 ESD Base extension forward</i>
7	801954	Stativ 9200 Twin 100 XL m Stativförlängare bak <i>Base 9200 Twin 100 XL Base extension back</i>
8	801955	Stativ 9200 Twin 100 SL m Stativförlängare bak <i>Base 9200 Twin 100 SL Base extension back</i>
9	802094	Stativ 9200 Twin 100 ESD m Stativförlängare bak <i>Base 9200 Twin 100 ESD Base extension back</i>
10	802082	Stativ 9200 Twin 125 hjul m Stativförlängare bak <i>Base 9200 Twin 125 XL Base extension back</i>
11	802084	Stativ 9200 Twin 150 hjul m Stativförlängare bak <i>Base 9200 Twin 150 XL Base extension back</i>
12	801958	Stativ 9200 Twin 100 XL m Stativförlängare fram & bak <i>Base 9200 Twin 100 XL Base extension forward & back</i>
13	801959	Stativ 9200 Twin 100 SL m Stativförlängare fram & bak <i>Base 9200 Twin 100 SL Base extension forward & back</i>
14	802096	Stativ 9200 Twin 100 ESD m Stativförlängare fram & bak <i>Base 9200 Twin 100 ESD Base extension forward & back</i>
15	802083	Stativ 9200 Twin 125 hjul m Stativförlängare fram & bak <i>Base 9200 Twin 125 XL Base extension forward & back</i>
16	802085	Stativ 9200 Twin 150 hjul m Stativförlängare fram & bak <i>Base 9200 Twin 150 XL Base extension forward & back</i>


Stycklista - Hjul

Part list - Castors


A XL Hjul - Allround
XL castor -Allround

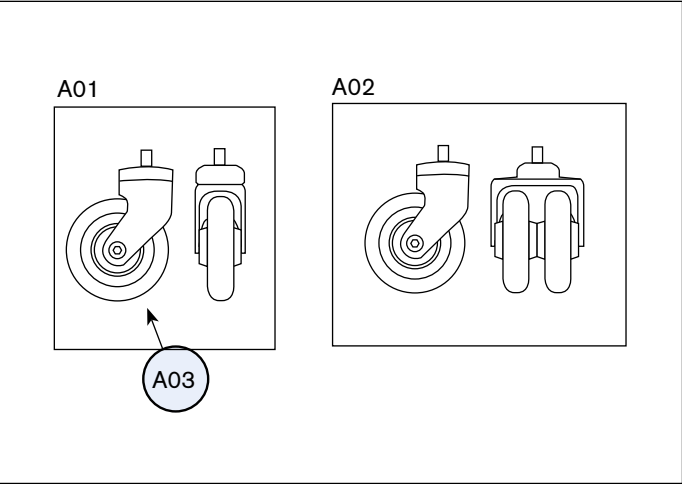

B SL Hjul - För hårda golv
SL castor -Hard surfaces

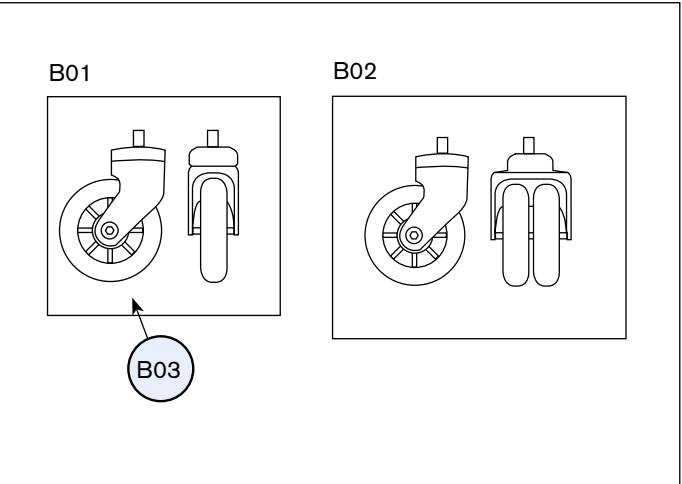

C BXL Hjul - För mjuka golv
BXL castor -Soft surfaces

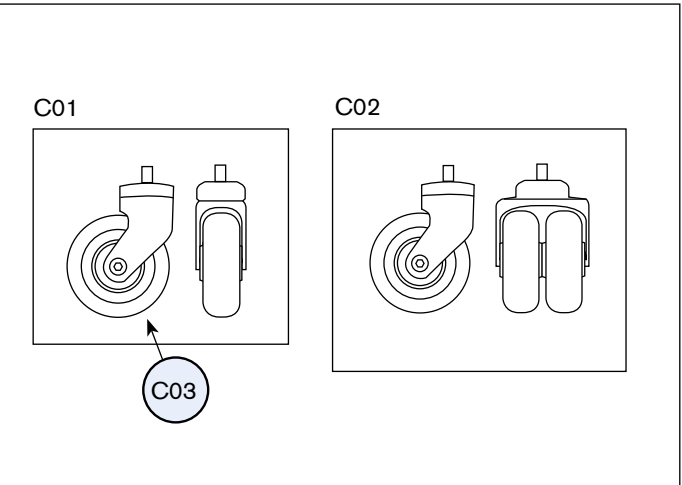


Pos	Art.nr	Benämning
Pos	Art.no	Name
A01	1	801213 Länkhjul 100 XL M12 Castor 100mm XL M12
	2	800903 Länkhjul 100 XL tröga M12 Castors 100mm XL stagnant M12
A02		802942 Länkhjul Dubbelt 100 XL M12 Castor double100mm XL M12
A03		801360 Hjul 100 XL m kullager utan bygel Castors without fork 100 mm XL with SKF-Ball bearing
B01		801144 Länkhjul 100 SL M12 Castor 100mm SL M12
B02		802943 Länkhjul Dubbelt100 SL M12 Castor double 100mm SL M12
B03		801638 Hjul 100 SL inklusive kullager utan bygel Castors without fork 100 mm SL with SKF-Ball bearing
C01		803162 Extra brett lätttrullat länkhjul, BXL 100 mm Extra wide easy-rolled castor
C02		803181 Extra brett lätttrullat dubbelt länkhjul, BXL 100 mm Extra wide easy-rolled double castor
C03		803161 Hjul 100 BXL Polyuretan Extra brett XL-hjul utan bygel Castors without fork 100 BXL polyutrthane black


Stycklista - Hjul

Part list - Castors


D01 Länkhjul 125 mm - För trösklar
125 castor - Threshold

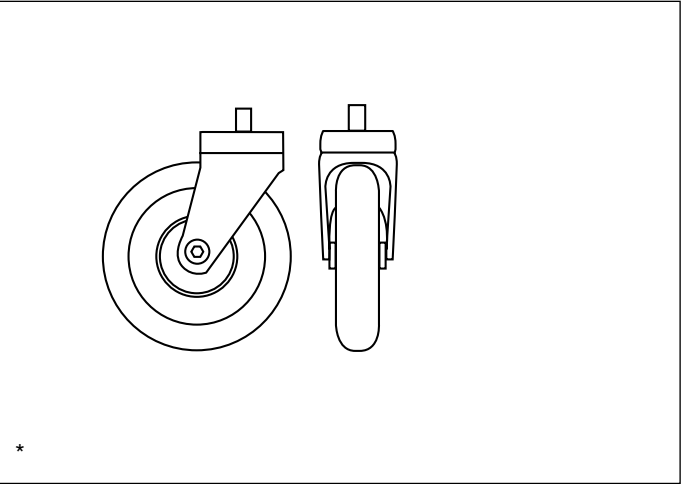

E01 Länkhjul 150 mm - För trösklar
150 castor - Threshold

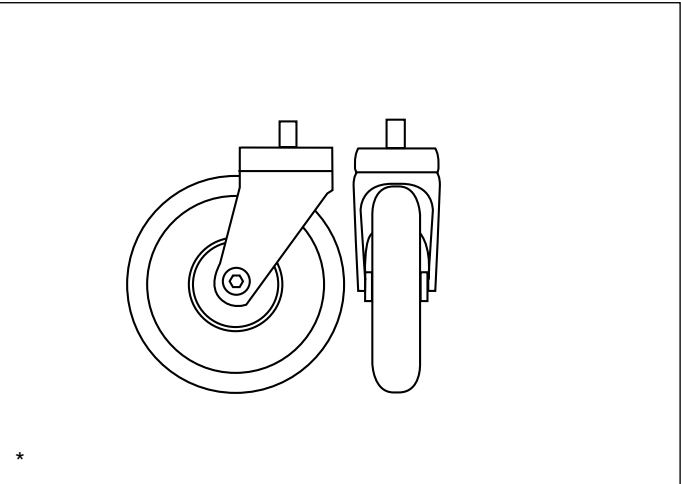

F01 ESD hjul
ESD castor

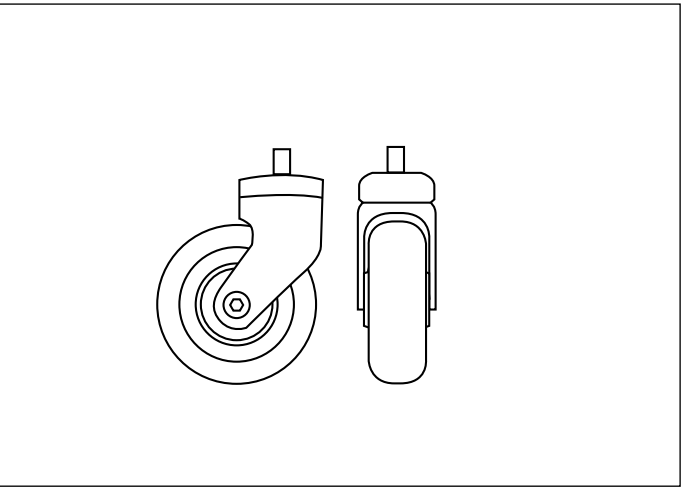


*Stativförlängare måste användas !
*Base extenders must be used !

Pos	Art.nr	Benämning
Pos	Art.no	Name
D01	800904	Länkhjul 125 mm XL Castor 125 mm M12
E01	800905	Länkhjul 150 mm XL Castor 150 mm M12
F01	802066	Länkhjul 100 mm ESD M12 kpl. m bygel. Extra bred bana Castor 100 mm ESD M12, extra wide wheel path

Stycklista - Bromsar

Part list - Brakes


A Bromsspak
 Brake lever

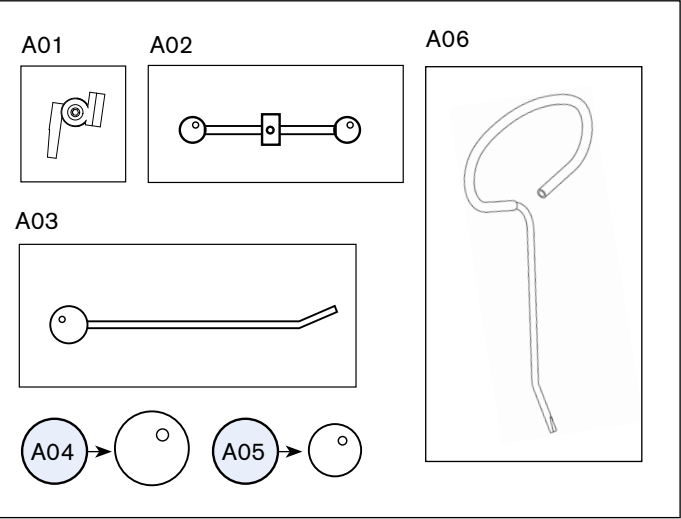

Pos Art.nr Benämning
Pos Art.no Name

- | | | |
|-------|------------------------|---|
| A01 | 801832 | Handbromsspaksadapter 9000 justerbar
<i>Brakelever adapter 9000 adjustable</i> |
| A02 | RC1010 | Reumatikerkryss till Handbromsspak
<i>Rheumatic cross for hand brake lever</i> |
| A03 1 | BD1020 | Handbromsspak 25 cm f PLUS-stativ
<i>Brake lever 25 cm for PLUS-base</i> |
| 2 | BD1010 | Handbromsspak 35 cm Vinklad f PLUS-Stativ
<i>Brake lever 35 cm, angled for PLUS-base</i> |
| 3 | BD1030 | Handbromsspak 45 cm Vinklad f PLUS-stativ
<i>Brake lever 45 cm, angled for PLUS-base</i> |
| 4 | BD1040 | Handbromsspak 55 cm vinklad f PLUS-stativ
<i>Brake lever 55 cm, angled for PLUS-base</i> |
| A04 | LB1010 | Kula handbromsspak diam 50mm
<i>Large ball grip 50 mm for brake lever</i> |
| A05 | 801014 | Kula Handbromsspak Diam 35mm
<i>Large ball grip 35 mm for brake lever</i> |
| A06 | BD1110 | Handbromsspak 35 cm m ögla f Plus-stativ
<i>Brake lever 35 cm with loop f Plus-base</i> |

B01 Bromsben
 Brake leg

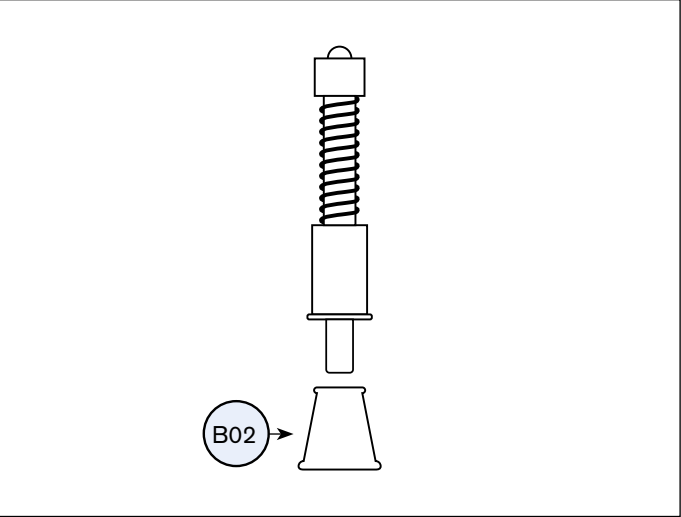


- | | | |
|-----|------------------------|---|
| B01 | 801017 | Bromsben 9000 f 100mm Hjul kpl m alla fästdet.
<i>Rheumatic cross for hand brake lever</i> |
| B02 | 801264 | Bromsfot Diam 32mm
<i>Brake lever 25 cm for PLUS-base</i> |

Stycklista - Elektronik


Part list - Electronics

A01 Elektronik Upp/ned
Electronics f up/down

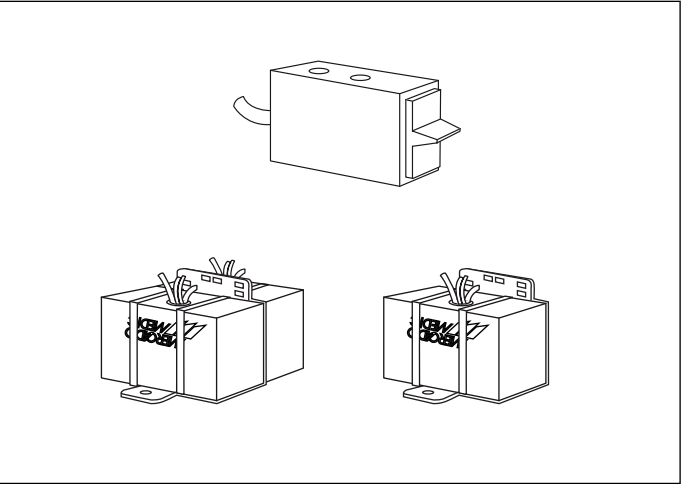


Pos	Art.nr	Benämning
Pos	Art.no	Name
A01	804047	Reläkortssats upp/ner+ladd kpl inkl manbox 9200 m tunga Kit relaycard ver2 for REAL9200 cpl

B01 Elektronik Upp/ned & Broms
Electronics f up/down & brake

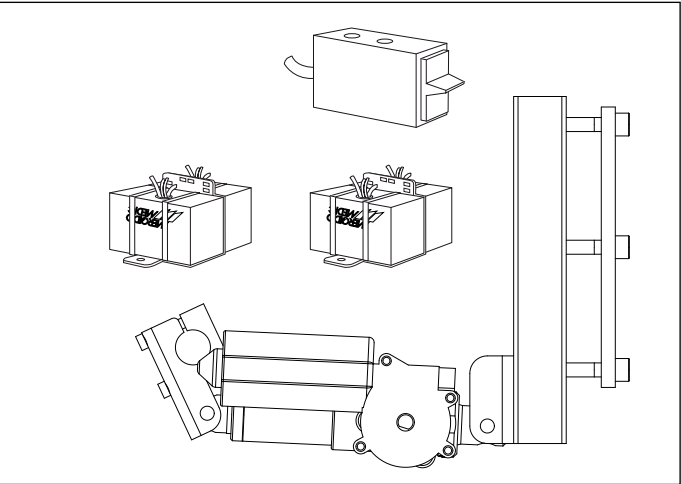

B01	804204	Reläkortssats u/n+br+ladd 9200 Eldon elbroms inkl manb tunga Electric kit + relaycard for up/down+brake cpl
-----	--------	--

B01 Elektronik Broms
Electronics f brake

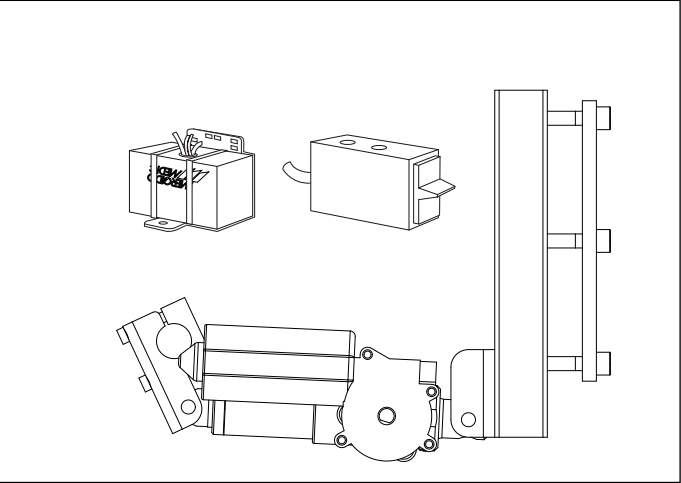

B02	804201	Eldonssats f elbroms f 9200 inkl Manbox utf tunga v2 Electric kit + relaycard for brake cpl
-----	--------	--



Mercado Medic AB
Tryffelslingan 14
181 57 Lidingö

Telefon & Fax
Tel 08 555 143 00
Fax 08 555 143 99

Email & Internet
Email info@mercado.se
Internet www.mercado.se