



DIE REAL-STÜHLE HABEN DIE CE-KENNZEICHNUNG
GEMÄSS DEN SCHWEDISCHEN VORSCHRIFTEN FÜR
MEDIZINTECHNISCHE PRODUKTE LVFS 2003:11.

OPTIONEN UND ZUBEHÖR

für REAL 9000 PLUS Modelle und 6100 PLUS Modelle



OPTIONEN UND ZUBEHÖR

RAHMEN

Zur Erfüllung verschiedener Anforderungen sind die Rahmen in mehreren Ausführungen erhältlich, z. B. mit eingebauter Fußbremse. Dieser Stuhl lässt sich bremsen, ohne dass man sich hierfür nach unten zum Bremshebel beugen muss.

Der PLUS-Rahmen bietet viel Platz für die Füße und die Sitzfläche ist fest auf dem Untergestell montiert. Der Rahmen ist deswegen ideal zum Trippen; Fortbewegen in sitzender Position.

BREMSHEBEL

Bremshebel sind in verschiedenen Längen erhältlich und lassen sich rechts wie links anbringen.

Am Bremshebel lässt sich bei Bedarf ein Rheumatikerkreuz anbringen, um die Bremse leichter zu bedienen. Darüber hinaus ist auch eine elektrische Bremse erhältlich.

RAHMENVERLÄNGERUNG

Mit einer Rahmenverlängerung erhält ein Stuhl erhöhte Stabilität, da sie einem Umkippen des Stuhls entgegenwirkt. Die ideale Zusatzoption für Personen mit

spastischer Problematik. Bei der Sitzneigungsverstellung 0-23° ist diese Verlängerung Pflicht.

ROLLEN

Unsere Stühle haben im Standard bereits die hochwertige Leichtlaufrolle XL 100 mm, die insbesondere bei Linoleum und mittelharten Fußböden zum Einsatz kommt. Die Superleichtlaufrolle SL 100 mm hat einen besonders leichtgängigen Lauf und doppelte Kugellager. Sie eignet sich am besten für Fußböden wie Parkett oder Betonböden. Die BSL-Rolle ist eine SL-Rolle in breiterer Ausführung. Die 125- und 150 mm-Rollen eignen sich z. B. ideal für das Überwinden von Türschwellen und Bordsteinen.

FUß-/BEINSTÜTZEN

Ein Fußbügel dient als entlastende Stütze für die Füße. Er lässt sich leicht hoch und herunter klappen, z. B. beim Umsetzen oder wenn mehr Freiraum für die Füße benötigt wird. Der Fußbügel ist in zwei Ausführungen erhältlich und eignet sich für alle REAL 9000-Stühle mit PLUS-Rahmen. Optional sind Beinstützen erhältlich, die vorn am PLUS-Rahmen montiert werden und sich mit Waden- und Kniestützen ergänzen lassen.

NR.	BEZEICHNUNG	ART.-NR.	NR.	BEZEICHNUNG	ART.-NR.
1	PLUS-Rahmen 9000 48x53 cm, XL-Rollen (Erwachsene) mit Leichtlaufrollen XL 100 mm mit Superleichtlaufrollen SL 100 mm	802659 802660	6	Bremshebel mit Greifring für PLUS-Rahmen 35 cm	BD1110
2	PLUS-Rahmen 9000 43x53 cm (Kinder) mit Leichtlaufrollen XL 100 mm, Hand- und Fußbremse mit Superleichtlaufrollen SL 100 mm, Hand- und Fußbremse Fußbremse für PLUS-Rahmen 9000	802657 802658 802865	7	Schiebebügel PLUS für PLUS-Rahmen 48 Schiebebügel PLUS für PLUS-Rahmen 43	PB1011 PB2011
3	PLUS-Rahmen 9000 Transport mit Schiebebügel und Handbremse	803793	8	Schiebegriffe PLUS-Rahmen	PB1010
4	Elektrische Bremse für ein 9000 PLUS EL	803276	9	Rückenlehnenfunktion fest f. hohe Rückenlehne einschl. Schiebegriffe tiefenverst. 2 Stellungen	803903
5	PLUS-Rahmen 9000 PLUS 48 (Erwachsene) mit 4 Bremsfüßen 100 XL Umkehrbremse	804270	10	Bremshebelbefestigung für PLUS-Rahmen Breiteneinstellbar, 7 Breiten Breiteneinstellbar, 2 Breiten	802800 802799
6	Bremshebel für PLUS-Rahmen 25 cm 35 cm 45 cm 55 cm	BD1020 BD1010 BD1030 BD1040	11	PLUS-Rahmenverlängerung Hinten, Paar Vorne, Paar	BEX20 BEX10
6	Große Kugel 50 mm für Handbremshebel	LB1010	12	Rolle (mit Gabel) Leichtlaufrolle XL 100 mm Superleichtlaufrolle SL 100 mm Extrabreite BXL 100 mm 125 mm 150 mm	801213 801144 803162 800904 800905
6	Kleine Kugel 40 mm Gummi schwarz	LB1040	13	Fußbügel 1/8 PLUS 48, hochklappbar rechts PLUS 48, hochklappbar links PLUS 43, hochklappbar rechts PLUS 43, hochklappbar links	FR1010 FR2010 FR1020 FR2020
6	Kleine Kugel 35 mm rot	LB1030	14	Fußbügel 1/4 PLUS 48, hochklappbar PLUS 43, hochklappbar	FR3010 FR3020
6	Kreuzgriff für Bremshebel	RC1010			



INDIVIDUELL ANPASSBAR

BEINSTÜTZEN

Das zentrale Fußbrett gibt stabilen Halt für die Füße. Es ist mit dem Fuß, oder einem manuellen Hochklappsystem (optional erhältlich) hochklappbar.

Alternativ sind die Beinstützen Medic mit ganzen oder geteilten Fußplatten in vier Größen erhältlich: S, M, L und XL. Die Maße der Fußplatten sind bei den Ausführungen S bis XL gleich. Die Beinstützen sind in Höhe, Tiefe und Winkel einstellbar. Auch der Winkel der Fußplatten lässt sich einstellen. Die Beinstützen werden vorn am Rahmen montiert und lassen sich mit Waden- und Kniestützen ergänzen. Angebracht werden die Beinstützen an einer speziellen Halterung (Vierkantrohr) unter dem Sitz.

WADENSTÜTZEN

Die Wadenstützen dienen als zusätzliche Stütze für die Waden, wenn die Beinstützen keine ausreichende Stabilisierung bieten. Je nach verwendeten Beinstützen sind die Wadenstützen in unterschiedlichen

Ausführungen erhältlich. Der Wadenstützmechanismus lässt sich einfach über Halterungen an den Beinstützen montieren.

KNIESTÜTZEN

Die Haltung von Beinen und Füßen lässt sich mit Hilfe verstellbarer Kniestützen, die auf die jeweilige Beinlänge abgestimmt werden, korrigieren.

Die Kniestützen sorgen dafür, dass die sitzende Person nicht nach vorn rutschen kann. Sie werden an den Medic-Beinstützen montiert und lassen sich herunterklappen sowie in Höhe und Tiefe verstellen. Die Kniestützenpolster sind in verschiedenen Farben und Materialien erhältlich.

ADAPTER

Als Option sind Beinstützenadapter erhältlich für die Befestigung der winkelverstellbaren Beinstütze 'Komfort' oder ggf. einer eigenen Beinstütze. Angebracht werden die Adapter am U-Bügel der Armlehnen.

 ZUBEHÖR EIGNET SICH AUCH FÜR REAL 6100 PLUS

NR.	BEZEICHNUNG	ART.-NR.	NR.	BEZEICHNUNG	ART.-NR.
1	Elektrisch winkelverstellbare längerkompensierende zentrale Beinstütze Fußbrett 30 cm tief Fußbrett 25 cm tief Wadenstütze re+li	LS311110 LS311111 CS501458	7	Medic geteiltes Fußbrett S (18-24 cm) M (23-32 cm) L (28-41 cm) XL (38-51 cm)	LS151110 LS151210 LS151310 LS151410
2	Zentrales Fußbrett 32 x 24 cm (BxT) L, Länge 30-38 cm XL, Länge 37-53 cm Zentrales Fußbrett PLUS 29x24 cm (BxT) L, Länge 30-38 cm XL, Länge 37-53 cm Zentrales Fußbrett Mini L, Länge 30-38 cm XL, Länge 37-53 cm	LS202110 LS202210 LS262110 LS262210 LS212110 LS212210	7	Medic Fußbrett S (18-24 cm) M (23-32 cm) L (28-41 cm) XL (38-51 cm)	LS101110 LS101210 LS101310 LS101410
3	Zentrales Fußbrett für 6100 PLUS (EL) 29 x 24 cm (BxT) L, Länge 30-38 cm XL, Länge 37-53 cm	LS312110 LS312210	8	Medic Fußbrett Mini S (18-24 cm) M (23-32 cm) L (28-41 cm) XL (38-51 cm)	LS111110 LS111210 LS111310 LS111410
4	Kante für Fußplatte Mobil 6100 für Fußbrett 32 x 24 cm für Fußbrett 29 x 24 cm	803211 HS2020	9	Medic geteiltes Fußbrett Mini S (18-24 cm) M (23-32 cm) L (28-41 cm) XL (38-51 cm)	LS161110 LS161210 LS161310 LS161410
5	Kniestütze Rechts 16x8, Kunstleder schwarz Links 16x8, Kunstleder schwarz	KS111038 KS121038	10	Zentrales Fußbrett 32 x 10 cm (BxT) komplett Länge 30-38 cm Länge 37-53 cm	LS222110 LS222210
6	Kniestütze Mini Rechts 12x8, Kunstleder schwarz Links 12x8, Kunstleder schwarz	KS212038 KS222038	11	Wadenstütze inkl. Anbauset (Paar) für Medic Beinstützen Wadenstützenpolster 15 x 13 cm (Br. 37) Wadenstützenpolster 10 x 10 cm (Br. 25)	CS101038 CS201138
			12	Adapter für Rollstuhl-Beinstütze Komfort Rechts Links Paar	AD2011 AD2012 AD2010



SITZPOLSTER UND SITZWINKELFUNKTION

SITZPOLSTER

Das ErgoMedic-Sitzpolster wurde für optimalen Sitzkomfort konzipiert, mit leicht erhöhter Polsterung unter den Oberschenkeln im Vergleich zu der Polsterung unter dem Gesäß. Die Form der Sitzfläche verteilt den Druck gleichmäßig und verhindert selbst beim Anwinkeln nach vorn ein Vorwärtsrutschen.

Für Stabilität und Komfort sorgt die durchdachte Form des ErgoMedic-PLUS-Sitzpolsters, das außerdem weich ist. Auch bei diesem Sitzpolster ist das Polster unter den Oberschenkeln im Vergleich zu der Polsterung unter dem Gesäß leicht erhöht.

Die höhere, abgerundete Form zu beiden Seiten der Oberschenkel stabilisiert Becken und Beine. Das Arthrodesen-Sitzpolster ist geteilt mit individuell verstellbaren Klappen. Es wird vor allem zur Linderung/Rehabilitation orthopädischer Problematik an Hüfte und Oberschenkelknochen eingesetzt.

ErgoMedic mit viskoelastischem Schaum besteht aus zwei verschiedenen Materialien. Das obere, aus viskoelastischem Schaum, passt sich in der Form an und bietet sowohl eine gleichmäßige Druckverteilung als auch erhöhten Sitzkomfort.

Die Holzplatte ist für das Eingießen bzw. Nachrüsten einer Sitzschale oder individueller Polsterung vorgesehen. Sitze mit Anti-Rutsch-Funktion werden für verschiedene individuell anpassbare Sitzkissen empfohlen.

Zu den Sitzpolstern sind passende Wechselbezüge erhältlich: Inkontinenzbezüge oder solche aus Velours oder Kunstleder.

SITZWINKELFUNKTION

Mercado bietet verschiedene Sitzwinkelverstellungen an. Die Bedienung ist per Drehspindel hinter dem Stuhl, per Gasfeder oder elektrisch möglich. Wird der Sitzwinkel verändert, bewegt sich die Rückenlehne synchron zur Sitzfläche. So wird das Dekubitusrisiko durch Schiebekräfte verringert.

Auf Anfrage stellt Mercado Ihnen gern individuelle Lösungen vor.

Bei bestimmten Modellen lässt sich der Sitzwinkel per Drehspindel von der Begleitperson einstellen und arretieren. Diese Lösung bietet sich besonders in Fällen an, in denen der Sitzwinkel nicht per Gasfeder eingestellt werden kann. Ideal für orthopädische Kliniken, bei denen Patienten in einem bestimmten Winkel sitzen müssen, und für Schulen, wo ein aktives Sitzen der Schüler gefördert werden soll.

Bei der Sitzwinkelverstellung per Gasfeder kann die sitzende Person den Sitzwinkel eigenständig für aktives und passives Sitzen mit der Bedienung unterm Sitz oder unter der Armlehne anpassen.

Das Aufstehen wird erleichtert bei nach vorn angewinkelter Stellung. Diese Stellung wird in Kombination mit einer elektrischen Höhenverstellung eine Aufstehhilfe.


Wenn der/die AnwenderIn die Sitzwinkelverstellung per Gasfeder nicht mit Hilfe seines/ihrer Gleichgewichts bewegen kann, eignet sich die elektrische Version. Die Bedienung befindet sich unter der Armlehne.

 ZUBEHÖR EIGNET SICH AUCH FÜR REAL 6100 PLUS

NR.	BEZEICHNUNG	ART.-NR.	NR.	BEZEICHNUNG	ART.-NR.
1	Sitzwinkelverstellung per Gasfeder		5	Sitzwinkelfunktion für 9000 PLUS verstellbar zwischen Werten v. +15° und -8° / + 8° und -15° / 0° und -23°	
	Bedienung unter der Armlehne	SAR31		für Polsterbreite 40-54 cm	803070
	Bedienung unter der Sitzfläche	SAR30		für Polsterbreite 33-39 cm	803071
2	Sitzwinkleinstellung per Drehspindel		5	Sitzwinkelfunktion für 6100 PLUS verstellbar zwischen Werten v. +15° und -8° / + 8° und -15° / 0° und -23°	
	komplett mit Drehspindel	SAR20		für Polsterbreite 40-54 cm	803072
3	Sitzwinkelverstellung elektrisch			für Polsterbreite 33-39 cm	803073
	Mit Bedienschalter unter der Armlehne	SAR40	6	Sitzgrundplatte aus Holz in einer der Std. Abmessungen für Sonderbau durch Fachhändler	ST10xx90
	Mit Fernbedienung Infrarot	SAR41	7	Sitzgrundplatte in einer der Std. Abmessungen mit Anti-Rutsch	ST10xx61
	Mit Joystick	SAR42	8	Sitzpolster ErgoMedic mit Inkontinentzbezug	STxxxx60
	Mit Kabelfernbedienung	SAR43			
4	Elektrosatz für Sitzneigung kompl.	SAR40			



Mehr Informationen zu unseren Sitzpolstern finden Sie in der betreffenden Broschüre.

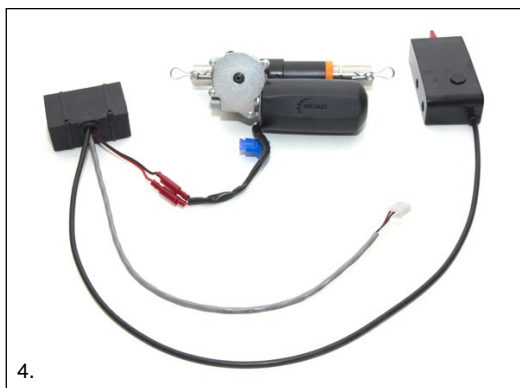

RÜCKENLEHNEN UND RÜCKENLEHNENFUNKTION

RÜCKENLEHNEN

Wir haben Rückenlehnen in verschiedenen Höhen. Unsere niedrige Rückenlehne besteht aus einem ergonomisch konzipierten Rückenpolster, das sowohl optimale Unterstützung für den unteren Rücken als auch Bewegungsfreiheit für den Oberkörper bietet.

Die hohe Rückenlehne bietet mehr Unterstützung und stabilisiert insbesondere nach oben hin, ohne die Bewegungsfreiheit von Oberkörper oder Schulterblättern groß einzuschränken.

Alle Rückenlehnen sind als ErgoMedic und als ErgoMedic PLUS auswählbar. Diese beiden ergonomischen Sitzsysteme wurden vom Physiotherapeuten Bengt Engström entwickelt.

Die höhere ErgoMedic PLUS-Rückenlehne ist auf Becken und Brustwirbelsäule abgestimmt. In der oberen

Mitte, zwischen den Schulterblättern, hat sie eine weiche Stütze, damit bei aufrechtem Sitzen ein stabiles Anlehnen möglich ist, ohne dass die Schulterpartie eingeengt wird. Die hohe Rückenlehne ist auch mit tiefer Seitenführung, extra tiefer Seitenführung mit Verstärkung oder mit speziellem aufblasbarem Lumbalkissen erhältlich.


RÜCKENLEHNENFUNKTION

Unsere Rückenlehneneinstellung Standard lässt sich in Höhe, Tiefe und Neigung einstellen. Mit der Rückenlehneneinstellung Medic kann die Sitztiefe tiefer eingestellt werden. Dies ist z. B. bei Personen mit starker Kyphose hilfreich.


Die Rückenlehnenverstellung Komfort lässt sich per Gasfeder verstellen. Die Rückenlehne federt weich und lässt sich im Sitzen eigenständig regulieren.

 ZUBEHÖR EIGNET SICH AUCH FÜR REAL 6100 PLUS

NR.	BEZEICHNUNG	ART.-NR.	NR.	BEZEICHNUNG	ART.-NR.
1	Rückenlehneneinstellung Standard für eine niedrige Rückenlehne	BRM1000	6	Komfort Rückenlehnenverstellung für eine hohe Rückenlehne Standard Sitztiefe (für Kinder und Arthrodesensitzpolster)	801742
2	Rückenlehneneinstellung Standard für eine hohe Rückenlehne	BRM4000		Größere Sitztiefe	801744
3	Rückenlehneneinstellung Medic für eine niedrige Rückenlehne 112 S 200 mm L 240 mm XL 340 mm	BRM1800 BRM1900 BRM2000	7	Elektrische Rückenlehnenverstellung für eine niedrige Rückenlehne Elektro-+Relaisatz für Rückenlehnenverstellung	803277
	Rückenlehneneinstellung Medic für eine niedrige Rückenlehne 155 S 200 mm L 240 mm XL 340 mm	BRM1500 BRM1600 BRM1700	8	Elektrische Rückenlehnenverstellung für eine hohe Rückenlehne Elektro-+Relaisatz für Rückenlehnenverstellung	803277
4	Rückenlehneneinstellung Medic für eine hohe Rückenlehne 112 S 200 mm L 240 mm XL 340 mm	BRM4800 BRM4900 BRM5000	9	Elektrosatz für Rückenlehnenverstellung	803277
	Rückenlehneneinstellung Medic für eine hohe Rückenlehne 155 S 200 mm L 240 mm XL 340 mm	BRM4500 BRM4600 BRM4700	10	Verstärkte Rückenlehneneinstellung Medic Halterung Rückenlehneneinstellung Medic L: 155 mm (waagrecht), 240 mm (senkrecht) L: 112 mm (waagrecht), 240 mm (senkrecht) XL: 155 mm (waagrecht), 340 mm (senkrecht) XL: 112 mm (waagrecht), 340 mm (senkrecht) Oberteil der Rückenlehneneinstellung Medic verstärkt	802859 801082 801083 801084 801085 802860
5	Komfort-Rückenmechanismus, niedrige Rückenlehne Standard Sitztiefe (für Kinder und Arthrodesensitzpolster) Größere Sitztiefe	801743 801745		Rückenlehneneinstellung Medic verstärkt (doppelt), komplett L 155 mm, H 240 hohe Rückenlehne L 155 mm, H 340 hohe Rückenlehne	BRM5600 BRM5700

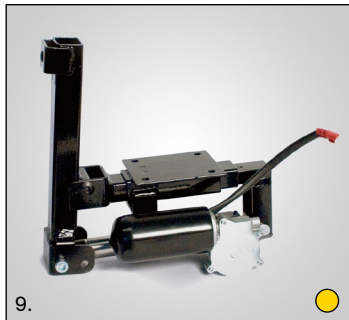

Mehr Informationen zu unseren Rückenlehnen finden Sie in der betreffenden Broschüre.

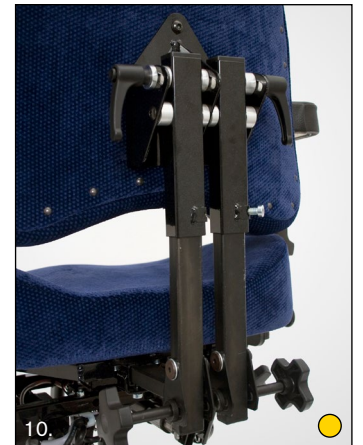

SICHERHEITSHINWEIS für die Rückenlehnenfunktion bei einer Sitzwinkelverstellung:

Eine verstärkte (doppelte Medic)

Rückenlehneneinstellung sollte verwendet werden:

- wenn unwillkürliche Bewegungen der Person die Rückenlehne stark belasten könnten;
- ab einer Körpergröße von 200 cm bei einem Stuhl mit einer SWV nach hinten und Kopfstütze;
- ab einem Körpergewicht von 90 kg bei einem Stuhl mit einer SWV bis 15 ° nach hinten.

Eine verstärkte (doppelte Medic)

Rückenlehneneinstellung muss verwendet werden:

- ab einem Körpergewicht von 110 kg bei einem Stuhl mit einer SWV bis 15 ° nach hinten;
- bei einem Stuhl mit einer SWV bis 23 ° nach hinten;
- wenn die SWV-Einstellung 15-23 ° aufgrund der hohen Belastung gewählt wird;
- Menschen mit sich wiederholenden Schaukelbewegungsmustern durch z.B. Spastik.

ARMLEHNEN UND ARMLEHNENMECHANISMEN

ARMLEHNEN

Die Armlehnen sind ein wichtiger Bestandteil des ERGOMEDIC-Sitzsystems und tragen maßgeblich zu dessen hohem Sitzkomfort bei. Die Kanten sind an Innen- und Außenseite abgeschrägt, um den Druck auf die Unterarme bei längerem Aufliegen zu minimieren. Hinten ist die Armlehne nach innen gewölbt, damit der Ellenbogen stabil aufliegt. An der Vorderseite bietet sie sicheren Halt beim Aufstehen und sich Hinsetzen.

Die Komfort-Armlehnen sind etwas breiter in der Form und bieten eine weichere Polsterung.

Die Hemiplegie-Armlehne eignet sich insbesondere für Personen mit einem gelähmten Arm, z.B. durch einen Schlaganfall. Der gelähmte Arm findet Halt dank der Form der Armlehne mit seitlicher Unterstützung. Die Armlehne lässt sich auch

drehen und hierdurch kann eine optimale Position zur Unterstützung gefunden werden.

Die ErgoMedic PLUS-Armlehnen sind so geformt, dass die Arme seitlich gestützt werden. Hierdurch wird der Oberkörper noch mehr entlastet. Eine Erhöhung unter den Handgelenken bietet zusätzliche Entlastung. Diese Armlehne kann auch gut als Alternative Hemiplegie-Armlehne eingesetzt werden.



ARMLEHNENMECHANISMUS

Der Armlehnenmechanismus 9000 PLUS ist höhen- und breitenverstellbar. Durch vollständiges Absenken oder die nach hinten wegklappbare Ausführung wird ein Umsetzen in seitliche Richtung ermöglicht. Die breiteren Armlehnen lassen sich ggf. nicht vollständig absenken oder nach hinten wegklappen.



ZUBEHÖR EIGNET SICH AUCH FÜR REAL 6100 PLUS

NR.	BEZEICHNUNG	ART.-NR.	NR.	BEZEICHNUNG	ART.-NR.
1	Armlehnenpolster ErgoMedic	Für klappbare Armlehnen	6	Armlehnenpolster Hemiplegie	AR406038
		Für nicht klappbare Armlehnen			
		AR151038			
		AR152038			
		AR153038			
2	Armlehnenpolster Mobil	Für klappbare Armlehnen	7	Armlehnenstütze (T-Stück) für 9000 PLUS	
		Für nicht klappbare Armlehnen			
		AR301038			
		AR302038			
		AR303038			
3	Armlehnenpolster Komfort	Für nicht klappbare Armlehnen	8	Armlehnenbefestigung (U-Bügel) rechts	802698
		AR502038			
		AR503038			
		AR504038			
4	Armlehnenpolster ErgoMedic PLUS		9	Armlehnenbefestigung (U-Bügel) links	802699
5	Armlehnenpolster Mini	Für nicht klappbare Armlehnen	10	Armlehnenmechanismus wegklappbar mit T-Stück 32 cm für 6100 PLUS ohne Sitzwinkelfunktion	
		AR111038			
		AR112038			
			11	Armlehnenmechanismus wegklappbar mit T-Stück 38 cm für 6100 PLUS mit Sitzwinkelfunktion	
			12	Hemiplegie-Mechanismus für klappbare Armlehnen	
			13	Armlehnenstütze Hemiplegie 9000 PLUS 32 cm	

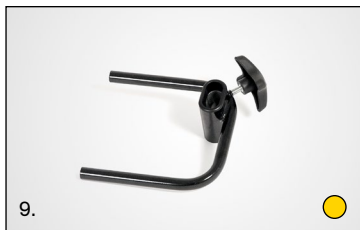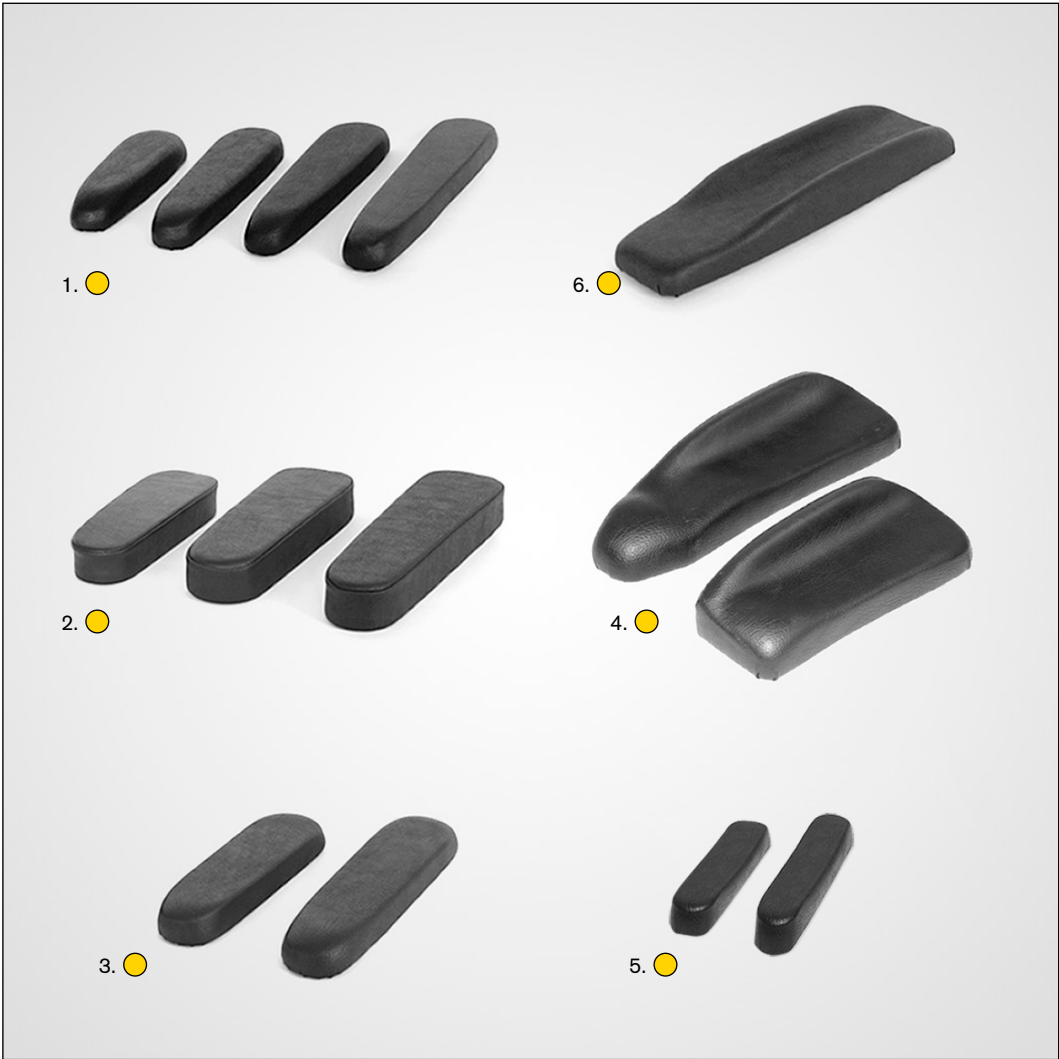

ZUBEHÖRVIELFALT FÜR GROBE FLEXIBILITÄT

SEITENPELOTEN

Unsere Rückenlehnen unterstützen eine aufrechte und aktive Sitzhaltung. Wenn eine umfangreichere Unterstützung benötigt wird, bietet Mercado neben den ErgoMedic PLUS Rückenlehnen verschiedene Arten von Seitenpelotten.

TISCH AUS RAUCHGLAS

Für die gesamte REAL 9000-Serie bieten wir einen Tisch an. Er misst 60x45 cm, wird an der rechten Armlehne befestigt und lässt sich hochklappen.

TISCH AUS HOLZ

Der Tisch aus Holz hat die Maße 45x30 cm. Er ist zur Seite drehbar und lässt sich je nach Wunsch rechts oder links von der Armlehne anbringen. Auch dieser Tisch ist mit der gesamten REAL 9000-Serie kompatibel.

HÜFTGURT

Ein Hüftgurt verhindert ein vorderseitiges Herausfallen der sitzenden Person. In den Größen S (51-71 cm), M (68-83 cm) und L (83-103 cm) mit verstellbarer Länge erhältlich.

AMPUTATIONSSTÜTZE

Die Amputationsstütze hält das teilamputierte Bein in der richtigen Stellung und ist so geformt, dass der Stumpf so bequem wie möglich darauf ruhen kann. Die Amputationsstütze ist für links und/oder rechts erhältlich und wird mit einer Halterung unter dem Sitz befestigt.

ABDUKTIONSKEIL

Ein Abduktionskeil verhindert ein Aneinanderliegen der Knie/Beine. Die Abduktionskeile sind in zwei Größen erhältlich: 11 und 15 cm. Der Mechanismus ist in drei Längen erhältlich; für Kinder 57 mm sowie für Erwachsene 115 mm und 175 mm.

WECHSELBEZÜGE



Ein Wechselbezug schützt die Polsterung gegen Schmutz und Staub und verlängert ihre Gebrauchsdauer. Der Inkontinenzbezug bietet Schutz gegen Nässe. Die maschinenwaschbaren Wechselbezüge sind für Polsterteile in verschiedenen Größen und Farben erhältlich.



ZUBEHÖR EIGNET SICH AUCH FÜR REAL 6100 PLUS

NR.	BEZEICHNUNG	ART.-NR.	NR.	BEZEICHNUNG	ART.-NR.
1	Schwenk- und verstellbare Seitenpelotte Seitenpelottenmechanismus, schwenk- und verstellbar rechts Seitenpelottenmechanismus, schwenk- und verstellbar links Dazugehöriges Kissen (schwenk- und verstellbar)	TS31 TS32 TS2038	7	Abduktionskeil (schwarzes Kunstleder) 11 cm 15 cm	LD1038 LD2038
2	Seitenpelotte mit geradem Halter mit Anbauset rechts mit Anbauset links Seitenpelottenpolster 15 x 13 cm (grauer Velours)	TS11 TS12 TS1046	8	Abduktionskeil-Befestigungsmechanismus 57 mm komplett 115 mm komplett 175 mm komplett	LD15 LD16 LD17
3	Seitenpelotte mit rundem Halter mit Anbauset rechts mit Anbauset links Seitenpelottenpolster 15 x 13 cm (grauer Velours)	TS21 TS22 TS1046	9	Hüftgurt einschl. Halterungen und Schrauben S (51-71 cm) M (68-83 cm) L (83-103 cm) Hüftgurt ohne Halterung S (51-71 cm) M (68-83 cm) L (83-103 cm) Befestigung für Hüftgurt - Paar	HB1010 HB1020 HB1030 800952 800953 800954 800878
4	Tisch aus Rauchglas 60x45 cm* f. nicht klappbare Armlehne 9000 PLUS Tisch aus Rauchglas 60x45 cm* f. klappbare Armlehne	TA1010 TA1030	10	Amputationsstütze Amputationsstützmechanismus Befestigung Amputationsstützkissen (grauer Velours)	800827 800786 AS1046
5	Tisch aus Rauchglas 45x37 cm* f. nicht klappbare Armlehne 9000 PLUS Tisch aus Rauchglas 45x37 cm* f. klappbare Armlehne	TA1015 TA1035	11	Überzüge für alle Polsterteile erhältlich	
6	Tisch aus Holz 45x30 cm mit Halterung	TA1020	12	Höhenverstellbare Halterung für einen H-Gurt Wichtig: Verkauf erfolgt stückweise!	804184

*Beim REAL 6100 nur in Kombination mit NICHT wegklappbaren PLUS-Armlehnen

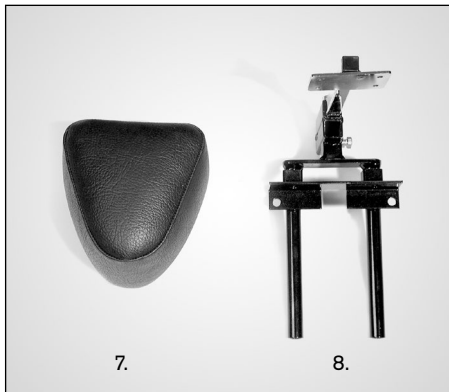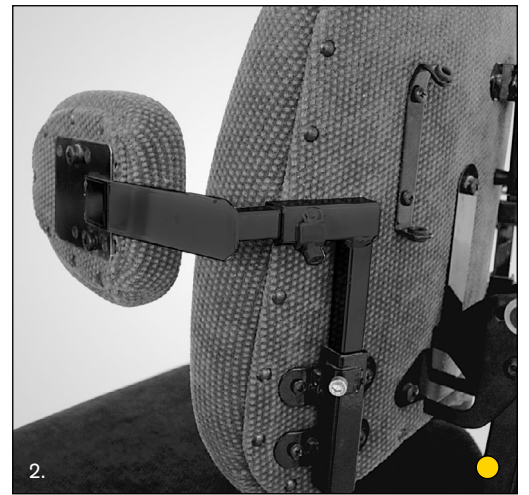

NOCH MEHR OPTIONEN UND DIE ELEKTRIK

KOPFSTÜTZE

Unsere Kopfstütze bietet dem Kopf die optimale Unterstützung und entlastet so Nacken und Rücken bei unzureichender Rumpfkontrolle. Sie lässt sich einfach in die gewünschte Position bringen. Als flaches, geformtes und ERGOMEDIC PLUS-Kissen erhältlich.

SEITENKISSEN

Die Seitenkissen bieten der sitzenden Person Stabilität und Unterstützung beim Sitzen. Auch eine Verwendung als Oberschenkelstütze ist möglich, sodass die Beine zusammengehalten werden.

Das Seitenkissen lässt sich in Breite und Höhe positionieren sowie nach vorn und hinten wenden. In vier Größen erhältlich: XS, S, M und L.

ELEKTRISCHE BEDIENUNG DER SITZHÖHEN-/SITZWINKELFUNKTION

Zur Anbringung unter der Armlehne, am Rücken bei separater Steuerung oder zur Steuerung per Joystick.






ELEKTRISCHE BREMSE


Kann der manuelle Bremshebel vom/von der AnwenderIn nicht bedient werden, erleichtert die elektrische Bremse das Bremsen.



ZUBEHÖR EIGNET SICH AUCH FÜR REAL 6100 PLUS

NR.	BEZEICHNUNG	ART.-NR.	NR.	BEZEICHNUNG	ART.-NR.
1	Kopfstütze flach, 29x16 cm	NS1046	9	Ladebuchse mit Gehäuse	
			1 Funktion		803029
2	Kopfstütze geformt, 31x18 cm	NS3046	4 Funktionen		803030
3	Kopfstütze ErgoMedic PLUS 30x23	NS2046	10	Joystick mit Bremsknopf für Trippel-/Therapiestühle	
			mit 2 elektrischen Verstellungen		802742
4	Kopfstütze ErgoMedic PLUS 30x8	NS4046	mit 3 elektrischen Verstellungen		802743
5	Kopfstützmechanismus universal		11	Kabelfernbedienung für eine elektr. Verstellung	802739
	S (H 28 cm)	NS30			
	M (H 38 cm)	NS20	12	Kabelfernbedienung für	
	L (H 48 cm)	NS10	2 - 4 elektr. Verstellungen		802740
6	Kopfstützmechanismus PLUS seitenverstellbar		13	Fußpedal für elektrisches Anheben/Senken	802688
	S (H 28 cm)	NS31			
	M (H 38 cm)	NS21	14	Akkuladegerät für Elektrostuhl 12 V	802289
	L (H 48 cm)	NS11	15	Bedienkasten mit flachem Schalter	803893
7	Seitenkissenbefestigung PLUS		16	Bedienkasten mit Schalter 'Zunge'	803034
	Rechts	SS11			
	Links	SS12			
	Paar	802874			
8	Seitenkissen				
	XS (15x8 cm)	SS10XX			
	S (28x8 cm)	SS20XX			
	M (25x14 cm)	SS30XX			
	L (30x16 cm)	SS40XX			

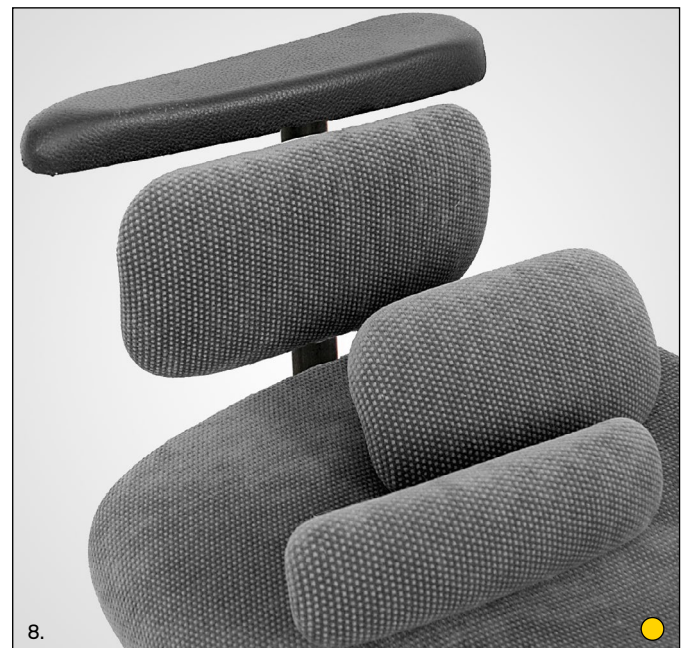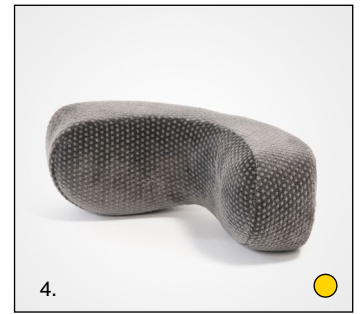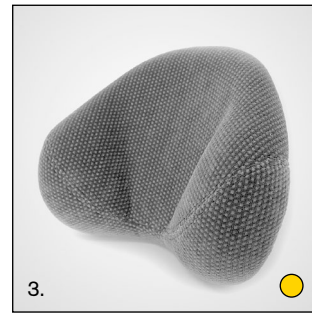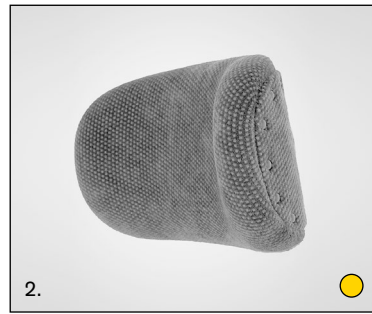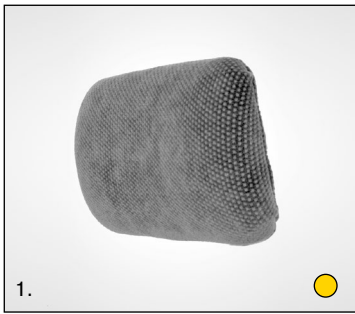

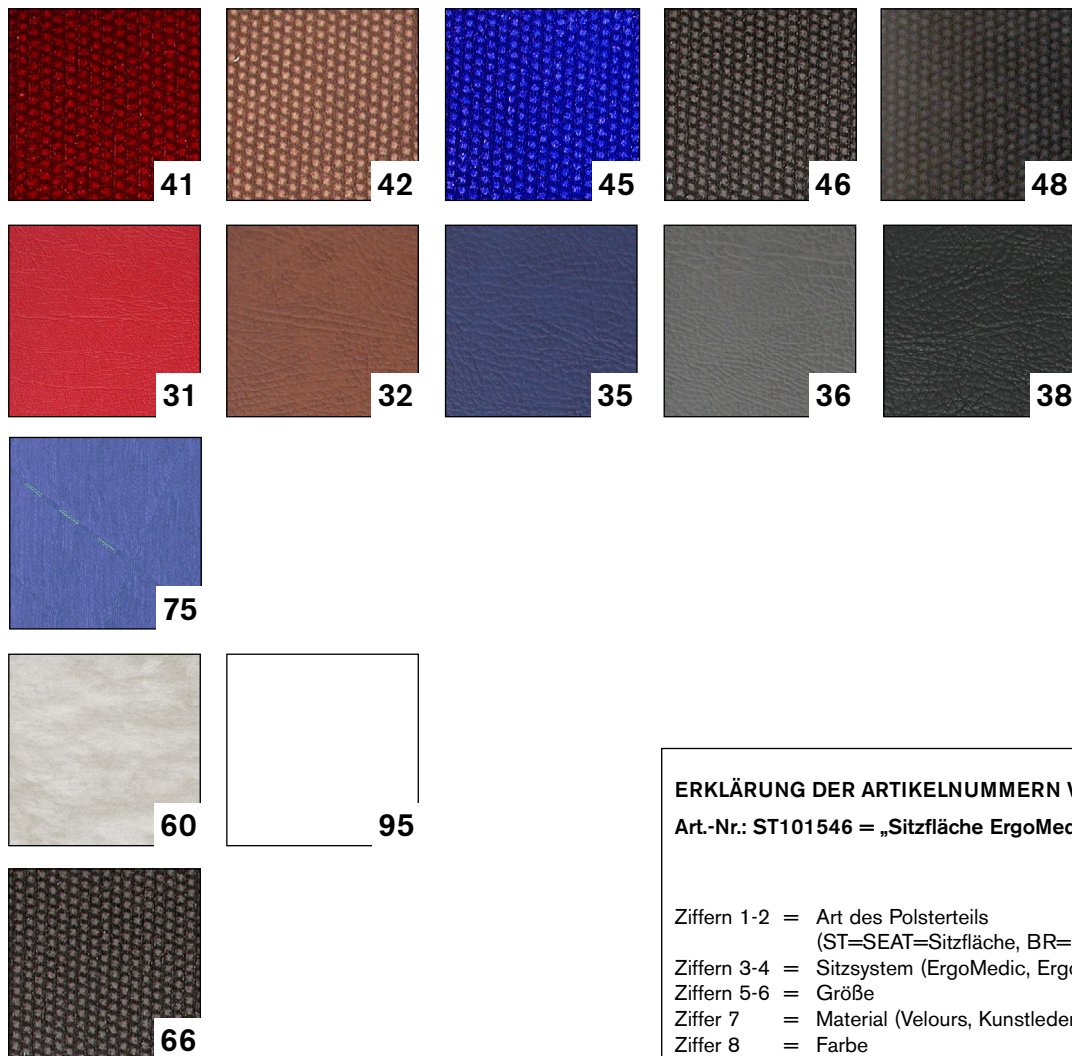

ERKLÄRUNG DER ARTIKELNUMMERN VON POLSTERTEILEN

Art.-Nr.: ST101546 = „Sitzfläche ErgoMedic, Velours grau 44x48 cm“

Ziffern 1-2 = Art des Polsterteils
(ST=SEAT=Sitzfläche, BR=BACKREST=Rückenlehne usw.)
Ziffern 3-4 = Sitzsystem (ErgoMedic, ErgoMedic PLUS usw.)
Ziffern 5-6 = Größe
Ziffer 7 = Material (Velours, Kunstleder usw.)
Ziffer 8 = Farbe

BEZÜGE

Velours

41 Weinrot 42 Braun 45 REAL-Blau 46 Grau 48 Schwarz

Kunstleder

31 Rot 32 Braun 35 Blau 36 Grau 38 Schwarz

Gemusterter Stoff Erwachsene

75 Blau

Weitere Bezugsoptionen

60 Inkontinenzbezug 95 ohne Bezug

Wechselbezüge

66 Inkontinenzbezug (Velours mit grauem Kunststoffüberzug)

Für alle Polsterteile von Mercado Medic sind Bezüge erhältlich.